



スライディンググローブ

体位変換やベッド上の移動がらくにできます。



スライディンググローブ ¥3,024 (税抜¥2,800)

- サイズ:幅約20×長さ約46.5cm
- 材質:ナイロン
- 色:紺
- 日本製
- TAISコード:00076-000031




親指を閉じると
抜けにくくなります。

親指と人差し指を挟むことにより、
グローブが抜けにくく、操作性がよくなります。



スライディンググローブの使い方

- 荷重のかかっている部分に手を差込んで、体を滑らせて使います。
- 介助者の腰への負担を避けるため、腕だけの介助を避け、体全体で介助して下さい。

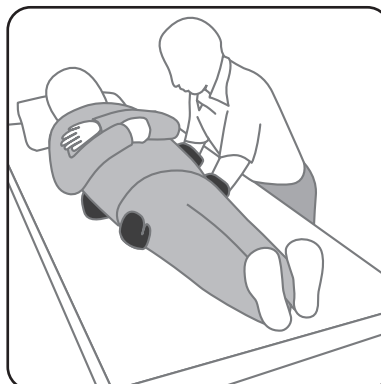

■体位変換に

体の下に手を差し込んで
体位変換も楽にできます。

■ベッド上での移動・背ぬきに

背上げ時の背ぬきなどが
楽に行えます。

■ポジショニング時の体圧の確認に

体の下に手を差し込んで
体圧の確認をする事でクッションを調節します。

■寝具・衣類のしわ伸ばしに

体の下に手を差し込んで
寝具・衣類のしわを伸ばせます

⚠ 警告

本製品はベッド・寝具の上での体位変換・移動等に使用し、
それ以外の用途には使用しないで下さい。
また、人体以外には使用しないで下さい。火気厳禁。

⚠ 注意

本製品は滑りやすいので、取り扱いには十分ご注意ください。
通路・床・お子様の手の届く場所に放置しないで下さい。
誤って踏んだ場合、滑って転倒したりケガをする恐れがあります。



- ・中性洗剤をご使用ください
- ・柔軟剤は使用しないでください
- ・弱く絞ってください

丈夫な素材を使用しており、洗濯も可能な
ので衛生的に使用できます。

※より詳しい使い方はこちらへ↓
<http://www.hello-with.com/publics/index/64/#page-content>

製造・販売元

With 株式会社 **ウィズ**

本 社 〒564-0042 大阪府吹田市穂波町19-25
TEL 06-6310-9090 FAX 06-6310-9600
URL <http://www.hello-with.com> E-mail: with@hello-with.com