






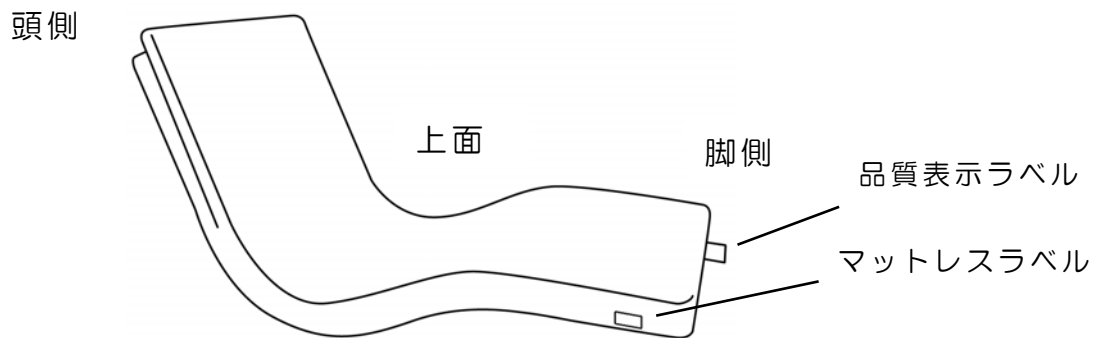
FK-95 シリーズ

腹部圧迫軽減マットレス 取扱説明書

設置と名称

851290-8900

 警告	<p>この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。</p>
<p>当社の介護・メディカルベッド用以外にはご使用にならないでください。 大きさの違いにより、ベッドやベッド付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。</p>	 禁止
 注意	<p>この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。</p>
<p>マットレスの上で、縫い物等、突起物（針、ハサミ、ナイフ等）の使用はお避けください。 針がマットレスの中に入ってしまったたり、破損の原因になります。</p>	 注意
<p>ラベル類をはがさないでください。 無理にはがしますと、生地の変色や破損の原因になります。</p>	
<p>マットレスを持運ぶ場合は、カバーの上から詰め物を持ち、障害物に当たらないように運んでください。 障害物に引っ掛けたり、カバーだけをもち移動させると、カバーのホツレや破れの原因になります。</p>	
<p>直射日光の当たる場所は避けてください。 変形、変色の原因になります。</p>	 禁止



- FK-95 は上面・頭側脚側の区別があります。品質表示ラベル側が脚側、マットレスラベルの矢印が示す方向が上面になります。設置方向を誤りますと機能を損ないますので注意してください。

特徴

- マットレスの頭側を2枚重ね構造にし、背上げ時にかかる腹部の圧迫を、重ねた部分がスライドすることで軽減します。
- 中材はウレタンクッションを使用しているため、適度な硬さを保持しつつ、身体にあたる面はソフトな感触です。
- 座位補助ベッドのサイドアップ機能に対応しています。

仕様

寸法	FK-95 850 サイズ	幅 850×長さ 1950×厚み 95 mm	重量	約 8kg
	FK-95 910 サイズ	幅 910×長さ 1950×厚み 95 mm		約 8.5kg
	FK-95 970 サイズ	幅 970×長さ 1950×厚み 95 mm		約 9kg
材料	表地	ポリエステル 100%		
	クッション材	ウレタンフォーム		

お手入れ

カバーの汚れは、中性洗剤を水で薄め、布に染み込ませ、固く絞って拭き自然乾燥させてください。シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤、また高水準消毒液、アルコール類を使用しないでください。

アフターサービス

修理を依頼される前に取扱説明書をよく読み、再度点検の上、なお異常がある場合は、お買い上げ店または、下記へ連絡してください。

ご連絡いただきたい内容・・・住所、氏名、電話番号、型式名、販売店、お買い上げ日、故障または異常の内容（できるだけ詳しく）



フリーダイヤル：0120-083413

製造元：フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148

保証書

保証書

保証期間	1年
お買い上げ日	平成 年 月 日

お客様	ご芳名	様
	〒	□□□-□□□□
	ご住所	
TEL		

販売店	店名・住所
-----	-------

保証の対象

本体のみ行います。

保証の態様

- (1) 保証期間内において、この製品に製品上の欠陥が発見された場合には無償修理をいたします。
- (2) ご用命の際は、お買い上げの販売店又は相談窓口にご連絡下さい。
- (3) 遠隔地等については、旅費を申し受けることがあります。

保証を受けるための条件

保証を受けるためには、保証書及び納品書又は領収書を提示して下さい。

※ 本保証書と納品書又は領収書を併せて保管をお願いします。

保証書の適用除外

- (1) 保証書及び納品書又は領収書のご提示がなかった場合。
- (2) 誤使用或いはお取扱い上の不注意や過失によって故障が生じた場合。
- (3) 本製品をご使用者自身又は他業者により変造・改造された場合。
- (4) ご購入後の移動・輸送によって故障又は損傷が生じた場合。
- (5) 火災・天災・地変によって故障又は損傷が生じた場合。
- (6) 本製品の製造上に起因した欠陥であるか、確認できない場合。

※ 上記項目については有償修理になります。

法的責任 この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は相談窓口にお問合わせ下さい。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148 TEL 042-838-1111(大代表)