

■ 愛情点検表 ■

すべり止めマット [ユクリア] 安全チェックシート ※チェック欄が足りない場合はコピーしてお使いください

愛情点検	安全点検項目	点検結果 (該当には○)					処理手順
		日付					
	変色がある。						○印があるときは、お買い上げ販売店にご相談ください。
	表面が硬くなっている						
	ひび割れ、シワ、白化、裂け、反りがある。						
	折りぐせがついている。						
	凹凸が磨耗している。						

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談下さい。

■ 仕様 ■

製品名	すべり止めマット [ユクリア] M			すべり止めマット [ユクリア] L		
製品品番	PN-L10201D	PN-L10201A	PN-L10201BR	PN-L10202D	PN-L10202A	PN-L10202BR
カラー	オレンジ	ブルー	ブラウン	オレンジ	ブルー	ブラウン
サイズ (幅×長さ×厚み)	38cm×55cm×0.25cm			38cm×70cm×0.25cm		
材質	合成ゴム (防カビ加工)					
製品質量	0.8kg			1.0kg		

※防カビ加工を施しておりますが、使用環境によっては、効果が十分に発揮できない場合があります。

防カビ加工について

本製品は、防カビ加工を施しています。

防カビ加工製品とは、防カビ加工されていない製品の表面と比較し、特定のカビの育成が基準より抑えられていることが確認されている製品です。防カビ性の試験はJISに準拠し、抗菌製品技術協議会 (SIAA) の試験方法の結果に基づいて判定されます。

■防カビ加工についての情報

- 防カビ加工部位 : 本体
- 防カビ加工方法 : 練り込み



⚠ 注意事項

- 防カビ試験は、SIAA指定法にて実施しています。
- 防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。
- 使用条件によってはカビが発生する場合があります。
- SIAAの安全基準に適合しています。

お客様ご相談窓口のご案内

ご相談窓口における 個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

商品・お取扱いなどのご相談は パナソニック エイジフリー株式会社



フリーダイヤル
0120-365887

●受付時間 9:00~17:30 (土、日、祝日休み)

<http://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

Panasonic®

取扱説明書


すべり止めマット [ユクリア]

■すべり止めマット [ユクリア] M

品番 : PN-L10201

■すべり止めマット [ユクリア] L

品番 : PN-L10202

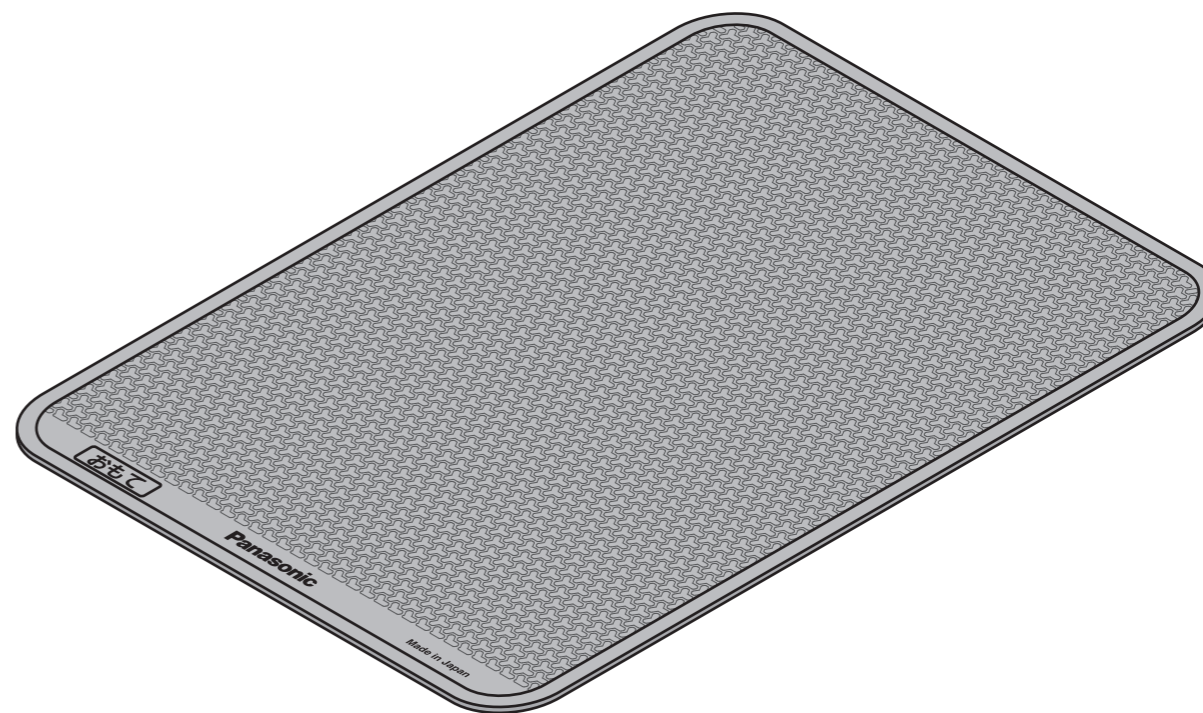

ご使用になる前に必ずお読みください。

●安全上のご注意 P2・3	●愛情点検表 P4
●使用できない浴槽・洗い場 P3	●仕様 P4
●使用方法 P3	●お客様ご相談窓口のご案内 P4
●お手入れ方法 P3		

このたびは、すべり止めマット[ユクリア]をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(P2・P3)を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

パナソニック エイジフリー株式会社

本社 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

©Panasonic AGE-FREE Co., Ltd. 2017

■ 安全上のご注意 ■

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告 「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。

注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。


(次は図記号の例です)


 してはいけない内容です。


 実行しなければならない内容です。


警告


 **必ず守る** ■すべり止めマットは消耗品になります。表面が硬くなる、ひび割れ、シフ、白化、裂け、反り、凸凹が摩耗している等、マットの劣化が著しい場合は、使用を中止する。マットのすべり止め効果が十分に発揮されず、転倒やけがをするおそれがあります。


 **必ず守る** ■使用前に浴槽内のマットの位置を確認する。マットを設置後に強くお湯をかき混ぜるとマットがずれる場合があり、足を踏み外して転倒やけがをするおそれがあります。


 **必ず守る** ■真上から足全体がマットの上に乗るように踏み込む。マットが移動し、転倒やけがをするおそれがあります。


 **必ず守る** ■マットには、しっかりと体重を乗せる。寝そべった状態で座ったり、子どもや体重のかるい使用者がマットを十分に踏み込まない場合、マットがずれる可能性があり、転倒やけがをするおそれがあります。


 **必ず守る** ■次の点を実施する。
・必ず浴室内（浴槽・洗い場）で使用する。
・浴槽や洗い場、マットのぬめりや埃などの汚れ、石けんなどをとってから使用する。
転倒し、けがの原因になります。


 **必ず守る** ■次の点を実施する。
・定期的にマットの表面、裏面のぬめりや汚れを落とす。
・入浴時以外は浴槽からマットを取り出し、水洗い後に乾いた布で乾拭きする。
変色や劣化が起こり、転倒やけがの原因になります。また、カビの繁殖を促進する原因になります。


 **禁止** ■熱湯をかけたり、サウナ等の高温下で使用しない。マットが損傷や変形し、転倒やけがをするおそれがあります。


 **禁止** ■カットして使用しない。マットのすべり止め効果が十分に発揮されず、転倒やけがをするおそれがあります。


 **禁止** ■マットを二重、三重にかさねて使用しない。マットのすべり止め効果が十分に発揮されず、転倒やけがをするおそれがあります。


 **禁止** ■浴槽から立ち上がる際に、水平方向へ大きく力を加えない。マットが移動し、転倒やけがをするおそれがあります。


 **禁止** ■片足で蹴るよう着地したり、マット端部に大きく力を加えない。斜めから強い力が加わるような使い方をすると、マットが移動し、転倒やけがをするおそれがあります。


 **必ず守る** ■使用者が自分の身体を十分に安定させられない場合は、必ず介助者が付き添う。事故の原因になります。


 **必ず守る** ■すり足など使用上支障がある場合は注意する。マットにつまずいて転倒したり、マットが動くなど、けがの原因になります。


 **必ず守る** ■湯沸しが完了してから設置する。マットが変形し、転倒やけがをするおそれがあります。


 **必ず守る** ■表と裏を正しく使用する。すべり止め効果を正しく発揮させるために「おもて」の文字（「Panasonic」ロゴがある面）が上になるようにご使用ください。表と裏を間違えると転倒やけがをするおそれがあります。


 **必ず守る** ■マットの巻きぐせや折りぐせをとり、平らにしてから使用する。くせは、保管時に逆方向に丸める、平らにしてお湯に数時間沈めておくと、とれやすくなります。くせが残っていると、転倒やけがをするおそれがあります。


 **必ず守る** ■肌に異常があらわれたときは使用を中止する。人体に無害な材料を使用していますが、肌に異常があらわれた場合は、すぐに使用を中止してください。


 **禁止** ■すのこやバスマットが敷かれている洗い場では使用しない。マットのすべり止め効果が発揮されず、転倒やけがをするおそれがあります。

 **禁止** ■火気に近づけない。火災やマットの変形、変色の原因になります。


 **禁止** ■浴室以外で使用しない。マットのすべり止め効果が著しく低下するおそれがあり、転倒やけがの原因になります。


 **禁止** ■マット端面が浮いた状態で使用しない。マットのすべり止め効果が十分に発揮されず、転倒やけがをするおそれがあります。


 **禁止** ■排水口（栓）やグレーチングの上にマットを設置しない。マットのすべり止め効果が十分に発揮されず、転倒やけがをするおそれがあります。


 **禁止** ■マットを折り曲げた状態で使用しない。マットのズレや変形により、転倒やけがをするおそれがあります。


注意


 **必ず守る** ■中性洗剤をうすめた液をスポンジか、やわらかい布にふくませて汚れを取り、きれいな水で洗剤を洗い流して、かげ干しか、乾いた布で空拭きする。マットが劣化または破損しけがをするおそれがあります。


 **禁止** ■お手入れに洗濯機や乾燥機を使用しない。マットが劣化または破損しけがをするおそれがあります。


 **禁止** ■屋外に放置したり直射日光に当てたりしない。マットが劣化または破損しけがをするおそれがあります。

 **禁止** ■タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しない。マットが劣化または破損しけがをするおそれがあります。

 **禁止** ■塩素系薬剤をかけての殺菌・消毒および、温泉水や入浴剤を使用しない。マットが劣化または破損しけがをするおそれがあります。

 **必ず守る** ■浴槽や床面に変色がみられた場合、使用を中止する。浴槽や床面の材質、表面加工などの、種類によってはまれに浴槽や床面が変色するおそれがあります。

 **禁止** ■マットを折り曲げた状態で長期保管しない。マットが劣化または破損しけがをするおそれがあります。

 **禁止** ■マットの上にものを置かない。マットの損傷や変形の原因になります。また、マットの上のものがガタつき、転倒やけがの原因になります。

■ 使用できない浴槽・洗い場 ■

- ・木製の浴槽、大理石の浴槽、泡の出る浴槽、タイル敷の浴槽、小石敷の浴槽、お湯が循環している浴槽（24時間風呂）
- ・タイル敷の洗い場、小石敷の洗い場
- ・温泉や地下水、井戸水などのミネラル成分が多いお湯を使っている場合

記載された浴室環境以外でも使用前にマットがずれる動かないか、十分に確認してからご使用ください。

■ 使用方法 ■

- マットには表と裏があります。すべり止め効果を正しく発揮させるために「おもて」表記（Panasonicロゴがある面）が上になるようにご使用ください。

表（おもて）

- ・模様
- ・「おもて」表記
- ・「Panasonic」ロゴ表記

裏（うら）


- ・模様のみ

- 浴槽底や洗い場床面へ設置して身体の安定を保ちます。

浴槽への出入り



入浴中の姿勢保持

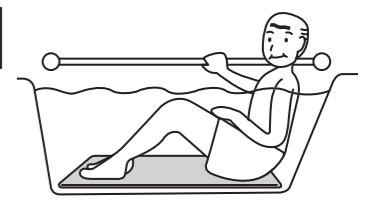

■ お手入れ方法 ■

中性洗剤をうすめた液をスポンジか、やわらかい布にふくませて汚れを取り、きれいな水で洗剤を洗い流して、かげ干しか、乾いた布で空拭きしてください。

お知らせ 水道水に含まれるカルキやミネラル分が表面に付着して、白くなることがありますが、人体に悪い影響はありません。