

ご使用上の注意

⚠ 警告 -WARNING-

誤った取り扱いにより、人が重傷を負う可能性が想定される内容を表示しています

●本製品は、産業用保護帽ではありません。法律(労働安全衛生法)で定める作業では使用しないでください。●本製品は、乗車用ヘルメットではありません。原動機付自転車を含むオートバイ及び自転車に乗車する際に使用しないでください。●本製品の分解・加工等はいしないでください。本来の性能を発揮できません。●火または高温の熱源に近づけないでください。燃焼の危険があります。●一度でも大きな衝撃が加わったり、高温にさらされた場合には、外観の異常が無くても使用せず廃棄してください。●無理に深く装着しないで下さい。本製品に隙間ができ、本来の性能を発揮できません。

⚠ 注意 -CAUTION-

誤った取り扱いにより、人が損害を負う可能性が想定される内容、および破損の発生が想定される内容を表示しています

●あご紐は必ず正しく装着してください。強風時に脱げてしまう可能性があります。●暖房機の近くなどの高温(50℃以上)になる場所や、直射日光があたる場所に長時間放置しないでください。変形・破損・物性低下などにより、機能を損なう可能性があります。●使用中に皮膚のかぶれ・かゆみ等が生じたら直ちに使用を中止し、医師の診断を受けてください。●定期的(6~12ヶ月程度)に、変形、破損、表面の脆化、ヒビ割れ等の異常が生じていないか確認し、異常がある場合は使用せずに廃棄してください。●使用後は都度、変形、破損、表面の脆化、ヒビ割れ等の異常が生じていないか確認し、異常がある場合は使用せずに廃棄してください。

保管方法

●高温・多湿を避けた暗所で荷重が掛からない状態で保管してください。変形・破損・物性低下などにより、機能を損なう可能性があります。

でるキャップ コンパクトタイプ

適応サイズ	頭の外周サイズ 54cm~62cm
型番	DC-C-01
外観サイズ	W300×D260×H40(mm)
質量	約85g(あご紐を含む)
材質	本体:PE樹脂 あご紐:PP樹脂
パッケージサイズ	W261×D50×H280(mm) (ヘッダー高さ30mm)

※記載をされた本製品の機能及び仕様は、改良のため予告なく変更されることがあります。

保管開始日(ご購入日)

年 月

保管開始日より約3年間を目安に交換をお勧めします。

株式会社タイカ

ウェルネス事業本部

お問い合わせ

Tel.0120-152047

(フリー)

〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4

Tel.03-5648-6630 / Fax.03-5648-6640 <https://taica.co.jp/pla>



日本製

