

どこでも手すり ベースカバー 取扱説明書


名称

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

当社製”どこでも手すり”シリーズのベースプレート以外には装着しないでください。カバー破損や思わぬ事故の原因になります。

カバーをベースプレートに脱着する際、ベースプレートは重いので必ず床に置いた状態で行ってください。落してケガをしたり器物破損の原因になります。

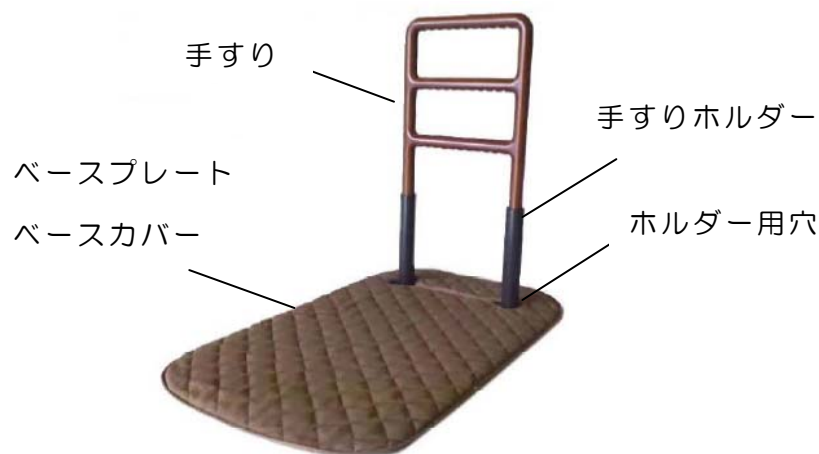

仕様


寸法	幅 53 cm×長さ 92 cm
カバー材料	ポリエステル 100%、アクリル 100%

脱着の仕方

脱着は必ずベースプレートに手すり及びホルダーが装着されていない状態で行ってください。


● ベースプレートへの着け方

カバーの脱着は必ず床に置いて行います。
手すりホルダーを取り付ける位置にホルダー用穴が来る向きで、図のようにベースカバー裏のベルトは外した状態でカバー四隅をベースプレート四隅に順々にはめていきます。

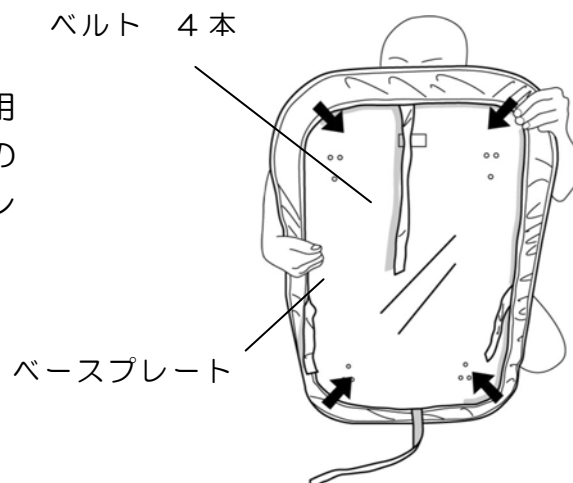

最後に裏の十字ベルトをそれぞれつなぎます。静かに表にし、床に置いたときにエッジがめくり上がっていないかを確認してください。めくり上がっている場合は裏からベルトを引張り調整してください。

カバー装着後の手すりホルダー、手すりの組み立ては、手すり本体用取扱説明書に従ってください。

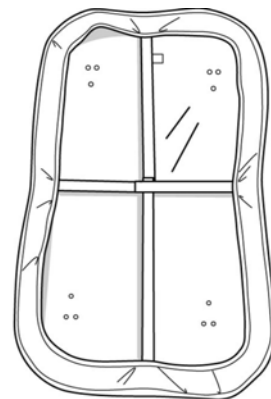

● ベースプレートからの外し方

裏の十字ベルトをそれぞれ外し、四隅を順々に外します。

お手入れの方法

【カバーのお手入れ】

- ベースカバー裏の表示ラベルに従ってください。
- 著しい汚れは、中性洗剤を水で薄め、布に染み込ませ、固く絞って拭き自然乾燥させてください。シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。
- 液温 30℃を限度として洗濯機で洗浄することができます。洗剤は中性洗剤を使用し、強アルカリ洗剤、漂白剤は使用しないでください。タンブル乾燥は絶対におやめください。縮みの原因となります。

アフターサービス

ご意見、ご質問はお近くの弊社支店、またはお買い上げの販売店へお申しつけください。



0120-083413

発売元：フランスベッド株式会社