

# ふとん用手すり 組立・取扱説明書

このたびは弊社の製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。



## ⚠ 注意

正しく安全にご使用いただくためにこの組立・取扱説明書をよくお読みいただいた上で組立てご使用下さい。  
また、いつでもご覧いただけるように大切に保管して下さいようお願い申し上げます。

## 部品一覧

組立を行う前に、次の部品が揃っているかお確かめ下さい。

部品名称	部品数	材質	寸法
手すりフレーム	1	タモ無垢材	(W) 605 × (D) 330 × (H) 640
ベース (大)	1	タモ無垢材	(W) 460 × (D) 220 × (H) 20
ベース (小)	1	タモ無垢材	(W) 460 × (D) 170 × (H) 20
小ネジ	6	スチール	M8 × 25

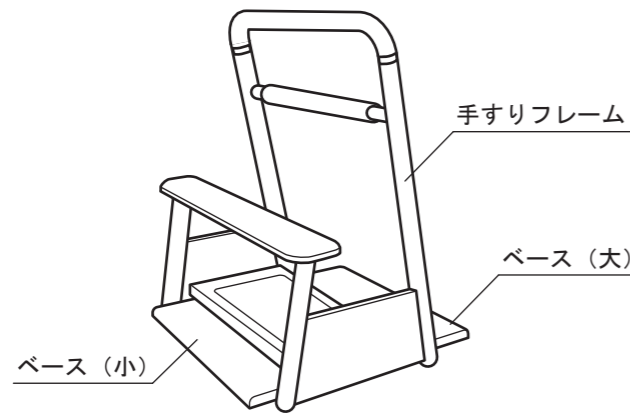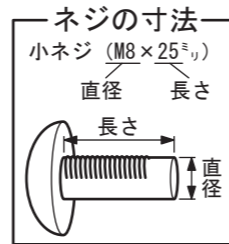

## 組立方法


### 組立を行う前に

十分な組立スペースを確保して下さい

## ⚠ 注意

床面の保護をして組立作業を行って下さい。  
ケガをしたり商品や床面を傷つける原因になります。

※ 組立には、プラスドライバーをご用意下さい。

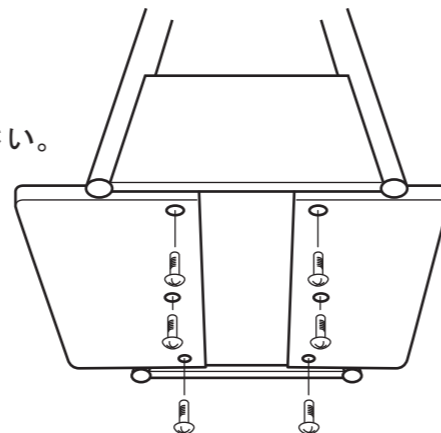


### 組立順序

- ・ベース (大・小) はどちら側にも取り付けることができます。
- ・よくお使いになる側に (大) をその反対側に (小) を取り付けて下さい。
- ・手すりフレーム底面にあるネジ穴に小ネジ (M8 × 25<sup>mm</sup>) で仮止めして下さい。
- ・全ての小ネジを仮止めしてから、ネジを確実に締め付けて下さい。

## 使い方

- ・イの部分に手をつけて体を支えて上体を起こします。
- ・口の部分をしっかりと握って立ち上がります。  
(その他の部分には体重をかけたり無理な力を加えないで下さい。)

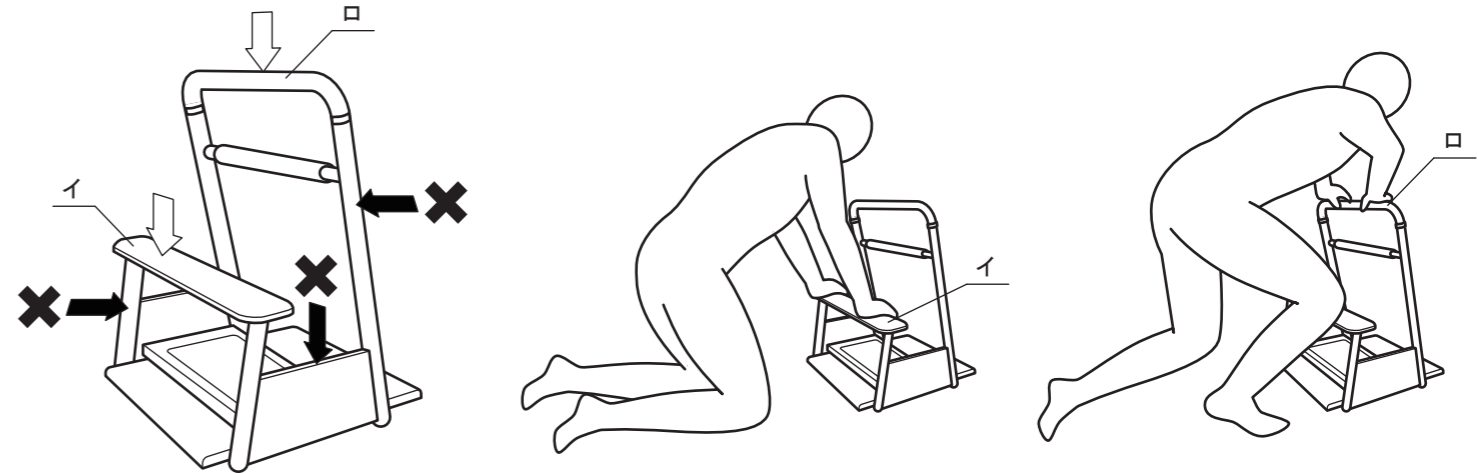

## お手入れ

### ⚠ 注意 必ずお守り下さい

シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだもの及び、研磨剤、漂白剤などは使用しないで下さい。  
商品を傷める場合があります。  
水拭き、化学雑巾・中性洗剤の使用は避けて下さい。変色の原因になります。  
専用クリーナーをお使いになるときは、一度めだたない所でお試しになってからご使用下さい。

- ◎ 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いて下さい。
- ◎ 表面がデリケートなため、商品の美しさを保つためには定期的なお手入れをして下さい。  
専用ワックスを柔らかい布に浸し、薄く塗り広げるように全体を拭いて下さい。  
(オイル・ワックスは商品によって使用を誤ると火の原因となる場合がありますので、  
同梱されてます取り扱い上の注意をよくお読みの上、ご使用下さい。)
- ◎ 著しい汚れを落とす場合は専用クリーナーで汚れを拭き取り、乾いた柔らかい布で拭いて下さい。
- ◎ 消毒は、納入業者または消毒施設のある業者にご依頼下さい。

## 保守点検

組付ネジ類が緩んでいないか、各部品類が外れていないか時々確認して下さい。

転倒や破損してケガをする恐れがあります。

虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をして下さい。

他から虫が入ったことも考えられますので、  
放置すると虫害が拡大する恐れがあります。

床面保護部品 (樹脂・ゴム・フェルト) 等の消耗部品の状態を時々確認して下さい。

割れ・剥がれ等の異常を発見した場合は、市販されている代用品と交換して下さい。  
また、床の材質やご使用方法によっては、接地面が傷ついたり、きしみ音が出ることがありますので、  
極力カーペット類を使用するなどして床面の保護は、お客様が行って下さい。  
床面の傷・変色・変形は保証の対象外ですのでご注意下さい。

## こんな時には

### がたつき、きしみ音のある時は

ネジ類が緩んでいないかお調べ下さい。緩みのある場合は、組立方法に従ってネジ類を締め直して下さい。

# 安全のために必ずお守り下さい

絵表示について この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い戴くため、下記の絵表示をしています。その表示と意味は次の様になっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

<p><b>警告</b></p> <p>記載されている内容を見逃して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。</p>	<p><b>注意</b></p> <p>記載されている内容を見逃して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や製品が破損する恐れのあることを示します。</p>	
<p>この記号は禁止の行為であることを告げるものです。 (～してはいけません。)</p>	<p>この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 (～下さい。)</p>	<p><b>絵表示</b></p> <p>絵表示に対する行為を禁止することを告げるものです。</p>

## 警告

### 使用上の注意


ご使用の際は介護者が付き添っていることをお勧め致します。  
誤った使用法は思わぬケガや重大な事故の原因となります。




固定式ではありませんので設置後の安全性や利用者の状態をご確認の上ご使用下さい。  
誤った使用法は思わぬケガや重大な事故の原因となります。



踏み台や椅子として使用しないで下さい。  
破損や転倒をしてケガをする恐れがあります。

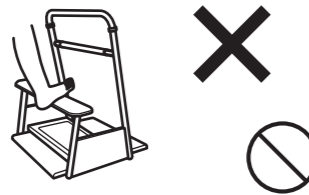


濡れた手で使用しないで下さい。  
すべて転倒をしてケガをする恐れがあります。

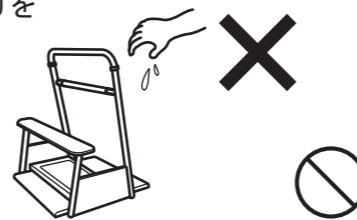


## 注意

### 設置上の注意

平らな場所に設置して下さい。  
ガタツキや異常音など故障の原因になります。

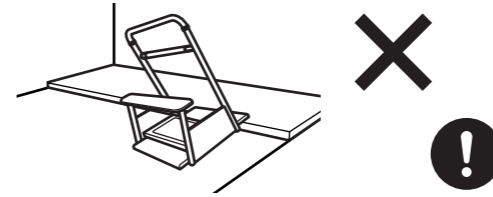

直射日光や、エアコンからの風が、直接当たる場所は避けて下さい。  
品質変化による変形・変色・ひび割れなどの原因になります。

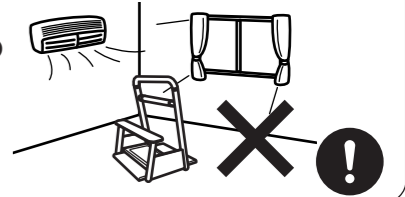

高温多湿な場所は避けて下さい。  
品質変化による変形・変色・ひび割れ・サビなどの原因になります。



屋内のみで使用して下さい。  
屋外での使用は品質変化による変形・変色・ひび割れ・サビなどの原因になります。



## 注意

### 使用上の注意

移動する際は下を持って下さい。  
移動する際は、両手で下を持って持ち上げて下さい。  
引きずったり、その他の場所で持ち上げると破損や床面を傷つける原因になります。



物を載せたままでの移動は十分に注意して下さい。  
載せた物の落下や、思わぬケガの原因になります。



部品は分解改造しないで下さい。  
破損してケガをする恐れがあります。

