


もふピタ

難しい体位変換やポジショニングを助けるクッション

取扱説明書

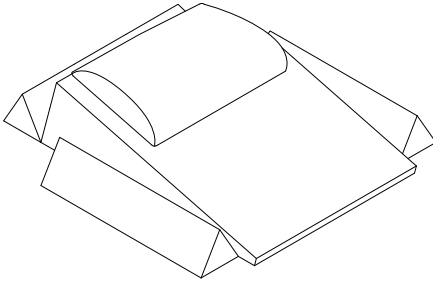

MP-01

サイズ：W88×L94cm

※当商品はまくらは付属いたしません。

枕カバーの中にお手持ちのまくらや、タオルなどをいれていただき、ご使用者様にあわせて適切な高さでご使用ください。

このたびは、フランスベッド社製クッション「もふピタ」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。こちらの「取扱説明書」には本製品を正しく安全にお使いいただくための注意事項を記載しています。

- 正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずよくお読みください。
- 必要な時に読めるように大切に保管してください。
- 必ず専門家と相談のうえ、正しくご使用ください。
- 使用中に異常を感じたり不安を感じた場合は、使用を中止しすみやかに専門家にご相談ください。

使用上のご注意

身体に無理のかかる体位でのご使用はお止めください。



呼吸を妨げぬよううつ伏せで使用しないでください。



体位変換・良肢位保持・床ずれ予防以外の用途にはご使用にならないでください。



衣類や寝具（シーツ等）がしわにならないようにクッションを設置してください。



使用の際は防水カバーのファスナーを絶対に開けないで使用してください。



保管する際は、紫外線による劣化を防ぐため、直射日光の当たる場所は避けてください。



火器や鋭利なものは近づけないでください。破損の原因となります。



お手入れや保管をする際は、本体の品質表示ラベルに従ってお取り扱いください。



材質について（全サイズ共通）

本体：ウレタンフォーム（上層：ラバータッチソフトウレタン/下層：硬質ウレタンチップフォーム）

防水カバー：表面/ポリウレタンフィルム（防水）裏面/ポリエステル100%

お手入れ方法

洗浄

防水カバーの取り外しは本体ウレタンを傷つけつる可能性がございますのでおやめください。

- ・汚れが気になる場合は、水または中性洗剤で拭き取るようにしてください。
- ・洗剤で清拭した後は水拭きし、跡が残らないよう乾拭きしてください。
- ・直射日光を避けて日陰干ししてください。
- ・水洗いすることはできません。洗濯機・乾燥機はご使用になれません。

保管

- ・汚れを取り除き、よく乾燥させてから保管してください。
- ・高温、多湿、直射日光の当たる場所での保管はしないでください。
- ・上に重たいものを乗せて保管しないでください。
- ・圧縮した状態での保管は、クッション本体のへたりや破損につながるためお避け下さい。

防水カバーのお手入れに使用可能な洗剤・薬剤、消毒方法について (○：適している / ×：不可)

	部品	清拭	洗濯
洗剤・薬剤	中性洗剤	○ ※洗剤の表示濃度	×
	弱アルカリ性洗剤	○ ※洗剤の表示濃度	×
	塩素系漂白剤	○ ※0.1%に希釈	×
	消毒用エタノール	○	×
	逆性石鹼（オスバン液）	○ ※0.2%に希釈	×
消毒	熱湯消毒	×	
	オゾン消毒	○	
	オートクレーブ	×	

薬剤につきましては上記の指定濃度にてご使用ください。