


もふピタ


洗濯機で洗えて衛生的！体位をやさしくサポート

取扱説明書

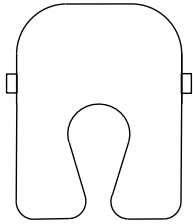

U-L

サイズ：W66×L86cm

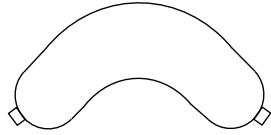

U-S

サイズ：W50×L100cm




W-50

サイズ：W50×L45cm



W-100

サイズ：W100×L45cm

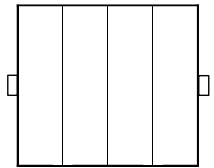

LW-67

サイズ：W70×L60cm

W-150

サイズ：W150×L45cm

W-200

サイズ：W200×L45cm

このたびは、フランスベッド社製クッション「もふピタ」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。こちらの「取扱説明書」には本製品を正しく安全にお使いいただくための注意事項を記載しています。

- 正しくお使いいただくために、ご使用前に必ずよくお読みください。
- 必要な時に読めるように大切に保管してください。
- 必ず専門家と相談のうえ、正しくご使用ください。
- 使用中に異常を感じたり不安を感じた場合は、使用を中止しすみやかに専門家にご相談ください。

使用上のご注意


身体に無理のかかる体位での使用はお止めください。




呼吸を妨げぬようご使用の際は配置に配慮をしてください。



体位変換・良肢位保持・床ずれ予防以外の用途にはご使用にならないでください。

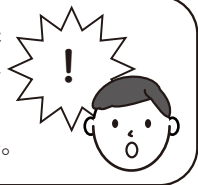


持ち手やシートが、身体の下でしわにならないようにご使用ください。

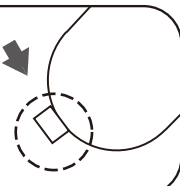

衣類や寝具（シーツ等）がしわにならないようにクッションを設置してください。



W-50、W-100、W-150、W-200のシート付のクッションを、専用防水カバーに入れる場合はシートがしわにならないように裏面に折り込んでください。

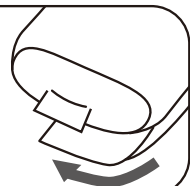

保管する際は、紫外線による劣化を防ぐため、直射日光の当たる場所は避けてください。



火器や鋭利なものは近づけないでください。破損の原因となります。



洗濯や保管をする際は、本体の品質表示ラベルに従ってお取り扱いください。



材質について（全サイズ共通）

①本体クッション

生地：ポリエステル 100%（着脱不可）

中材：ポリエステル 86%、合成繊維（アクリレート） 14%

洗濯機でのお手入れが可能です



②専用防水カバー（別売）

生地：表（パイル） 綿 80%、ポリエステル 20% / 裏 ポリウレタンフィルム（防水加工）

お手入れ方法


洗浄

本体クッション

- ・洗濯時、製品と洗濯機のふたが接触しないよう洗濯キャップなどを使用し、できるだけ水にひたして、弱い水流で洗濯してください。製品が浮いた状態で洗濯すると製品や洗濯機を損傷する恐れがあります。
- ・洗濯後はよく水気を切り、風通しの良い場所で陰干ししてください。
- ・お手入れ後は充填物を整え使用してください。
- ・使用する前に本体が十分に乾燥しているか確認してください。
- ・乾燥機による乾燥も可能です。乾燥は80℃以下にしてください。
- ・アイロンは、当て布をして形を整える程度に軽くかけてください。

専用防水カバー（別売）

- ・洗濯ネットに入れ、できるだけ中の空気を抜いて洗濯してください。
- ・遠心脱水機や洗濯機の脱水機能のご使用は避けてください。製品の性質上、水が抜けず洗濯機が転倒・破損する恐れがあります。
- ・乾燥機による乾燥も可能です。乾燥は80℃以下にしてください。
- ・アイロンは、当て布をして形を整える程度に軽くかけてください。
- ・お手入れ後、クッションにカバーを掛ける際は、必ずきちんと口のしわをのばし、クッションを隠すように生地を重ねてからご使用ください。*図1

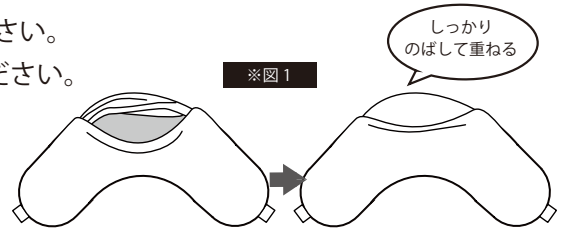

保管

本体クッション / 専用防水カバー（別売）

- ・汚れを取り除き、よく乾燥させてから保管してください。
- ・高温、多湿、直射日光の当たる場所での保管はしないでください。
- ・上に重たいものを乗せて保管しないでください。
- ・圧縮した状態での保管は、クッション本体のへたりや破損につながるためお避け下さい。

使用可能な洗剤・薬剤、消毒方法について

(○: 適している / ×: 不可)

部品		本体	防水カバー
洗剤・薬剤	中性洗剤	○	○
	弱アルカリ性洗剤	○	○
	塩素系漂白剤	×	×
	エタノール	○	×
	逆性石鹼（オスバン液）	○	×
消毒	熱湯消毒	○	×
	オゾン消毒	○	○
	オートクレーブ	×	×

フランスベッド株式会社
<https://www.francebed.co.jp/>

〈お客様相談室〉
固定電話からは ☎0120-39-2824
携帯・スマホからは ☎0570-666-996
月～金：9時～12時、13時～17時 土、日、祭日、年末、年始等は除く

※本仕様は改善のため、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。