

らくらく **介助用食器**

# ゴックン

実用新案特許・アメリカ特許

## ご使用方法と注意事項


正しくお使いいただくためによくお読み下さい。

ドロリとしたもの、粒のあるミキサー食に御使用下さい。

### おかゆ・ミキサー食用

食事時間が長い、スプーンを噛む、口を開けづらい、こぼす等食事介助に困っている方の食器です。

ミキサー食は混合にせず、献立ごとにミキサーして、別々のらくらくゴックンにいれ、おいしく食べさせて下さい。

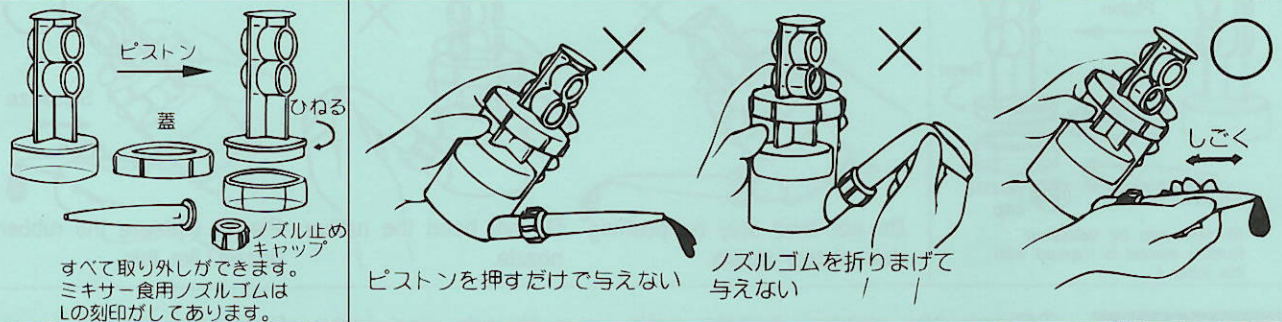


### 使用方法

- ①ピストンを押しながら、親指と人さし指でノズルゴムをつまみ、しごく様にして与えます。この時、ピストンは押し続けて下さい。
- ②ノズルゴムの中は小さじ1杯分の量になっており、1回のしごきで小さじ1杯分が出てきます。  
介助者が口に入っていく量がわかるようになっています。

### 注意事項

- ①ピストンのみで押し出すとおかゆの様に粘りのあるものは押す力が大となり押しづらくなります。しごく操作をすることでらくに押し出す事ができます。
- ②ノズルゴムの洗浄は両手でもむようにして洗って下さい。

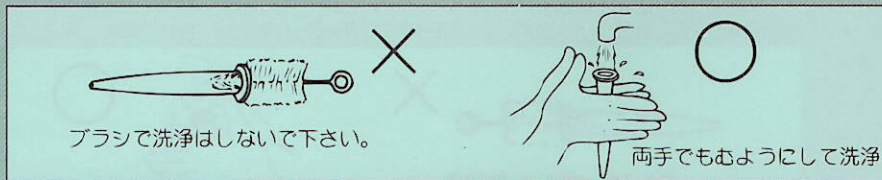

- ③煮沸・滅菌消毒や乾燥器に入れる時は食器をバラバラに分解して下さい。
- ④滅菌消毒は120℃以下で10分以内でおこなって下さい。
- ⑤洗浄ブラシは小型の歯ブラシが代用できます。
- ⑥洗剤によっては樹脂を劣化させるものもあります。十分に洗浄をして下さい。

### 材質

本体、蓋、ピストン、ノズル止めキャップ	ポリカーボネイト	耐熱温度 120℃
ノズルゴム	シリコンゴム	耐熱温度 150℃

### 容量

250ml

### 取換え部品

(別売) ノズルゴム(L)

牛乳やお茶などがむせて 飲みづらい方は、スープ・お茶用を御使用下さい。

製造元  齊藤工業株式会社

新潟県燕市小関字野中1156-1 TEL0256-62-2627(代)