

アフターサービス

- **修理を依頼されるときは・・・** 修理を依頼される前にこの取り扱い説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合は、『お買い上げの販売店』または下記『お客様相談室』へご連絡ください。
- **ご連絡いただきたい内容・・・** ご住所・ご氏名・電話番号・型式名・お買い上げの販売店・お買い上げ日故障または異常の内容（できるだけ詳しくお願いいたします。）
- **お客様相談室・・・** 弊社は厳格な検査を経て納品いたしておりますが、万一不具合点がございましたら、『お買い上げの販売店』または弊社『お客様相談室』までお問い合わせください。

フリーダイヤル ☎ 0120-39-2824

受付時間：月～金曜日、9～12時、13～17時
（土、日、祝祭日、年末、年始、弊社指定の休日等は除く）

製造販売元 フランスベッド株式会社

保 証 書

この製品は、厳格なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載内容によりお買い上げの販売店が受け付け致します。
※ 修理は、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、ご依頼ください。
※ 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5
TEL 042(543)3111(代表)

型 式	アドバンスポールN ADー	販 売 店
保証期間	お買い上げ日 年 月 日から1年間	
お 客 様	ご住所 〒	
	ご氏名 様	
	電話番号	

◇◇◇ 保 証 規 定 ◇◇◇

- 保証期間内に正常なる使用状態において万一故障した場合には、無償修理致します。
お買い上げ日及び販売店名は、納品書又は領収書等で確認させていただきますので、保証書とともに紛失しないよう保管願います。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
（イ）使用上の誤まり、不当な修理や改造による故障及び損傷。
（ロ）お買い上げ後の転倒、落下等による故障及び損傷。
（ハ）火災、地震、風水害、落雷やその他の天災地変、公害、ガス害、塩害等による故障及び損傷。
（ニ）電源を使用する製品においては、指定電源（日本国内仕様）AC100V 50/60Hz以外での使用や異常電圧による故障及び損傷。
（ホ）本保証書のご提示がない場合。
（ヘ）本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無く、納品書又は領収書等にて必要事項の確認ができなかった場合。
（ト）保証書の記載事項の字句を書き替えられた場合。
（チ）消耗部品の取替え及び点検等の費用。
（リ）離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿った訪問に要する実費を申し受けることがあります。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 法的責任
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 保証の対象
本体及び付属品。但し、消耗部品、縫製部品、別売部品は除く。
- 免責
本製品の故障の放置又はその使用によって生じた、直接、間接の損害についての保証は、一切その責を負いませんので、予めご了承ください。

修理の記録

フランスベッド



リハテック
アクティブウォークシリーズ
-Advance Pole N-

アドバンスポールN AD-03 90cm～120cm

アドバンスポールN AD-04 90cm～120cm

リハテック
Reha tech

アドバンスポールN 取扱説明書

910670-8900

- このたびは、本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
- 安全のため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- お読みにになったあとは、いつでも取り出せるように、大切に保管してください。



警告

必ずお読みください

- 用途によって必要な性能が異なります。高齢者の歩行補助や松葉杖などの医療機器として使用しないでください。転倒などの原因となります。
- 本製品はウォーキング専用の製品です。ウォーキング以外の用途に使用しないでください。
- 長さの調節の際に十分に締め付けてもシャフトが縮むことがあるのでご注意ください。大きな段差で使用した時や、長時間歩行した後などは緩みやすいので特にご注意ください。
- 長さの調節後、軸方向に圧縮力をかけて、シャフトが縮まないことを確認してからご使用ください。

ご使用前に

- グリップに取り付けられている紐(ストラップ)は、体重を掛けて使用する事を意図しておりません。この紐に体重を掛けて使用しないでください。
- 使用前後及び使用中にも各部を十分に点検してください。使用中にけがの原因になりますので、破損・変形等したものは使用しないでください。
- 振り回すなど、他の人が危険な状態になる行為は行わないでください。

● SG マークについて



SG マーク制度は、ウォーキングスポーツ用ボールの欠陥によって発生した人身事故に対する補償制度です。

● 適した長さに設定するには


靴を履いた状態でポールを持ち、肘を約 90 度にまげた時の長さに調節してください。(図 1)

● ラバーチップを外す場合

片手でシャフトを握り、もう片方の手でラバーチップを引き抜いてください。(図 2)

舗装された道では、ラバーチップを付けた状態でお使いください。


登山道やぬかるんだ道などでは、ラバーチップを外して状態でご使用ください。

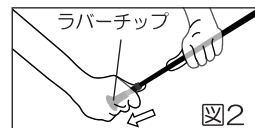

※ラバーチップがすり減り、底の溝がなくなった時は、ラバーチップを新しい物に交換してください。

各部の名称

【杖本体】

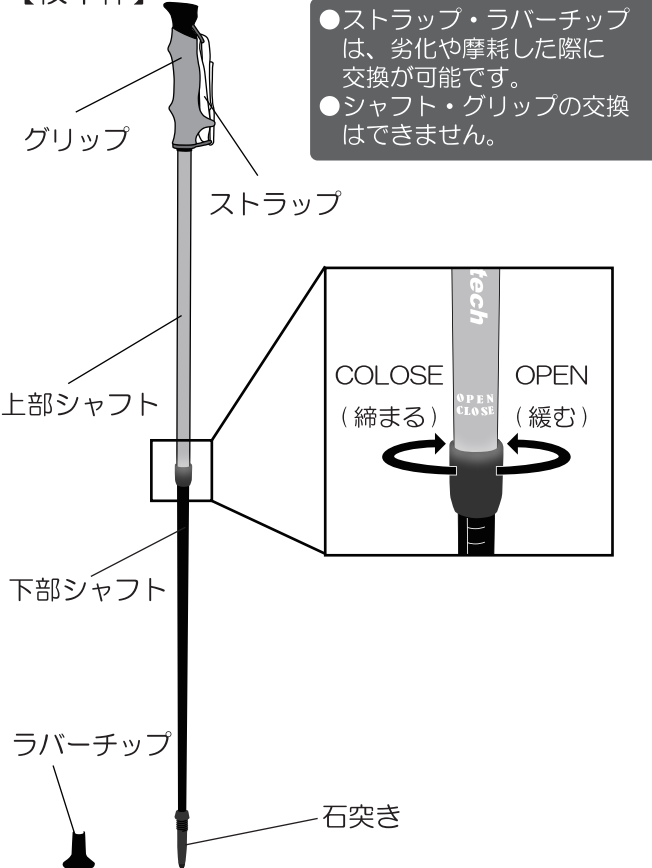

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記の区分や絵表示をしています。その指示と内容は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意
この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

記号は、行為の強制や、指示する内容を告げるものです。

警告

- 修理、分解、改造を行わないでください。
- 直射日光のあたる場所に長時間放置しないでください。変色、変形、故障の原因となります。
- 車内に長時間放置しないでください。変形、故障の恐れがあり大変危険です。
- 暖房器具のそばに放置しないでください。火災、故障の恐れがあり大変危険です。
- 用途によって必要な性能が異なります。高齢者の歩行補助や松葉杖などの医療用の用途には使用しないでください。転倒などの危険があります。

注意

- 道路の側溝の溝や凹みのある箇所では、杖先がはまり込む場合があるため十分注意してください。
- ウォーキングスタイルによって使用するポールが異なります。本製品は、スタンダードウォーク(ディフェンシブウォーク)のみに使用してください。
- 長さの調節の際に十分に締め付けてもシャフトが縮むことがあるのでご注意ください。大きな段差で使用した時や、長時間歩行した後などは緩みやすいので特にご注意ください。
- 長さの調節後、軸方向に圧縮力をかけて、シャフトが縮まないことを確認してからご使用ください。

注意

- 長さ調節の際に、「MAX」の表示が見える位置で固定して使用しないでください。事故や故障の恐れがあります。
- 雨天や降雪などの悪天候の下で使用しないでください。事故や故障の恐れがあります。
- 杖を落としたり、倒したりしないでください。故障の原因となります。
- グリップに取り付けられている紐(ストラップ)は、体重を掛けて使用する事を意図しておりません。この紐に体重を掛けて使用しないでください。
- 振り回すなど、他の人が危険な状態になる行為は行わないでください。
- ラバーチップがすり減り、溝がない状態で使用しないでください。

注意

- 使用前後及び使用中にも各部を十分に点検してください。使用中にけがの原因になりますので、破損・変形等したものは使用しないでください。
- 使用前・使用中にシャフトの継ぎ目が確実に固定されていることを確認してください。
- 身体に合った杖を選んでください。
- 濡れた、または凍った路面は滑りやすいため注意してください。
- 長期間使用しない場合は直射日光、高温高湿の環境を避け、寝かせた状態で保管してください。

仕様



型式		AD-03 SL	AD-04 BK
材質	持ち手	(グリップ) 樹脂	(ストラップ) PP、ナイロン
	上部シャフト	アルミニウム	
	下部シャフト		
	石突き	樹脂、アルミニウム、タングステン	
	ラバーチップ	SBR(スチレン・ブタジエンゴム)	
全長 cm		約 90～120 cm	
重量 g		約 400 g (1本約200 g)	
ラバーチップサイズ		11 mm 用	

お手入れ方法・保管方法

- 使用後、汚れや水分をしっかりと落としてください。雪や雨などで濡れた場合は、下部のポールを抜き取り、自然乾燥させてください。著しい汚れは、中性洗剤を水で薄め布に染み込ませ、硬く絞って拭き、自然乾燥させてください。シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。
- 使用後は直射日光の当たらない、高温にならない、湿気の少ない場所で保管してください。
- 長期間使用せずに保管した場合は、使用前に必ず、各部の劣化や異常がないか確認してください。

使用方法

- 長さ調節の方法
 - 1) 上部シャフトを矢印の方向に回し、緩めてください。
 - 2) 下のシャフトを引き出し好みの長さに調節してください。(シャフトには両面に2種類の刻印がありますので、目安にしてください)

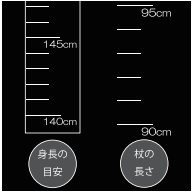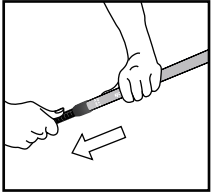


- 3) 上部シャフトを矢印の方向に回し、しっかり固定されるまで締めてください。








注意

本製品は、90 cm～120 cmの長さにおいて安全にお使いいただける製品です。下部シャフトの上端に刻印されている「MAX」の文字が見える長さで固定してお使いにならないでください。

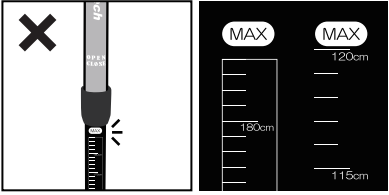






● ストラップの取り付け方

- 1) ストラップの端をグリップの穴に通してください。
- 2) 面ファスナーを留めてください。

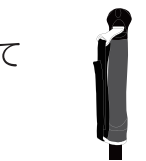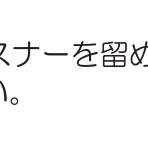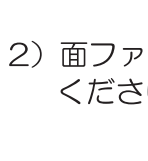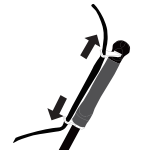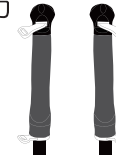

● グリップの握り方


- 1) 面ファスナーの留め位置を変えてストラップを緩め、手を通してください。
- 2) 図のようにグリップをしっかりと握ってください。

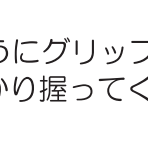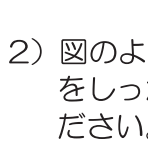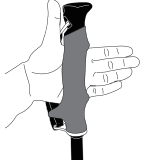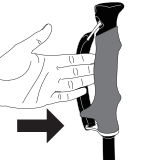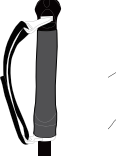

効果的な歩き方

- ①右手のポールを後ろに押し出ししながら、右足を前に踏み込みます。
- ②右足を踏み込むタイミングで、左手のポールを地面に突きます。
- ③左手のポールで地面を漕ぐように後方に押しながら、左足と右手のポールを前に振り出し始めます。その時に左足と右手のポールは力まずに軽く振り出してください。
- ④左手のポールを地面後方に向けて押しながら、左足の踏み込みと同時に右手のポールを地面前方に突きます。
- ⑤左腕とポールがほぼ直線になるように後方へ押しながら左足に体重移動します。体重が左足に移ってから、右足と左手のポールを前方に振り出し始めます。

以降①～⑤を左右交互に繰り返して歩きます。

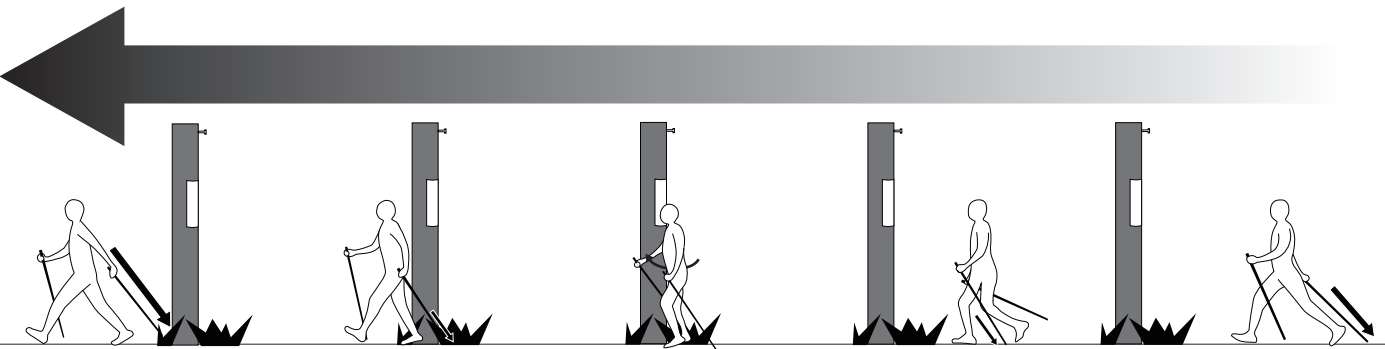

- ※ 歩き方を意識しすぎて歩きにくい場合は、ポールを後方に押そうとせずに両手を前に振ってテンポ良く歩く事を意識してください。
- ※ 右足を前に出すときは右手のポールを、左足を前に出すときは左手のポールを後方に押し出してください。