

⑥ 保管方法

- 汚れを落とし、風通しのよい日陰で保管してください。変形防止のため製品に負荷をかけないでください。

⑦ 廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、各自治体の条例に従ってください。
- 配達に使用した梱包材料は、一般ゴミとして廃棄が可能です。

⑧ 仕様

		撥水・防水カバータイプ		通気カバータイプ	
		カラー (表)青 (裏)シルバーグレー		カラー (表)青 (裏)こげ茶	
材 質	カバー	表地：ポリエステル 裏地：ポリウレタン		ポリエステル	
	中身	シリコーンゲル、ポリウレタンフォーム			
サ イ ズ	83 cm 幅	レギュラー	MB-FIIW3R	MB-FIIA3R	幅 83×長 195×厚 13 (cm)
			ショート	MB-FIIW3S	
		ロング	MB-FIIW3L	MB-FIIA3L	幅 83×長 210×厚 13 (cm)
			レギュラー	MB-FIIW1R	
		ショート	MB-FIIW1S	MB-FIIA1S	幅 91×長 181×厚 13 (cm)
			ロング	MB-FIIW1L	
	100 cm 幅	レギュラー	MB-FIIW0R	MB-FIIA0R	幅 100×長 195×厚 13 (cm)
			ロング	MB-FIIW0L	

αPLA、αPLA F は(株)タイカの登録商標です。
製品の仕様は改善などのため、予告なしに変更することがあります。

株式会社タイカ ウェルネス事業本部
〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4
Tel.03-5648-6630 Fax.03-5648-6640
☎0120-152047 (無料)

FII01
2020.11

床ずれ防止マットレス

αPLA F II

体圧分散式マットレス

アルファプラ F II

- 撥水・防水カバータイプ
- 通気カバータイプ



取扱説明書

ご使用になる前に必ずお読みください。

Taica

体圧分散式マットレス アルファプラ FII 取扱説明書

① 安全上の注意

安心してご使用いただくために、以下のことを必ず守ってご使用ください。



以下の記載を無視して、誤った取り扱いをすると、人命に関わるけがや重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

心臓マッサージ等、身体に力を加える処置でのご使用はお控えください。力が分散し適切な処置ができない可能性があります。

本製品に人を乗せたまま移動させないでください。落下してけがをする恐れがあります。

ベッドサイドレール、介助バー等と、本製品とのすき間に手などを挟まれないようにご注意ください。けがをする恐れがあります。



以下の記載を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

表と裏を間違えて使用されると、本製品の性能が十分に発揮されませんのでご注意ください。

本製品の上に体圧分散を妨げるような敷物を敷かないでください。効果的な体圧分散ができず、床ずれを発生および悪化させる恐れがあります。

本製品の端を強くつかまさないでください。内部がちぎれる場合があります。持ち運びの際は、裏面にある持ち手をご利用ください。

本製品をマットレス洗浄機、滅菌機（オートクレープ等）にかけると、破損する可能性があります。事前に（株）タイカまでお問い合わせください。

直射日光に当てないようにしてください。紫外線による変質の原因になります。

高温のもの（ドライヤー、ストーブ、アイロン等）および低温のもの（ドライアイス等）に近づけないでください。変質の原因になります。

火または温度の高いものに近づけないでください。火災の危険があります。

無理な力（折り曲げる、強くにぎる、引っ張る、ねじる等）を加えないでください。

② ご使用になる前に

●ご使用前にキズ、ほころび、汚れ等がないことを、必ずご確認ください。厳重な品質管理のもと製造しておりますが、万一不備がありましたら、お手数ですが、（株）タイカへご連絡ください。

●開封直後、ウレタンフォームの臭いが気になる場合がございますが、身体に害を与えるような有害物質は含んでおりません。臭いはしばらくすると自然に消えますのでご安心ください。

③ 製品の交換・返品について


●お手元に製品が届きましたら、速やかに製品をご確認ください。

●製品不良の場合は、（株）タイカまたは取扱店にご連絡ください。

④ 使用方法

●「αPLA FII」とプリントしてある面を上にしてご使用ください。

●持ち運びの際は、裏面にある持ち手をご利用ください。

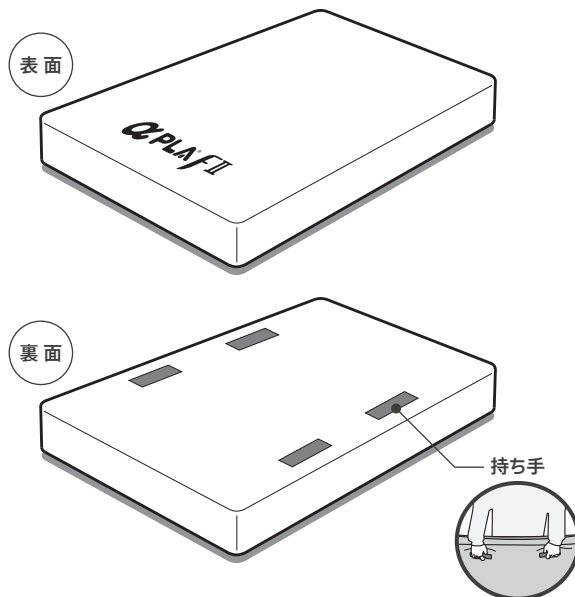










●汗を多くかけられる方が使用する場合は、体位変換や空調管理を十分に行ってください。また、シーツやパッド等の洗濯交換を適宜行ってください。

●通気カバータイプの場合、失禁の心配がある方は、市販の防水シーツを併用してください。

⑤ お手入れ方法

【カバー】

●本製品のカバーを洗濯する際は、以下の注意事項をお守りください。

撥水・防水カバータイプ	通気カバータイプ
 手洗いしてください。液温は、40℃を限度としてください。	 洗濯機によるお洗濯が可能です。液温は、60℃を限度としてください。
 酸素系漂白剤は使用できませんが、塩素系漂白剤は使用できません。	
 タンブル乾燥はできません。	
 日陰で平干ししてください。	 日陰で吊るして乾燥してください。
 アイロン掛けはできません。	
 ドライクリーニングはできません。	
 ウェットクリーニングはできません。	

【ウレタンフォーム】

●汚れた場合

軽い汚れの場合には、乾いたタオルもしくは固く絞ったぬれタオルでたたくようにして拭いた後、乾燥をさせてください。汚れがひどい場合は、水洗いが可能です。液温40℃を限度とし、中性洗剤を使用して、手洗い（押し洗い）してください。乾いたタオルなどで水分を拭き取った後、直射日光を避け、日陰で平らに置いて十分乾燥させてください。ウレタンフォームは、スリット加工された面が表面になります。カバーを装着する際は表裏をお確かめください。

●除菌消臭剤

市販のアルコールや除菌消臭剤はウレタンフォームの劣化を促進させる恐れがありますので使用しないでください。

●乾燥

定期的に風通しのよい日陰で立てかけて乾燥させることをおすすめします。

※家庭用洗濯機、乾燥機は使用できません。業務用機械での洗浄・乾燥については、（株）タイカまたは取扱店までお問い合わせください。