

6

保管方法

- ・汚れを落とし、風通しのよい日陰で保管してください。変形防止のため商品に負荷をかけないでください。

7

廃棄について

- ・本商品を廃棄する場合は、各自治体の条例に従ってください。
- ・配達に使用した梱包材料は、一般ゴミとして廃棄が可能です。

8

商品仕様

		撥水・防水カバータイプ	通気カバータイプ	
材質	カバー	表地：ポリエステル 裏地：ポリウレタン	ポリエステル	
	中身	シリコーンゲル、ポリウレタンフォーム		
サイズ	83cm幅	レギュラー	MB-FW3R	MB-FA3R
			幅 83 cm × 長 195 cm × 厚 13 cm	
		シヨート	MB-FW3S	MB-FA3S
			幅 83 cm × 長 181 cm × 厚 13 cm	
		ロング	MB-FW3L	MB-FA3L
			幅 83 cm × 長 210 cm × 厚 13 cm	
	91cm幅	レギュラー	MB-FW1R	MB-FA1R
			幅 91 cm × 長 195 cm × 厚 13 cm	
		シヨート	MB-FW1S	MB-FA1S
			幅 91 cm × 長 181 cm × 厚 13 cm	
		ロング	MB-FW1L	MB-FA1L
			幅 91 cm × 長 210 cm × 厚 13 cm	
100cm幅	レギュラー	MB-FWOR	MB-FAOR	
		幅 100 cm × 長 195 cm × 厚 13 cm		
	ロング	MB-FWOL	MB-FAOL	
		幅 100 cm × 長 210 cm × 厚 13 cm		

※商品の仕様は改善などのため、予告なしに変更することがあります。

株式会社タイカ ウェルネス事業本部

〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-39-4
Tel:03-5648-6630 Fax:03-5648-6640
フリーダイヤル 0120-152047

2017.08.2000

ご使用になる前に必ずお読みください。

体圧分散式マットレス
床ずれ防止マットレス

アルファプラ F

αPLAF

- 撥水・防水カバータイプ
- 通気カバータイプ



取扱説明書

Taica

1 安心してご使用いただくために

安全上のご注意

安心してご使用いただくために、以下のことを必ず守ってご使用ください。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

心臓マッサージ等、身体に力を加える処置でのご使用はお控えください。力が分散し適切な処置ができない可能性があります。

本商品に人を乗せたまま移動させないでください。落下して怪我をする恐れがあります。

ベッドサイドレール、介助バー等と、本商品とのすき間に手などを挟まれないようにご注意ください。怪我をする恐れがあります。



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。

表と裏を間違えて使用されると、本商品の性能が十分に発揮されませんのでご注意ください。

本商品の上に体圧分散を妨げるような厚手の敷物を敷かないでください。効果的に減圧されない可能性があります。

本商品の端を強くつかまないでください。内部がちぎれる場合があります。持ち運びの際は、底面にある持ち手をご利用ください。

汗を多くかかれる方が使用する場合は、体位変換や空調管理を十分に行ってください。また、シーツやパッド等の洗濯交換を適宜行ってください。

本商品をマットレス洗浄機やオートクレーブ等の滅菌機にかけると、破損する可能性があります。事前に(株)タイカまでお問い合わせください。

直射日光に当てないようにしてください。変質の原因になります。

高温のもの（ドライヤー、ストーブ、アイロン等）および低温のもの（ドライアイス等）に近づけないでください。変質の原因になります。

火または温度の高いものに近づけないでください。火災の危険があります。

無理な力（強くにぎる、引っ張る、ねじる等）を加えないでください。

2 ご使用になる前に


- ・ご使用前にキズ、ほころび、汚れ等がないことを、必ずご確認ください。嚴重な品質管理のもと製造しておりますが、万一不備がありましたら、お手数ですが、(株)タイカへご連絡ください。
- ・開封直後、ウレタンフォームの臭いが気になる場合がございますが、身体に害を与えるような有害物質は含んでおりません。臭いはしばらくすると自然に消えますので安心ください。

3 商品の交換・返品について

- ・お手元に商品が届きましたら、速やかに商品をご確認ください。
- ・商品不良の場合は、(株)タイカまたは取扱店にご連絡ください。

4 使用方法 / 取扱上のご注意

- ・「αPLA F」とプリントしてある面を上にご使用ください。

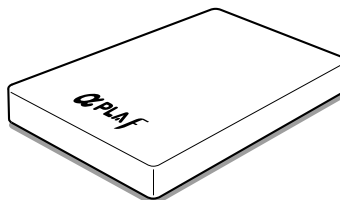










- ・伸縮性の高い市販のシーツを敷いてご使用ください。
- ・通気カバータイプの場合、失禁の心配がある方は、防水シーツを併用してください。
- ・本商品に人を乗せたまま移動させないでください。落下して怪我をする恐れがあります。
- ・端を強くつかんで持つと破損する恐れがあります。持ち運びの際は、底面にある持ち手をご利用ください。
- ・本商品を折り曲げないでください。内部構造が破損する可能性があります。



5 お手入れの方法

カバーのお手入れ方法

- ・本商品のカバーを洗濯する際は、以下の注意事項を必ずお守りください。

撥水・防水カバータイプ	通気カバータイプ
 手洗いしてください。液温は、30度を限度としてください。	 洗濯機によるお洗濯が可能です。液温は、60°Cを限度としてください。
 酸素系漂白剤は使用できませんが、塩素系漂白剤は使用できません。	
 タンブル乾燥はできません。	
 日陰で平干してください。	 日陰で吊るして乾燥してください。
 アイロン掛けはしないでください。	
 ドライクリーニングはできません。	
 ウェットクリーニングはできません。	

本体のお手入れ方法

- ・汚れた場合
乾いたタオルもしくは固く絞ったぬれタオルでたたくように拭いた後、十分に乾燥させてからご使用ください。
- ・除菌消臭剤
市販のアルコールや除菌消臭剤はフォームの劣化を促進させる恐れがありますので使用しないでください。
- ・乾燥
定期的に風通しのよい日陰で立てかけて乾燥させることをおすすめします。
- ・クリーニング
専用の装置が必要です。通常のクリーニングでは破損の恐れがありますので、(株)タイカまたは取扱店にご相談ください。
- ・洗浄業者様へ
本商品をマットレス洗浄機やオートクレーブ等の滅菌機にかけると、破損する可能性があります。事前に(株)タイカまでお問い合わせください。