


床ずれ防止 車いす用クッション取扱説明書

型式名：インテグラメッド BETA

862100-8901

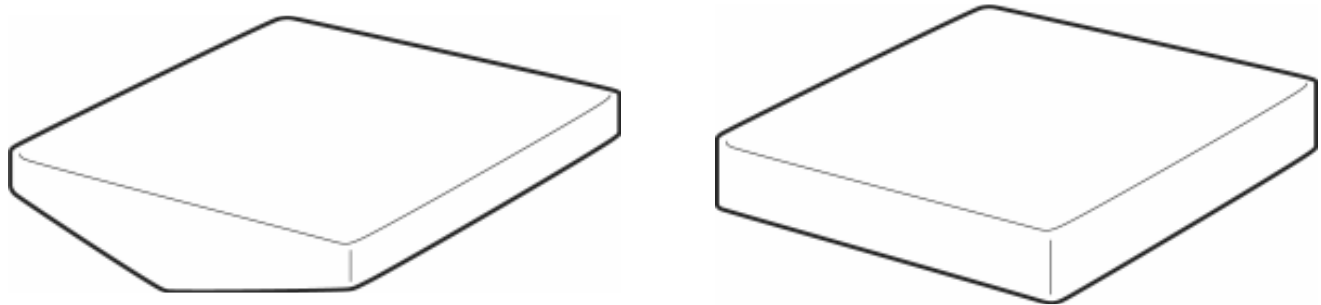

このたびはフランスベッドの製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。





⚠ 注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- 取扱説明書はいつでもご使用できるように大切に保管してください。
- 床ずれになる原因は体圧の負荷だけでなく、患者の栄養状態、移動時のズレやこすれなど体位変換の回数等様々な要因が重なっています。このマットレスで体圧分散はしますが、他の要因に対して床ずれ防止を保証するものではありません。

1. 安全のために必ずお守りください

●絵表示について

※この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただくために、また使用者への危害や財産への損害を未然に防止するために下記の絵表示をしています。その意味と内容は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 <p>この表示を無視して、誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。</p>	 <p>この記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 (～しなさい。)</p>
 <p>この記号は禁止の行為であることを告げるものです。 (～してはいけません。)</p>	 <p>絵表示に対する行為を禁止することを告げるものです。</p>

2. 設置上の注意

⚠ 注意

- 直射日光の当たる場所は避けてください。
変形、変色の原因になります。



3. 使用上の注意

⚠ 注意

- この車いす用クッションは減圧クッションのため、敷物を使用する際はできるだけ薄い物をご使用ください。厚い敷物を使用すると身体にかかる減圧効果が得られなくなる恐れがあります。



4. お手入れの仕方

⚠ 注意

- 車いすクッションの表地の汚れを落とす場合は、中性洗剤を水で薄めて染み込ませた布を固く絞って拭いてください。著しい汚れを落とす場合はアルコールを染み込ませた布で拭いてください。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだ物及び漂白剤などは使用しないでください。表地を傷める場合があります。



- 洗濯方法及び消毒方法はメディカル担当の弊社営業員にお尋ねください。

5. 仕様一覧

	BETA IPA-01	BETA IYA-01	BETA JYP-01
寸法	縦400×横400×高さ40 /90mm	縦400×横400×高さ40/ 90mm	縦400×横400×高さ50mm
色	ピンク	イエロー	
表生地	ナイロン63%、ポリウレタン37%		
詰め物	ヴィスコエラスティック、ウレタンフォーム		

アフターサービスについて

- ◎ 弊社は厳格な検査を経て納品いたしておりますが、万一不具合点がございましたら、『お買い上げの販売店』または弊社『お客様相談室』にお問合せください。

ご連絡していただきたい内容・・・ご住所、ご氏名、電話番号、型式名、お買い上げ店、お買い上げ日

『お客様相談室』



フリーダイヤル：0120-39-2824

受付時間：月～金曜日、9～12時、13～17時
(土、日、祝祭日、年末、年始、弊社指定の休日等は除く)