







## 床ずれ防止マットレス インテグラメッド TOP

## 120N/N-S/N-SW/N-W/SS 取扱説明書

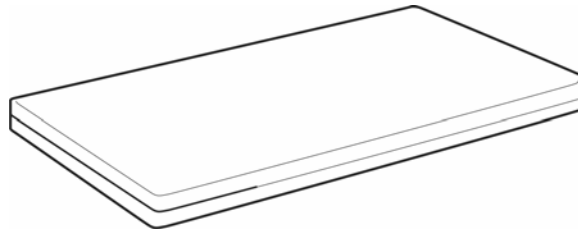

## 設置

 <b>警告</b>	<p>この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。</p>
<p>当社の介護・メディカルベッド用以外にはご使用にならないでください。 大きさの違いにより、ベッドやベッド付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。</p>	 禁止
 <b>注意</b>	<p>この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。</p>
<p>床ずれは様々な要因が重なっています。このマットレスは体圧を分散するマットレスであり、床ずれ防止を保証するものではありません。</p>	 注意
<p>このマットレスは体圧を分散するマットレスです。敷物を使用する際はできるだけ薄い物をご使用ください。 厚い敷物を使用すると、マットレスの体圧分散性を損なう恐れがあります。</p>	
<p>マットレスを持運ぶ場合は、カバーの上から詰め物を持ってください。 カバーだけを持ち移動させると、カバーが破れる恐れがあります。</p>	
<p>直射日光の当たる場所は避けてください。 変形、変色の原因になります。</p>	 禁止

- このマットレスは体圧分散性に優れたマットレスであり、褥瘡予防から、褥瘡レベル1~2に対応しています。表地は“シワ”ができていく、速乾性に優れていますので、シーツのみでの使用をお勧めいたします。また、発汗量の多い方にパッドをご使用になる場合は、できる限り薄手のパッドをご使用ください。厚いものではマットレスの体圧分散性を損なう恐れがあります。
- 裏表・頭側脚側の区別はありません。

## 仕様



寸法	120N	幅 850×長さ 1950×厚み 120 mm
	120N-S	幅 850×長さ 1810×厚み 120 mm
	120N-S W	幅 910×長さ 1950×厚み 120 mm
	120N-W	幅 1000×長さ 1950×厚み 120 mm
	120SS	幅 780×長さ 1950×厚み 120 mm
表地	ナイロン・ポリウレタンコーティング 防水・速乾・伸縮・抗菌素材	
中材	表面	ウレタンフォーム
	芯材	ヴィスコ・エラスティック
重量	120N	約 13.3 kg
	120N-S	約 12.4 kg
	120N-S W	約 14.2 kg
	120N-W	約 15.6 kg
	120SS	約 12.2 kg
防災性	難燃製品	

## 特長

- 体圧分散性に優れたマットレスであり、褥瘡予防から、褥瘡レベル 1～2 に対応しています。また、急激な力に対して変形しにくいため安定した体圧分散が期待できます。
- 速乾性がありますので楽に清拭が行えます。
- 全ての方向に対して伸縮性がありますので“シワ”になりにくい。
- 背上げ・脚上げ機能に対応しています。
- 座位補助ベッドのサイドアップ機能に対応しています。

## お手入れの方法

※ ガス消毒の条件設定には実地試験が必要な場合が有ります。

 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
当マットレスは丸洗い及び表地、中材単体の洗浄機での洗浄はできません。	
清拭にシンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤、また高水準の消毒液を使用しないでください。 接触した場合は、温水でよくすすぎ乾燥させてください。	
 禁止	

### 【カバーのお手入れ】

- 汚れは、中性洗剤を水で薄め、布に染み込ませ、固く絞って拭き自然乾燥させてください。
- しつこい汚れや消毒は、メチルアルコールで拭き、その後中性洗剤を含むお湯でふき取り、完全に乾燥させてください。

- 消毒液で清拭してください。

使用できる消毒液	次亜塩素酸ナトリウム（0.01%～0.1%）
	塩化ベンザルコニウム（0.1%～0.2%）
	塩化ベンザトニウム（0.1%～0.2%）

### 【中材のお手入れ】

- カバーを外し、40℃以下の温水に中性洗剤を溶かし、汚れた部分に流しながら軽く手でたたくようにすることで洗い流すことができます。乾燥は、マットレスを水平にしておこなってください。



### 【滅菌処理】

- 高圧蒸気滅菌法（オートクレーブ滅菌）にて滅菌処理が可能です。

滅菌温度	90℃～105℃
滅菌時間	10 分間

- ガス消毒の条件設定には実地試験が必要な場合があります。

## 保管方法

 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。	
	直射日光のあたる場所での保管はおやめください。	
	丸めたり、折ったりしての保管はおやめください。	
	立てて保管しますと、倒れて危険ですのでおやめください。	
		 禁止

- マットレスを、長時間ご使用になられない時は、湿度の少ない部屋で、平置きしてください。重ねる場合は、10枚を限度とし平積みしてください。