



328303-8921

ウェイテッド Hug ふとん・ウェイテッド Hug ふとん★ミニ

取扱説明書／保証書

この度はフランスベッドの製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございました。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

またお読みになったあとも、

巻末の「保証書」とあわせて大切に保管下さい。



フランスベッド株式会社

● はじめてウェイトッド Hug ふとんをお使いになる皆様へ

ウェイトッド Hug ふとんは、寝具の中に束状になったポリエステル繊維のウェイトを入れ、重さを与えた掛けふとんです。適度な圧刺激によって、安心感をもたらし、睡眠をサポートします。特に不安の強い方、落ち着かない方、身体イメージが低下している方や感覚過敏の方などにおすすめします。


● 同梱物の確認

本製品の購入後、はじめて梱包箱を開けるときに、下記のものがすべて入っていることを確認してください。

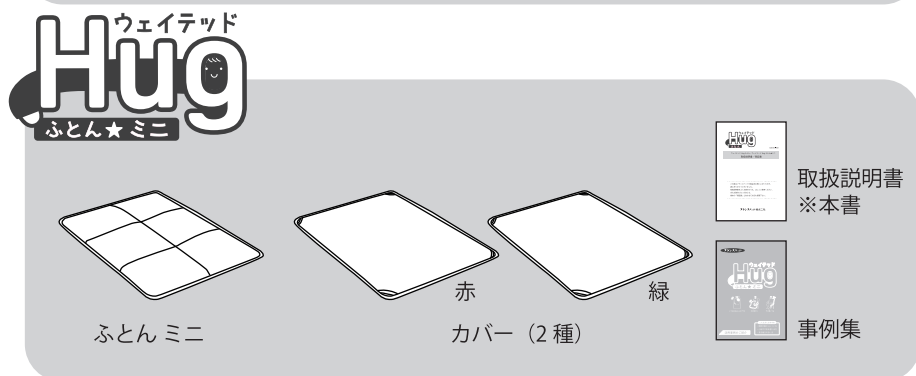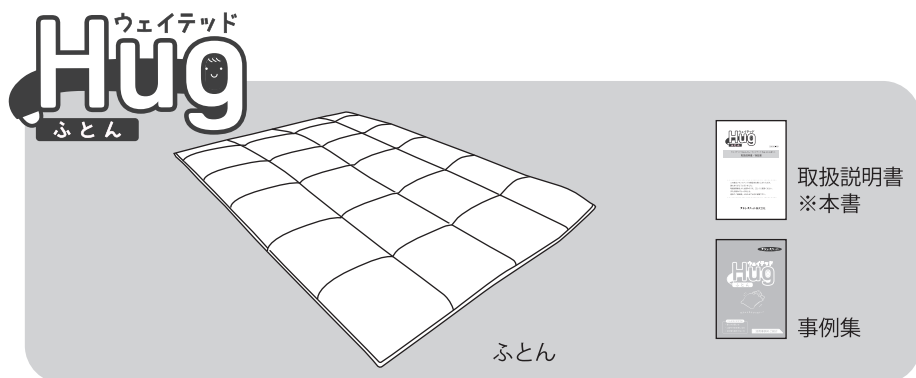


● 各部の名称

ウェイテッド Hug ふとん

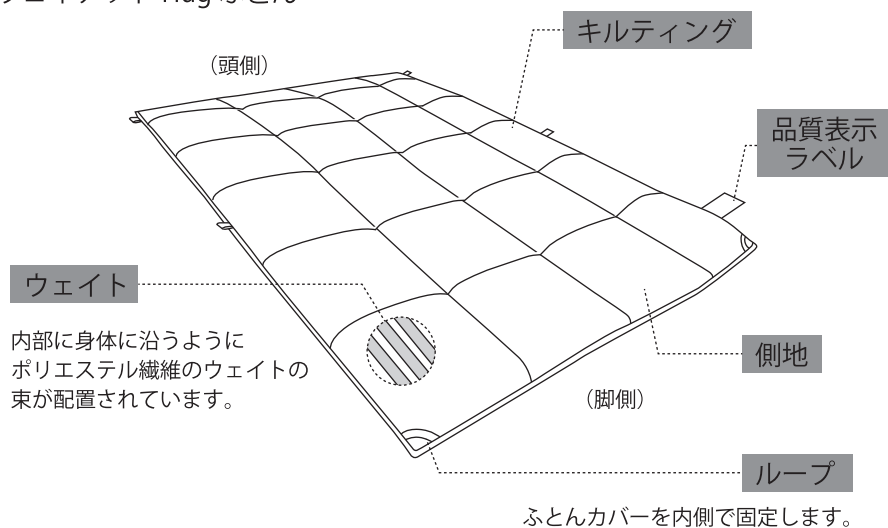

ウェイテッド Hug ふとん★ミニ


[ふとん本体]

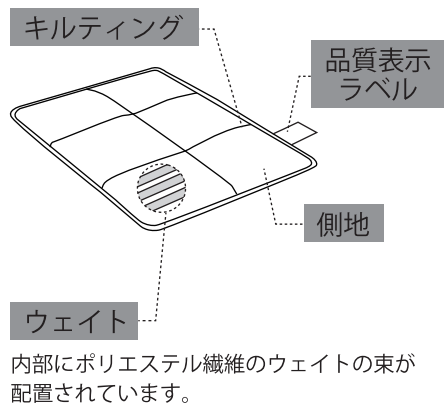

[カバー] 触り心地の異なる2種類のカバー

赤：もこふわ感あり

緑：さらっと感あり

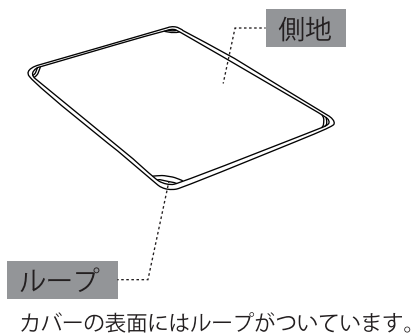

● 安全上のご注意

この取扱説明書では、製品を安全に正しく使用して頂き、利用者への危害や財産への損害を未然に防止するために下記のように警告・注意を記載しています。内容をよく理解したうえで、本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



禁止

- 寝たきりの方やじょく瘡の恐れのある場合は、ふとんのご使用をお控えください。
- 使用中に不快感を示されたり、不安感を訴える場合は使用をお控えください。
- ふとんのご使用及び近くでの喫煙はお止めください。火災の原因等になる場合があります。
- 乳児へのご使用はお控え下さい。



注意

- ご使用の場合、口元や鼻を塞がないようにご注意ください。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が危害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。



禁止

- 本製品はポリエステル繊維を使用しております。万が一ご使用中にお肌に異常を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。



注意

- ご利用者ご自身でふとんからの出入りができることを確認してください。ご利用者の筋力が低い場合は注意してください。
- ふとんが床に落ちた場合、つまづく危険がありますのでご注意ください。
- ふとんは常に清潔な状態で使用してください。
- 電気毛布及び電気加熱式寝具を併用される場合は、電気製品に付属する「取扱説明書」をご覧の上ご使用ください。寝具内が体温以上になると、脱水症状等になる場合があります。
- ふとんを持ち運ぶ場合は、両手で抱えて運んでください。

● お手入れのしかた



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が危害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。



禁止

- ご家庭での洗濯はお控えください。
お手入れの方法にしたがってください。

クリーニング

- クリーニング専門店で依頼する場合は、「品質表示」ラベルを明示ください。

部分洗いについて

- 部分的に側地が汚れたら、あらかじめ薄めた中性洗剤で手洗いによる部分洗いをしてください。
- ぬれた布ですぐに拭き取った後、十分に乾燥させてください。
- 乾燥は、風通しのよい日なたで、形を整えてから吊り干しし、十分に乾燥させてください。

干し方

- ふとん側地の傷みや汚れを防ぐため、カバーやシーツでおおってください。
- ふとんたたきなどであまり強く叩かないでください。強く叩くとふとん側地や詰物を傷めるおそれがあります。
- 全面が日に当たるように表裏をときどき反転させて干します。
- 天気のよい乾燥した日に干してください。

収納方法

- ふとんを干したあと、カバーやシーツをはずし湿気の少ない場所に、保管してください。
- ダニやカビを防ぐため、使わない間でもふとんはときどき日に干してください。


● ご使用方法



注意


- 医師または医療・介護従事者の指示に従って、本製品を安全かつ正しく使用してください。
- ご使用にあたっては、ふとんをかけて 15 分ほど待ってから、体力、機動性が損なわれないことを確認してください。

ウェイテッド Hug ふとん

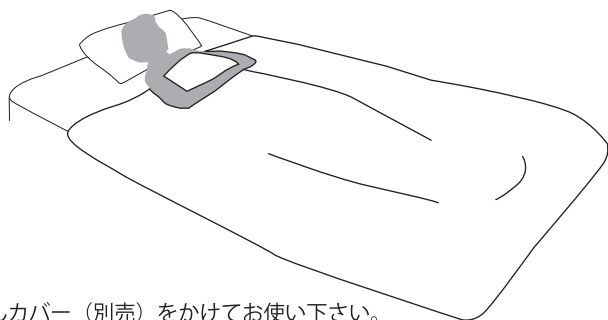


掛けふとんカバー（別売）をかけてお使い下さい。


ウェイテッド Hug ふとん ミニ

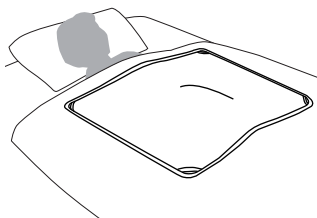

いつものおふとんに
プラスして

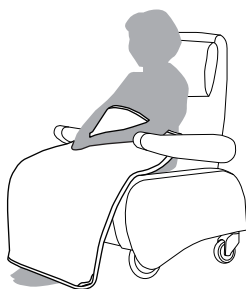

ひざ掛けとして

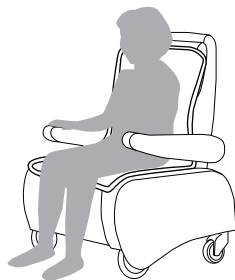

下に敷いて

●仕様

ウェイトッド Hug ふとん

サイズ	幅 150× 長さ 200 cm
重 量	6kg
素 材	側地 / ポリエステル 100% 詰物 / ポリエステル 100%

ウェイトッド Hug ふとん★ミニ

サイズ	幅 70× 長さ 100 cm
重 量	1.5kg
素 材	[本体] 側地 / ポリエステル 100% 詰物 / ポリエステル 100% [カバー] (赤) 表地 / コットン 76%、ポリエステル 24% 裏地 / ポリエステル 100% (緑) 表地・裏地 / ポリエステル 100%

※製品の寸法には多少の誤差があります。

※製品仕様は品質改善、製品追加のため予告なしに変更することがあります。

●アフターサービス

- ・**保証書**：所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- ・**保証期間中に修理を依頼される場合**：保証書の記載内容に従って修理いたします。
- ・**保証期間を過ぎて修理を依頼する場合**：修理すれば使用できる場合は、希望により有料で修理いたします。

修理を依頼されるときは、依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合には『お買い上げの販売店』または『弊社お客様相談室』までご連絡ください。

【お客様相談室】

弊社の商品は厳格な検査を経て納入いたしておりますが、万一不具合な点がございましたら、販売店または弊社お客様相談室までお問合せください。

固定電話からはフリーダイヤル



0120-08-3413

携帯・スマホからはナビダイヤル



0570-666-996

受付時間：月～金曜日 9時～12時、13時～17時

※土、日、祝祭日、年末年始、
弊社指定の休日は除く

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町 1148 番地 5

◇◇◇ 保 証 書 ◇◇◇

この製品は、厳重なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で製造上の不備により故障した場合には、本保証書記載内容によりお買い上げの販売店が受付け致します。
※ 修理はお買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、ご依頼下さい。
※ 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

型 式 ウェイテッド Hug ふとん・ウェイテッド Hug ふとん★ミニ

保証期間 お買い上げ日 年 月 日から1年間

お 客 様 ご住所 〒

ご氏名

電話番号

様

販 売 店

修理の記録

◇◇◇ 保 証 規 定 ◇◇◇

1. 保証期間内に正常なる使用状態において製造上の不備により故障した場合には、無償修理致します。
お買い上げ日及び販売店名は、納品書又は領収書等で確認させていただきますので、保証書とともに紛失しないよう保管願います。
2. 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
(イ) 使用上の誤まり、不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の転倒、落下等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷やその他の天災地変、公害、ガス害、塩害等による故障及び損傷。
(ニ) 本保証書のご提示がない場合。
(ホ) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無く、納品書又は領収書等にて必要事項の確認ができなかった場合。
(ヘ) 保証書の記載事項の字句を書き替えられた場合。
(ト) 離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿い訪問に要する実費を申し受けることがあります。
3. 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
4. 法的責任：この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問合わせ下さい。
5. 保証の対象：本体及び付属品。但し、消耗部品、縫製部品、別売部品は除く。
6. 免責：本製品の故障の放置又はその使用によって生じた、直接、間接の損害についての保証は、一切その責を負いませんので、予めご了承下さい。