


エアーストレッチパッド AR-300

お買上げまことにありがとうございます。

- この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、国外では使用できません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

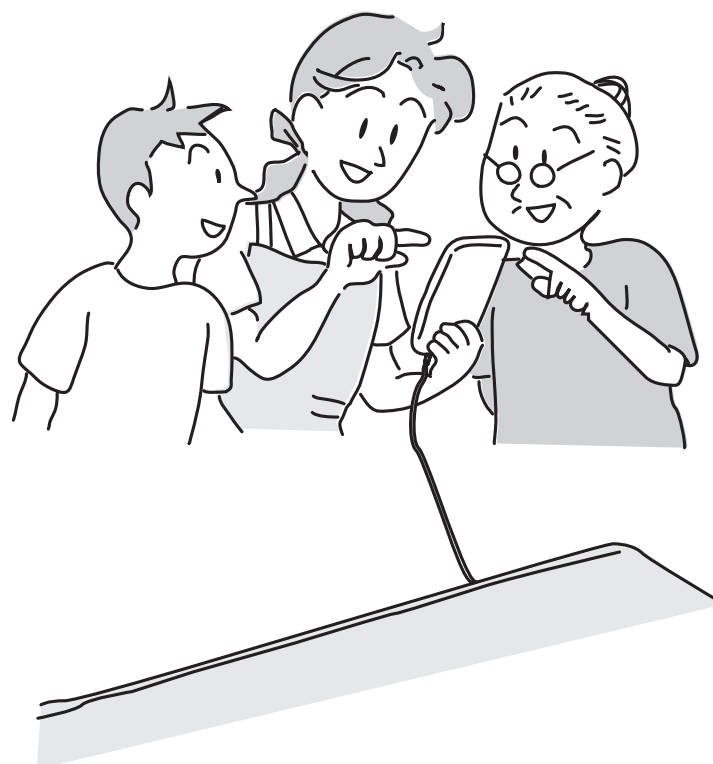

も く じ

ページ

安全上のご注意	1～5
使用上のご注意	6
各部のなまえ	7
使用前の準備	8
ストレッチの使いかた	9～10
ヒーターの使いかた	11～12
組み合わせての使いかた	13～14
このようなときは	15
お手入れ	15
故障かな?と思ったら	16
仕 様	17
アフターサービスについて	18

フランスベッド




安全上のご注意




☆ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

☆ここに示した注意事項は、商品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また、注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を、「危険」・「警告」・「注意」に区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	人が傷害を負う可能性および物的損害が想定される内容を示しています。

絵表示の例	記号の意味
	△は、危険・警告・注意を促す内容を表しています（図の中に具体的な注意内容が描かれています）。
	⊘は、行為の禁止を表しています（図の中に具体的な禁止内容が描かれています）。
	●は、行為の強制や、指示の内容を表しています（図の中に具体的な指示内容が描かれています）。

☆お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに**必ず保管**してください。


危険

次のような医用電子機器と併用しない



禁止

- ペースメーカーなどの体内埋込型医用電子機器
 - 人工心臓などの生命維持用医用電子機器
 - 心電計などの装着型の医用電子機器
- 誤動作を招く恐れがあります。

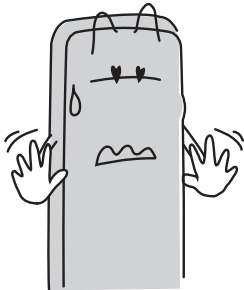


次のような方に使用させない



禁止

- 乳幼児
 - お子様だけのストレッチ・ヒーターの使用
 - 自分で温度調節のできない方
 - 自分で意思表示ができない方
- 低温やけど・脱水症状・事故をおこす恐れがあります。

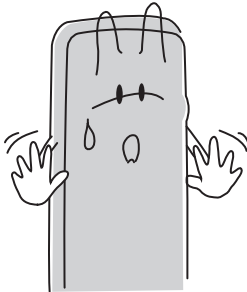

低温やけどについて

40～60℃の比較的低い温度でも、皮ふの同じところが長時間触れていると、赤い斑点や水ぶくれができることがあります。
これが低温やけどです。
万一、低温やけどをされたときには、ただちに専門医の診断を受けてください。



警告

次の方は、必ず医師と相談のうえ使用する



強制

- 医師の治療を受けている方や、特に身体に異常を感じている方
- 悪性腫瘍のある方
- 心臓に障害のある方
- 生理中や妊娠している方
- 安静を必要とする方
- 背骨に異常のある方や曲がっている方
- かつて治療を受けたところ、または疾患部へ使用する方

- 熱の高い方
- 知覚障害、または皮ふに異常のある方
- 骨粗しょう症の方
- 急性疾患のある方
- 血圧に異常のあるとき
- 伝染性疾患の方
- その他特に身体に不安や異常を感じているとき

体調不良・事故をおこす恐れがあります。

次のような方は、使用しない (ヒーター使用時)



禁止

- 皮ふの弱い方・低温やけどをされた方
 - 深酒をされた方・疲労の激しい方
 - 眠気を誘う薬（睡眠薬・かぜ薬など）を服用された方
- 低温やけど・事故をおこす恐れがあります。

身体に異常を感じたときは、ただちに使用を中止し、医師に相談する



強制

体調不良をおこす恐れがあります。



周囲の方が注意する



強制


お年寄りが使用されるときは、周囲の方が注意してください。
低温やけど・事故をおこす恐れがあります。

近くで携帯電話・PHS・コードレス電話を使用しない



禁止

電波により影響を受ける恐れがあります。

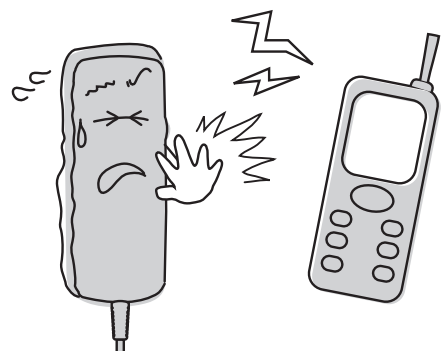

安全上のご注意


⚠ 警告

交流100V以外は使用しない



禁止

火災・感電の原因になります。

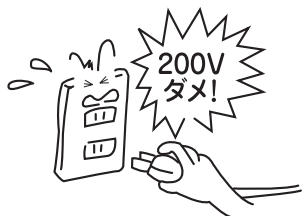

電源コードは乱暴に扱わない



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物を乗せたり、挟み込んだりしないでください。火災・感電の原因になります。



電源コードが傷んだときは使用しない



禁止

電源コードやさし込みプラグが傷んだり、コンセントのさし込みがゆるいときは、使用しないでください。


感電・ショート・発火の原因になります。

「高」で長時間使用しない (ヒーター使用時)



禁止

低温やけどの恐れがあります。

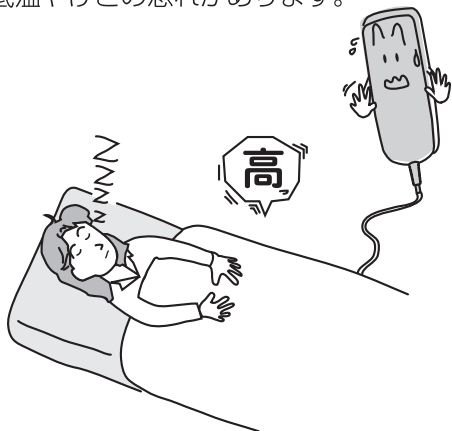

うつぶせで使用しない (ストレッチ使用時)



禁止


必ず仰向けに寝てストレッチをしてください。事故をおこす恐れがあります。

シーツ(市販品)は必ず取り付ける



強制

低温やけど・故障の原因になる恐れがあります。

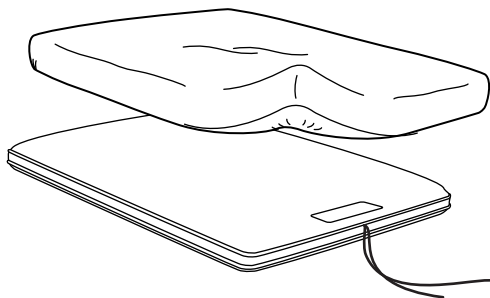


改造・分解・修理はしない



分解禁止

改造はしないでください。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしないでください。火災・感電・けがの原因になります。修理は、お買上げの販売店に相談してください。

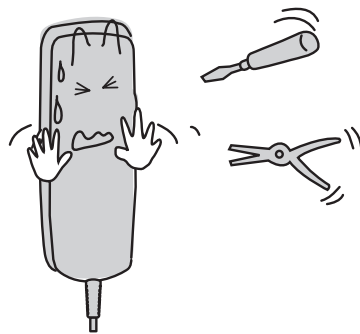


⚠ 注意

さし込みプラグを持って抜く



強制

さし込みプラグをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。コードを引っ張ると、コードが傷み、火災・感電の原因になることがあります。

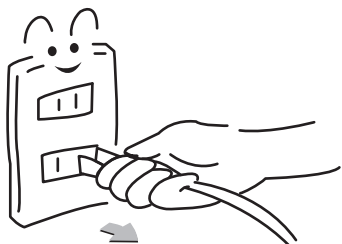


使用しないときはさし込みプラグを抜く



プラグを抜く

感電・漏電火災の原因になることがあります。

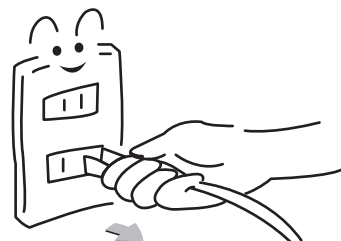


さし込みプラグはきれいにする



強制

コンセント部にほこりがついたときは、さし込みプラグを抜き、拭いてください。ほこりがついたままにしておくと、火災の原因になることがあります。

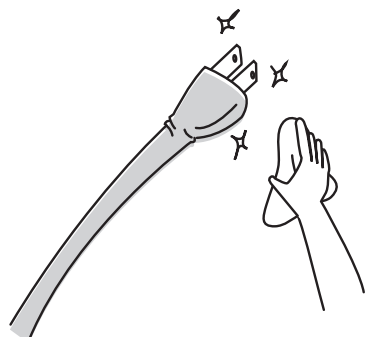

ぬれた手でさし込みプラグを抜きさししない



禁止

また、お手入れのときは必ずさし込みプラグをコンセントから抜いてください。感電の原因になることがあります。




湿気の多い場所で使用しない



禁止

浴室など湿気の多い場所で使用したり、保管しないでください。感電・火災・故障・カビの原因になることがあります。

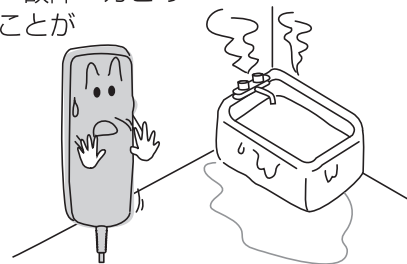


火気の近くで使用しない



禁止

ストーブなどの火気の近くで使用したり、タバコを吸いながら使用しないでください。火災・故障の原因になることがあります。

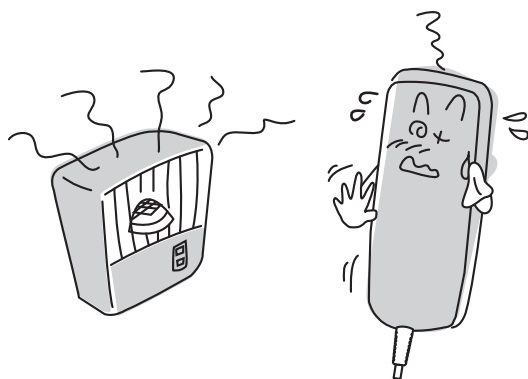


水につけたり、かけたりしない



水ぬれ禁止

ショート・感電の恐れがあります。パッドに水などをこぼしたときは、すぐに使用を中止して販売店に相談してください。

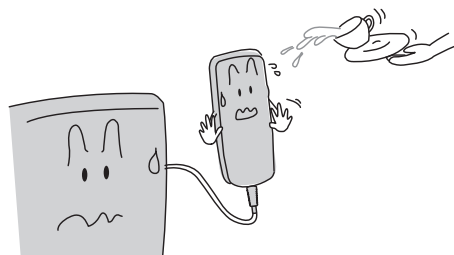

安全上のご注意


⚠ 注 意

パッドにピンや針を刺したり、異物を入れたり縫いつけたりしない



禁止

火災・感電・故障の恐れがあります。

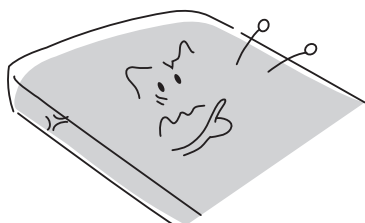


長時間続けて使用しない



禁止

ストレッチは、使いはじめは15分以内にしてください。

また、ストレッチは1日30分以内、ポイントで同じ位置の使用は5分以内にしてください。筋肉・神経を痛めることがあります。

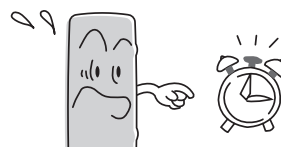

2人以上での同時使用、腰をかけた状態での使用、立った状態での使用などはしない。



禁止

けがや故障、破損の原因になります。

長時間使用しないで再び使用する場合は器具が正常に動くことを確認する



強制

ご不審な点がありましたら、お買い上げの販売店に相談してください。

また、定期的に各部動作に異常がないか点検の上ご利用下さい。




ペットの暖房用に使用しない



禁止

ペットがコントロール部やコードを傷め、火災・故障の原因になることがあります。

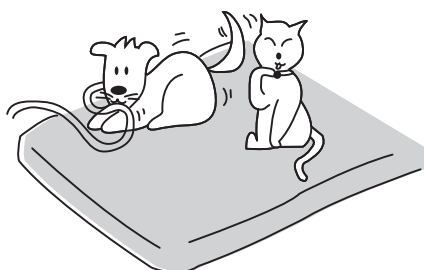


動かなくなったり異常がある場合は、すぐにさし込みプラグを抜く



プラグを抜く

事故防止のため、すぐにさし込みプラグを抜いて、お買い上げの販売店に必ず相談してください。感電・漏電・ショートなどによる火災の恐れがあります。

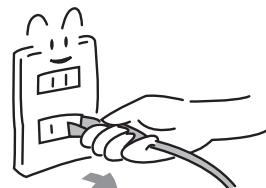

パッドに飛び乗ったり立ったりしない



禁止

転倒してけがをすることがあります。



停電になった場合は、使用しない



禁止

エアバッグがふくらんだ状態で止まる恐れがあります。

使用上のご注意

落としたり、強い衝撃を与えない

故障の原因になります。



禁止




他の暖房器具と併用しない

変形・変色・故障の原因になります。




禁止

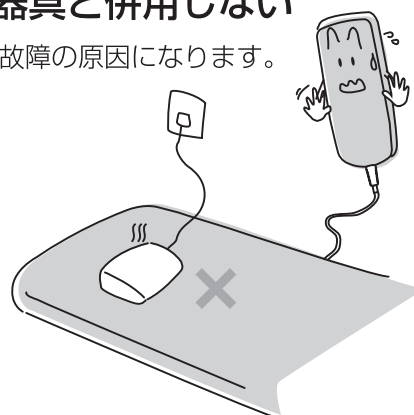

直射日光の当たる場所、高温多湿な場所を避け、湿気がこもらないように壁から5cm以上離して設置して下さい。



強制

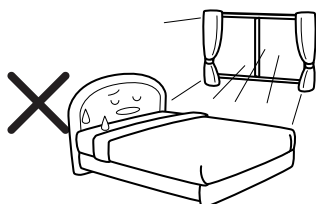


時々寝装品を取り除き、風通しをよくして湿気が溜まらないようにして下さい。

新しいうちは素材の臭いのする場合がありますので気になるかたはお部屋の換気を十分にしてお取り除いて下さい。



強制

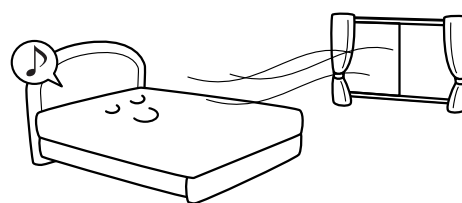


ラベル類を剥がさないで下さい。

ラベル類が無い場合、商品の特定ができなくなるため、保証の対象にならないことがあります。また、無理に剥がしますと生地の変色や破損の原因になります。



禁止

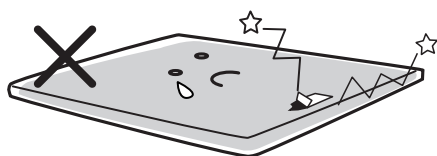


電源コード、手元スイッチのコードをヘッドボード、フットボード及び、脚等で踏まないで下さい。

コードが破損し感電・火災の原因になります。




禁止

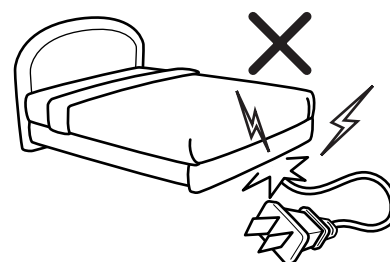

各部のなまえ


パッド

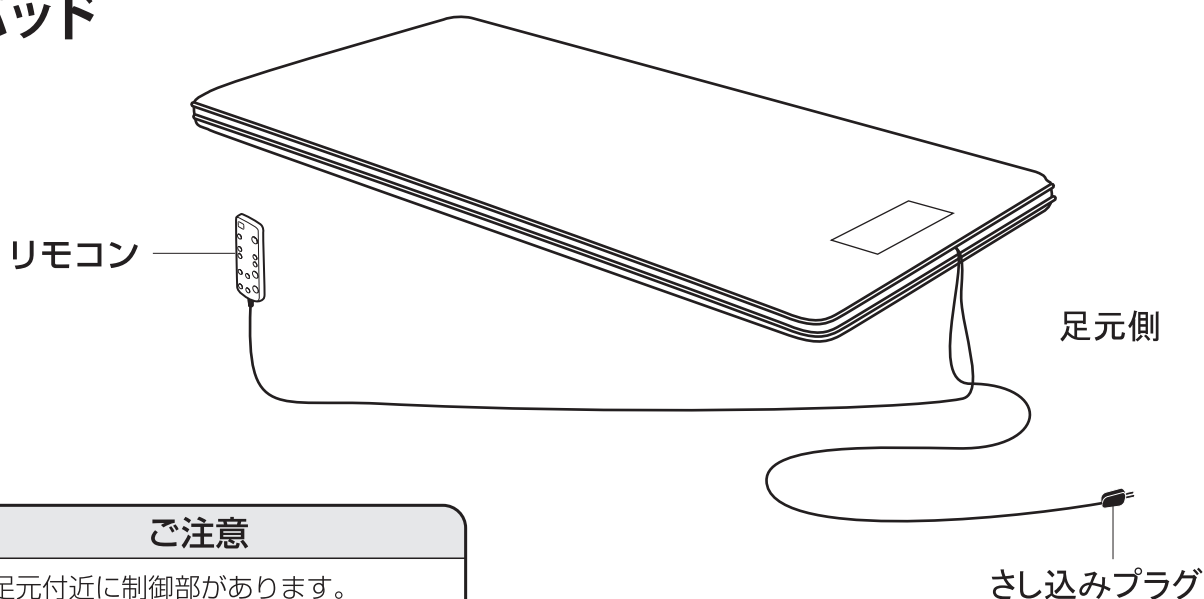

ご注意

- 足元付近に制御部があります。
- この部分は他の部分と比べかたいので、ご使用の際、気をつけてください。

リモコン

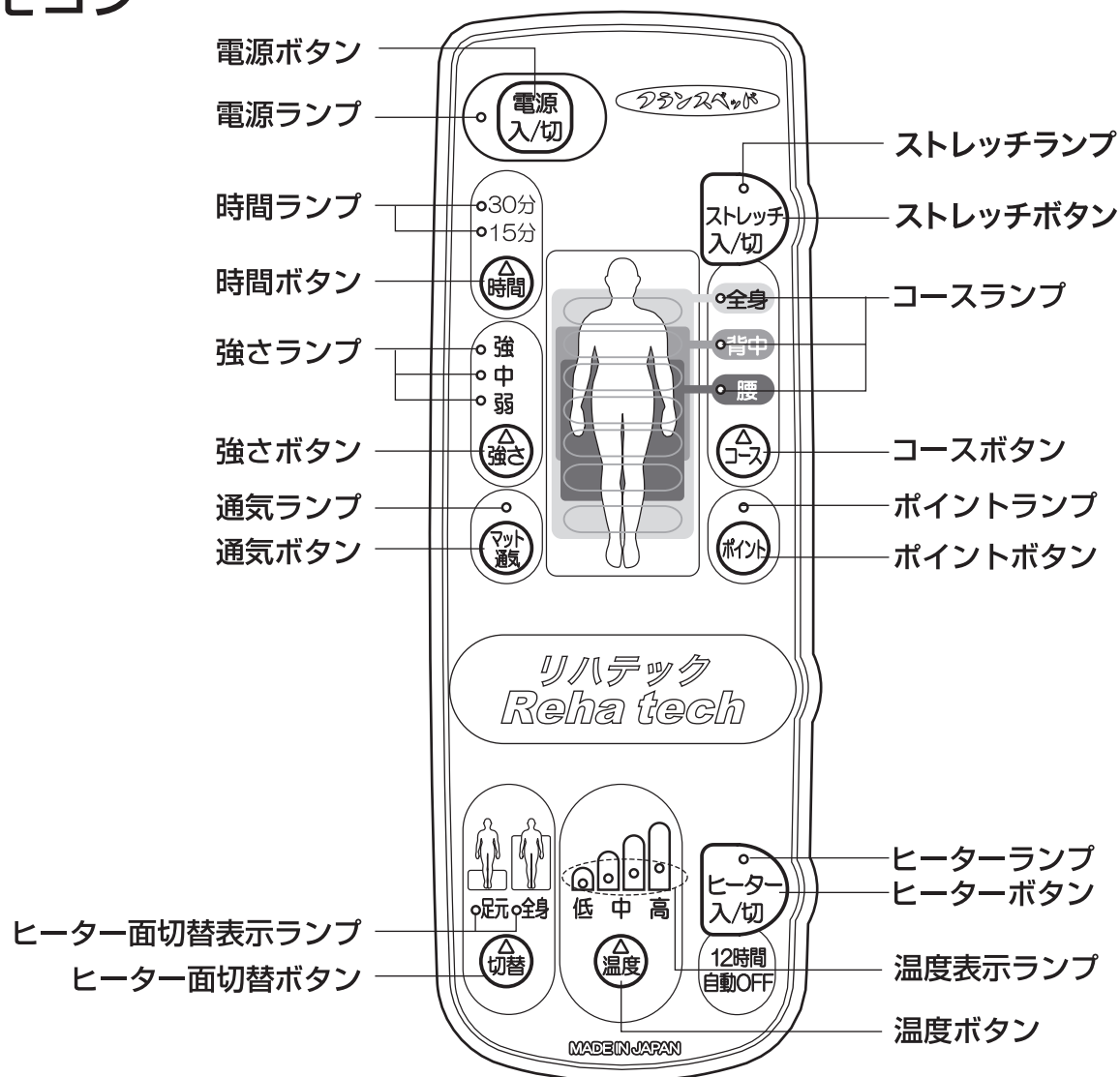


使用前の準備




1 パッドを広げる

◎敷布団、床、畳の上にもご使用になれます。

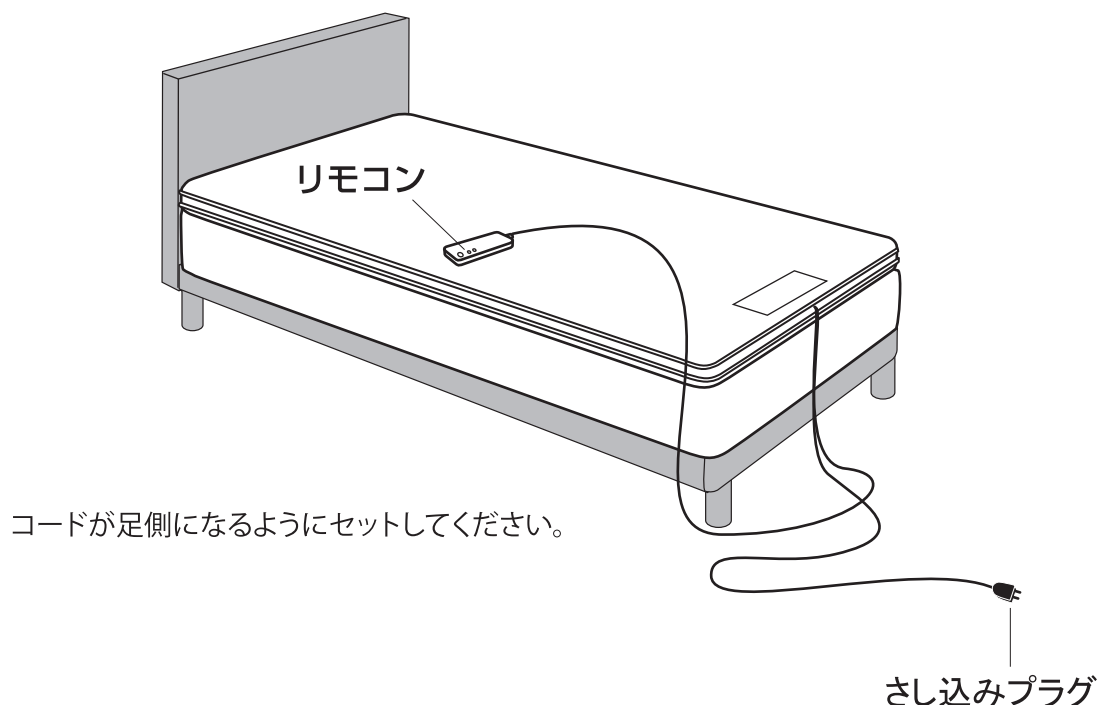

2 さし込みプラグをコンセントにさし込む

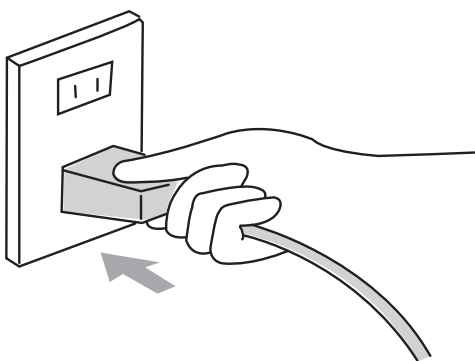

リモコンについて

◎操作はリモコンでおこないます。


お願い

- 操作ボタンなど、確実に動くかどうか確認してください。
- リモコンのランプが全て点滅表示している場合は、「故障かな?と思ったら」(☞ 16ページ)をご覧ください。

ストレッチの使いかた

1 電源入/切を押す

- 電源ランプが点灯します。
このとき、ストレッチのコース、時間、強さの各々のランプは設定内容を少し明るさをおさえた点灯で示します。
- 他のキーを押さずに10分経過しますと電源ランプは消灯します。（電源が切れます。）

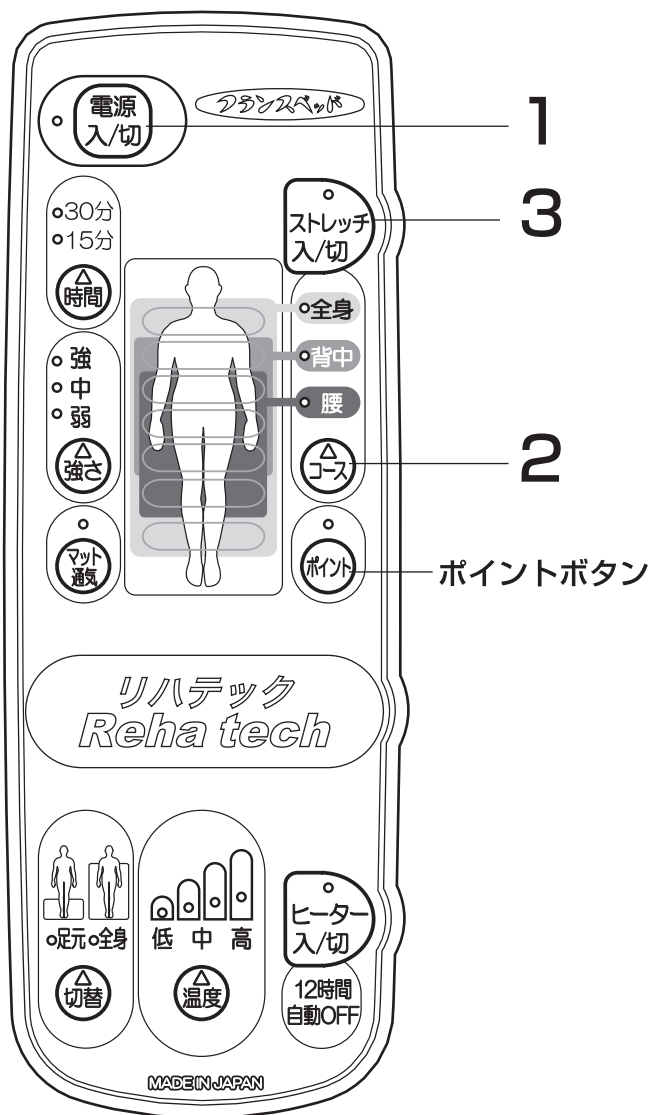

2 お好みの設定をする

① コースを押す

② 時間・強さを選ぶ

時間を押す

強さを押す

3 ストレッチ入/切を押す

- 準備運転のため、エアーバッグがふくらみはじめるまでに、約30秒くらいかかることがあります。
- 運転中でも、設定を変更することができます。

使用中の緊急停止

電源入/切を押す





- 電源ランプが消灯したことを確認してください。

ポイントストレッチ

- 首や背中・腰・脚など7つのポイントの中から1ヵ所だけをストレッチします。
- 1回押すごとに、エアーバッグのふくらむ位置が変わりますので、お好みの位置に設定できます。


エアーバッグがお好みの位置でふくらんだとき

ポイントを押す

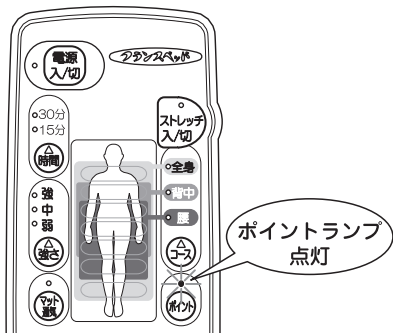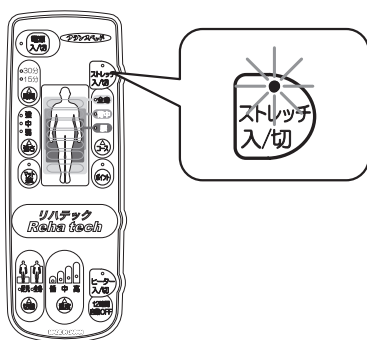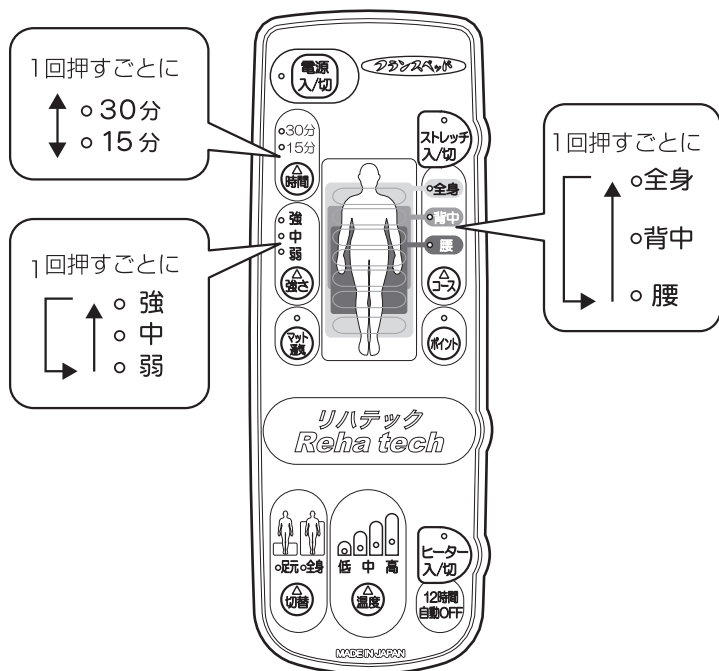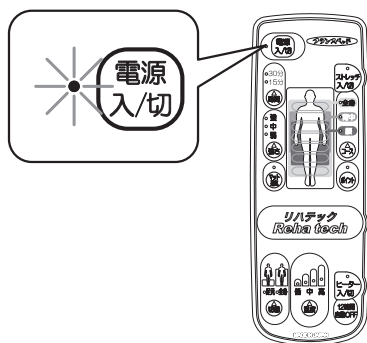

使用するとき

- パッド中央部に仰向けに寝て、エアバッグが身体の中央部に当たるように身体を動かして調節してください

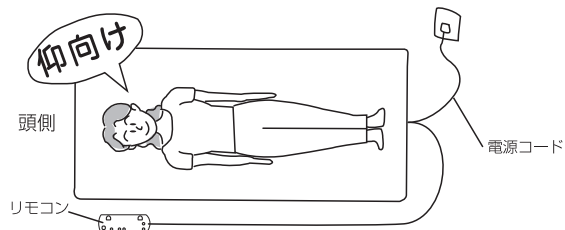

⚠ 危険

- 次のような方に使用させない。
 - 乳幼児
 - お子様だけの使用
 - 自分で意思表示ができない方

⚠ 注意

- ストレッチは、使いはじめは15分以内にする
- ストレッチは、1日30分以内、ポイントで同じ位置の使用は5分以内にする

途中で中止したいときは



再び使用するとき



- リモコンに表示している設定内容で運転します。

終わったら

- ストレッチランプが消灯します。
- ①リモコンの電源入/切を押して「切」にする
- ②さし込みプラグを抜く

ヒーターの使いかた

- 冬場などにパッドが冷たく感じるとき、パッドを暖めて使用する事ができます。



1 電源入/切を押す

- 他のキーを押さずに10分経過しますと電源ランプは消灯します。（電源が切れます。）

2 ヒーター入/切を押す

- 運転中でも、設定（温度、足元・全身の切替）を変更することができます。


3 温度を選ぶ

温度を押す

- 約12時間後、切り忘れ防止のため自動的に運転を終了します。（時間設定はできません。）

メモ

冬場など寒い時期は毛布等をかけてご使用ください。

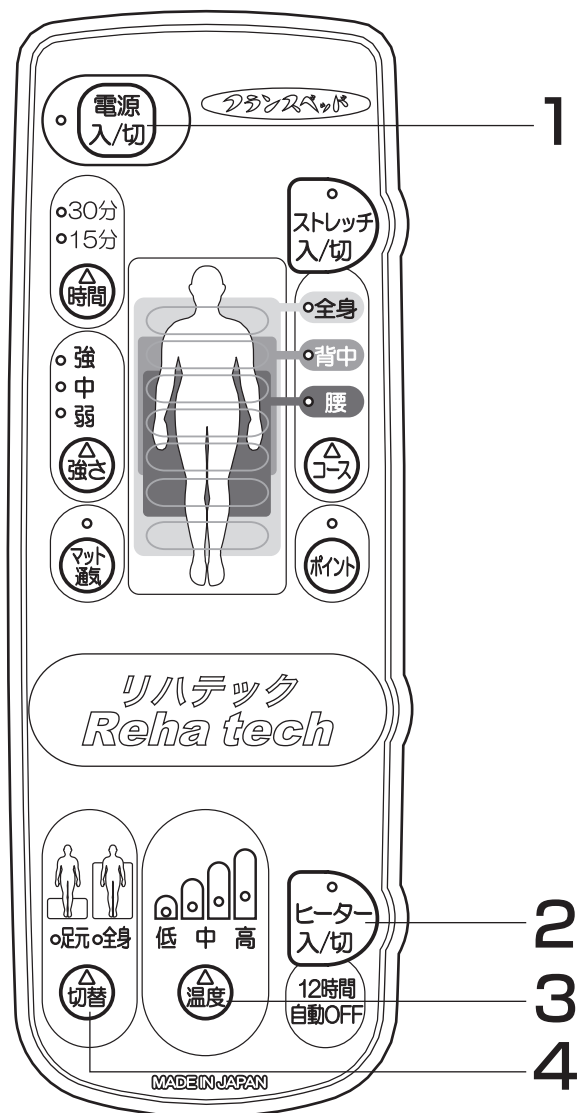

使用中の緊急停止


電源入/切を押す

- 電源ランプが消灯したことを確認してください。

4 足元・全身の切替

切替を押す

- 足元……足元部分のヒーターが作動します。
- 全身……ヒーター全面作動します。


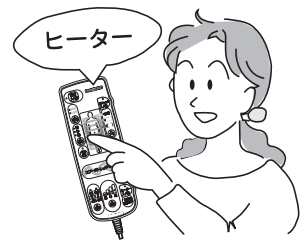


使用するとき

暖くなるまで多少時間がかかります。（寝る前には予熱のためにヒーターを入れてください。）

ただし暖房器のように暖くなりません。

ヒーターの連続運転時間は最長で12時間です。

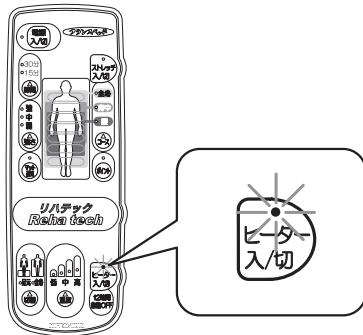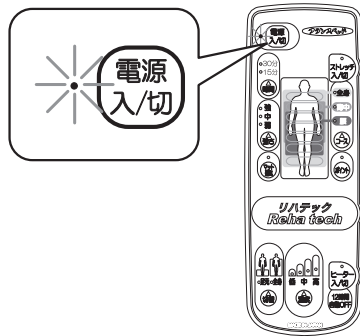

⚠ 危険

- 次のような方に使用させない。
 - 乳幼児
 - お子様だけの使用
 - 自分で温度調節のできない方
 - 自分で意思表示ができない方


途中で中止したいときは

 を押す



再び使用するとき

 を押す

- リモコンに表示している設定内容で運転します。

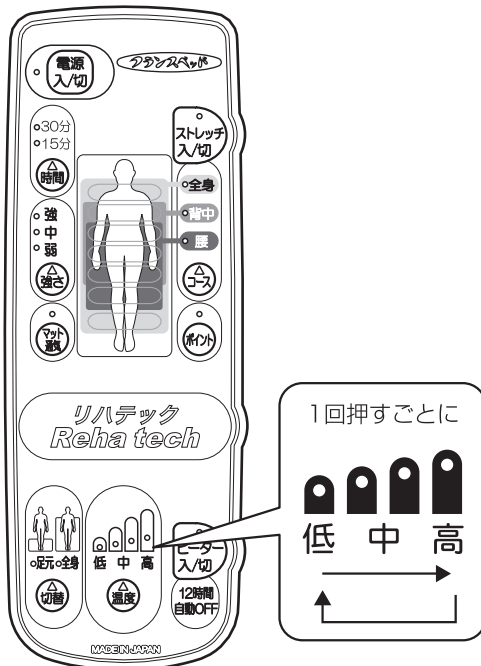


1回押すごとに

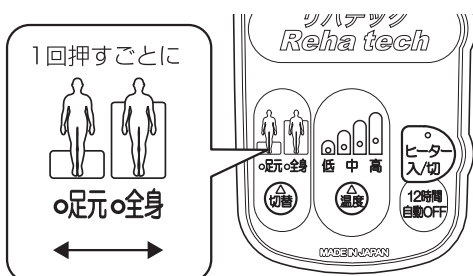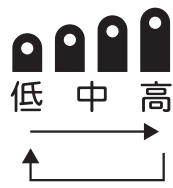


終わったら

- ヒーターを終了するまで使用したときは、終了と同時に「切」になります。

①途中で中止したときは、リモコンの  を押して「切」にする

②さし込みプラグを抜く

組み合わせでの使いかた・パッド

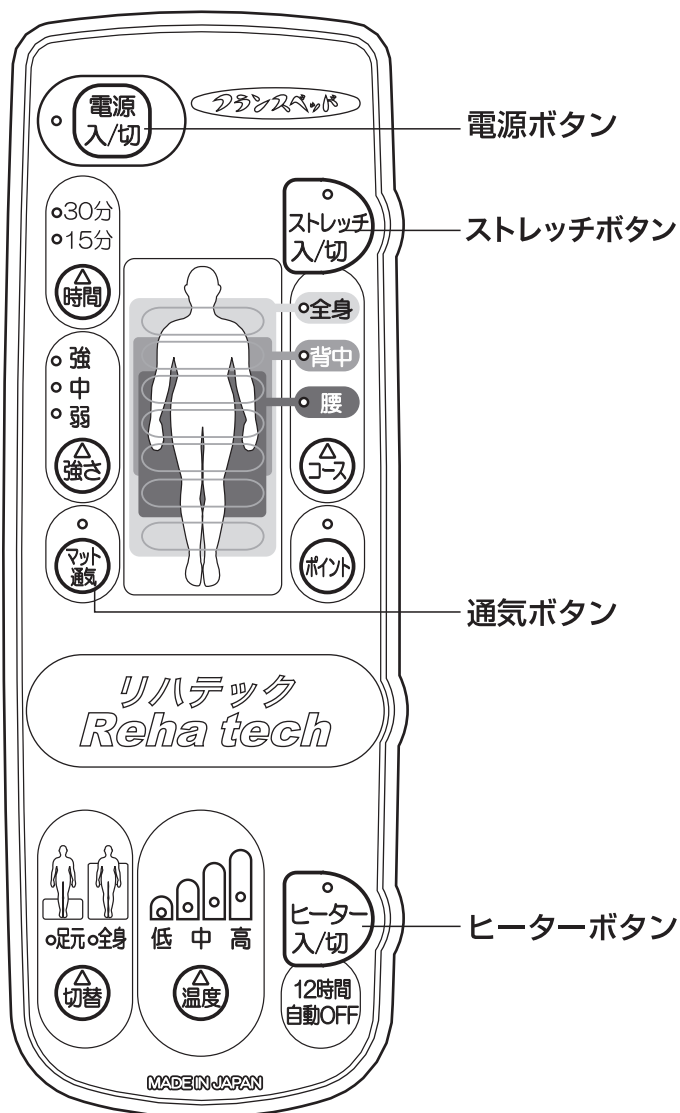

使用中の緊急停止

電源入/切 を押す

- 電源ランプが消灯したことを確認してください。

パッドを暖めながら

電源入/切 を押してから

1 **ヒーター入/切** を押す

- 暖くなるまで多少時間がかかります。

2 **ストレッチ入/切** を押す

- 準備運転のため、エアーバッグがふくらみはじめるまでに、約30秒くらいかかることがあります。

通気の

電源入/切 を押してから

1 **マット通気** を押す



- パッド内に空気を送り通気します。
- 通気は2時間で自動的に止まります。
- 通気中はストレッチは使用できません。

ド通気の使いかた

組み合わせ



ストレッチをする

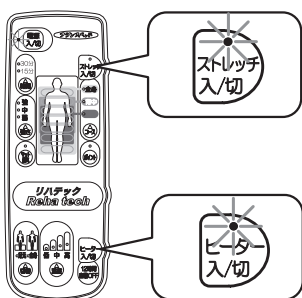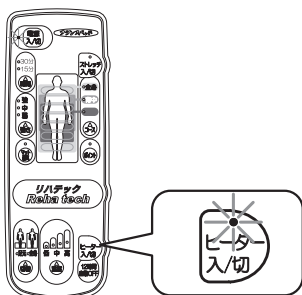

設定を変更したいときは

- ストレッチの設定変更 9～10 ページ
- ヒーターの設定変更 11～12 ページ

途中で中止したいときは

中止したい運転のボタンを押す

再び使用するときには

使用したい運転のボタンを押す


ヒーターは組み合わせてから 約 8 時間後に終了します

- 組み合わせて使用するとき、ヒーターは組み合わせるボタン(ストレッチ)を押したときから約 8 時間後に終了します。
また、最大約 12 時間しか連続して運転できませんので、何時間も予熱をして組み合わせて使用するときには注意してください。運転の途中でヒーターが終了することがあります。

途中でストレッチを 中止したときは

- 途中で中止しても、ヒーターはそのまま運転を続け、約 8 時間で終了します。ヒーターも中止したいときは、**ヒーター 入/切** を押してください。

使いかた

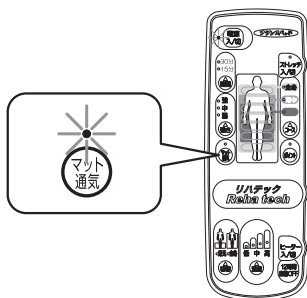

終わったら

- リモコンの運転していたランプが消灯します。

- ① リモコンの **電源 入/切** を押して「切」にする
- ② さし込みプラグを抜く

このようなときは

長期間使用しないとき

⚠ 注意

- さし込みプラグをコンセントから抜く。

再使用するとき

⚠ 注意

- 器具が正常に動くことを確認する。

停電したとき

- リモコンの全てのランプが消灯し、運転を停止します。
- さし込みプラグをコンセントから抜く

停電が復帰したとき

使用するとき

さし込みプラグをコンセントにさし込む

- 「使用方法」(P. 9~14ページ)の手順でお好みの運転の設定をしてください。

お手入れ

⚠ 注意

- 必ず電源を「切」にしてさし込みプラグをコンセントから抜いて、お手入れをする。
- 水につけたり、かけたりしない。

リモコン

- ベンジン・シンナー・台所用中性洗剤などは表面を痛めますので使用しないでください。
- 水を含ませたやわらかい布を固く絞って拭いてください。



パッド

- パッドは洗濯できません。
- 汚れた場合はほこりを払い落とし、水で薄めた中性洗剤を染みこませ固く絞った布で、叩くようにして落とし下さい。
- 著しい汚れには、布用クリーナーをご使用下さい。
- シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだものおよび漂白剤などを使用しないで下さい。色落ちしたり布地を傷める場合があります。
- 専用クリーナーをご使用の際は、一度目立たないところでお試しになってからご使用ください。

愛情点検



長年ご使用のエアーストレッチパッドの点検を

こんなことはありませんか？	処 置
<ul style="list-style-type: none">• コードを動かすと電源ランプがついたり消えたりする。• さし込みプラグやコードが変色・変形・損傷している。• リモコンが破損している。• さし込みプラグ、コンセント、コードの一部がいつもより熱い。• リモコンがいつもより熱い。• 「低」にしてもパッドが異常に熱い。• パッド表面が熱により部分的に変色している。	使用しないで、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室に修理を依頼してください。
<ul style="list-style-type: none">• さし込みプラグにほこりやごみがたまっている。	ほこりやごみを取り除いてください。

また、このような症状がなくても、お買い上げ後5~6年たちましたら、安全のため点検をおすすめします。

故障かな？と思ったら



- 万一、故障かなと思われることがありましたら、修理を依頼される前に次のことを調べてください。

症 状	確認してください	処 置	参照ページ
電源ランプが点灯しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● さし込みプラグが抜けていませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> ● さし込みプラグをコンセントに根元までさし込んでください。 	8
リモコンが作動しない。	<ul style="list-style-type: none"> ● リモコンのランプが全て点滅表示していますか。 ● 全てのランプが消灯していますか。 ● ストレッチボタンを押しても動作しませんか。 	<ul style="list-style-type: none"> ● さし込みプラグを一度抜き、もう一度コンセントにさし込んでください。 	5 8 9 10
エアバッグがふくらまない、またはふくらみが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> ● ストレッチ部分の全てのランプが点滅していますか。 ● ストレッチの強さランプを確認してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源ボタンを押してください。 ● ストレッチ動作中にはパッドへ飛び乗らないでください。 ● 強さボタンにより強さを強くしてください。 	5 9 10
ヒーターボタンを押しても、パッドが暖かにならない。	<ul style="list-style-type: none"> ● ヒーター部分の全てのランプが点滅していますか。 ● ヒーターの温度表示ランプを確認してください。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源ボタンを押してください。 ● 温度ボタンにより温度を高くしてください。 	11～12
時間ボタンや強さボタンを押しても表示が切り替わらない。	<ul style="list-style-type: none"> ● 今、ストレッチを行っているところの時間ボタンや強さボタンを押しましたか。 	<ul style="list-style-type: none"> ● ストレッチのときは、ストレッチの時間ボタンや強さボタンを押してください。 	9～10

次のような場合は故障ではありません

症 状	説 明
ストレッチ使用後、エアーの抜けが悪い。	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用後は時間の経過とともにエアーは抜けて行きますので故障ではありません。
使用していなくても、パッドが少し盛り上がっている。	<ul style="list-style-type: none"> ● パッドにはエアバッグが取り付けられており、平常の状態でもいくらかの凹凸があります。
ストレッチ使用時、パッド内部でブーという音がする。	<ul style="list-style-type: none"> ● パッド内部のエアバッグを作動させるため、制御部からエアー供給をしている音です。故障ではありません。

仕 様

品 番		エアーストレッチパッド AR-300			
電 源 定 格	ストレッチ	交流100V 50－60Hz			
	ヒーター	交流100V 50－60Hz			
定 格 時 間	ストレッチ	30分			
	ヒーター	12時間			
定 格 消 費 電 力	95W	ストレッチ消費電力		20W	
		ヒーター消費電力		75W	
パッド表面温度 (ヒーター使用時)		低 中 高 ○ ○ ○ ○ 約27℃ 約31℃ 約37℃ 約45℃			
タ イ マ ー	ストレッチ	30分・15分			
	ヒーター	12時間（最大）			
強 さ	ストレッチ	強・中・弱			
ス ト レ ッ チ	コース	全身・背中・腰	ポイント	7ヵ所	
通 気	連続2時間（2時間で自動停止）				
質 量	約13kg				
外 形 寸 法	パッド	幅1000mm X 長さ2000mm X 厚さ100mm			
	リモコン	幅76mm X 長さ212mm X 厚さ20mm			
パッド素材		生地:ポリエステル 詰物:ウレタンフォーム, BREATHAIR(ポリエーテルエステル系繊維) エアバッグ:ポリウレタン			
発熱体		検知線組み込みコードヒーター			
コ ー ド 長		電源コード 約2.9m	リモコンコード	約2.3m	

- 温度はJIS C9210に基づく測定値です。(室温20℃)
- 実際に使用されるとききの表面温度は、室温・ふとんの厚さや使用状態などにより多少異なります。
- 本品は家庭用です。業務用として使用できません。

アフターサービスについて

保証書について

- ◎ 保証書はお買い上げ販売店で「お届け日、お買い上げ店名」を記入していただいでください。
- ◎ 保証書に記入ができない場合は、お届け日、お買い上げ販売店名のわかる書類（納品書や領収書など）と併せて大切に保管してください。

補修用性能部品の保有期間

- ◎ 弊社は本商品の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年間保有しております。
補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、縫製部品は除きます。

修理を依頼されるときは

- ◎ 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検のうえ、なお異常がある場合には『お買い上げの販売店』、または弊社『お客様相談室』までご連絡ください。

保証期間中は

- ◎ 保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎてるときは

- ◎ 修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

- ◎ できるだけ詳しくお願いいたします。
 - ①ご住所、ご氏名、電話番号
 - ②型式名、お買い上げ販売店名、お届け日
 - ③故障または異常の内容

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お客様相談室

修理、お取り扱い、お手入れなどのご相談は、まず、『お買い上げの販売店』へお申し付けください。

- ◎ 弊社は厳格な検査を経て納品いたしておりますが、万一不具合点がございましたら、『お買い上げの販売店』、または弊社『お客様相談室』にお問合わせください。

フリーダイヤル  0120-39-2824

受付時間：月～金曜日、9～12時、13～17時
（土、日、祝祭日、年末、年始、弊社指定の休日等は除く）

保証書

型 式 エアーストレッチパッド AR-300
保証期間 お買い上げ日 年 月 日から1年間
お 客 様 ご住所 〒

ご氏名 様
電話番号

販
売
店

この製品は、厳重なる品質管理及び検査を経てお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合には、本保証書記載内容によりお買い上げの販売店が受付け致します。
※ 修理は、お買い上げの販売店に必ず本保証書を提示の上、ご依頼下さい。
※ 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管して下さい。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5
TEL 042(543)3111(代表)

◇◇◇ 保証規定 ◇◇◇

- 保証期間内に正常なる使用状態において万一故障した場合には、無償修理致します。
お買い上げ日及び販売店名は、納品書又は領収書等で確認させて頂きますので、保証書とともに紛失しないよう保管願います。
- 次のような場合には、保証期間内でも有償修理になります。
(イ) 使用上の誤まり、不当な修理や改造による故障及び損傷。
(ロ) お買い上げ後の転落、落下等による故障及び損傷。
(ハ) 火災、地震、風水害、落雷やその他の天災地変、公害、ガス害、塩害等による故障及び損傷。
(ニ) 指定電源(日本国内仕様)AC100V 50/60Hz以外での使用や異常電圧による故障及び損傷。
(ホ) 一般家庭用以外(例:業務用の長時間使用)に使用された場合の故障及び損傷。
(ヘ) 本保証書のご提示がない場合。
(ト) 本保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入が無く、納品書又は領収書等にて必要事項の確認ができなかった場合。
(チ) 保証書の記載事項の字句を書き替えられた場合。
(リ) 消耗部品の取替え及び点検等の費用。
(ヌ) 離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿い訪問に要する実費を申し受けることがあります。
- 本保証書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 法的責任
この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店にお問合わせ下さい。
- 保証の対象
本体及び付属品。但し、消耗部品、縫製部品、別売部品は除く。
- 免責
本製品の故障の放置又はその使用によって生じた、直接、間接の損害についての保証は、一切その責を負いませんので、予めご了承下さい。

修理の記録

＝お客様メモ＝ お買い上げの際に記入しておいてください。お問い合わせなどのときに便利です。

お 買 上 げ 販 売 店 名	お買い上げ年月日		年 月 日
	品 番		エアーストレッチパッド AR-300
電話			

メモ