

❖❖ エルゴグリフクラッチ ❖❖


クローズドカフ (Cat.14-11~13) 使用説明書

* ブラック * ブリリアントレッド * ブリリアントブルー *

色、デザインが美しい、スマートなクローズドカフのクラッチ。一見、グリップから上は長さ調節が出来ないように見えますが、内側の隠しボタンで3段階、調節ができる、すっきりしたタイプです。もちろんカフ自体は上下に動かすことができます。グリップの持ち手がソフトで持ちやすい形です。




グリップから上は、3段階調節プッシュボタンで
21.8cm・23cm・24.2cm の長さに変更できます。

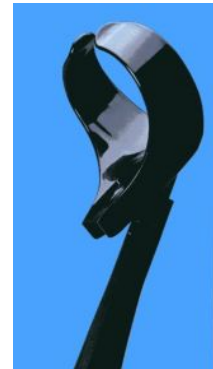

クラッチの長さの調整(1)・・・グリップから下部分 9段階

スナップロックをつかみ、引っ張るとパチンとはねるようにはずすことができます。9箇所穴があいていますので、使用者に合わせて、ちょうど良い長さを決め、穴に合わせてスナップロックを押し込むとパチンとはまります。

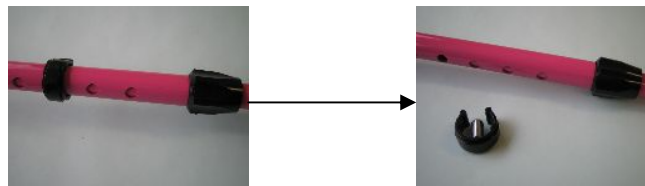

アップはこのとおり



クラッチの長さの調整(2)・・・グリップから上部分 3段階

プッシュボタンを押しながらカフを上にはくとパチンとはまります。

長さ調節のプッシュボタン



先ゴムは片減りした状態のまま使うと危険です。

替えゴムを別売り (¥400) していますので、早いうちにこまめに交換してください。

サイズ	適応身長	地面からグリップまで	グリップからアームカフまで	重量
レギュラー	:140cm~170cm 程度	59~79cm(9段階)	21.8・23・24.2cm(3段階)	620g
トール	:160cm~190cm 程度	74~94cm(9段階)	21.8・23・24.2cm(3段階)	680g

ドイツ製。介護保険レンタル品目対象品・非課税

グリップから上 3段階、下 9段階で長さ調節。耐荷重 120kg。

輸入販売元 :



プロト・ワン 有限会社

東京都文京区本郷 5-3-3 本郷ビル 2F

TEL : 03-3816-3399 Fax: 03-3816-3933

<http://www.proto-one.co.jp/>

20091008