

KT-95・KT-95HD (D/N) 組立・取扱説明書

1. 梱包内容

組立・取扱説明書の梱包内容と現品との照合をしてください。

【部品】①テーブル………1 【工具】④十字ねじ回し………1
②テーブル受け………1 ⑤六角棒スパナ………1
③支柱………2 【付属品】⑥十字穴付きナベ小ねじ
(SW・FW付) ……10

2. 組立方法

- ①テーブルを裏返して、その上に②テーブル受けを逆さに置き、④十字ねじ回しを用いて、⑥十字穴付きナベ小ねじ(SW・FW付)で固定してください。
- ③支柱を逆さにして、支柱パイプをテーブルパイプに差し込み、③支柱を持ったままハンドルをゆるめてください。
- 支柱パイプがテーブルパイプの奥に当たるまで入れ、⑤六角棒スパナを用いて、六角穴付きボルトを固定してください。
- ハンドルをしめ込んでください。

3. 操作方法

1. 上下動操作

テーブル位置を高くする場合は、両側のハンドルをゆるめ、テーブルを持ち上げてください。

テーブル位置を低くする場合は、両側のハンドルをゆるめ、テーブルを押し下げてください。

2. 高さ調節

両側のハンドルをゆるめ、テーブルを上下に動かし、両側のハンドルをしめ込みますと、任意の位置でテーブルの高さが固定できます。

4. 取扱上のご注意

- テーブルに腰かけたり、寄り掛かったりしない。
テーブルが破損、故障したり、転倒してケガをするおそれがあります。
- テーブル上に、加熱したなべや湯沸し等を直接置かないでください。
ヤケドやテーブルが変形するおそれがあります。
- 耐荷重(30kg)より重い物は置いて使用しないでください。
破損、故障によりケガをするおそれがあります。
- 組立完了の際は、各部のねじ・ボルトのゆるみがないかを確認してから、ご使用ください。

