


○ 取り付けについて

- ①クリップの両端を持って折ります。 ※上下関係なく折ることができます。
- ②クリップの口が開くので、帽子のふちを挟み、クリップを平らな状態に戻して使用します。

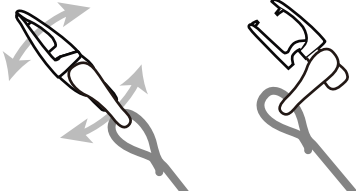

洗濯方法



- ①帽子本体からは必ず取り外し、別々に洗濯して下さい。
- ②中性洗剤で、紐部分を手洗して下さい。



《お洗濯の際の禁止事項》

商品の破損、傷み、色移りなどが発生する場合がありますので、以下の行為はお控え下さい。

- 乾燥機の使用 ○つよく擦る・もみ洗い ○漂白剤・有機溶剤の使用
- ドライクリーニング ○濡れたまま放置する ○他の衣類と一緒に洗う



《注意・禁止事項》必ずお読み頂いた上で、お使いください。

- 頭部以外の部位に使用しないで下さい。
- 本製品の加工・改造・修理は行わないで下さい。
- あご紐をきつく締めすぎたり、直接結ぶことは、大変危険ですでおやめ下さい。
- 磨耗、損傷のある場合は使用しないで下さい。
- 本製品をご使用中に痒み、かぶれ、痛み、湿疹等の異常が生じた場合、直ちに使用を中止し、医師に相談して指示に従ってください。
- 異常の発生や症状の悪化を防ぐため、次の場合はご使用前に医師に相談して下さい
頭部の手術後や頭部に傷、痛み、痺れ、腫れ、湿疹、かぶれ等の症状がある方 / アレルギー体質の方や皮膚が敏感な方
- 本製品は汗や摩擦などにより、色落ちが起きたり、他の生地に色移りする場合があります。