

★ 安全のため、ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読みください。


★ お読みになった後は、いつでも必要な時に取り出せるように、所定の場所に保管してください。

サイドステッパーFB

取扱説明書

サイドステッパーFBは、歩行の際に体を支える補助として使用する杖です。

各部の名称

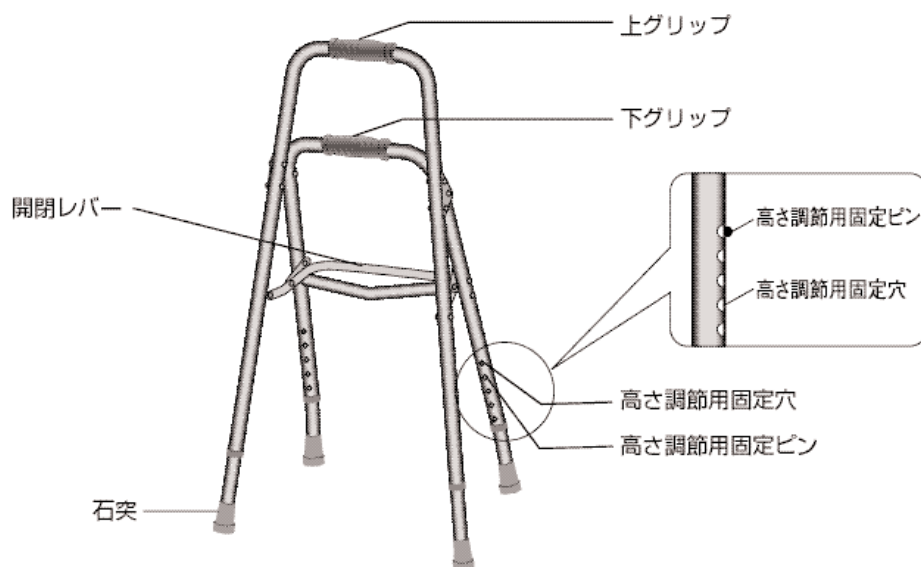

★安全のために、必ずお守りください

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者への危害や財産への損害を未然に防止するため、下記のように警告・注意を記載しています。



警告 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意 この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。



- 転倒して怪我をするのを防ぐために、以下のことに注意してください。
 - ・ 高さ調節用固定ピンが、高さ調節用固定穴からきちんと突き出ていることを確認してから、ご使用ください。
 - ・ 4個の石突きが全部地面につくようにしてご使用ください。
 - ・ 安定する場所に石突きをのせて、体を支えてください。
 - ・ 小石や段差の縁等に石突きをのせないでください。
 - ・ やわらかい地面や、滑りやすい所では、使用しないでください。
 - ・ グリップをしっかりと持って歩行してください。
 - ・ 石突きのゴムは、すり減ったままにせず、こまめに取り替えてください。




- 火気、熱源に近づけないでください。変形、変質、燃える恐れがあります。
- 改造をしないでください。破損または怪我の恐れがあります。
- 小さなお子さまの遊び道具にしないでください。事故の恐れがあります。
- 本来の目的以外のご使用は避けてください。破損または怪我の恐れがあります。

ご使用方法

高さの調節

高さ調節用固定ピンと、高さ調節用固定穴を使って、高さを調節できます。

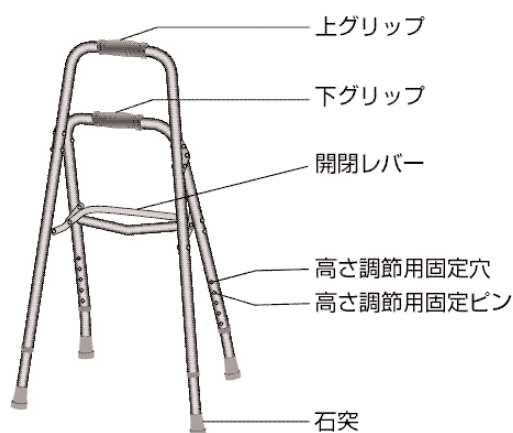



- 固定ピンを押さえながら、脚先を上下させて、使う人の身長や腕の長さに高さを合わせます。
- 固定ピンの先が固定穴からカチンと音をたてて突き出し、確実に固定された事確かめます。
- 4本の脚の高さが全て同じ高さになるように調節してください。

折りたたみの仕方

1. サイドステッパーの開閉レバーを使って折りたたみます。
2. レバーを押さえると開き、引くとたたみます。

グリップの使い方

- イス等から立ち上がりの時は下グリップをご使用ください。
- 歩行の時は上グリップを掴み、長いほうのシャフトを内側にしてご使用ください。
(下図参照)

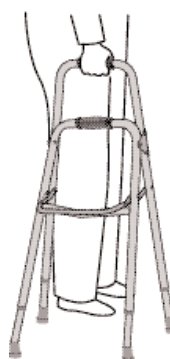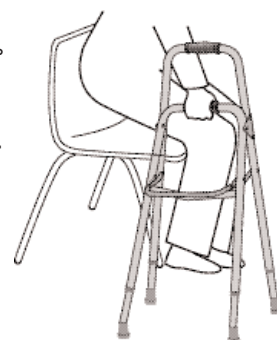

お手入れ方法

- ご使用後はやわらかい布等で汚れを拭き取り、湿気のない場所に保管してください。
- 汚れがひどいときは中性洗剤をご使用ください。シンナー、ベンジン、磨き粉、たわし等は、使用しないでください。

[主な仕様]

長さ:小 幅44~46.5cm 上グリップ高73~82.5cm 下グリップ高57~67cm 奥行31~36cm
大 幅45~48cm 上グリップ高83~93cm 下グリップ高67~71cm 奥行36.5~41cm
材質:シャフト(アルミ製) 石突(ゴム)
重量:小 1.6kg 大 1.7kg

- ご不明の点、万一故障や事故の場合には、下記へご連絡ください。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地
TEL 042(543)3111 (代表)

- ご連絡いただきたい内容は
 - ・ご住所、ご氏名、電話番号
 - ・製品名、お買上げ店名、お買上げ年月日
 - ・故障又は異常の内容(できるだけ詳しく)