

安全のため、ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読みください。


お読みになった後は、いつでも必要な時に取り出せるように、所定の場所に保管してください。

# シャワーチェア NH-50

## 取扱説明書

シャワーチェアNH-50は、自力で立つことが困難な方が、座ってシャワーを浴びるのを補助するための器具です。

### 各部の名称

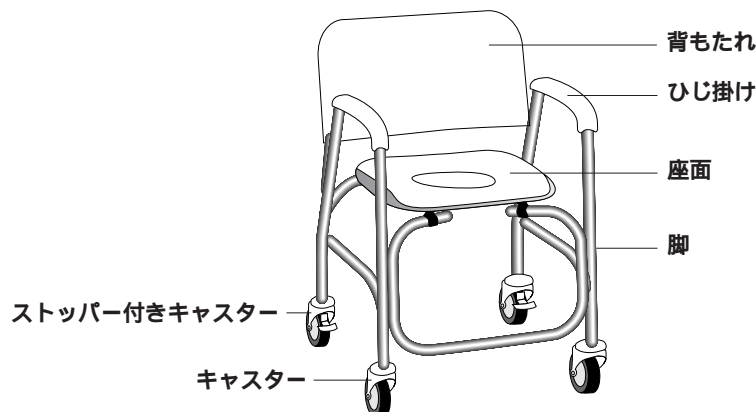

## 安全のために、必ずお守りください

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者への危害や財産への損害を未然に防止するため、下記のように警告・注意を記載しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。



警告

介助者の付き添いのもとで、ご使用ください。

転倒して怪我をするのを防ぐために、以下のことに注意してください。

- ・シャワーチェアの位置を変えるときは、いったん立ち上がって、シャワーチェアの位置を変えてから、座り直してください。
- ・シャワーチェアの端に手をつけて、体重をかけないでください。
- ・移動する際は使用者の足を足置きに乗せて移動してください。足が床に擦れたり引っかかったりする恐れがあります。
- ・浴室では、カスターを必ず固定してご使用ください。固定する際は、前後ともストッパーが脚の内側にくるようにしてください。外側にして固定すると、つまずく恐れがあります。
- ・背もたれに、強い力でドスンと寄りかからないでください。介助者も気をつけてください。
- ・座るときや立ち上がるときに、強い力で背もたれにつかまらないでください。
- ・石けんをつけて体を洗うときは、必ず介助者が手で支え、滑らないようにしてください。
- ・浴室には手すり等を取り付け、座る、立つ、移動するなどの際に、補助としてください。
- ・シャワーチェアを、踏み台などに使用しないでください。



注意

火気、熱源に近づけないでください。変形、変質、燃える恐れがあります。

改造をしないでください。破損または怪我の恐れがあります。


小さなお子さまの遊び道具にしないでください。事故の恐れがあります。

本来の目的以外のご使用は避けてください。破損または怪我の恐れがあります。

## ご使用方法


### 移動

キャスターのストッパーを踏んで、チェアを固定します。(2個とも)

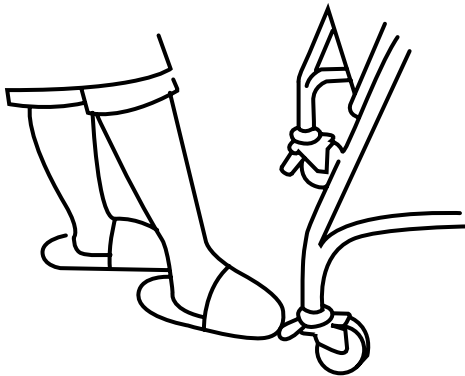

キャスターのストッパーを解除して、浴室へ押して行きます。

療養者をのせます。腰を深く乗せてください。(キャスターのストッパーは固定してください)

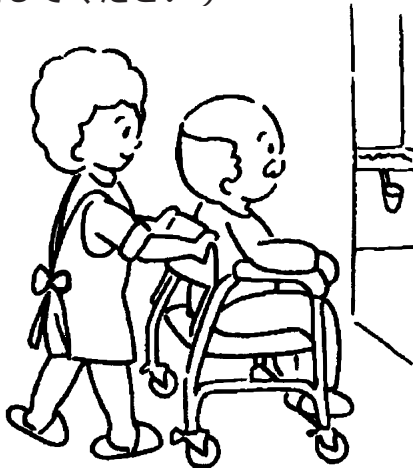

### 入浴

チェアに座ったままでシャワー浴をさせてあげます。(キャスターのストッパーは固定してください)




## シャワーチェア NH-50 組立て説明書

### 部品構成(部品確認)

| 部品番号 | 部品名                | 数  |
|------|--------------------|----|
|      | ひじ掛けフレーム           | 2  |
|      | 足置きフレーム            | 1  |
|      | シート後ろフレーム          | 1  |
|      | 背もたれフレーム(手押しバー)    | 1  |
|      | シート                | 1  |
|      | ボルト(長)             | 8  |
|      | 波型ワッシャー            | 10 |
|      | シート後ろフレーム取付用ボルト(短) | 2  |
|      | ナット                | 10 |
|      | シート取付用ねじ           | 2  |
|      | シート取付用留め金          | 2  |


部品番号は組立て手順の絵の番号に対応しております。

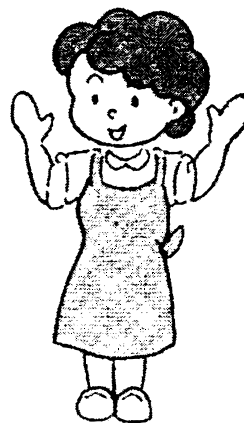


部品が全部あるかを確認してください。

1

足置きフレーム を2つのひじ掛けフレーム  
ではさむようにし、ボルト 、 波型ワッシ  
ャー 、 ナット で軽く組み立てます。(必  
ずゆるめたまま組み立ててください)

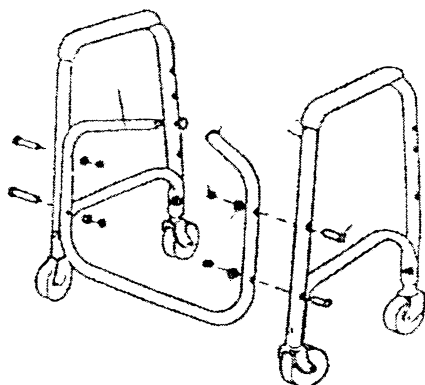


この時は、  
仮締めて  
組み立てます。

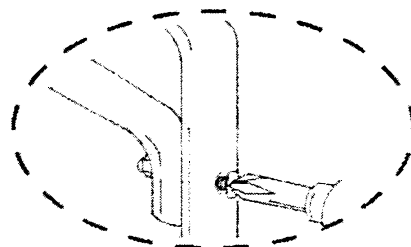


2

シート後ろフレーム を2つのひじ掛けフ  
レーム の間に入れ、シート後ろフレ  
ーム取付用ボルト(短) と波型ワッシ  
ャー とナット で軽くとめる。(ここでも  
必ずゆるめたまま組み立ててください)

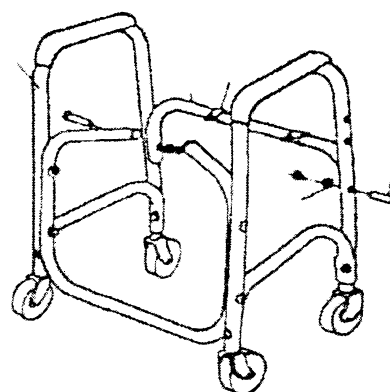

3

背もたれフレーム(手押しバー) を  
ボルト 、 波型ワッシャー 、 ナット  
で、ひじ掛けフレーム の上部に取  
付けます。(ここでも必ずゆるめたま  
まで)

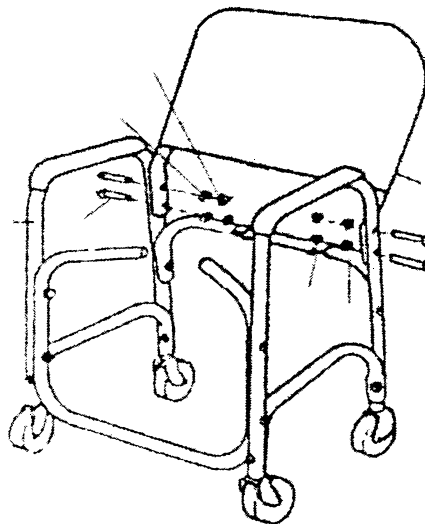


4

シート後ろフレーム の上部にシート取付用留め金 を取付けます。



ここまできたら  
各部のボルトを  
しっかり締めます。

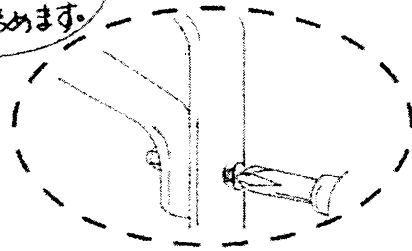


5

ここまでの作業が終わったら、  
軽くとめていたすべてのボ  
トルがかみあうようにシッ  
カリと締めてください。




6

シート を足置きフレーム とシ  
ート後ろフレーム に乗せ、シ  
ート取付け用ねじ でシート取付  
留め金 に堅くとめてください。

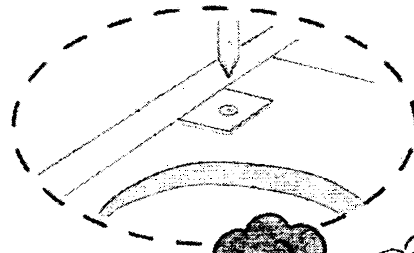

これで  
安心ネ!!

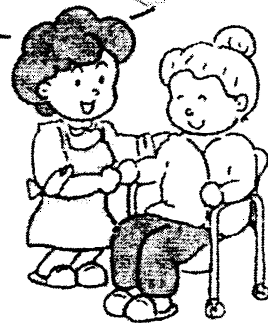

### お手入れ方法

ご使用後はやわらかい布等で水気を拭き取り、湿気のない場所に保管してください。  
洗うときは中性洗剤をご使用ください。シンナー、ベンジン、磨き粉、たわし等は、使用しないでください。

### [主な仕様]

サイズ：全幅56×奥行60×全高86（座高48）cm  
材質：アルミ、プラスチック  
背もたれ：ナイロン  
重量：7kg

ご不明の点、万一故障や事故の場合には、下記へご連絡ください。

フランスベッド株式会社

メディカルサービス事業本部

〒169-0073 東京都新宿区百人町1-25-1

☎03(3363)2255

### ご連絡いただきたい内容は

- ・ご住所、ご氏名、電話番号
- ・製品名、お買上げ店名、お買上げ年月日
- ・故障又は異常の内容（できるだけ詳しく）