


高輝度LEDの光と大音量でお知らせ！「シルピカ」 取扱説明書・保証書

このたびは「シルピカ」をお買い上げいただき、有難うございました。ご使用前にこの取扱説明書を良くお読みの上、正しくご愛用下さいますようお願い申し上げます。なお、この取扱説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧下さい。

1. 各部名称と機能

○ 壁掛け型受信器【シルピカ】

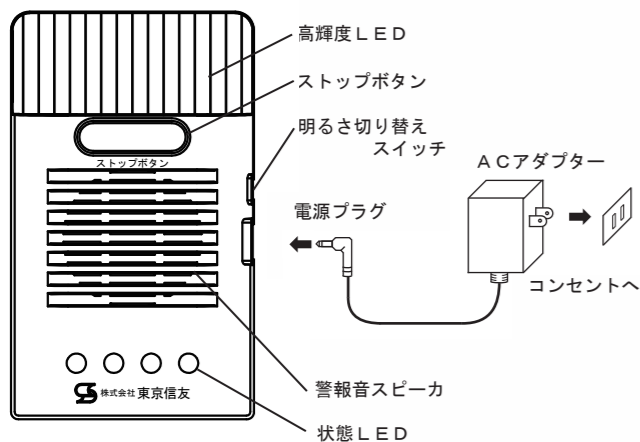


【シルピカ】本体
《高輝度LED：白色》
高輝度LEDがお知らせします。

《警報音スピーカー》
大音量の警報音でお知らせします。

《ストップボタン》
ストップボタンを押すと警報が停止します。

《状態LED》
購入時設定により、LEDが点灯します。

《明るさ切り替えスイッチ》
高輝度LEDの明るさを切り替えるスイッチで、明・暗の2種となります。

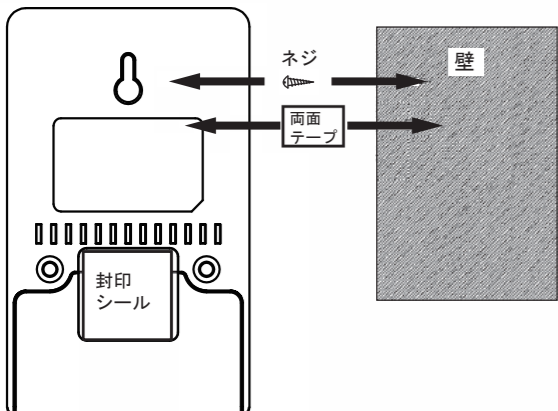

【付属品】
《ACアダプター：1個》
シルピカ本体とコンセントにきちんと差し込まれていることを確認の上、ご使用下さい。
コンセントとACアダプターの接続部の間にホコリがたまると火災になることがありますので、ホコリがたまらないようご注意ください。

《両面テープ：1枚》
《ネジ：1本》
シルピカの本体を固定する際にご利用下さい。
両面テープは壁面を汚してしまったり、剥がしてしまうことが考えられますのでご注意ください。

【動作内容】

この商品はシルウォッチの発する電波信号を受信し、高輝度LEDの点滅と、約86dBの警報音でお知らせします。

■ 通信距離：見通しで約150mです。（環境により変化します。）

【接続方法】

この商品は特別な取り付け工事は必要ありません。

- ① シルピカの本体を付属品の両面テープやネジを利用し、壁などに取付けます。もしくは就寝時に枕元に置いて使うこともできます。（※振動はしません。）
- ② シルピカの本体電源ジャックにACアダプターのプラグを差し込みます。（*付属品のACアダプター以外は絶対に使用しないでください。）

2. 使用上のご注意

1. この商品は防水防滴機能はありません。
2. この商品には精密部品が入っておりますので、落としたり、ぶつかけたりしないでください。
3. この商品を静電気の影響があるところに放置しないでください。
特にテレビ画面やパソコンの画面からは強い静電気が出ていますので近づけないでください。
4. この商品は磁気による影響を受けることがありますので、磁石つきの健康器具など強い磁界を発生する器具には近づけないでください。
5. 化学薬品やガスの中でのご使用は避けてください。
シンナー・ベンジンなどの各種溶剤、およびそれらを含有するもの（ガソリン・マニキュア・トイレ用洗剤・接着剤など）がシルピカに付着しますと、変色・劣化や破損の原因となることがありますので、ご注意ください。
6. ACアダプターとコンセントの付近にホコリがたまると、火災の原因になることがありますので、ご注意ください。
7. 濡れた手でACアダプターに触れますと、感電する危険があります。
8. 強い光の点滅により、子供や神経過敏な方はてんかんなどの発作を起こす場合がございますので、あらかじめご使用前にかかりつけの医師にご相談ください。

3. 其他のご注意

- ⚠ この商品にはネジや両面テープなどの細かい部品を付属しておりますので、乳幼児が誤って飲み込んでしまわないように、ご注意ください。
- ⚠ シルピカに接続するACアダプターは、入力端子側への差し込みと電源コンセントへの差し込みに緩みのないようにしっかりと差し込んで下さい。差し込みが不十分だと、ショートして、破裂・発熱・発光などの恐れがありますので、ご注意ください。
万一、煙が出ている、変な臭いがあるなどの異常が有る場合は、ACアダプターをコンセントから抜き取り、煙が出なくなることを確認してから、当社または代理店へ調査・修理をご依頼ください。
- ⚠ ACアダプターのコードは首や手足にからみつかないように、しっかりと固定してください。
思わぬケガなどを負う場合があります。
- ⚠ ACアダプターは風通しの良い湿気の少ない差し込み口を選んでください。
- ⚠ この商品を分解したり、内部に手を触れたりすると感電したり、ショートしたりする危険があります。これらの行為は絶対にしないでください。
この商品は日本国内のみでご使用ください。
- ⚠ この商品は情報伝達システムであり、火災や犯罪を未然に防ぐものではありません。
万一、この商品を使用中に火災事故・損害事故・人身事故などが発生しても、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

おかしいと思ったら、まず、ACアダプターがコンセントにしっかりと入っているか、電源プラグが本体へしっかりと差し込まれているかお調べください。
なお、不明な点はお気軽にお問合せください。

⚠ **注意と警告を示します。**

【仕様】

		仕様		シルピカ ER409SP			
シ ル ピ カ	電 気	電源	ACアダプター	12V 1A（一次側100V）（PSE規格）			
			待機時消費電力	6VA以下			
		LED	高輝度LED使用本数	高輝度白色 6本			
			状態LED使用本数	青色 1本	黄色 1本	緑色 1本	赤色 1本
		警報音音響	音響出力	86dB±5dB（本商品正面1m）			
	警報音周波数		500Hz～3kHz				
	警報音断続時間		0.6秒鳴動、0.6秒休止を繰り返す				
	受信	無線規格	特定小電力 ARAIB STD-T67				
		周波数	426MHz帯				
		定格電流	15mA MAX（受信時）	160mA MAX（警報鳴動時）			
アンテナ		内蔵パターンアンテナ					
受信距離		見通し約150m					
その他		保存温度	-10℃～+60℃				
	使用温度	0℃～45℃					
	外観色	アイボリーホワイト					
	外観寸法（mm）	65（W）×109（H）×28（D）					
		本体重量	90g				

シルピカ保証書

保証期間	1年		
お買上げ日	年	月	日
お 客 様	ご芳名		
	ご住所		
	TEL		
販売店 (保証元)			

* 本保証書は当社保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
* 本保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
* 本保証書は日本国内のみ有効です。

保証について

正常なご使用状態で保証期間中に万一故障が発生した場合には、この取扱説明書を同封の上、保証元までご郵送またはご持参くだされば無料で修理・調整を致します。ただし、つぎの場合には保証期間中でも有料修理となりますのでご了承ください。
 ■ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障、および損傷。
 ■お買上げ後の輸送、移動中の落下などによる故障および損傷。
 ■ご使用中に生じる外観上の変化（ケースの色褪せなど）
 ■火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 ■本保証書の提示がない場合。
 ■本保証書に所定の記入がない場合。
 （もし、記入がない場合は直ちにお買上げの販売店にお申し出ください。）
 * 修理の際はケースなどを一部代替品を使用させていただくことがありますので、ご了承ください。
 * 故障が発生した場合には、そのままの状態でご郵送下さい。

製造販売元 株式会社 東京信友

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-14-5 新宿KMビル
TEL: 03-3358-8000(代) FAX: 03-3358-6330
E-mail: info@shinyu.co.jp
http://www.shinyu.co.jp