

快適に使えるひとくふう

POINT 1 防水シートを敷きましょう

使用する際に、防水シートなどを敷くところぼれても安心です。

POINT 2 お湯を通しましょう

使用前にお湯を通すと、冷たさを感じにくく、快適に使用できます。



特徴

— 中身が見えにくい —

本体が半透明なので、容器の中身が見えにくくなっています。

— 軽いので安心 —

プラスチック製で軽量なので尿が入っても重たくありません。落としても割れにくいので安全です。

— 持ちやすい —

取っ手付なので、使用時でも洗浄時でも持ちやすくなっています。

— メモリ付 —

尿の量が一目でわかるメモリ付です。
(100CC ~ 800CC)

ティコブ半透明尿器 女性用

使用方法

衛生的にご使用いただくために下記の使用方法をお守り下さい。

1. 容器のフタをとる。
2. 受け口をご自身のほうに向くように持つ。
3. 受け口をできるだけ身体に密着させて使用する。
※尿モレを防ぐために、受け口にティッシュペーパーなどをあててご使用下さい。
4. 使用後は尿を捨て、受け口と本体を共によく洗う。
5. 洗った後は水をよく切りフタをする。

使用上の注意

- 火のそばに置かないで下さい。
- たわし又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
- 使用後の洗浄は水又はぬるま湯をご使用下さい。
- 幼児の手の届かない所に保管して下さい。
- 直射日光や湿気をさけ、風通しの良い清潔な場所に保管して下さい。

耐熱温度

本体： 70℃
フタ： 120℃
口輪： 120℃

原料樹脂

本体：ポリエチレン
フタ：ポリプロピレン
口輪：ポリプロピレン



箱 外装:PP
品番 UR01W



日本製

介護用品総合メーカー

 株式会社 幸和製作所

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

【カスタマーサポート室】10時～17時(土・日・祝日を除く)

 0120-508-058

<http://www.kowa-ws.co.jp>