

快適に使えるひとくふう

POINT 1 防水シートを敷きましょう

使用する際に、防水シートなどを敷くとこぼれても安心です。

POINT 2 お湯を通しましょう

使用前にお湯を通すと、冷たさを感じにくく、快適に使用できます。



特徴

— 中身が見えにくい —

本体が半透明なので、容器の中身が見えにくくなっています。

— 軽いので安心 —

プラスチック製で軽量なので尿が入っても重たくありません。落としても割れにくいので安全です。

— 持ちやすい —

取っ手付なので、使用時でも洗浄時でも持ちやすくなっています。

— メモリ付 —

尿の量が一目でわかるメモリ付です。
(100CC ~ 800CC)

ティコブ半透明尿器 男性用

使用方法

衛生的にご使用いただくために下記の使用方法をお守り下さい。

1. 容器のフタをとる。
2. 受け口をご自身のほうに向くように持つ。
3. 尿モレを防ぐために尿器本体を身体にできるだけ近づけて使用する。
4. 使用後は尿を捨て、受け口と本体を共によく洗う。
5. 洗った後は水をよく切りフタをする。

使用上の注意

- 火のそばに置かないで下さい。
- たわし又はみがき粉でみがくと傷がつくことがあります。
- 使用後の洗浄は水又はぬるま湯をご使用下さい。
- 幼児の手の届かない所に保管して下さい。
- 直射日光や湿気をさけ、風通しの良い清潔な場所に保管して下さい。

介護用品総合メーカー

 **株式会社 幸和製作所**

〒590-0982 大阪府堺市堺区海山町3丁159番地1

保管方法

【カスタマーサポート室】10時～17時(土・日・祝日を除く)

 **0120-508-058**

フリーコール ユーワン オープン
<http://www.kowa-ws.co.jp>

耐熱温度

本体 : 70℃
フタ : 120℃
口輪 : 120℃

原料樹脂

本体 : ポリエチレン
フタ : ポリプロピレン
口輪 : ポリプロピレン



箱 外装:PP
品番 UR01G



日本製