


# Duo Gel Cushion

## デュオジェルクッション

### 取扱説明書

デュオジェルクッションは、長時間車いすに座られる方向けに『体圧分散』と『姿勢保持』ズレへの対応を実現した高機能クッションです。

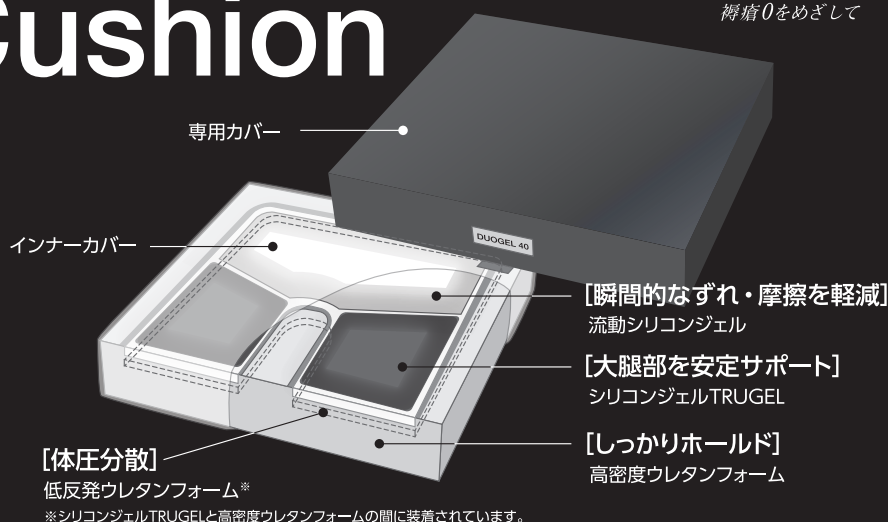

## 安全にお使いいただくために

デュオジェルクッションの取り扱いにあたっては、本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

### 重要安全情報

体圧分散式クッションのご使用中に生じる可能性のある危険を回避するためには、その原因となる要素がどこにあるかを、予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予測することは困難です。従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を記載してあります。

なお、下記の警告に従わなかった場合には、物的損害や負傷、死亡につながる危険性があります。



1

体圧分散式クッションは身体を柔らかく支え、保持するのが特徴です。ご自身で身体を支えられない方は、必ず第三者の立ち合いのもとご使用ください。車いすからの落下、転落を招く恐れがあります。



2

体圧分散式クッションのご使用に際しては、必ず専門家と相談の上ご使用ください。またご使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。病状悪化や事故の恐れがあります。



3

クッションに着座する際、または移乗する際はクッションから滑り落ちないように身体を支えてください。転倒・転落など思わぬ事故の恐れがあります。



4

クッションの端には座らないようにしてください。転倒・転落など思わぬ事故の恐れがあります。



5

クッションに飛び乗ったり過度の荷重を掛けたりしないでください。転倒・転落を招く恐れや商品の破損につながる可能性があります。(最大使用者体重:100kgまで)



6

流動性ジェルは人体に無害ですが、万が一漏れ出して床等に付着した場合は、油污れ用の洗剤を使用して速やかに拭き取ってください。ジェル成分が残っていると滑り易くなりますので、転倒など思わぬ事故の原因につながる場合があります。


### ご使用上の注意

- ご使用の際は、流動性ジェルが均一な状態でのご使用が最適な商品となります。内部ジェルが極端に偏った状態でのご使用は商品の破損に繋がる可能性があります。
- 専用カバーについている「FRONT」タグを前(膝側)にしてご使用ください。
- デュオジェルクッションは本体のウレタンとジェルを保護するためにインナーカバー(半透明の中袋)に入っています。このインナーカバー(半透明の中袋)は絶対に取り外さないでください。
- 鋭利なものでクッションを傷つけないようご注意ください。ウレタンの破損や、ジェルが漏れ出てしまう可能性があります。

## ご使用方法

デュオジェルクッションを車いすの上に設置する際は、専用カバーに取り付けられている[FRONT]タグが、車いすの前側(膝側)になるように設置してください。誤った向きで使用しますと、商品本来の性能を発揮しないばかりか、思わぬ事故の原因になる場合があります。

タグの位置が前側(膝側)になるように、車いすの座面にセットします。

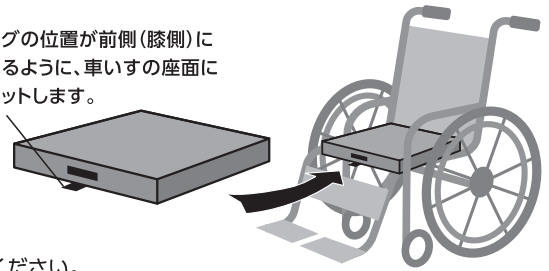

## お手入れ方法

※業務用機械での洗浄・乾燥についてはお問い合わせください。

### ■本体

**本体のウレタンとジェルは洗浄することが出来ません。**

インナーカバーに付いた汚れは、水、ぬるま湯または薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布を硬く絞り、拭き取ってください。

### ■専用カバー

洗濯を行う場合は、商品に取り付けられている品質表示ラベル(洗濯ラベル)をご参照ください。

- ・水、ぬるま湯または薄めた中性洗剤を染み込ませた柔らかい布等で、洗濯する前に表面の汚れを予め取り除いてください。
- ・洗濯ネットに入れ、洗濯機で弱い洗いが出来ます。洗濯機による洗濯、または手押し洗いをしてください。
- ・十分にすすぎを行い軽く脱水後、陰吊り干しを行ってください。乾燥機をご使用の場合は、低温に設定してください。

### ◎注意

- ・インナーカバー(半透明の中袋)は本体のウレタンとジェルを保護するためのカバーです。絶対に取り外さないでください。
- ・漂白剤、柔軟剤の使用不可、アイロン、ドライクリーニング不可。
- ・洗濯機使用時は洗濯ネットを使用してください。
- ・タンブル槽内の詰めすぎ、長時間の乾燥に注意してください。

## 保管方法について

- 商品の劣化を防ぐため、保管する際はクッションを平らに置くように保管してください。
- クッションの上に重いものを置いたり、圧縮された状態で保管しないでください。ヘタリや破損の原因になります。
- 高温多湿や直射日光の当たる場所は避けてください。熱や紫外線で製品の劣化を早めます。

## 仕様

品番	CK-385(40×40) / CK-395(42×42)	
サイズ 重量	CK-385(40×40) : 幅40 × 奥行40 × 厚7.5cm / 約1.7kg CK-395(42×42) : 幅42 × 奥行42 × 厚7.5cm / 約1.9kg	
材質	専用カバー	【上面】表地：ポリエステル100%(伸縮)、裏地：ポリウレタンフィルム(防水) 【下面】ターポリン布(防水・防炎・すべり止め加工)
	中袋	ウレタンフィルム
	中身	シリコンジェル、ウレタンフォーム(上/低反発ウレタンフォーム、下/高密度ウレタンフォーム)

※専用カバーのみの販売もご用意しております。