

ネッティ αFB 取扱説明書

*この取扱説明書は必要なときに取り出しやすい場所に保管してください。

目次

タイトル	ページ
1. はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・	2
1. 1 品質と耐久性	
1. 2 環境問題への取組	
1. 3 取扱説明書について	
1. 4 基本寸法	
2. 概略・・・・・・・・・・・・・・・・	4
3. 各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・	5
4. ネットィαFBの特徴・・・・・・・・	5
5. 組み立てと調整・・・・・・・・	6
5. 1 開梱と組み立てて淳	
5. 2 メインホイール	
5. 3 フロントキャスター	
5. 4 バックサポート	
5. 5 座面奥行の調整	
5. 6 転倒防止バー	
5. 7 シートクッション	
5. 8 バックサポートクッション	
5. 9 フットレッグサポート	
5. 10 ヘッドサポート	
5. 11 アームサポート	
5. 12 ブレーキの調整	
5. 13 プッシュハンドル	
5. 14 座面角度（ティルト）	
5. 15 バックサポート角度（リクライニング）	
6. 取扱方法及び注意事項・・・・・・・・	18
7. メンテナンス・・・・・・・・	20
8. トラブルシューティング・・・・・・・・	21
9. 規格と保証について・・・・・・・・	22
10. 寸法と重量・・・・・・・・	23

1. はじめに

この度は車いす『ネッティα（アルファ）FB』をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本製品のご使用前には、必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全に使用してください。

ネッティαFB は「EN12183:2007」に基づく品質テストを受けており、その品質はドイツの TÜV Product service により認証された室内及び屋外利用のための車いすです。また、同商品は ISO/FDIS7176/19 に基づく衝撃テストに関しても基準を満たしております。

車いすはユーザーのニーズに応えるべく、また適切なアセスメントに則って提供されるべきものです。そのため、各車いすの可能性（できること）と限界（できないこと）を把握することが重要です。

ネッティαFB は快適性と安心を求めるユーザーのために開発された車いすであり、ネッティ・シーティングシステムのもつ人間工学に基づいたフレームはユーザーにさまざまな適合と調整の可能性を提供します。

また、ティルト及びリクライニングの機能を活用することで、ユーザーに活動的な姿勢と安楽な姿勢の両方を提供することができます。



使用者最大体重：130kg

*販売される国、地域により仕様が異なる場合があります。

1. 1 品質と耐久性

ネットィαFBはヨーロッパの品質規格 EN 1 2 1 8 3 / 2007 に基づきドイツの認証機関 TÜV Product Service によってテストされています。製造メーカーである Alu Rehab A/ S 社として同規格は通常の使用において 5－6 年の耐用年数に該当すると考えておりますが、実際の車いすの耐用年数はユーザーの障害の程度と定期的なメンテナンスの頻度により変動するものです。



1. 2 環境問題への取組

環境問題への取組として以下を実践しております。

- ・ 環境に対し有害な物質の使用、製造プロセスをできる限り避けています。
- ・ 環境的観点及び経済的観点より、長期にわたりご使用いただける商品開発を心がけています。
- ・ 梱包に使われるすべての素材がリサイクル可能です。
- ・ ネットィαFB は各々の構成素材への分解がしやすく、リサイクルを考慮したデザインとなっています。
- ・ ネットィαFB は病院や施設などの介助スタッフの腰痛予防を考慮に入れた構造的工夫がされています。



1. 3 取扱説明書に関して

ご使用に際しては、重大な事故や車いすへの損傷を避けるために、必ずご使用前にこの取扱説明書を熟読してください。

 警告	この表示事項を守らずに、誤った取扱いをすると重大な事故につながり、使用者が重傷を負う恐れがあります。
 注意	この表示事項を守らずに誤った取扱いをすると使用者が傷害を負ったり、物的損害をこうむる恐れがあります。
	重要な情報を説明するマークです。

1. 4 基本寸法

項目	標準仕様
座幅 (mm)	400
全幅 (mm)	580
全長 (mm)	970～
全高 (mm)	1150～
前座高 (mm)	460
重量 (kg)	約32
使用者最大体重 (kg)	130

2. 概略

このページでは説明書全体の概要を簡単にご説明しております。
ご使用上注意やメンテナンスなどについて簡単に把握することが可能です。

 : このページはあくまで再確認のためのものです。

- 車いすの開梱（5.1）
- メインホイールの確認（5.2）
- フロントキャスターの確認（5.3）
- バックサポートとリクライニングシリンダーの接続方法（5.4）
- シートクッション、バッククッションの取り付け（5.7）（5.8）
- フットレッグサポートの取り付け（5.9）
- ヘッドサポートの取り付け（5.10）
- 転倒防止バーの取り付け（5.6）
- プッシュハンドル（介助ハンドル）の取り付け（5.13）

 : トラブルシューティングについては（8）を、組み立てと調整については（5）をご参照ください。

 警告	フットサポートの上に立たないでください。 前方へ転倒し、ケガをする恐れがあります。 車いすを持ち上げる際は、アームサポート、フットレッグサポートを持たないでください。
 注意	車いすを操作、調整する際は注意してください。 車いすを持ち上げる際は、アームサポート、フットレッグサポートを持たないでください。 ティルト・リクライニングを操作する際には、必ずブレーキと転倒防止バーが有効になっていることを確認してください。 転倒防止バーは常にユーザーにとって安全な状態で使用してください。 すべてのネジがしっかりと固定された状態で使用してください。
	車いすの仕様は販売地域、国によって異なる場合があります。

2. 1 同封部品の確認


本製品には以下の部品が同梱されていますので、ご確認ください。
（オプションパーツ、特別仕様は除く）

- 本体フレーム ×1
（アームサポート、メインホイール、キャスターは本体に付属しています）
- バッククッション ×1
- シートクッション ×1
- フットレッグサポート ×2（左右：各1、カフサポートが付属しています）
- ヘッドサポート ×1
- 転倒防止バー ×2（左右：各1）
- 取扱説明書 ×1

3. 各部の名称

標準仕様

- ① プッシュハンドル（介助ハンドル）
高さ調整ネジ
- ② ブレーキレバー
- ③ プッシュハンドル（介助ハンドル）
- ④ ヘッドサポートブラケット
- ⑤ ヘッドサポート奥行調整ネジ
- ⑥ ヘッドサポート
- ⑦ バックサポートクッション
- ⑧ アームサポート
- ⑨ シートクッション
- ⑩ レッグサポート
- ⑪ カフサポートアダプター
- ⑫ カフサポート
- ⑬ フットサポート
- ⑭ フロントキャスター
- ⑮ フロントフォーク
- ⑯ ブレーキ
- ⑰ 転倒防止バー
- ⑱ メインホイール
- ⑲ ニープロテクター

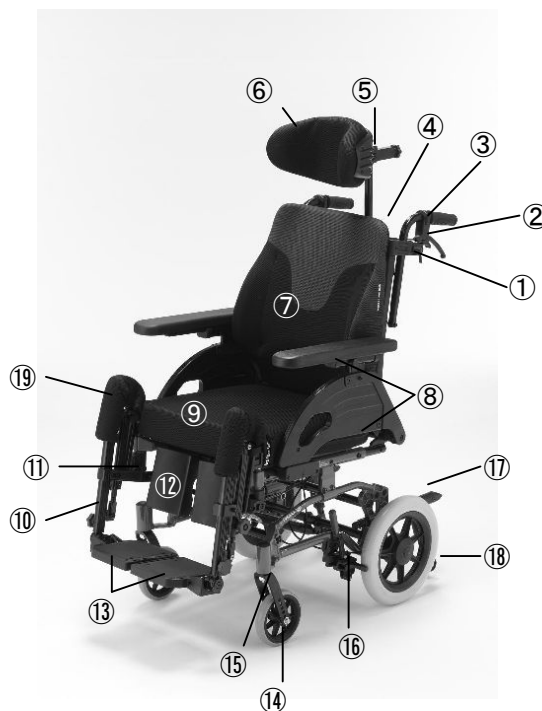

* この他ご不明なパーツがございましたら、取扱店までお問い合わせください

* この車いすは販売される国や地域により異なる場合がございます

4. ネットィαFBの特徴

シート	・ シートクッション付 ・ ティルト角度 : 0° ~ +20° ・ 奥行 : 37.5cm ~ 45cm (2.5cm 1° 毎)
ホイール	・ メインホイール : 12in ノーパンクタイヤ ・ キャスター : 6in ノーパンクタイヤ
バックサポート	・ リクライニング角度 : 90° ~ 135° ・ 高さ : 50cm ・ バックサポートクッションは腰部と側方からのサポートが得られる形状にデザインされています ・ 高さ調整式プッシュハンドル
フットレッグサポート	・ 高さ及び角度調整機能付 ・ 着脱可能
アームサポート	・ 高さ及び奥行調整機能付 ・ 跳ね上げ可能
ヘッドサポート	・ 高さ及び角度、奥行調整機能付 ・ 着脱可能

5. 組み立てと調整

5. 1 開梱と組み立て手順

- ①すべてのパーツと添付されている資料を箱から取り出してください。
- ②メインホイールとフロントキャスターの固定を確認してください。
- ③バックサポートとリクラニングシリンダーを接続してください。
- ④シートクッション、フットレックサポート、転倒防止バー、ヘッドサポート
プッシュハンドル（介助ハンドル）を取り付けてください。
- ⑤その他オプションパーツがあれば取り付けてください。

*必要な工具はそれぞれの項目で説明があります。

5. 2 メインホイール

- ①メインホイールに緩みがないか確認してください。
(5.2.1)



(5.2.1)

5. 3 フロントキャスター

- *フロントフォーク、フロントキャスターが固定されているか、確認してください。
- *フロントフォークは下記の要領で取り外すことが可能です。

- ①フロントフォークの下からクイックリリースの
ボタンを押してください。
- ②ボタンを押したままキャスターブラケットに
クイックリリース軸を差し込んでください。(5.3.1)
- ③奥まで差し込んでから固定されているか必ず
確認してください。(5.3.2)



(5.3.1)



(5.3.2)



注意

使用前にメインホイール及びフロントキャスターが確実に固定されていることを確認してください。



注意

メインホイール及びフロントキャスターが固定されない場合には、使用を中止し取扱店にご連絡ください。

5. 4 バックサポート

- ・バックサポートはリクライニングシリンダーをシリンダーブラケットに差し込み接続します。
(5.4.1)

①シリンダーを差し込んでから、付属しているロックピンをシリンダーブラケットの横から差し込み、シリンダーを固定してください。
(5.4.2)

②ロックピンはクイックリリースとなっていますので、ボタンを押しながら差し込んでください。差し込み後、確実に固定されているか必ず確認してください。



(5.4.1)



(5.4.2)



注意

ロックピンを差し込んだ後、確実に固定されていることを必ず確認してください。

- ・シリンダーブラケットには4箇所穴が空いています。ロックピンの差し込み位置は座面の奥行に合わせてください。





座面の奥行とシリンダーブラケットに関して

座面の奥行を調整する際には、右図を参考に奥行とシリンダーブラケットの位置を合わせてください。

異なる位置に設定した場合、バックサポートの角度調整（リクライニング）が正常に作動しない場合や、破損の原因となる可能性がありますのでご注意ください。

☆設定位置

- ①：37.5 cm
- ②：40 cm
- ③：42.5 cm
- ④：45 cm

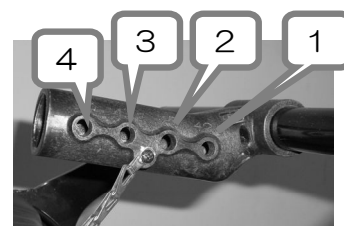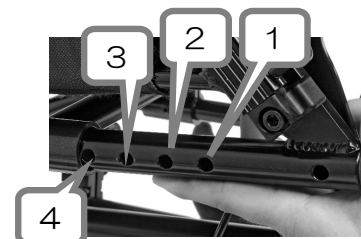

5. 5 座面奥行の調整

《後方での調整方法》

- ①座面の奥行を調整する際には、バックサポートを固定しているロックピンを外し、バックサポートとリクライニングシリンダーを分離してください。(5.4.2)



奥行を短くする場合には、あらかじめバックサポートをいっぱいまで倒してから外してください。

- ②アームサポートのロックを解除してください。



注意 アームサポートのロックがかかっていると奥行き調整はできません。

- ③バックサポートヒンジと本体フレームを固定しているネジを外しバックサポートをスライドさせることで奥行を調整することができます。(5.5.1)

- ・奥行は、37.5cm～45cm まで4段階で調整可能です。



(5.5.1)

- ④奥行を調整した後は、〔5.4〕の手順に従いバックサポートを取り付けてください。

- ・奥行を調整した場合は、シリンダーブラケットにあるロックピンの差し込み位置も変わります。

- * 6mm 六角レンチ×1 本を使用します。



注意 調整後はバックサポートヒンジが確実に固定されていることを確認してください。



注意 ロックピンを差し込んだ後、バックサポートが確実に固定されていることを確認してください。

《前方での調整方法》

レッグサポート取付部のパーツを調整することで10cmまで長さを調整することができます。

- ①本体フレーム前方にあるネジを外してください。
 - ②レッグサポート取付部を前方にスライドします。
 - ③長さを調整したら、ネジで固定してください。
- (5.5.2)

- * 6mm六角レンチ×1 本を使用します。
- * 左右の長さを変えた場合には、フットサポートのロックが使用できなくなります。




(5.5.2)

5. 6 転倒防止バー

・ 転倒防止バーの取り付け方法

- ①転倒防止バーを本体フレームに差し込みます。(5.6.1)
- ②バネを転倒防止バーに取り付けます。(5.6.2)
- ③ピンを転倒防止バーの先端に差し込み、
バネが外れないようにします。(5.6.3)

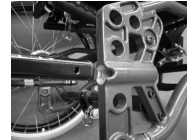

(5.6.1)



(5.6.2)



(5.6.3)

・ 転倒防止バーの操作手順

- ①転倒防止バーを手前に引きます。(5.6.4)
- ②転倒防止バーを180°回転させ、
下に向け、ロックさせます。(5.6.5)
- ③転倒防止バーが固定され、車いすが
後ろに倒れないことを確認してください。



(5.6.4)



(5.6.5)



警告

車いすのプッシュハンドル部分などに、荷物など重いものを取り付けないでください。車いすのバランスが崩れ、後方に転倒する危険があります。



注意

安全に車いすをご使用いただくため、転倒防止バーは必ずご使用ください。

5. 7 シートクッション

シートプレートの前端に合わせて、シートクッションを取り付けてください。



5. 8 バックサポートクッション

クッションはご利用者の状況に合わせて位置を上下に調整し取り付けてください。

背張り調整を行う場合には、クッションを取り付ける前に背張り調整用のベルトを緩めてからクッションをつけます。



5.9 フットレッグサポート

- このレッグサポートは長さ調整と角度調整が可能で、必要に応じて取り外すことができます。また、フットサポートの角度も無段階で調整可能です。

I. レッグサポートの取り付け (5.9.1)

- ① フレームに対して20°程外側に回転した状態で垂直にレッグサポートを差し込んでください。
- ② 次にレッグサポートを内側に回転させ、正面を向くようにします。
- ③ レッグサポートを下に押しこむと固定されます。

- 取り外しには上の手順と逆に行ってください。



(5.9.1)

II. レッグサポートの角度調整

- ① レッグサポートについている星型のネジを緩めると角度調整を行うことができます。(5.9.2)
- ② お好みの位置でネジを締めて固定してください。




(5.9.2)

III. フットレッグサポートの長さ調整

- レッグサポートについている星型のネジ〔A〕を緩めると長さの調整を行うことができます。(5.9.3)
- 長さを合わせたら、ネジを締めて固定してください。

- ❗ 高さ調整ネジを外すと受け側のナットの位置がずれ固定できなくなります。ネジを付ける場合は、ナットの位置を合わせてからネジを締めてください。

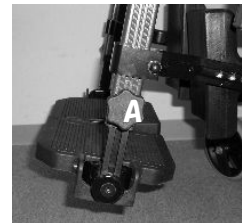


(5.9.3)

IV. フットサポートの角度調整

- フットサポートは無段階で角度を調整することが可能です。
- フットサポートの横にあるネジ〔B〕を緩めると調整ができます。調整後はネジを締めて固定してください。(5.9.4)

* 5mm六角レンチ×1本を使用します。

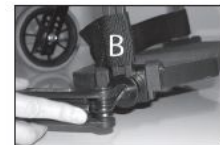

(5.9.4)

V. フットサポートの固定と取り外し

- 左右のフットサポートをつなげることで、安定性が増します。

- ① 右足側のフットサポートにあるプラスチックロック (5.9.5) をスライドさせロックを外し、左足側のフットサポートにあるボルトから離します。
- ② 右足側のフットサポートを上にあげると左右のフットサポートが外れます。



(5.9.5)

Ⅵ. フットレッグサポートの取り外し

- フットレッグサポートは、少し上に持ち上げてから外側へ回転させると取り外すことができます。
(5.9.6)

(5.9.6)




Ⅶ. カフサポートの調整

- カフサポートは高さとお行の調整が可能です。
- カフサポートの高さ調整は、カフサポートアダプターを止めているナット〔C〕を緩めると調整ができます。(5.9.10)

* 10mmスパナ×1本を使用します。
- カフサポートのお行調整は、カフサポートパッドとカフサポートアダプターの間にあるナット (5.9.11) を緩めてカフサポートパッドを取り外し、取り付け位置を変更してください。(5.9.10) お行は4段階で調整可能です。

* 13mmスパナ×1本を使用します。

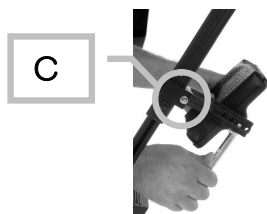

(5.9.10)




(5.9.11)



警告

フットサポートに足を乗せたまま、立ち上がらないでください。
前方へ転倒し、ケガをする恐れがあります。

5. 10 ヘッドサポート

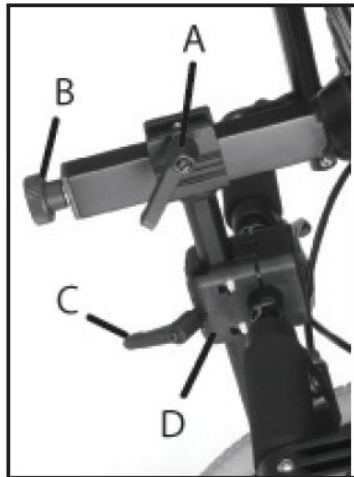

- A : 奥行（前後）調整ネジ
B : 角度調整ネジ
C : 高さ調整ネジ
D : ヘッドサポートアダプター

- ①ヘッドサポートアダプターに調整ネジ（C）を付けてください。
- ②ヘッドサポートをアダプターに差し込んでください。
- ③ヘッドサポートの高さ、奥行、角度をユーザーに合わせて調整してください。

- ・ヘッドサポートの位置が調整では合わない場合、ヘッドサポートアダプターの角度、位置を微調整することができます。
- ・調整する場合は、ヘッドサポートアダプターの上にあるネジと内側にある4個のネジを緩めて調整してください。
- ・ネジを締める場合には、4箇所のネジを少しずつ順番に締めてください。



警告

ヘッドサポートを持ってティルト・リクライニングを動かすことや、車いすを移動することは、パーツが破損する原因や転倒する恐れがありますのでおやめください。



注意

各部の調整を行う際には、必ずネジを緩めてから調整を行ってください。ネジを緩めずに調整を行うと、破損の原因となります。



注意

高さ調整ネジと奥行調整ネジは締めすぎに注意してください。ネジを締めすぎるとネジ山が潰れ、固定ができなくなります。

5. 11 アームサポート

I. アームサポートの跳ね上げ

スカートガードの赤いレバーを握ると固定が外れ（5.11.1）
アームサポートの跳ね上げができます。



（5.11.1）



（5.11.2）

アームサポートを元に戻した際は、固定されていることを確認してください。

II. アームサポートパッドの前後調整

アームサポートパッドの下にある赤いボタンを押すと、
パッドの前後調整ができます。（5.11.3）

*アームサポートパッドは、必ず固定される位置で
使用してください。



（5.11.3）

III. アームサポートの高さ調整

スカートガードについているネジを緩めると
高さの調整ができます。（5.11.4）

* 4mm六角レンチ×1本を使用します。



（5.11.4）



警告

アームサポートを持って、車いすを持ち上げないでください。
車いすの破損やケガにつながる恐れがあります。



注意

ご使用前に、アームサポートが固定されていることを確認してください。



注意

アームサポートパッドに重いものを乗せるなど、過度な荷重をかけないでください。




注意


アームサポートの跳ね上げをしたまま、ティルト角度の操作を行わないでください。車いすの破損やケガにつながる恐れがあります。

5. 12 ブレーキの調整

- ブレーキは微調整することができます。
- ブレーキレバーを前方へ押すと、ブレーキがかかります。(5.12.1)
- ブレーキレバーを後方へ引くと、ブレーキは解除されます。(5.12.2)

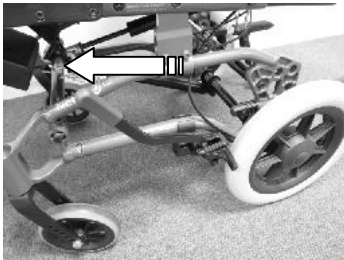


(5.12.1)

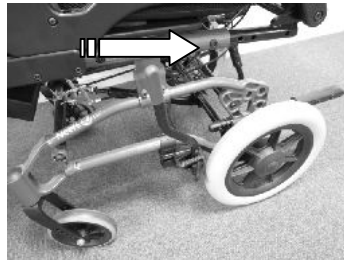

(5.12.2)

- ①ブレーキ位置を調整するには、ブレーキクランプの内側にある2本のネジ（a）を緩めてください。(5.12.3)
- ②クランプの位置を決めたら、ネジを締めてください。
- ③クランプを設定した後の微調整は、クランプの下にあるネジ（b）を緩めると調整できます。
- ④ブレーキ調整を行った後は、ネジが適切に締められていることを確認し、ブレーキの効きを確認してください。

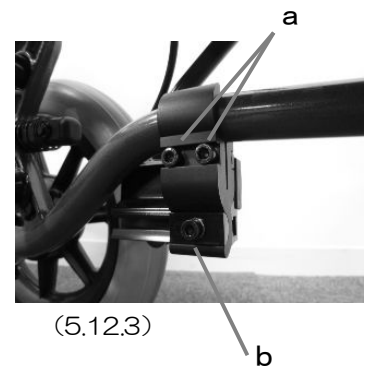

(5.12.3)

* 5mm六角レンチ×1本を使用します。



注意

ご使用の前に、ブレーキの効きを必ず確認してください。



注意

移乗や、ティルト・リクライニングの角度調整をする際は、必ずブレーキをかけ、転倒防止バーを下にさげてください。

5. 13 プッシュハンドル（介助ハンドル）

・プッシュハンドルの取り付け方法

- ①プッシュハンドルに付いているボルトとナットを外します。（5.13.1）
- ②車いすのプッシュハンドル高さ調整ネジを緩めます。（5.13.2）
- ③プッシュハンドルを差込み、高さ調整ネジを締めます。
- ④プッシュハンドルに①で外したボルトとナットをつけます。



（5.13.1）



（5.13.2）

・プッシュハンドルの高さ調整方法

- ①プッシュハンドルを固定しているネジを、反時計回りに回転させると、固定が解除され高さ調整が可能になります。ハンドルを上下させて高さを調整してください。（5.13.2）
- ②高さが決まったら、ネジを締めてください。



警告

車いすのプッシュハンドル部分などに、荷物など重いものを取り付けないでください。車いすのバランスが崩れ、後方に転倒する危険があります。



注意

高さ調整をする際は、指などの挟みこみに注意してください。ケガにつながる恐れがあります。



注意

プッシュハンドルは、必ず固定ができる位置でご使用ください。固定をせずに使用すると車いすの破損や、ケガにつながる恐れがあります。

5. 14 座面角度（ティルト）

座面角度（ティルト）はプッシュバーの左側にあるレバーを握ると、 $0^{\circ} \sim 20^{\circ}$ （水平～後傾 20° ）の範囲で調整できます。レバーを離すと角度が固定されます。



5. 15 バックサポート角度（リクライニング）

バックサポート角度（リクライニング）はプッシュバーの右側にあるレバーを握ると、 $90^{\circ} \sim 135^{\circ}$ の範囲で調整できます。レバーを離すと角度が固定されます。

*プッシュバーには、それぞれの機能を示すステッカーが貼ってあります。



〔リクライニング〕



〔ティルト〕

〔リクライニング〕
背もたれ角度調整機能

〔ティルト〕
座面角度調整機能



警告

アームサポートを持って、車いすを持ち上げないでください。
車いすの破損やケガにつながる恐れがあります。



注意

移乗や、ティルト・リクライニングの角度調整をする際は、必ずブレーキをかけ、転倒防止バーを下にさげてください。



ティルト及びリクライニングの操作は、介助者が横に立ち操作することをお勧めします。車いすの後ろに立ち操作を行う場合に比べ介助者の負担が少なく、また、ご利用者の状況も確認できるため安全に行うことができます。

ティルトとリクライニングの角度調整は同時に行わず、『ティルト角度→レッグサポート角度（エレベーター）→リクライニング角度』の順番で操作することをお勧めします。



ティルト操作時



リクライニング操作時



後ろから角度調整を行う場合は、十分注意してください。



操作の順番はメーカーが推奨する方法であり、ご利用者の状況・状態やご使用の目的によって、操作は異なります。



注意

リクライニング角度調整を行う場合、アームサポートとバックサポートの間に腕などの挟みこみが無いことを確認してください。



注意

アームサポートを跳ね上げたまま、ティルト・リクライニングの角度調整を行わないでください。車いすの破損やケガにつながる恐れがあります。



注意

ティルト・リクライニングの角度調整を行う場合は、必ず平らな場所で操作してください。坂道や段差のあるところで操作するとバランスを崩し、転倒する恐れがあります。



注意

ティルト・リクライニングの角度調整を行うと、車いすの全長が変わります。家具や壁の側で操作を行うと、ぶつかる可能性があり危険ですので、周囲にスペースがあることを確認してから角度調整を行ってください。

6. 取扱方法（操作方法）及び注意事項

警告 	バックサポートやプッシュハンドルに重いものをひっかけないでください。 車いすのバランスが崩れ、転倒事故の原因となります。
	フットサポートの上に立ち上がらないでください。 前方へ転倒し、ケガをする恐れがあります。
	移乗する際や、ティルト・リクライニングの角度調整を行う場合には、必ずブレーキをロックし 転倒防止バーを下に向けてください。
	アームサポート、フットレッグサポート、ヘッドサポートを持って、車いすを持ち上げないで ください。
	ご利用者が乗っている状態で、車いすを持ち上げないでください。
注意 	介助者がついている場合を除き、転倒防止バーを下に向けて使用してください。
	段差の乗り越えや外出時には、フットサポートと地面の間に十分なクリアランスがあることを確 認してください
	ご使用の前にブレーキの効きを確認してください。

6. 1 基本事項

車いすの操作は、ご利用者の身体状況や着座位置、車いすの重心、セッティングにより影響が変わり
駆動効率に影響します。メインホイールに乗る荷重の割合が高くなるほど駆動効率は高くなり、フロ
ントキャスターへの荷重が高くなれば駆動効率は悪くなります。

6. 2 段差を昇る場合

①前進で乗り越える場合

- ・転倒防止バーが上向きになっていることを確認してください。
- ・車いす全体を後方に傾けてフロントキャスターを浮かせてください。
- ・段差の上にフロントキャスターを乗せ、直進してください。

②後進で乗り越える場合

- ・転倒防止バーが上向きになっていることを確認してください。
- ・車いすを後方に傾け、少しだけフロントキャスターが浮くようにしてください。
- ・車いすを引いて段差を乗り越えます。この際、フロントキャスターも段差の上に寄せられるように
十分に後方まで引いてください。

6. 3 段差を降りる場合

①前進で降りる場合

- ・転倒防止バーが上向きになっていることを確認してください。
- ・車いすを後方に傾け、少しだけフロントキャスターを浮かせてください。
- ・車いすを前方に進め、メインホイールを段差の下に接地させ、フロントキャスターを降ろします

②後進で降りる場合

- ・転倒防止バーが上向きになっていることを確認してください。
- ・メインホイールを段差から降ろし、車いすを後方に少し傾けフロントキャスターを少し浮かせて
ください。
- ・車いすを後進させ、フロントキャスターをゆっくりと接地させてください。

注意 	段差の乗り降りをする場合には、十分なスペースがあることを確認してください。
	ご利用者が前方に転倒する恐れがありますので、十分注意してください。
	段差の乗り降りをした後は、必ず転倒防止バーを下に向けてください。

6. 4 スロープ、坂道での操作

- スロープや坂道の途中で車いすの向きを変えないでください。
- スロープや坂道に対して、車輪が垂直になるように設定してください。
- スロープ上でバランスを崩さないように注意してください。

6. 5 移乗

車いすからの移乗、車いすへの移乗については、ご利用者本人も含めて十分な練習を行ってください。準備として下記の通り、注意事項を確認してください。

- 車いすを移乗する先（ベットなど）にできる限り近づけてください。
- 転倒防止バーを下に向けてください。
- 確実にブレーキをかけてください。
- 乗り移りを行う側のアームサポート、フットレッグサポートを取り外してください。
- 外していない側のフットサポートは上げてください。
- フットサポートに足を乗せての移乗は、行わないでください。

6. 6 搬送について

- 車いすを車に固定するためのベルトは、安全ベルトとは異なります。
ご利用者の安全を確保するために安全ベルトを使用することをお勧めします。
- ヘッドサポートを適切にセッティングしていれば頭部は安定しますが、車で搬送を行う際には十分でないことがあります。
- 車いすの本体フレームには、ベルト固定位置を示すマークを4箇所シールで示しています。



- フレーム前方は右図（6.6.1）のように固定してください。



(6.6.1)

- フレーム後方の固定は、「トランスポート・アタッチメント」を取り付け、固定することをお勧めします。（6.6.2）



(6.6.2)

* 固定用のベルトは、0～45° の範囲で取り付けてください。

7. メンテナンス

7. 1 メンテナンスの方法について

ネットィαFB はモジュール車いすです。各部のパーツを交換することで長くご愛用いただくことが可能です。取り付けや交換方法については、各パーツの説明書を確認いただくか、取扱店にご相談ください。

-  : 小さな傷や塗装に関しては補修ペイントで修理することが可能です。
取扱店にご相談ください。
-  : 不具合や破損が発生した際には使用を中止し、取扱店にお問い合わせください。
-  : ボルトやナットがしっかりと固定されているか、点検と調整を行ってください。

*確認・点検頻度の目安

確認・点検内容	使用前	毎月1回
破損や不具合の有無（欠損しているパーツの有無）	○	
車いすの洗浄（拭き掃除など）		○
クッションの洗浄		○
転倒防止バー	○	
ブレーキの効き具合	○	
タイヤの磨耗		○
フィルト・リクライニングの効き	○	

7. 2 洗浄と消毒

- ① 車いす本体を洗浄する前にシートクッションを取り外してください。
- ② クッションカバーに印刷された洗浄方法に基づいて、シートクッションとカバーを洗浄してください。
- ③ 本体フレームを水拭き、もしくは中性洗剤で拭き掃除してください。
- ④ 高圧水流などの機器を使用する場合は、ガスシリンダー、各種ラベル、クッションに当たらないように注意してください。
- ⑤ 洗浄に際しては、中性洗剤をご使用ください。
- ⑥ 洗浄後は洗剤を洗い流し、水分を拭き取ってください。
- ⑦ 乾燥機などのご使用できません。
- ⑧ 本体フレームはアルコール溶剤での清拭は可能です。
- ⑨ 強いオゾンなどで消毒されますと、タイヤやクッションの変色や劣化の原因となります。
- ⑩ 水分を含んだ状態で、長時間おくとサビやカビの原因となります。

8. トラブルシューティング

状態	原因／対応	参照箇所
車いすがまっすぐ走行しない	・メインホイールのハブが適切に固定されていない。 ・片側のブレーキを強く締めすぎている。 ・ユーザーが左右に偏った座り方をしている。 ・ユーザーの力に左右でバラつきがある。	5. 1 2
車いすを駆動させると重い	・メインホイールのハブが適切に固定されていない。 ・メインホイール、フロントキャスターの汚れや髪の毛、糸くずなどを取り除いてください。 ・フロントキャスターに過大な荷重がかかっている。	5. 2 5. 3
車いすが上手く回転しない	・フロントキャスターが強く締め付けられていないか確認してください。 ・メインホイール、フロントキャスターの汚れや髪の毛、糸くずなどを取り除いてください。 ・フロントキャスターが適切な位置にセットされているか確認してください。	5. 2 5. 3
ブレーキの効きが悪い	・ブレーキを調整してください。	5. 1 2
車いすがゆがむ	・各部のネジやボルトがしっかりと固定されているか確認してください。 ・フロントフォーク、メインホイールがしっかりと固定されているか確認してください。	5. 2 5. 3

9. 規格と保証について

ネッティαFBは屋内・屋外両用としてテストされており、その品質にはCEマークが付与されています。

使用者最大体重：130kg

TÜV Product Service GmbH
EN12183：2007.



衝撃テスト：ISO7176/19に沿ってテストされ認定されています。

CEマークが付与されています。
CEマークはEU域内での医療器具として、必要な要件を満たした商品に付与されます。



○保証について

- 保証内容については添付の保証書をご確認ください。
- 製造メーカーであるAlu Rehab社が同意している一部の商品を除き、他社商品と組み合わせてご使用になる場合、すべての商品保証やCEマークは無効になります。
- 取扱説明書にない調整、セッティング、ならびに改造はすべて特殊な仕様に該当します。この場合、すべての商品保証は無効となります。
- 特殊仕様、特別調整を行う前に、必ず弊社までお問い合わせください。

10. 寸法と重量

項目	規格	備考
座幅 (mm)	400	スカートガード間の寸法
全幅 (mm)	580	
全長 (mm)	970~	
全高 (mm)	1150~	ヘッドサポートを含む
前座高 (mm)	460	床面からシートプレートまで
座面奥行 (mm)	375~450	シート前端からバックサポートヒンジまで
バックサポート高さ (mm)	480	シートプレートからバッククッション最上部まで
アームサポート高さ (mm)	260~350	段階調整、パッド前後調整可能
レッグサポート高さ (mm)	無段階調整	エレベーター式、カフサポート付
座面角度 (ティルト角度)	0° ~20°	設定により-5° ~20° に変更可能です。
リクライニング角度	90° ~135°	
メインホイール	12in ソリッド	介助ブレーキ付き
フロントキャスター	6in ソリッド	
シートクッション	ウノ	メッシュカバー仕様
バッククッション	ウノ	メッシュカバー仕様
ヘッドサポート	Aタイプ	メッシュカバー仕様
本体重量 (kg)	約32	標準仕様の場合
使用者最大体重 (kg)	130	
フレーム	アルミ製	本体カラー：グレー

- * サイズは採寸の方法により、±10mmの誤差がでる場合があります。
- * 各部の調整範囲は、設計時のサイズです。設定、仕様により調整できない場合がございますので、ご了承ください。
- * 上記は仕様変更などにより、予告なく変更する場合があります。

『ネッティαFB』の故障・修理に関するお問合せ・ご相談は販売店もしくは下記までお願いします。

販売店	フランスベッド株式会社 〒169-0073 東京都新宿区西新宿 6-22-1 新宿スクエアタワー5F  0120-083413 受付時間／平日 9:00～12:00 13:00～17:00 (年末年始・ゴールデンウィーク・夏期休暇は除く)
-----	--