


ottobock.

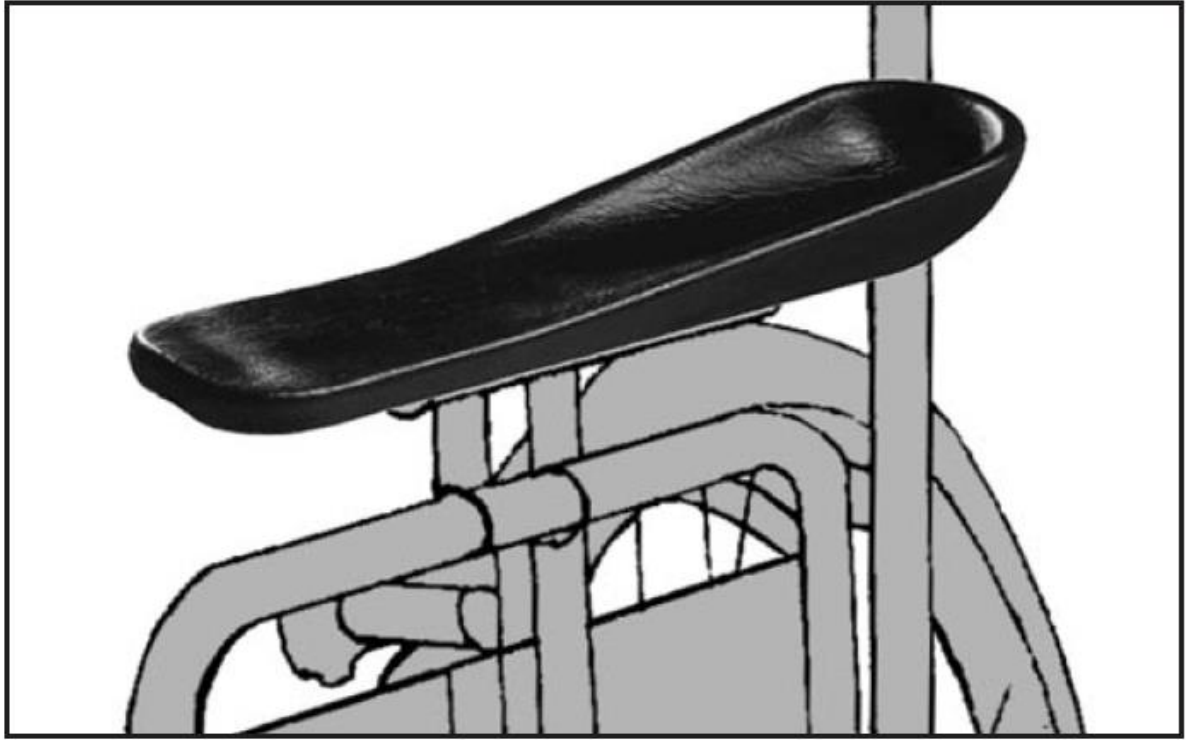

CE

オットーボック ハンドパッド、フォアアームパッド

ご利用の手引き

はじめに

オットーボックのフォアアームパッド及びハンドパッドは、車いすまたは座位保持装置において、ご利用者の前腕を支持し、姿勢の保持をサポートする製品です。オットーボックのフォアアームパッドは、オットーボックのハンドパッドと組み合わせて使用し、麻痺または筋力が低下した上肢(前腕)のサポートを行います。

フォアアームパッドは、ジョイスティックなどの操作を行う際の前腕支持としてもご利用いただけます。



ご注意

本製品はウレタンフォーム製ですので、火気を近付けないでください。
燃焼し、やけど及び火災の原因となる危険性があります。


車いすへの取付方法

フォアアームパッド裏側のアルミ製レールに、付属の角型ナット(①)をセットします。

フォアアームパッドの位置が決まったら、車いす(または座位保持装置)のアームサポート取付パイプ穴からボルト(②)を差込み、角型ナットに締めこみます。

ハンドパッドとの連結方法

アルミ製レールの前方より、付属のプレート(③)を半分くらい差込み、イモネジ(④)x4 個)でプレートを固定します。突き出したプレートにハンドパッドを差込み、同様にイモネジ 2 個で固定します。

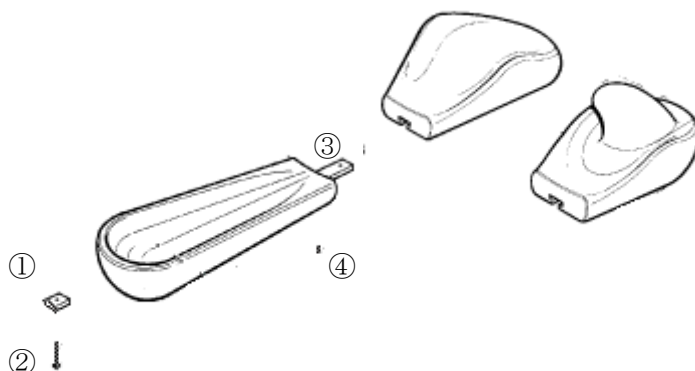

お手入れの方法

パッド部は、水／ぬるま湯、または中性洗剤での洗浄が可能です。洗浄後は、洗剤を確実に洗い流し、乾燥させてからご使用ください。また、パッド部のコーティングが破損している場合は、パッド内部に水分が浸透する恐れがありますので、交換をお勧めします。

製品に関するお問合せは、製品をご購入いただいた販売店、
またはオットーボック・ジャパンまで

オットーボック・ジャパン 株式会社
〒108-0023
東京都港区芝浦 4-4-44 横河ビル 8F
TEL: 03-3798-2111 FAX: 03-3798-2112
モビリティソリューションズ営業部