

このたびは、本品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前に、必ずこの取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、本書はいつでも見られる場所に大切に保管してください。本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組みなどをわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。本品を他のお客様にお譲りになるときは、必ず本書も併せてお渡しください。

**用途**

●本品は、ポータブルトイレのバケツに排泄物処理袋を固定するものです。

○記号の説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて次のマークで表示しています。各マークの意味を十分理解されたうえで使用していただきますようお願いいたします。

**使用上の注意**

**注意**

- 用途以外では使用しないでください。
- 袋止めをバケツに取り付けるときや排泄物処理袋を袋止めに取り付けるときは、フタや便座が倒れないことを確認してください。倒れて指などをはさみ、ケガをするおそれがあります。
- バケツや排泄物処理袋を取り出すときは、フタや便座が倒れないことを確認してください。倒れて指などをはさみ、ケガをするおそれがあります。
- 暖房機の熱風吹出口の前や火のそばなどに設置しないでください。変形や破損、ヤケドの原因となります。


**お手入れ方法**

- 中性洗剤で洗ってください。洗った後は、水分を取ってから風通しのよい場所で陰干しにしてください。変色の原因となります。

**使用方法**

＜袋止めの取付け方＞

- ①バケツの上に袋止めをセットします。
- ②袋止めの穴にある折り返し（8カ所）をバケツのヘリにはめます。  
※しっかり折り返しがはまっているか確認してください。

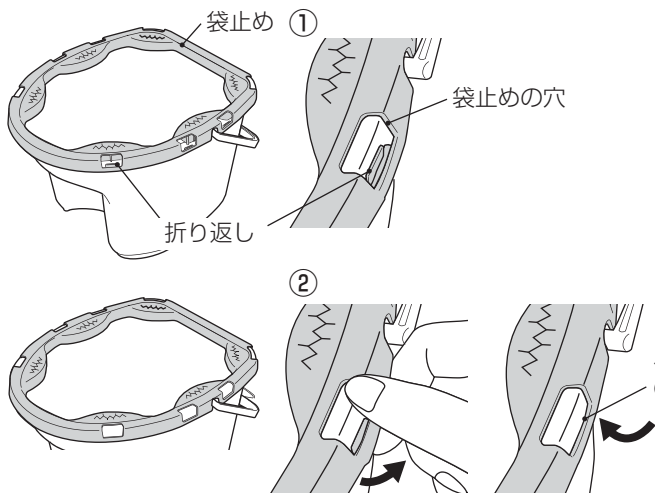

＜袋止めの取外し方＞

バケツのヘリから袋止めの折り返しを1カ所ずつ取り外します。

**別売りパーツについて**

別売りのラククリーンバッグNの購入を希望される方は、販売店または、弊社ウェブサイト内で確認してください。

品番	部品名	
0-19182	ラククリーンバッグN 20枚入	
0-19183	ラククリーンバッグN 抗菌プラス 20枚入	

**仕様**

材質：シリコーンゴム 耐熱温度：140℃  
耐冷温度：-20℃

- 注意** … 取扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながるおそれのあるもの。
- 重要** … 取扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招くおそれのあるもの。

**重要**

- 袋止めをバケツに取り付けた場合、バケツフタはバケツ（本体）にはまりません。
- シリコーンゴム特有の臭いが感じられることがありますが、材料本来の臭いで使用に問題はありせん。

**廃棄方法**


- お住まいの各自自治体の指示にしたがい、処分や廃棄をしてください。
- 地球環境保護のため、指示された場所以外には放置しないでください。

＜排泄物処理袋の取付け方＞ 市販の排泄物処理袋が使用できます。

＜取付可能排泄物処理袋サイズ＞

推奨：間口55cm以上、高さ38cm以上。

- ①袋止めが取り付けいたバケツを汚水受けにセットします。バケツの内底に袋をつけ、袋の端あたりを袋止めのストッパー部（6カ所）に差し込みます。
- ②袋の端は2～3cm残るようにして差し込んでください。差込みが浅いと袋が落ちるおそれがあります。  
※2～3cm残した袋の端は外側に折り返してください。また、便座をおろしたときに袋の端がめくれていないか確認してください。

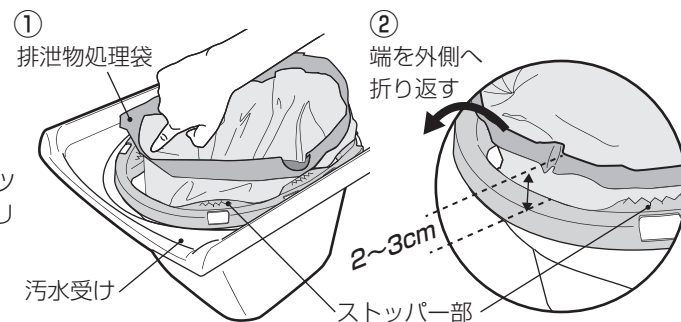

＜排泄物処理袋の取外し方＞

袋止めのストッパー部から袋を1カ所ずつ取り外します。

製品の的外観および仕様は、品質向上のため予告なく一部変更する場合があります。この商品の品質で、お気づきの点がございましたらお手数ですが下記までご連絡ください。

**株式会社 リッチェル**

富山市水橋桜木136 〒939-0592  
お客様相談室/TEL(076)478-2957  
受付時間:9:00~17:00(土日、祝日を除く)  
www.richell.co.jp  
Designed by Richell Corp., Japan  
MADE IN CHINA

