

回って止まって 前後にスライド！テーブルにピタッ！


ご使用の前に必ずお読みください

ピタットチェア 20

取扱説明書

この度は当社の製品をお買い求め頂き誠にありがとうございます。
下記の説明書をよくお読みになりご使用ください。
この説明書はいつでも見れるように大切に保管してください。
また、この商品を第三者に譲渡されるときには
必ずこの説明書を一緒にお渡しください。

本製品は、軽い力でテーブルにピタッと近付ける様に本体を回転、
スライドさせられる機能を付加した製品です。
高齢者や障害者の方の自立と、介護される方の負担軽減の
お役に立てますことを願って開発いたしました。

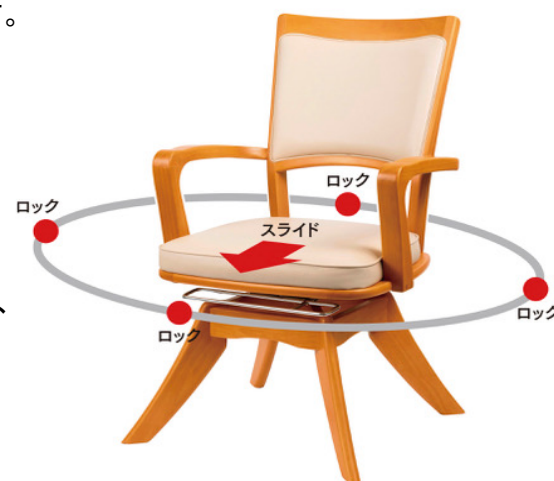

■ご使用になる前に

- 製品に破損個所がないか点検してください。割れ、ヒビ等の破損個所が見られた場合
すぐに使用を中止してください。
- 回転レバーを押えロックを解除し90度ごとにロックされるか確認してください。
- スライドレバー(前)、スライドボタン(後)を操作し、ロックを解除し前後12cmスライドし
確実にロックが掛かることを確認下さい。

■設置場所について

- 椅子が安定しない場所、滑りやすい場所には設置しないでください。
- 椅子の本体(上部)が回転、スライドします。周囲に障害物がない所で使用ください。
- 直射日光や暖房器具の近くには設置しないで下さい。変形、変色の恐れがあります。


■使用上の注意

- 椅子本来の目的以外で使用せず、正しい方法でご使用下さい。
- 椅子に座る時は座シートになるべく深くお座りください。
前側や左右に傾いて座ると回転やスライドがスムーズに動きにくくなります。
- 椅子本体の回転、スライドをさせる場合、必要以上の強い力で動かすと転倒や
椅子の破損につながる場合がありますのでお控えください。
- 椅子本体の回転とスライドを同時に動かさないでください。
- 回転レバー部、スライドレバー部の金物等の取付ネジ類は緩んでいないか
時々点検し緩んでいれば締め直してください。
- 本体、肘、脚部は木製で塗装されています。シンナーやベンジン等は塗装部を
傷めますので使用しないでください。
- 座シート・背シートは合成皮革製です。お手入れは柔らかい布で軽く拭いてください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤か石鹸水をぬるま湯で薄め布等でよく絞って拭き、
乾いた布で拭き取ってください。
- 脚部が床面を傷つけるような場合は、付属部品の脚裏フェルトを貼ってご使用くだい。
- 回転、スライドともに必ずロックが掛かっていることを確認して立ち座りをして下さい。
- 介助者が後から操作し、前へスライドさせる際、テーブルと肘掛けの間に手を挟まない様
慎重にゆっくり操作して下さい。
- 小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、操作時に充分ご注意下さい。

機能説明 動画



レバー操作の特徴

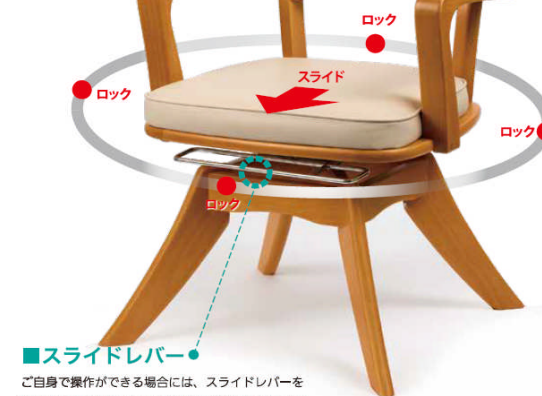


■スライドレバー

ご自身で操作ができる場合には、スライドレバーを
引き上げることでロックが解除し前後に12cmスラ
イドし自動的にロックします。車のシート調整と同
じ操作なので直感的な操作が可能です。

■介助者用 スライド ボタン

サポートの方が座面を前後にスラ
イドする場合に、ボタンを押しロックを
解除しながら座面を押し引きできます。

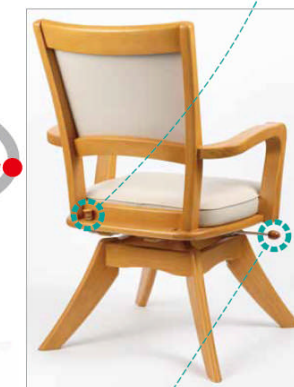

■回転レバー

回転レバーを押すことでロックが解除さ
れ、90度ごとに回転が自動ロックします。
レバーの左右位置をお選び下さい。

■使用方法

- 床の傷防止用フェルトを同梱しております。ご希望により脚裏に張り付けて
ご使用下さい。



●椅子を回転させる場合

- ①左右どちらかにある回転レバーを下へ押すことでロックが解除されます。
- ②ロックが解除された状態でご希望の方向へ少し回し、レバーから手を離します。
- ③「カチャッ」と音がしロックが掛かる(90度)ところまで回します。

●椅子本体(上部)を前後にスライドさせる場合

スライドレバー(前)を使う場合

- ①スライドレバー(前)を手で上へ引くとロックが解除します。
- ②ロックが解除された状態で前または後ろへ少し動かし、レバーから手を離します。
- ③ロックが掛かるところ(12cm)までスライドさせると「カチャッ」と音がし
レバーがもどりロックが掛かります。

スライドボタン(後)を使う場合(介助者の方用)

- ①スライドボタン(後)を指で下へ押すとロックが解除します。
- ②ロックが解除された状態で前または後ろへ少し動かし、ボタンから手を離します。
- ③ロックが掛かるところ(12cm)までスライドさせると「カチャッ」と音がし、
ボタンがもどりロックが掛かります。

注意！

- 必ずロックが掛かったことを確認し立ち座りを行ってください。
- スライド操作をする場合、テーブルと肘掛けのすき間に手を
挟まない様、確認しながら慎重にゆっくり操作して下さい。
- シートに浅く座ったり、左右に傾いて座るとスライドする際、
操作が重くなります。なるべく深く、まっすぐに座ってください。

お手入れについて

□椅子本体

●合成皮革のお手入れの際は柔らかい布で汚れをふき取ってください。

汚れがひどい場合は中性洗剤か石鹼をぬるま湯で薄め、よく絞った 布かスポンジで拭き取り、次に乾いた布で拭き取ってください。

●木製部はシンナーやベンジン等は塗装表面を傷めますので使用しないでください。

□回転部

●脚取付ネジ4本に緩みがある時は、六角レンチでネジを固定してください。

●回転レバーも緩みがある時は、回して固定してください。

□スライド部

●各取付けネジ部に緩みがある時は、六角レンチ・ドライバーでネジを固定してください。

●スライド樹脂には潤滑油が塗布されています、スライドの動きが悪くなった時は、

市販のグリスをアルミプレートに塗っていただくか、販売店にご連絡してください。

警告

火気の近く、ホットカーペットの上等では、使用しないでください。火災等の原因になります。

床が水平で段差がなく、床面の強度の十分な場所でご使用ください。

傾いた所でのご使用は危険ですのでしないでください。

本製品は「椅子」以外の目的で使用しないでください。

注意

立ち座りの際には回転部とスライド部が確実にロックが掛かった事を確認してご使用ください。

回転とスライドは同時に使用しないでください。

回転、スライド時に必要以上に勢いをつけると転倒やケガ、椅子の破損につながる場合がございますのでお控えください。

各部のネジ等が緩んだ状態で使用しないでください。

人が座った状態で移動させないでください。

直射日光、高温の場所では使用しないでください。

品質表示		品名	ピタットチェア 20		
椅子 本体、脚部	ラバーウッド・アミノアルキド塗装	タイプ	寸法	重量	
座、背シート	合成皮革、ウレタン	標準	SH440、W556、D590、H905	15.0kg	
回転部	鋼板	低座面	SH390、W556、D583、H855	14.5kg	
スライド部	アルミ、鋼板				
樹脂部品	ナイロン樹脂				

●保証期間

この製品の保証期間は通常の状態で使用された場合、ご購入から1年間で致します。

保証期間内での故障、破損に関しましては無償にて修理、交換または代替え品への交換を保証させていただきます。

PL生産物賠償責任保険付



株式会社 オフィス・ラボ

〒791-1106

愛媛県松山市今在家4-9-32

電話 089-958-2483 FAX 089-958-2109

販売店

便利なオプションのご紹介

回転用ロングレバー

KC-LL

3,000円(税別)



介助用スライドレバー

PT-KJL

3,000円(税別)



ピタットクッション

PT-CS

19,800円(税別)



カラーバリエーション>>>

■ピンク(PK)



■ベージュ(BE)



座布団仕様

■グリーン(GR)



ヘッドレスト

PT-HDR20

19,800円(税別)



2020年10月
発売予定

高さ調整



2か所角度調整



※取付作業が必要です。