

特殊寝台付属品 **フューランダム S&H80**

取扱説明書

このたびはフランスベッドの製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。



注意

正しく安全にご使用いただくためにこの取扱説明書をよくお読みいただいた上で、ご使用ください。
また、いつでもご覧いただけるように大切に保管して下さいようお願い申し上げます。

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただくために、下記の絵表示を示しています。
その表示と意味は次のようになっています。内容をよく確認してから本文をお読みください。



注意

記載されている内容を無視して、誤った取扱をすると、人が傷害をおう可能性や製品が破損する恐れのあることを示します。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。
(～してはいけません。)



この記号は行為を指示する内容を告げるものです。
(～してください。)

安全のために必ずお読みください



注意

マットレスの上で、飛び跳ねないでください。
ケガをしたり、破損の原因になります。
マットレスの上での喫煙はお止めください。
火災の原因等になることがあります。
マットレスの上での突起物(ハサミ、ナイフ等)の使用はお避けください。破損の原因になることがあります。



経年劣化により著しく変形、へたりが発生した時は使用をお止めください。
直射日光の当たる場所は避けてください。
変形、変色の原因になります。
突起物等のない平らな場所に設置してください。
破損の原因になります。
高温多湿な場所は避け、湿気がこもらないよう壁から5cm以上離して設置してください。




使用上の注意

○使用しているうちに多少のへたりが発生することがありますが性能上問題はありません。
○アンカ、こたつなどを高い温度(85℃以上)で長い時間放置しますと変形する恐れがありますのでご注意ください。

お手入れ マットレスを長持ちさせるために

○マットレスのお手入れは、カビ、臭い等を防ぐために時々寝装品を取り除き、風通しの良い所で陰干してください。
○汚れた場合は埃を払い落とし、中性洗剤を水で薄めた物を布に含ませ、硬く絞りこすらずたたくように落としてください。
○側地は取り外してご家庭で洗濯できます。
側地にファスナーが付いていますので、側地だけ取り外して洗濯することができます。

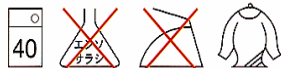

主な仕様

サイズ
全幅 85×全長195×厚さ8cm 重さ:約 5.5kg
全幅 85×全長181×厚さ8cm 重さ:約 5.0kg
全幅 85×全長170×厚さ8cm 重さ:約 4.7kg
全幅 103×全長195×厚さ8cm 重さ:約 6.5kg
表地 : ナイロン80%/ポリエステル20%
詰物 : ウレタンフォーム



注意 必ずお守りください

火または温度の高いものに近づけないでください。
シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだもの及び漂白剤などは使用しないでください。表地を傷める場合があります。



アフターサービス 修理を依頼される時は

修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合はお買い上げ店又は、下記へご連絡ください。

販売元

フランスベッド株式会社
0120-083413

- ご連絡いただき対内容
- ・ご住所、ご氏名、電話番号
- ・製品名、お買い上げ店名、お買い上げ年月日
- ・故障又は異常の内容(できるだけ詳しく)

製造元 エフ・アイ・ティー・パシフィック株式会社 03-5820-7021