



プルストップ式 ステッキ

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げ
頂きましてありがとうございます。

より正しく安全にご使用頂く為に
ご使用前に必ずこの「取扱説明書」を
お読み下さい。また、お読み頂いた後は
大切に保管してください。

この説明書の他に説明書やタグが
付属している場合は、それらと一緒に
保管をお願いします。



SGマーク制度は
製品の欠陥によって発生した
人身事故に対する賠償制度です

TechnoCare

快適なウォーキングライフを応援



お買い上げ頂く前にお読み下さい

棒状つえは、つえ無しで自立歩行できる人が
より安定して歩行できるよう補助的に使用する
ものです。

次のような場合の使用には適しません(体重
をかけすぎたりすると、かえって肩や手を痛め
ることがあるからです。)

また、購入時はそうでなくても、次のような状態
になった場合は、使用しないで下さい。

- ① つえ無しでは、歩行できない方の使用(手摺
に伝わらなければ歩行できない方や、介助
者に手伝わってもらわなければ歩行できない
方の使用が含まれます。)
- ② リハビリ中などのように、体重の一部を支え
ないと歩行できない方。ただし、医師などの
指導のもとでの使用は含みません。

日本製

一製造販売元一

有限会社テクノケア

〒347-0105 埼玉県加須市騎西 1290-1

TEL・FAX 0480-73-6644

http://www.techno-care.co.jp

製品の品質保証

本製品におきましては、厳密な検査を経て
皆様のお手元に届いておりますが、万が一、
お買い上げ頂いた製品が通常の使用状態に
おいて保証期間中に品質、製造上の不備に
より故障、破損した場合は、当社にて無償で
修理または、同等品と交換させていただきます。
ただし、次の場合は、保証期間内であっても
無償サービスから除外されます。

- 消耗箇所の損傷によるもの。
- ご使用中に過度な衝撃、外力をシャフトが
受けた場合。
- 転倒、衝撃などの過度の衝撃によって破損
した場合。
- 破損現品に、シャフトの破損の原因となるよ
うな多くのキズや摩耗が見受けられた場合。
- 誤った使用による故障、損傷。
- 不当な修理または改造による故障、損傷。
- 火、熱などによる外的要因による変形。
- その他、当社判断により保証対象とみなさ
れない場合。

また原則として、一度使用したものは、製品の
お取り替えはできません。

アフターサービス

保証規定に基づく無償修理期間を経過した
商品、及び期間内での無償修理対象外の
修理については当社有償修理に従い、修理
またはパーツを発送させていただきます。
アフターパーツに関しては、生産終了後5年間
は、保有していますが、在庫がなくなった場合
はやむを得ず一部代替え部品を使わせて頂く
ことがありますのでご了承ください。

製品の保証期間は、お買い上げ後1年間

ご購入年月日	年	月	日
ご購入販売店名			
ご購入販売店住所 (〒 -)			
TEL.() -			

使用上の注意事項



安全にご使用頂く為に 必ずお読みください。

- ◆ 自分の身体に合ったものをお選びくだ
さい。
- ◆ ご使用前後やご使用中に各部を点検
してください。確認しないでご使用され
ますと、思わぬケガをする恐れがあり
ます。《グリップのキズやヒビ、シャフト
のキズ・曲がり、ボタンの不具合、
各部のガタつき、先ゴムの異常など》
万が一、異常が認められた場合は、
使用しないでください。
- ◆ グリップの先端に、過大な力をかけるよう
な使用はしないでください。
- ◆ グリップは、支柱に指を添えて正しく握っ
てください。また前後に極端に斜めにして
使用しないでください。危険です。
- ◆ 小石や段差のフチなどに先ゴムを乗せな
いください。接地の不安定な状態での
使用は危険です。地面に先ゴム全体を乗
せ安定するのを確かめてご使用ください。

- ◆ 道路の側溝や凹みがある箇所では、杖
先がはまり込む危険があるので、十分ご
注意ください。
- ◆ ステッキは、歩く為の補助具です。
全体重をかけて使用しないでください。
- ◆ 柔らかな地面や、雪道、滑りやすい路面
等では使用しないでください。段差にも
ご注意ください。
- ◆ 先ゴムは、使用しているうちに消耗してき
ますので、ご使用前に点検をし、お早めに
交換してください。破れたり、磨耗したり等
の異常がある場合は、速やかに取り替え
てください。また、先ゴムは、必ず装着し
てください。
- ◆ 用途以外(例えば、登山用、護身用等)
には使用しないでください。また、危険で
すのでステッキで遊ばないでください。

⚠️ ご注意

切断してサイズを調節する場合は、最下
段のパイプを7cm以上残してください。
切断する場合は、販売店又は製造元に
お申し付けください。(お客様ご自身では、
カットしないでください。)

お手入れ及び保管方法

- ◆ ジョイント部の汚れやゴミ等の付着物は、
きれいに拭き取ってからご使用、保管を
お願いします。
- ◆ 使用後は、水分や汚れ等を拭き取り、
先ゴムや本体に付いた泥や汚れなどは、
そのまま放置しないで必ずよく絞った布で
拭き取ってください。
- ◆ 通常の汚れは、柔らかい布で乾拭きして
ください。油污れは、水でうすめた中性
洗剤に柔らかい布を浸し、かたく絞って
から拭き取り、更に柔らかい布で乾拭き
してください。
- ◆ 雨などにぬれた場合は、使用後水気を
良く拭き取り、乾燥させてください。湿っ
たまま放置すると錆び等の恐れがあります。
- ◆ 使用後は屋内に保管してください。その際
は、高温・多湿の場所には置かないくだ
さい。暑くなる場所や凍結するような場所
は、お避けください。

- ◆ 長期間使用しない時は、ジョイント部分の
張力を保つためシャフトは折りたたまず、
伸ばした状態で保管してください。
- ◆ お子様の手の届かない所に保管してくだ
さい。
- ◆ アクリル樹脂製品は、カラフルな色合い
が特徴ですが、表面は傷つきやすいので、
注意が必要です。
絶対にシンナー、ベンジン、アルコール
などの揮発性のある溶剤を含む薬品は、
使用しないで下さい。細かいヒビが入る事
や白く変色する事があります。

(財)製品安全協会が定めた認定基準に
適合しており、安心してお使い頂けます。



SGマーク制度は、製品の欠陥により発生
した人身事故に対する賠償制度です。
※ 保証期間は、ご購入後3年間です。

素材について

【アルミニウム シャフト】

軽くて強度があり、耐食性に優れた金属素材ですが、大きな衝撃や力を受けて、シャフトが凹んだり曲がったりした場合は、破損する恐れがありますのでご注意ください。

【布巻 シャフト】

表面仕上は、アルミニウムに布(生地)を巻いて特殊コーティングした仕上げです。

【木製 グリップ】

木が持つ色合いやぬくもり感、年輪を楽しんで頂ける素材です。大きな衝撃や力を受けた場合、ヘコミや破損する恐れがありますので、ご注意ください。

【メタクリル樹脂(アクリル) グリップ】


カラフルな色合いと透明感が特徴のアクリル。光に当たっても色あせしにくいですが、表面がとても傷付きやすいので注意が必要です。絶対にシンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性のある溶剤を含む薬品は、使用しないで下さい。細かいヒビが入る事や白く変色する事があります。

特徴

- 折り畳み式ステッキは、コンパクトに折りたたみができ、カバンなどに収納できるので携帯に便利です。
- ワンタッチで折りたたため、折りたたんだ状態が保持できます。(特許 第3876418号)
- 連結部にゴムひもを使用していないので、破損しにくくなっています。
- 長さ調節機能付き(伸縮)ステッキは、身長サイズに合わせて調節ができるものです。靴のヒールの高さが様々な方にもおすすめです。


本製品について、お気づきの点や不明な点がございましたら、ご購入頂きました販売店又は、当社までお問い合わせください。

各部の名称

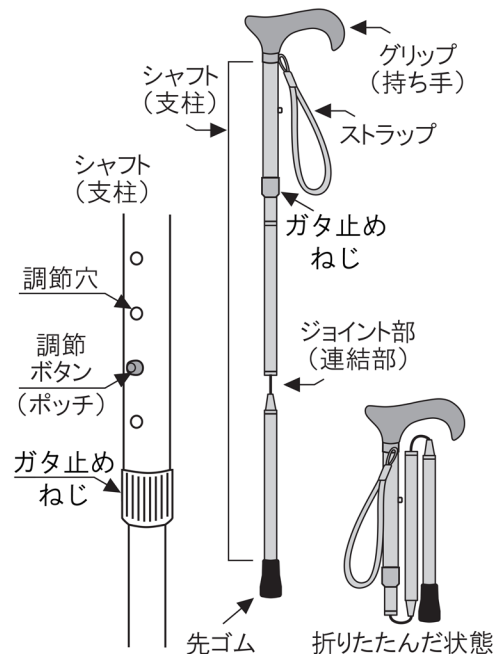

グリップの握り方

T字の付け根の部分をしっかりと握って下さい。

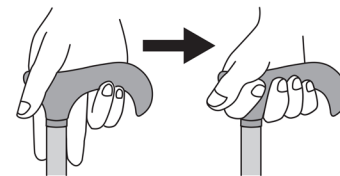

人差し指と中指でまたぐようにして、グリップ全体を握って下さい。



危険


グリップの一部だけを握ると、荷重がかたより支柱が折れる危険があります。また、思わぬ事故につながる恐れもありますので、絶対におやめ下さい。

正しい長さの選び方

ステッキは、自分にあった長さに合わせてお使いください。

ステッキの身体に一番近い脚先を足先の前外方向20cmに置いた時、肘の角度が30～40度になる長さが使いやすい長さの目安です。

前方外側
20cm

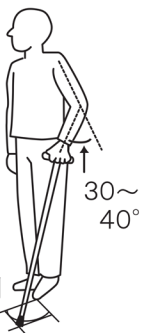


◆身長と杖の長さの目安値(単位:cm)

身長	長さ	身長	長さ	身長	長さ
142	74	158	82	174	90
146	76	162	84	178	92
150	78	166	86	182	94
154	80	170	88	186	96

※ 姿勢やヒールの高さ、腕の長さ・体型等により個人差がありますので、ご注意下さい。


長さ調節のしかた

- ①ガタ止めねじを半回転ほどゆるめます。
- ②ボタン位置が真つすぐに上下するように持ち調節ボタンを押しながら、下側のシャフトを上下に動かし、長さを調節します。
- ③調節ボタンが、調節した調節穴にはまっていることを確認し、ガタ止めねじをしっかりと締め、固定してください。

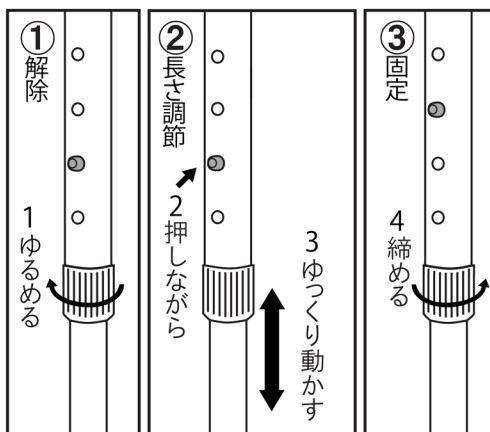


ご使用方法<組み立て方>

- ①ジョイント部(連結部)の両サイドを持ちます。

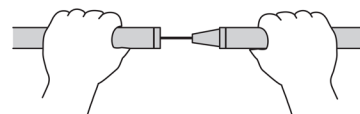

- ②連結部分を差込み、カチッと音がするまで押し込みます。

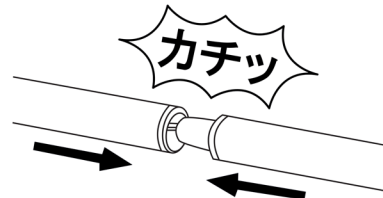

⚠ ご注意


ジョイント部(連結部)に汚れやゴミ等の付着物が付いたまま使用を続けた場合、抜けにくくなったり連結部にキズが付く場合があります。定期的にきれいに拭き取ってからご使用、保管をお願いします。

ご使用方法<たたみ方>


- ①ジョイント部(連結部)の両サイドを持ち、左右にカチッと音がするまで引きます。



- ②ジョイント部(連結部)のワイヤーが、もとに戻らない事を確認してください。

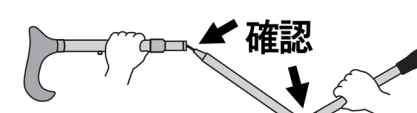

- ③そのまま折りたたみます。

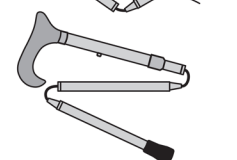

⚠ ご注意

ジョイント部のワイヤーが張っている状態では絶対に折りたたまないでください。外装に傷がつく事があります。