

ベッドフレーム 組立・取扱説明書・保証書

型式名 プレオックス F (SC) プレオックス R (1M)

このたびはフランスベッドの製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

⚠ 注意

正しく安全にご使用いただくためにこの組立・取扱説明書をよくお読みいただいた上で組立て、ご使用下さい。また、いつでもご覧いただけるように大切に保管して下さいようお願い申し上げます。

も く じ

安全のために必ずお守り下さい	1
SCタイプ	
部品一覧	5
各部のなまえ	5
SCタイプ方法	6
1Mタイプ	
部品一覧	8
各部のなまえ	8
1Mタイプ方法	9
快適にお使いいただくために	11
コントローラーの使い方	12
サイドレール・ベッド用グリップについて	13
お手入れ	14
保守点検	14
こんな時には	15
アフターサービス	16
保証書	18
お客様相談室	裏表紙
商品仕様	裏表紙

安全のために必ずお守り下さい

絵表示について この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使い戴くため、下記の絵表示をしています。その表示と意味は次の様になっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

⚠ 警告

記載されている内容を見逃して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性があることを示します。

⚠ 注意

記載されている内容を見逃して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や製品が破損する恐れのあることを示します。



この記号は禁止の行為であることを告げるものです。
(～してはいけません。)



この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。
(～下さい。)




絵表示に対する行為を禁止することを告げるものです。

⚠ 警告

使用上の注意

ベッドの操作を行う際には、寝ている方やベッド周辺の安全を確認しながら操作して下さい。何らかの危険を感じた時には、すぐに操作を中止して下さい。
ケガをしたり、故障の原因となります。

⚠ 警告

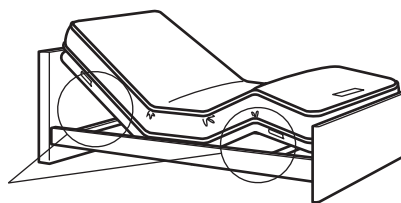

小さなお子様や取扱説明書・警告ラベルの内容が理解できない方がご使用になる場合は付添いの人が操作を行って下さい。

取扱説明書・警告ラベルには安全に使用する上で重大なことが書かれており、この内容が理解できない人が操作しますと、事故の原因となります。




御使用になる前に、体に不安のある方や現在治療中の方はかかりつけの医師に相談してからお使い下さい。

ベッドの背上げ、脚上げ機能を利用することで症状を悪化させる可能性があります。



分解改造しないで下さい。
破損してケガをする恐れがあります。

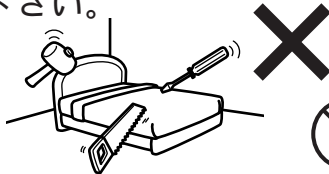

本製品は1人用ですので2人以上では使用しないで下さい。

重大な事故の原因になります。




ベッドを操作する際には、寝ている人の頭がヘッドボード側にあり、仰向けに寝た状態で行って下さい。

寝姿勢によっては身体に無理がかかりケガをする恐れがあります。



電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないで下さい。

感電・ショート・火災の原因になります。

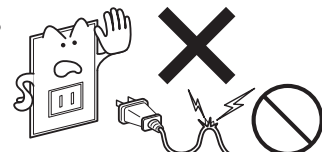

背上げ、脚上げした状態で背部や脚部に立ったり腰掛けたりしないで下さい。

ケガをしたり、破損の原因になります。



ベッドの下や背上げたトコイタとフレームの間には入らないで下さい。

ケガをしたり、破損の原因になります。




警告

使用上の注意


ベッドの周辺には危険物を置かないで下さい。

ベッドから落下した時（ねぼけ等で）ケガをする恐れがあります。

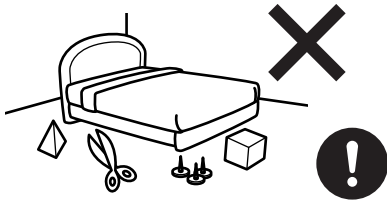

ベッドの近くでストーブ等を使わないで下さい。

引火して火災になる恐れがあります。

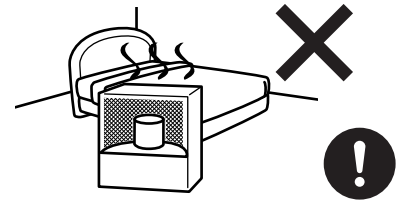


ベッドの上での喫煙はお止め下さい。

火災の原因等になることがあります。



ベッドの上で、飛び跳ねないで下さい。

ケガをしたり、破損の原因になります。

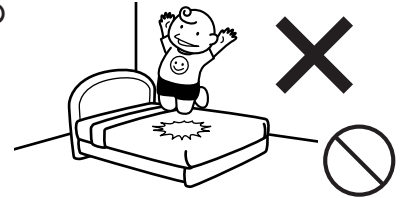

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったり、たばねたりしないで下さい。

又、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないで下さい。

電源コードが破損し、感電や火災の原因となります。



注意

設置上の注意


組立ててからの移動は困難になります。

ベッドの設置場所の上部に落下物を置かないようにして下さい。


地震時等に落下物でケガをする原因になります。




部屋の中でコンセントの位置、家具の引き出し、扉等の開閉に支障がないことを確認して下さい。

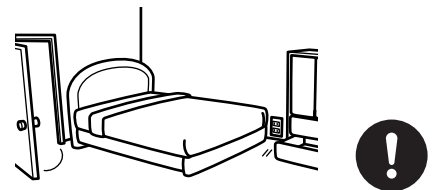


高温多湿な場所は避け、湿気がこもらないように、またベッドにより壁を傷つける場合がありますので、壁から5 cm以上離して設置して下さい。

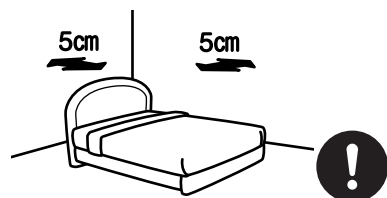

ベッドの重量（商品仕様参照）に十分耐えられる床の強度を確保して下さい。又、床の材質によっては、ベッドの接地面が傷ついたり、きしみ音が出ることがありますので、極力カーペット類を使用して床面の保護を行って下さい。

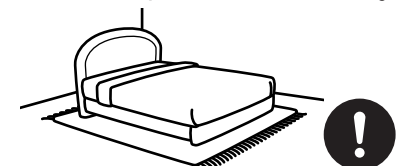


平らな場所に設置して下さい。ガタツキや異常音など故障の原因になります。

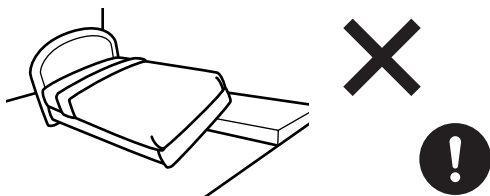

直射日光や、エアコンからの風が、直接ベッドに当たる場所は避けて下さい。


品質変化による変形・変色・ひび割れなどの原因になります。

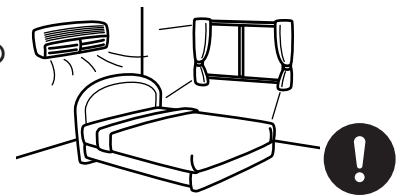


⚠ 注意

使用上の注意


妊娠中の方や極度に肥満体の方は、ご使用に際し十分注意してご使用下さい。

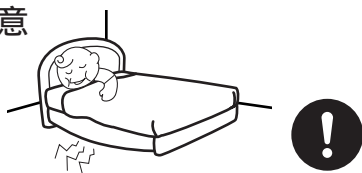


介護・就寝以外での使用はしないで下さい。
重大な事故の原因となります。

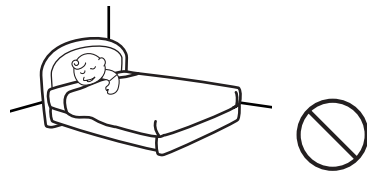

最大使用者体重は100kgです。
それを超える体重の方は使用しないで下さい。
ベッドの破損や重大な事故の原因となります。

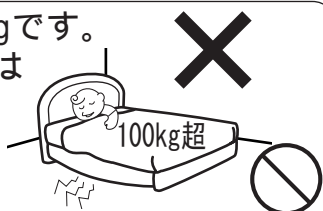


新しいうちは素材の臭いがある場合がありますので、気になる方はお部屋の換気を十分にしてお取り除いて下さい。

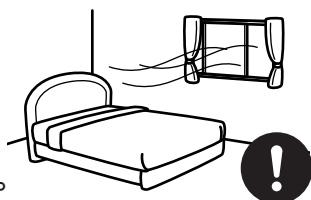


ベッドの下や周辺は除湿をし、定期的に掃除や換気をして下さい。

埃や湿気の滞留はカビ発生の原因になります。
壁などの近くでのご使用は特にご注意下さい。

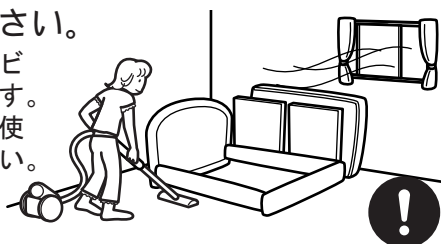

殺虫剤、シンナー、灯油、ベンジン、ガソリン等の有機溶剤で拭いたり、直接吹き付けしないで下さい。


フレーム部分の変色や色あせの原因になります。

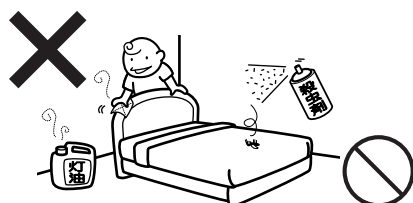

ベッドフレーム類には、無理な力を加えたり、強い衝撃を与えないで下さい。


特に、ヘッドボード、フットボードには乗らないで下さい。

転倒や破損してケガをする原因になります。

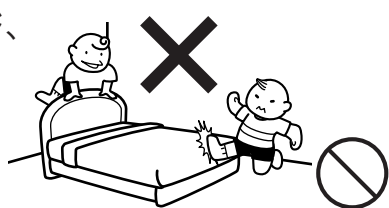


ベッドフレームの上には、必ず当社指定の専用マットレスを載せてお使い下さい。

当社の専用マットレス以外を載せてお使いになると破損してケガをする場合があります。

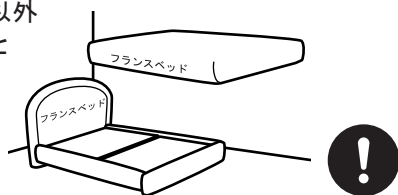


ベッドフレームにはデザイン上の凹凸、隙間がありますので、周囲を移動、及び乗り降りする際は注意して下さい。

引っかかり、挟んだりしてケガをする恐れがあります。

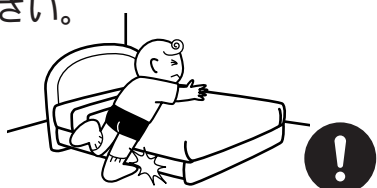

マットレスを載せていないベッドフレームの上には、直接乗らないで下さい。


破損してケガをする恐れがあります。

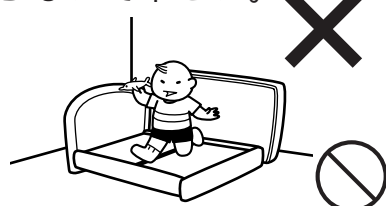


ベッドを持ち上げる場合は、必ず2人以上で行って下さい。

絶対に引きずらないで下さい。

床が傷ついたり、ベッドが破損する原因になります。

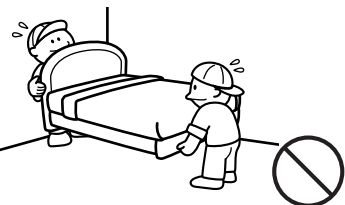


ベッドの設置場所を変える場合は組立順序の逆の手順で取り外し移設して下さい。

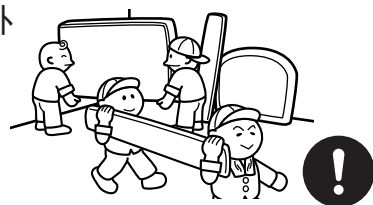

マットレスには向きがあります。


必ずマットラベルをフットボード側にして下さい。

曲げられなくなります。

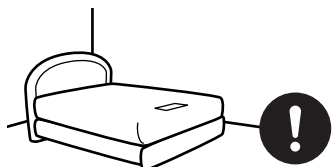

マットレスは、無理に折り曲げないで下さい。

変形や破損の原因になります。

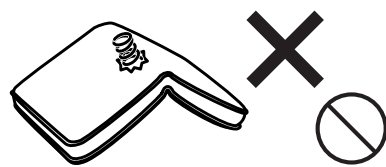


⚠ 注意

使用上の注意


背上げ、脚上げの状態のままで長時間（就寝の際など）使用しないで下さい。
ベッドの破損や重大な事故の原因となります。




交流100V以外では使用しないで下さい。
感電や火災の原因となります。

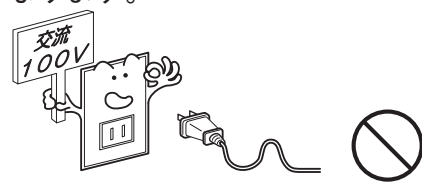


電源プラグや電源コード及びコントローラーには濡れた手で触らないで下さい。
感電する恐れがあります。

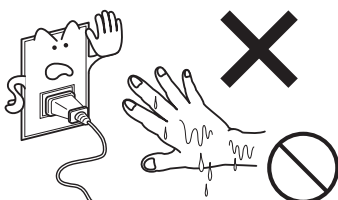


電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って抜いて下さい。
コードが破損し感電・火災の原因になります。

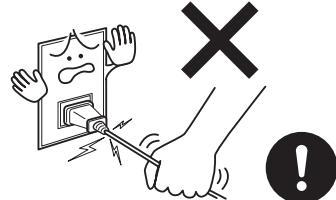


ベッドの電源はなるべく直接コンセントから取って下さい。
コンセントや延長コードの容量を越える電気製品を同時に接続使用しないで下さい。
電源コードや電源プラグが発熱する恐れがあります。

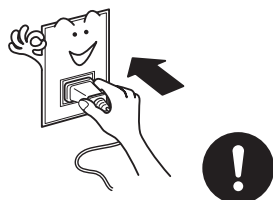


ベッドを動かす場合や長期間使用しない場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて下さい。
絶縁劣化による感電や漏電・火災の原因になります。

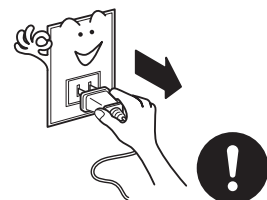

電源コード及びコントローラーのコードを無理に曲げたり、つぎ足したり、リクライニング部にはさんでりしないで下さい。
コードが破損し感電・火災の原因になります。

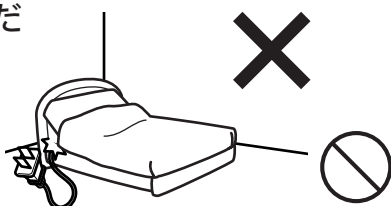

電源コードの上に重い物を載せたり、コードがベッド（レッグやキャスター等）の下敷きにならないようにして下さい。
コードが破損し感電・火災の原因になります。

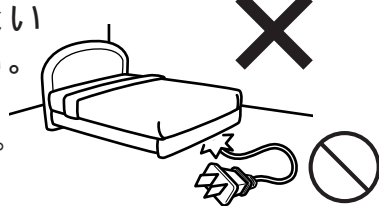

コントローラーの操作ボタンは、同時に2つ以上押さないで下さい。
加熱や故障の原因になります。



コントローラーはふとんの中に入れないで下さい。
加熱や故障の原因になります。




モーターやコントローラーに水やジュースなどの液体をこぼさないで下さい。
感電や故障の原因となります。



しばらく使用していなかった場合は、必ず人が乗る前にベッドの作動が正常かつ安全であることを確認して下さい。
作動が異常ですと、思われぬ事故の原因になります。



背上げ、脚上げなどの電動操作を長時間（2分以上）連続で行わないで下さい。
連続運転の為モーターが熱を持つとモーターの過熱防止保護回路が働きモーターが動かなくなります。
次に使用する時は十分に時間をおいてから使用して下さい。

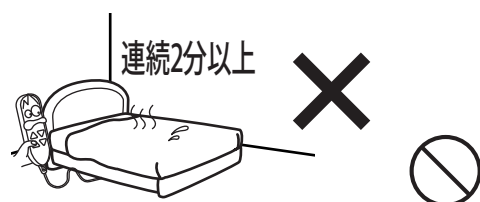

部品一覧

組立を行う前に、次の部品が揃っているかお確かめ下さい。



部品名称	部品数	梱包数
ヘッドボード	1	1
フットボード	1	
小ネジ (M8×45 [≒] _リ)	4	
小ネジ (M8×20 [≒] _リ)	4	
ナット	4	

部品名称	部品数	梱包数
サイドフレーム	2	2
トコイタ	2	1
マットレス	1	1

No.153272-0

各部のなまえ

SCタイプ

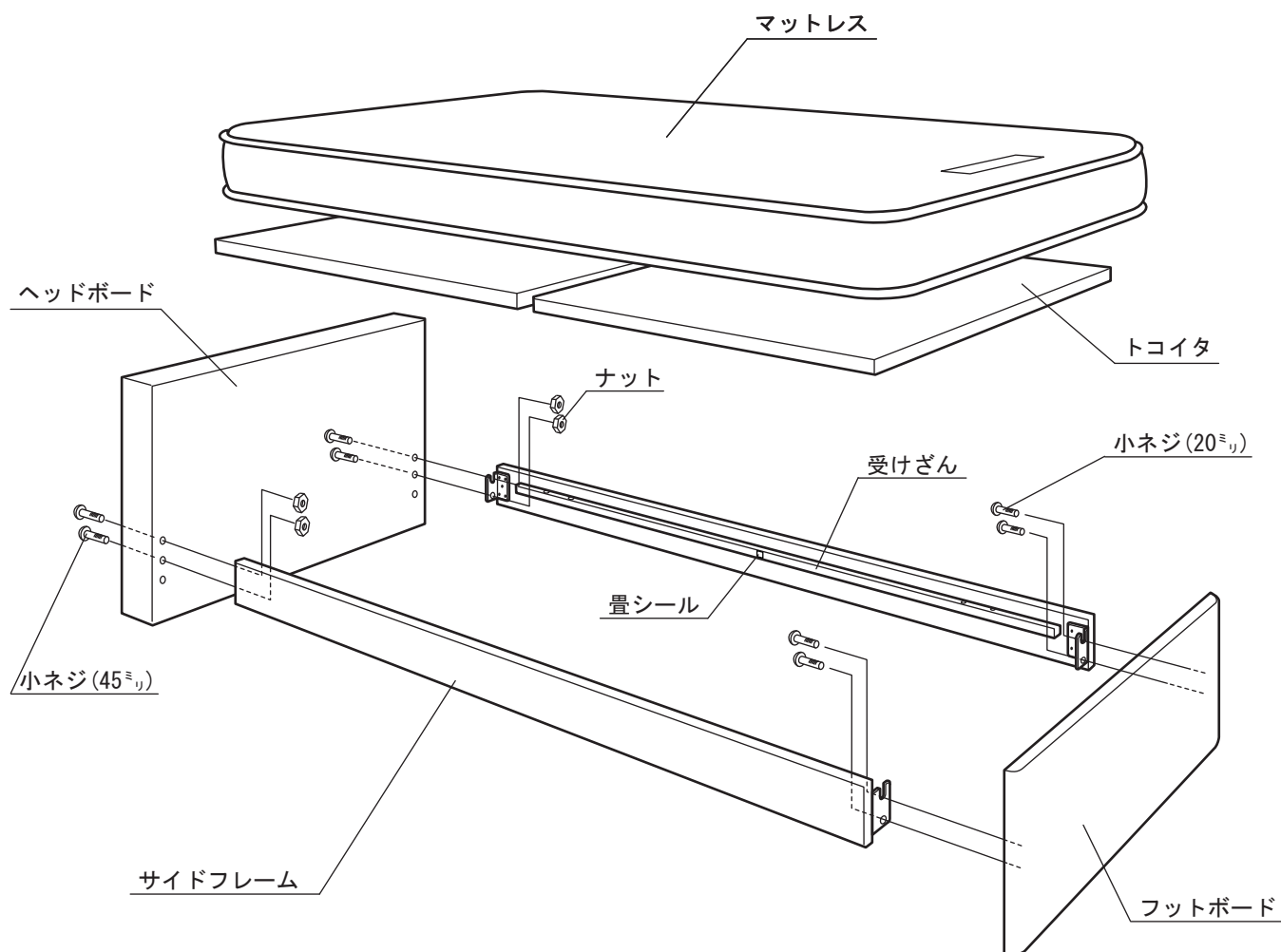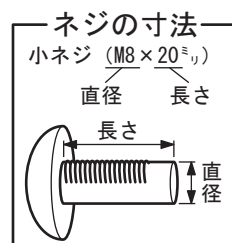

型式によりデザイン形状は異なります。

組立方法

SCタイプ

型式によりデザイン形状が異なりますが組立方法はおなじです。

組立を行う前に

ベッドを置く位置を決めます

- ・ 頭側の向きを確認して下さい。
- ・ 部屋の中でコンセントの位置及び、家具の引き出し、扉等の開閉に支障がないことを確認して下さい。
- ・ ヘッドボードは、頭側に置いて下さい。

⚠ 注意


2名以上で組立作業を行って下さい。
ケガをしたりベッドを破損する原因になります。

※ 組立には、プラスドライバーをご用意下さい。


組立順序

1 ヘッドボードとサイドフレームを仮組みします


- ・ 下図を参考にサイドフレームの向きを確認して下さい。
- ・ 「畳シール」の矢印が下を向くようにして組立ます。
- ・ 左右同じ向きで組み立てて下さい。

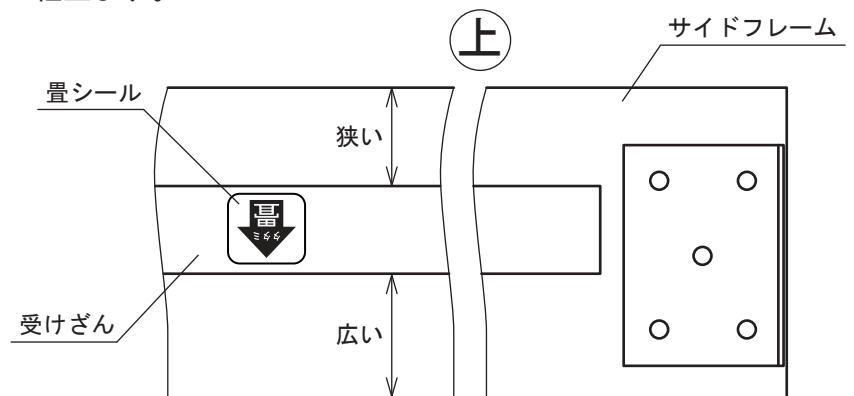

- ・ このベッドは組立ネジの位置により2種類のマットレス面高さが選べます。
- ・ ヘッドボード下部の貫通穴（上段）に小ネジ（45^{mm}）とナットを仮止めして下さい。
（高いマットレス面でご使用の場合は上側2個の貫通穴、低いマットレス面でご使用の場合は下側2個の貫通穴を使います）

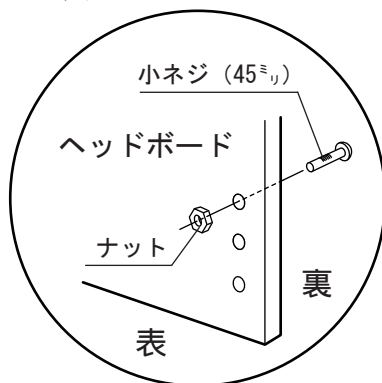


マットレス面(高)でご使用の場合

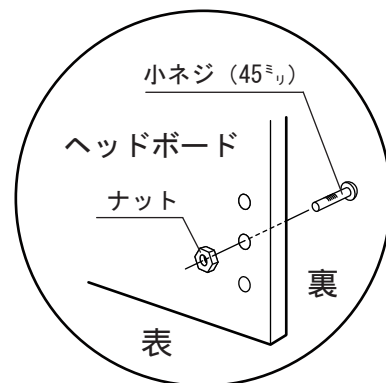


マットレス面(低)でご使用の場合

- ・仮止めした小ネジをサイドフレームの金具に引っかけて下さい。
- ・ひとつ下の貫通穴に小ネジ(45 $\frac{mm}{2}$)とナットを仮止めして下さい。
- ・左右同じように行って下さい。

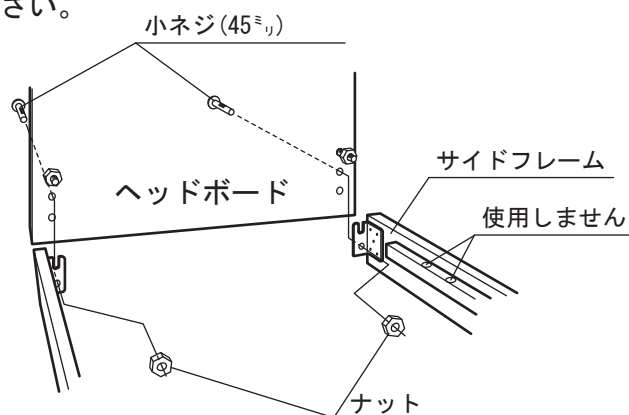


2 フットボードとサイドフレームを仮組みします

- ・ヘッドボードと同じ高さのネジ穴（下図参照）に小ネジ（20 $\frac{mm}{2}$ ）を仮止めして下さい。

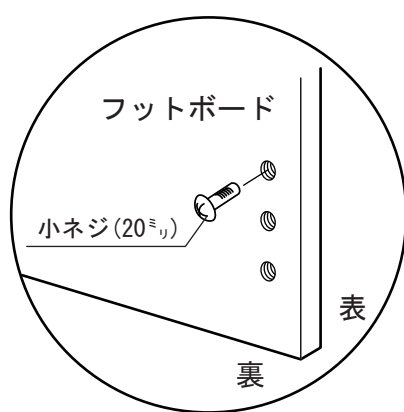


マットレス面(高)でご使用の場合

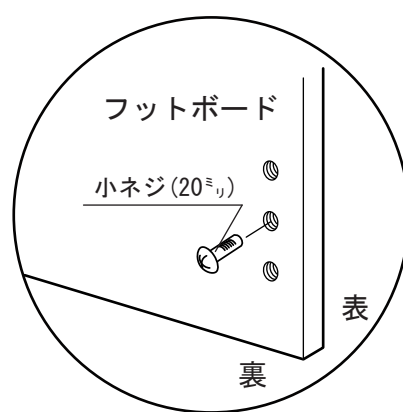

マットレス面(低)でご使用の場合

- ・仮止めした小ネジをサイドフレームの金具に引っかけて下さい。
- ・ひとつ下のネジ穴に小ネジ(20 $\frac{mm}{2}$)を仮止めして下さい。
- ・左右同じように行って下さい。

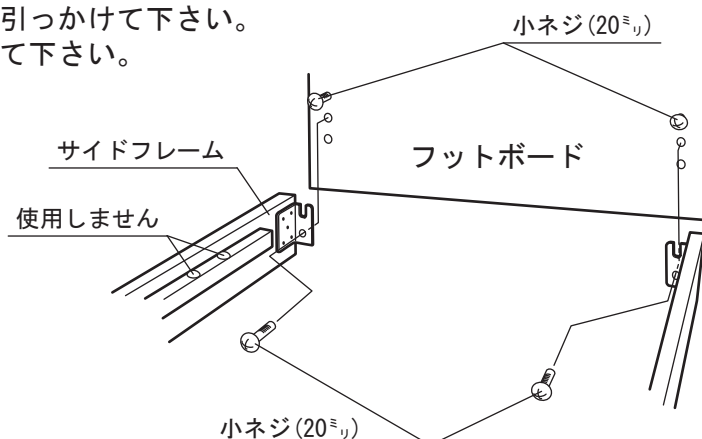

3 小ネジ（計8個）を確実に締付けて下さい

- ・サイドフレームがヘッドボード、フットボード双方の小ネジに確実に引っかかっていることを確認してから締付けて下さい。

4 トコイタをサイドフレームの受けざんに載せます

- ・トコイタは、中央に寄せる様に載せて下さい。


5 マットレスを載せて下さい

- ・以上でベッドの組立は終了です。

部品一覧

組立を行う前に、次の部品が揃っているかお確かめ下さい。



部品名称	部品数	梱包数
ヘッドボード	1	1
フットボード	1	
小ネジ (M8×45 ^{ミリ})	4	
小ネジ (M8×20 ^{ミリ})	4	
ナット	4	
電動フレーム	1	1
キャップ	1 2	
マットレス	1	1

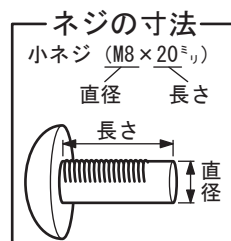

各部のなまえ

1 M タイプ

本製品には、下の図のように注意ラベルが貼付してあります。
ご使用前に、貼付箇所と意味内容をよくご理解下さい。

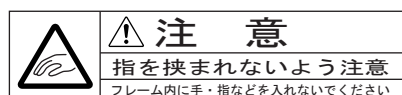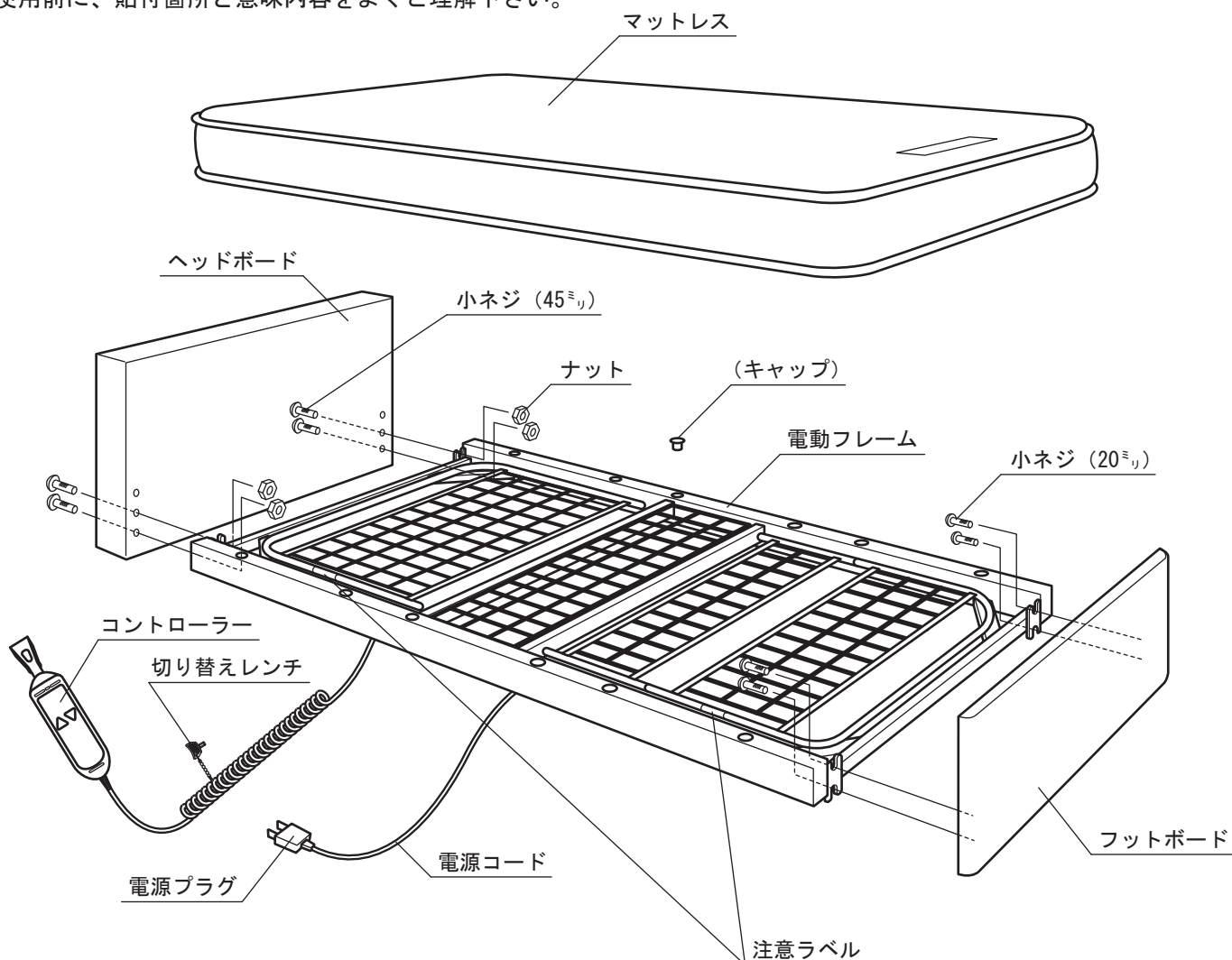

組立方法

1 M タイプ



型式によりデザイン形状が異なりますが組立方法はおなじです。

組立を行う前に

ベッドを置く位置を決めます

- ・ 頭側の向きを確認して下さい。
- ・ 部屋の中でコンセントの位置及び、家具の引き出し、扉等の開閉に支障がないことを確認して下さい。
- ・ ヘッドボードは、頭側に置いて下さい。

- ・ 電動フレームは構造上モーターが下側に出っ張って取り付いています。そのまま床に置くと不安定になりますので、本製品と床面を保護するために毛布などを敷き、梱包箱を台にして安定させると組立が容易に出来ます。

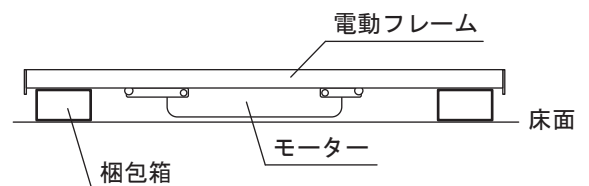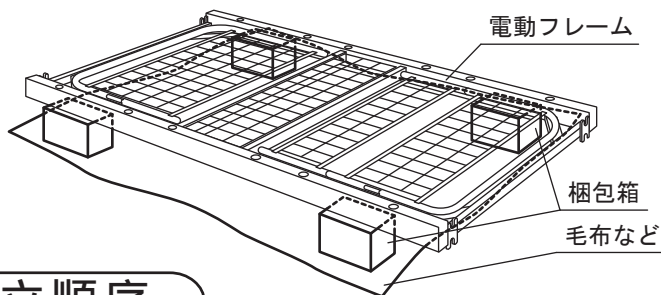

⚠ 注意


2 名以上で組立作業を行って下さい。
ケガをしたりベッドを破損する原因になります。

※ 組立には、プラスドライバーをご用意下さい。


組立順序

1 ヘッドボードと電動フレームを仮組みします

- ・ このベッドは組立ネジの位置により 2 種類のマットレス面高さが選べます。
- ・ ヘッドボード下部の貫通穴（下段）に小ネジ（45^{ミリ}）とナットを仮止めして下さい。
（高いマットレス面でご使用の場合は上側2個の貫通穴、低いマットレス面でご使用の場合は下側2個の貫通穴を使います）

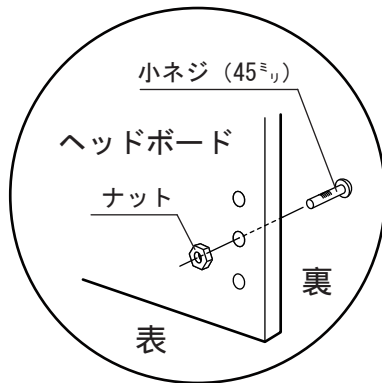


マットレス面(高)でご使用の場合

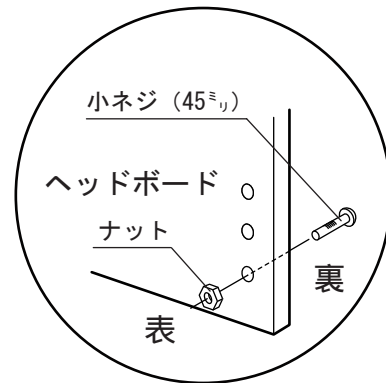


マットレス面(低)でご使用の場合

- ・ 仮止めした小ネジを電動フレームの金具に引っかけて下さい。
- ・ 上段の貫通穴に小ネジ（45^{ミリ}）とナットを仮止めして下さい。
- ・ 左右同じように行って下さい。

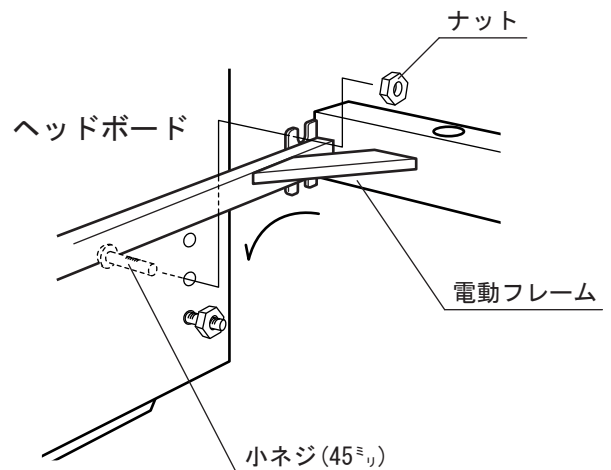


2 フットボードとサイドフレームを仮組みします

- ・ヘッドボードと同じ高さのネジ穴（下図参照）に小ネジ（20^{ミリ}）を仮止めして下さい。

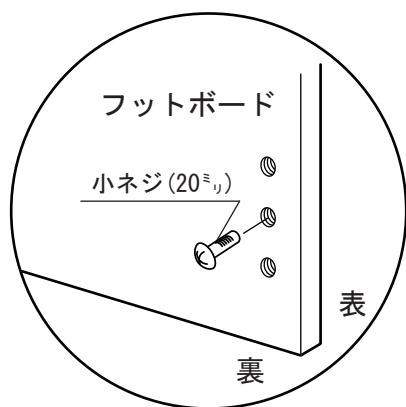


マットレス面（高）でご使用の場合

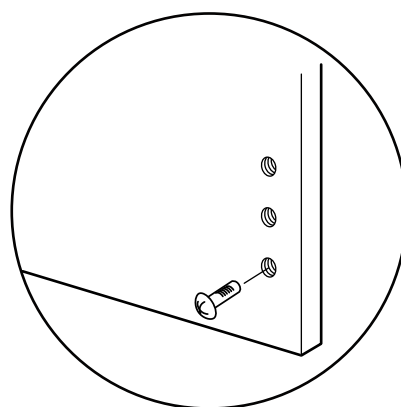

マットレス面（低）でご使用の場合

- ・仮止めした小ネジに電動フレームの金具を引掛けて下さい。
- ・ひとつ上のネジ穴に、小ネジ（20^{ミリ}）を仮止めして下さい。
- ・左右同じように行って下さい。

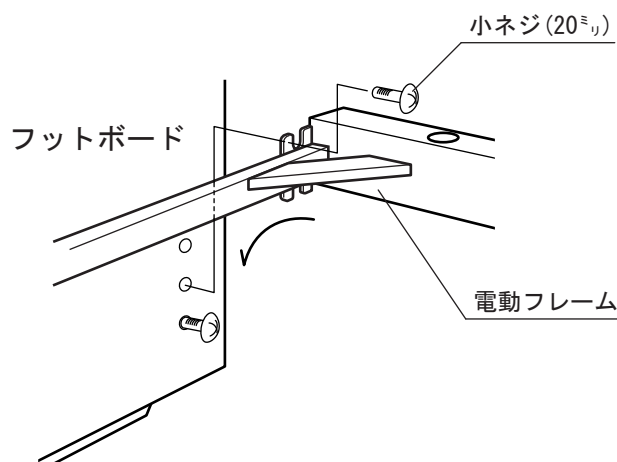


3 小ネジ（計8個）を確実に締付けて下さい

- ・電動フレームがヘッドボード、フットボード双方の小ネジに確実に引っかかっていることを確認してから締付けて下さい。

4 キャップを取り付けて下さい

- ・電動フレームにはサイドレールなどを取り付けるための穴があります。
- ・使用しない穴には必要に応じてキャップを取り付けて下さい。

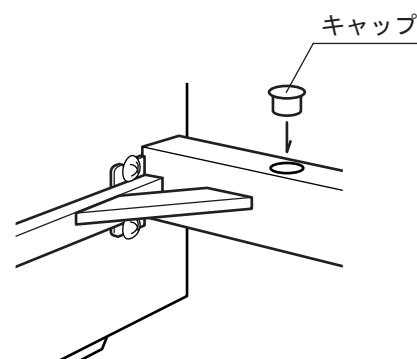

5 電源プラグを家庭用コンセントに差し込んで下さい

- ・コントローラー・電源コードは、電動フレームの下から外に出して下さい。


6 マットレスを載せて下さい

- ・以上でベッドの組立は終了です。

コントローラーの使い方

コントローラーのスイッチを押すことによりベッドの電動操作が行えます。
(お一人様用に設計されておりますので、ご使用は必ずお一人でお願いいたします。)



●操作ボタンを押すとパイロットランプが点灯して作動します。

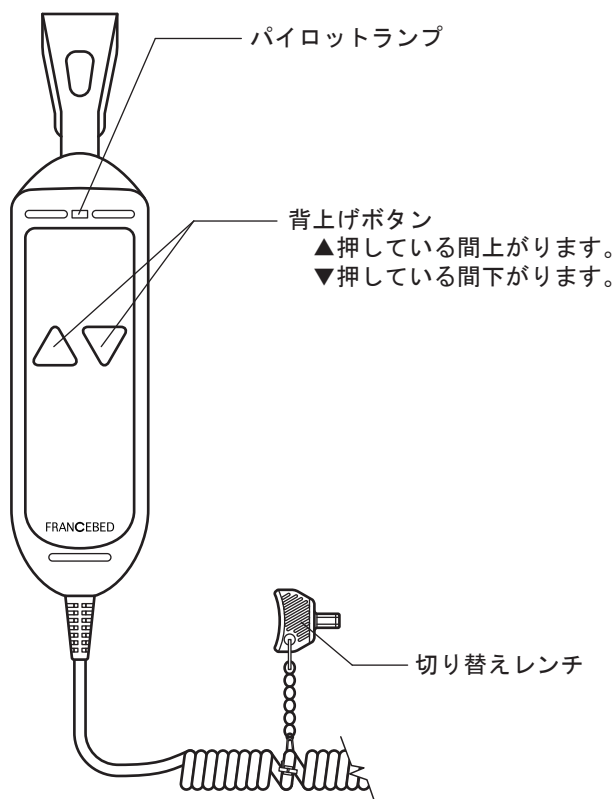

安全スイッチの操作


●裏面にある安全スイッチの六角穴に付属の切り替えレンチを差し込んで、OFFにマークをあわせるとコントローラーのスイッチによる操作を禁止する事ができます。

また、ONにマークを合わせるとコントローラーのボタンによる操作が可能になります。

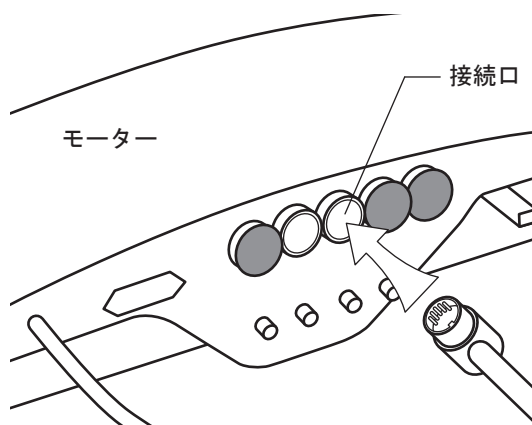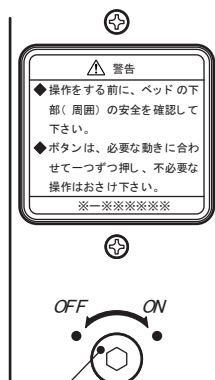

コントローラーの接続

●コントローラーが接続されていない場合は、モーター側面にあるコントローラー接続口に確実に接続して下さい。
(この時、コードのピンと接続口の穴位置を合わせて差し込んで下さい。)

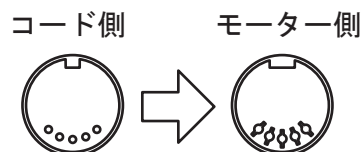



(タイプによりピン数は異なります。)

サイドレール・ベッド用グリップについて

警告

使用上の注意

サイドレールやベッド用グリップの隙間に手足、身体、首及び物を入れないで下さい。
サイドレールやベッド用グリップによっては製品自体に隙間がある場合があります。
また並べて使用する場合や周囲の壁や家具類などとの間にも隙間が生じます。
背上げ・脚上げなどベッドの操作をするときや寝返りのときなどに、挟まれる可能性があります。
特にベッド上で予測できない行動をとる可能性がある方や、自力で危険な状態から回避することができない方などには注意してください。
また、事故を防止するために隙間を毛布やクッションなどで埋めてください。

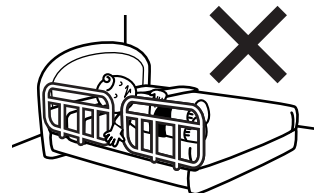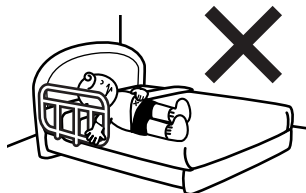

サイドレールやベッド用グリップの組み合わせによっては思いがけない隙間や危険性
が生じる場合があります。必ず弊社指定のサイドレールやベッド用グリップを
お選びいただき、組み合わせてご使用下さい。




サイドレールは、ベッドからの転落予防・寝具の落ち止めを目的とした補助具です。
ベッド用グリップは、ベッドでの立ち上がりや移乗などの動作を補助する補助具です。
それ以外の目的には使用しないで下さい。



使用者によってはサイドレールやベッド用グリップを乗り越え、ベッドから転落して
ケガをする可能性があります。特に厚いマットレスや寝装品との組み合わせに
よっては相対的に高さが低くなります。乗り越えないよう注意してください。




サイドレールやベッド用グリップに寄り掛かったり、腰掛けたり、
またがったり、上に乗ったりするなど無理な力を加える
ような異常な使い方はしないでください。
転倒してケガをしたり、破損する原因になります。

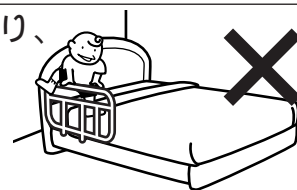


注意

使用上の注意


サイドレールやベッド用グリップ持ってベッドを移動したり、
無理な力で引っ張ったり、上に乗ったりしないで下さい。
取り付けネジが緩んだり、ベッドからサイドレールやベッド用グリップが
外れて、ケガをしたり、破損する恐れがあります。

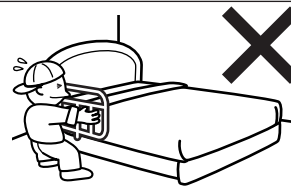

構造上、取り付け部がマットレスより出っ張りますので、
周囲を移動、及び乗り降りする際は注意して下さい。
身体をぶつけてケガをする恐れがあります。

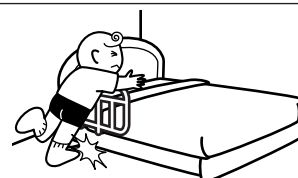

分解改造しないで下さい。
破損してケガをする恐れがあります。

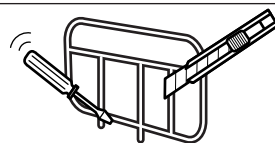

時々、ベッド及び本製品の組立ネジ類が緩んでないか確認して下さい。
ベッドフレーム及びサイドレールやベッド用グリップ等が外れてケガをする恐れがあります。



お手入れ

⚠ 注意 必ずお守り下さい


シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含んだもの及び、研磨剤、漂白剤などは使用しないで下さい。
商品傷める場合があります。
専用クリーナーをお使いになるときは、一度めだたない所でお試しになってからご使用下さい。

◎ 日常のお手入れは、乾いた柔らかい布で拭いて下さい。

◎ 著しい汚れを落とす場合は専用クリーナーで汚れを拭き取り、乾いた柔らかい布で拭いて下さい。


『木製品』

著しい汚れを落とす場合は、木製用クリーナーで汚れを拭き取り、乾いた柔らかい布で拭いて下さい。

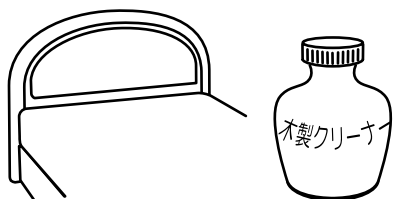


『金属製品』

著しい汚れを落とす場合は、金属用クリーナーで汚れを拭き取り、乾いた柔らかい布で拭いて下さい。

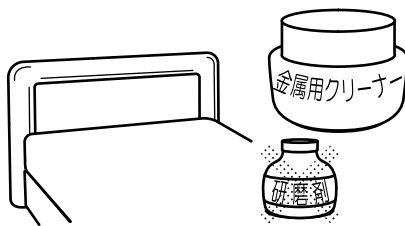


『本革製品』

著しい汚れを落とす場合は、皮革用クリーナーで汚れを落とし、必要に応じて皮革用ワックス等で磨いて下さい。

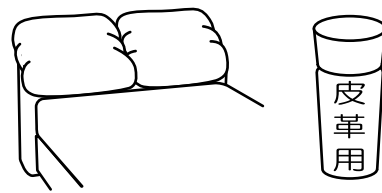

『化粧板製品』

著しい汚れを落とす場合は、中性洗剤を水で薄めた物を布に含ませ、硬く絞り汚れを拭き取り、乾いた柔らかい布で拭いて下さい。
また、シール・ステッカー類を貼られますと、剥がす際に商品の表面を傷つける恐れがあります。

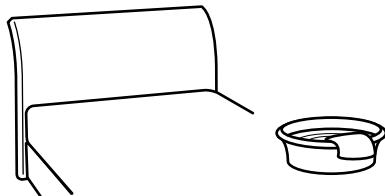


『ソフトレザー製品』

著しい汚れを落とす場合は、中性洗剤を白い布に含ませ拭き取り、更に水拭きし中性洗剤分を良く除去し、空拭きして下さい。
ワックスや科学雑巾は、使用しないで下さい。



『布製品』

埃を払い落とし、中性洗剤を水で薄めた物を布に含ませ、硬く絞りこすらずたたくように落として下さい。
洗濯絵表示の付いている物は、表示に従って下さい。
又、洗濯機の取扱説明書もあわせてご確認ください。

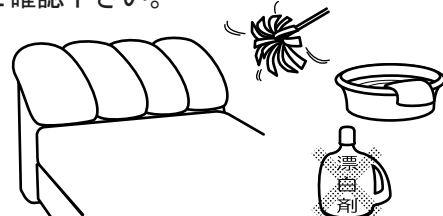

保守点検

組付ネジ類が緩んでいないか、各部品類が外れていないか時々確認して下さい。

転倒や破損してケガをする恐れがあります。



虫害を発見した場合は、直ちに殺虫や防虫処理をして下さい。

他から虫が入ったことも考えられますので、放置すると虫害が拡大する恐れがあります。



床面保護部品（樹脂・ゴム・フェルト）等の消耗部品の状態を時々確認して下さい。

割れ・剥がれ等の異常を発見した場合は、市販されている代用品と交換して下さい。

また、床の材質やベッドのご使用方法によっては、ベッドの接地面が傷ついたり、きしみ音が出る場合がありますので、極力カーペット類を使用するなどして床面の保護は、お客様が行って下さい。

床面の傷・変色・変形は保証の対象外ですのでご注意下さい。



電動フレーム

状態	確認事項
コントローラーのボタンを押しても動かない	<ul style="list-style-type: none"> ・電源プラグをコンセントに確実に差し込んで下さい。 ・コントローラーのコードが確実に差し込んであるか確認して下さい。
電動フレームが水平にならない	<ul style="list-style-type: none"> ・「組立方法」を見ながら正しく組立て直して下さい。 ・リクライニング部に掛け布団や毛布などが挟まれている場合があるので、電動リラックスフレームを少し持ち上げ、挟まれた物を取り除いて下さい。
<p>停電等が原因で背部や脚部が起きたまま停止してしまった。 水平にならないので寝られない。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・停電が終われば背部や脚部は再びコントローラーにて操作できます。 ・就寝に支障を来す場合は、次の手順で背部や脚部を水平にしてご使用下さい。 <ol style="list-style-type: none"> ①マットレスをはずして下さい。 ②水平にしたい背部または脚部が急激に落ちてこないように押さえながら作業するか、紐などで固定して作業して下さい。 ③水平にしたい側（頭側または脚側）のモーター上面にある赤いストッパーを内側方向に引いて下さい。 （赤いストッパーが無い場合は④へ） ④フタを【OPEN】の方向にスライドさせて外して下さい。 ※フタを外すとモーターが落下するので、足等挟まぬよう注意して下さい。 ※モーターの前後方向が似ている為、方向を確認しておいて下さい。 ⑤モーターをシャフトから外すと、背部または脚部は水平に出来ます。 <p>・通電後、逆の手順で元に戻してご使用下さい。</p> <ol style="list-style-type: none"> ⑥モーターが停止するまでコントローラーの下げるボタン（背部や脚部）を押し続けて下さい。 ⑦シャフトを回しての凸部がモーター内に納まるように調整しながら、モーターを持ち上げてシャフトにセットして下さい。 ⑧フタをスライドさせて取り付けて下さい。 ⑨赤いストッパーを下げて下さい。

ストッパー




スライド



フタ

シャフト

凸部

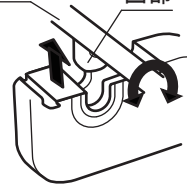

がたつき、きしみ音のある時は

小ネジ類が緩んでいないかお調べ下さい。
緩みのある場合は、組立方法に従って小ネジ類を締め直して下さい。

照明が点灯しない時は

（照明付きをお買い上げの方）

電源プラグが抜けていないか、電球が切れていないかをお調べ下さい。
電球が切れている場合、照明の種類によっては電球を交換することが出来ます。
使い方又は電球の交換方法に従って交換して下さい。

以上のことを行っても、直らない場合は『お買い上げ店』又は、『お客様相談室』にご連絡下さい。

アフターサービス

保証書

- ◎ 保証書は、お買い上げ店より「お届け日、お買い上げ店名」を記入していただいて下さい。
- ◎ 保証書に記入できない場合は、納品書又は領収書（お届け日、お買い上げ店名のわかる物）と併せて大切に保管して下さい。
- 注）保証書と、納品書又は領収書無き場合は保証いたしかねます。

保証期間

製品の部位により、お届け日より起算し以下の期間と致します。

- ①木製、金属製フレーム : 2年
 但し、可動部品 : 1年
 電気・照明部品 : 1年
- ②布製フレーム : 2年
 但し、付属品は除く。

修理を依頼される時は

- ◎ 修理をご依頼される前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合は『お買い上げ店』又は、『お客様相談室』へご連絡下さい。

保証期間中は

- ◎ 保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

保証期間を過ぎている時は

- ◎ 修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡していただきたい内容

- ◎ できるだけ詳しくお願いいたします。
 - ①ご住所、ご氏名、電話番号
 - ②型式名、お買い上げ店名、お届け日
 - ③故障又は異常の内容

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障個所の修理及び部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品及び補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品の場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お客様相談室

修理、お取り扱い、お手入れなどのご相談は、まず、
お買い上げの販売店へお申し付け下さい。

◎ 弊社製品は厳格な検査を経て納入致しておりますが、万一不具合な点がございましたら
お買い上げの販売店又は弊社相談室にお問合わせ下さい。



0120-39-2824

フリーダイヤル：月～金 9時～12時、13時～17時
土、日、祝祭日、年末、年始等は除く

商品仕様

SCタイプ

サイズ		全巾 × 全長 × 全高 (ミリ)	使用人員
シングルサイズ	外寸	1060×2065×795	1名

◎ マットレスの寸法は、マットレスに付いております品質表示ラベルの寸法欄をご参照下さい。

主材	天然木、化粧板
仕上げ	ウレタン塗装

1Mタイプ

サイズ		全巾 × 全長 × 全高 (ミリ)	使用人員
シングルサイズ	外寸	1060×2028×795	1名

◎ マットレスの寸法は、マットレスに付いております品質表示ラベルの寸法欄をご参照下さい。

主材	化粧板、スチール、ABS樹脂
仕上げ	ウレタン塗装、粉体焼付塗装

モーター	定格電圧	100V
	定格周波数	50／60Hz
	モーター形式	DC直流24V
	定格消費電力	110W
	起床性能	背部約65° 脚部約30° (膝上げ角度)
	起床時間	約24秒

117700-8941 (153272-0)