

『安全に』ご使用頂くために必ずお読みください。

マウスピュア® 口腔ケアスポンジ

本文中の【△警告】マーク部分は、取り扱いを誤ると、【死亡や生命に危険が及ぶ事故】につながる可能性があります。

【△警告】

以下の項目は、スポンジが抜け、「喉につまらせる事故」につながる可能性があります。

- 本品は1回使い切りの製品です。再使用は、絶対にしないでください。
菌の繁殖、スポンジの破損や抜けの原因となります。
- 袋を開封しないまま軸を引っ張り、製品を取り出さないでください。スポンジが抜ける原因となります。



- 使用前にスポンジ部分と軸が接着していることを必ず確認してください。
- 強く噛んだ状態で引っ張る等、過度の負荷をかけるとスポンジがちぎれたり、軸から抜ける場合があります。
- 万一、使用中、スポンジが抜けたり、ちぎれた場合には飲み込まない様、速やかに取り除いてください。
- 水、薬液等に浸したままにしないでください。スポンジが抜ける原因となります。
- お湯に浸けてのご使用はおやめください。スポンジが抜ける原因となります。
- 使用後は、スポンジが口腔内に残留していないことを必ず確認してください。
- 要介護者、飲み込む力の弱い方ご自身で、または小児だけでは、使用しないでください。



【 その他の使用上の注意 】

- 本品は口腔清掃用スポンジブラシです。それ以外の目的で使用しないでください。
- ご使用前に軸の折曲がり、変形や袋の破損等の異常を発見した場合は、ご使用をお控えください。
- 本品は食べることができませんので、絶対に嚙んだり飲み込んだりしないでください。
- ご使用の際は、必ず医師、歯科医師、看護師、歯科衛生士等の指導に従ってください。

【 保管および取扱上の注意 】

直射日光、高温・多湿を避け、小児の手の届かない場所に保管してください。

【 使用方法 】

袋から取り出し、スポンジ部分に少量の水分を含ませ、必ずしっかりしぼり口腔内の汚れを拭き取ってください。



※口腔ケアに関する
情報はこちら



（有限）

川本産業株式会社

本社/大阪市中央区谷町2丁目6番4号

●お客様相談窓口 ☎06-6943-8956 (10:00~17:00月~金ただし祝祭日を除く)

<https://www.kawamoto-sangyo.co.jp>