





マットレス MPM-10F 取扱説明書

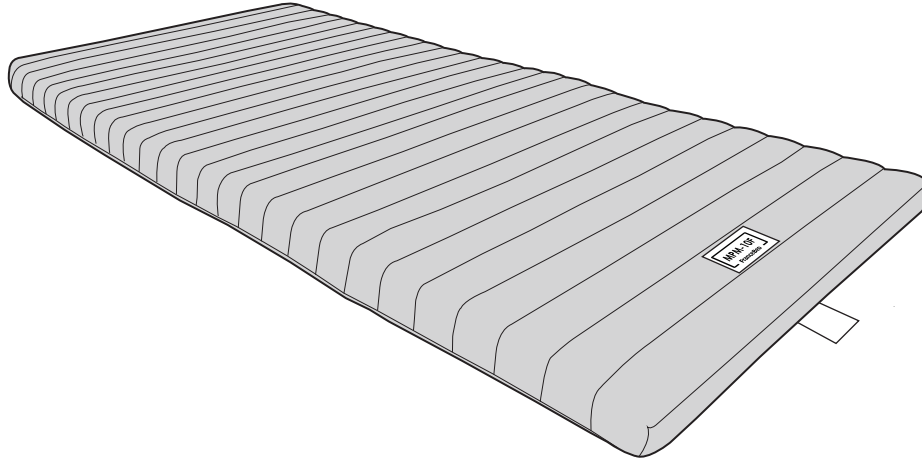



327303-8902






このたびはフランスベッドの製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。



 注意	この記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。(～してください)	 禁止	この記号は禁止の行為であることを告げるものです。(～しないでください)	 絵表示	この記号は絵表示に対する行為を禁止する内容を告げるものです。
---	--	---	-------------------------------------	--	--------------------------------

ご使用にあたり

 警告	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。	
当社の介護・メディカルベッド用以外には使用しないでください。 大きさの違いにより、ベッドやベッド付属品との間に隙間ができ、身体の一部が挟まれてケガをする恐れがあります。		
マットレスの上で、飛び跳ねないでください。 ケガや破損の原因になります。		 禁止
マットレスの上で喫煙をしないでください。 火災等の原因になることがあります。		
マットレスの近くでストーブやお線香等を使用しないでください。 火災になる恐れがあります。		

 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。	
定期的に寝装品をはずし、風通しをよくして湿気が溜まらないようにしてください。 臭いやカビの原因になります。	 注意	マットレスを持ち運ぶ場合は、カバーの上から詰め物を持ち、障害物に当たらないように運んでください。 障害物に引っ掛けたり、カバーだけを持ち、移動させると、カバーのホツレや破れの原因になります。
マットレスの上で、縫い物等、突起物（針、ハサミ、ナイフ等）の使用は避けてください。 針がマットレスの中に入ってしまったたり、ケガや破損の原因になります。		 禁止
ラベル類をはがさないでください。 無理にはがすと、生地の破れや破損の原因になります。		




設置・保管上の注意

 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示します。	
直射日光の当たる場所はお避け下さい。 変形、変色の原因になります。	 注意	使用しないときは、突起物のない平らな場所に保管してください。 破損や劣化の原因になります。

仕様

寸法	幅 890 × 長さ 2000 × 厚み 100 mm	重量	約7.5kg
カバー	外装生地	ポリエステル 100%	
	詰め物	ポリエステル綿 ウレタンフォーム	
中材	ウレタンフォーム		
ギャッチ対応	ギャッチ・サイドアップ機能対応		
洗淨	カバー洗濯のみ対応		

お手入れの方法

 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
当マットレスはカバーのみ洗浄が可能です。	 注意
消毒や汚れ落としに、シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤、また高水準消毒液、アルコール類を使用しないでください。 接触した場合は、40℃以下の温水でよくすすぎ乾燥させてください。	 禁止

マットレスのお手入れ

- 風通しのよい場所に立てて、陰干しをしてください。
- 業務用のガス消毒の条件設定には実地試験が必要な場合があります。

カバーのお手入れ

- 著しい汚れは中性洗剤を水で薄めて布に染み込ませ、固く絞って拭き自然乾燥させてください。
- 業務用のガス消毒の条件設定には実地試験が必要な場合があります。
- 液温40℃以下、弱水流にて洗濯することができます。
 - ・ファスナーが洗濯層の中で暴れないように、ファスナーを終点まで閉めてから洗濯してください。カバーはポリエステルを使用していますので、洗濯用ネットを使用することをお勧めいたします。
 - ・マットレスに取り付けてある”品質表示ラベル”にしたがってください。
 - ・洗剤は中性洗剤を使用し、強アルカリ洗剤、漂白剤は使用しないでください。
- タンブル乾燥は行わないでください。

アフターサービス

保証書：所定事項の記入および記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

保証期間中に修理を依頼される場合：保証書の記載内容に従って修理いたします。

保証期間を過ぎて修理を依頼される場合：修理すれば使用できる場合は希望により有料で修理いたします。

修理を依頼されるときは

修理をご依頼される前に取扱説明書をよくお読みいただき、再度点検の上、なお異常がある場合は、お買いあげ店または下記のお客様相談室へ連絡してください。

ご連絡いただきたい内容・・・住所、氏名、電話番号、型式名、販売店、お買いあげ日、故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

お客様相談室

弊社製品は厳格な検査を経て納入致しておりますが、万一不具合な点がございましたらお買いあげの販売店又は弊社相談室にお問い合わせ下さい。



フリーダイヤル 0120-39-2824

月～金 9時～12時、13時～17時 土、日、祭日、年末、年始等は除く
フランスベッド株式会社

保証書

保証期間	お買いあげの日より	:	1年
お買いあげ日	年	月	日

お客様	ご芳名	様
	〒 □□□-□□□□	
	ご住所	
TEL		

販売店	店名・住所
-----	-------

法的責任 この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買いあげの販売店又は相談窓口にお問い合わせ下さい。

保証の対象

マットレスのみ行います。

保証の態様

(1) 保証期間内において、この製品に製品上の欠陥が発見された場合には無償修理をいたします。

(2) ご用命の際は、お買いあげの販売店又は相談窓口にご連絡下さい。

(3) 遠隔地等については、旅費を申し受けることがあります。

保証を受けるための条件
保証を受けるためには、保証書及び納品書又は領収書を提示して下さい。

※ 本保証書と納品書又は領収書を併せて保管をお願いします。

保証書の適用除外

(1) 保証書及び納品書又は領収書のご提示がなかった場合。

(2) 誤使用或いはお取扱い上の不注意や過失によって故障が生じた場合。

(3) 本製品をご使用者自身又は他業者により変造・改造された場合。

(4) ご購入後の移動・輸送によって故障又は損傷が生じた場合。

(5) 火災・天災・地震によって故障又は損傷が生じた場合。

(6) 本製品の製造上に起因した欠陥であるか、確認できない場合。

※ 上記項目については有償修理になります。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148番地5
TEL 042(543)3111 (代表)

