

安全のために必ずお守りください

この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、使用者への危害や財産への損害を未然に防止するために、下記の区分や絵表示をしています。その指示と内容は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。

記号は、行為の強制や、指示する内容を告げるものです。

警告

- 修理、分解、改造を行わないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 風呂やシャワー室では使用しないでください。火災、感電、故障の原因となります。
- 直射日光のあたる場所に長時間放置しないでください。変色、火災、感電、故障の原因となります。
- 車内に長時間放置しないでください。電池破裂、火災、故障の恐れがあり大変危険です。
- 暖房器具のそばに放置しないでください。電池破裂、火災、故障の恐れがあり大変危険です。
- 濡れた手で、ACアダプタの抜き差しをしないでください。感電する恐れがあります。

注意

- 杖本体が熱くなったり異臭がする場合には直ちに使用を中止してください。
- 道路の側溝の溝や凹みのある箇所では、杖先がはまり込む場合があるため十分注意してください。

警告

- 本製品は歩行を補助するためのものです。力を入れて突いたり、全体重をかけたり、用途以外（例えば、登山用、トレッキングポール、護身用など）には使用しないでください。事故や破損の原因になります。
- 雨天の使用など、杖を濡らさないでください。火災、感電、故障の恐れがあります。
- 電源コードを傷つけたりしないでください。火災、感電、故障の恐れがあります。
- 電源スイッチを爪や先の尖ったもので押したり、必要以上に強く押したりしないでください。ボタンが破損するなどの原因となります。
- 杖を落としたり、倒したりしないでください。故障の原因となります。

注意

- 使用前に各部を点検してください。また、杖先ゴムが摩耗してきたり、劣化して外れやすくなったりした場合は、早めに取り替えてください。
- 使用前・使用中に支柱の継ぎ目や伸縮パイプなどが確実に固定されていることを確認してください。
- 身体に合った杖を選んでください。
- 濡れた、または凍った路面は滑りやすいため注意してください。
- リチウムイオン電池が使われています。本製品を廃棄される場合には、地域の条例に基づいて廃棄してください。


長さ調節方法

- ① 止めネジを緩めてください。
- ② 調節ボタンを押しながら伸縮パイプを適度な長さに合わせてください。調節ボタンは自動的に調節穴に入ります。穴は7カ所です。このとき伸縮パイプは最後まで引き抜かないでください。

注意

伸縮パイプは最後まで引き抜かないでください。中のコードが破損する恐れがあります。

- ③ 穴に調節ボタンが入ったことを確認し、止めネジをしっかりと締めてください。（LC-09、LC-10は止めネジはありません）

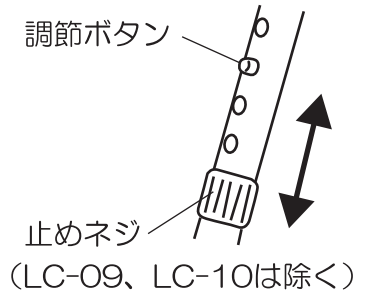


お手入れ方法・保管方法

- 著しい汚れは、中性洗剤を水で薄め布に染み込ませ、硬く絞って拭き、自然乾燥させてください。直接水洗いしたり、シンナー、ベンジンなどの揮発性の溶剤は使用しないでください。万一濡れた場合は速やかに拭き取り、自然乾燥させてください。
- 使用後は直射日光の当たらない、高温にならない、湿気の少ない場所で保管してください。

使用方法


- 初めて使用するときには必ず充電を行ってください。
- 充電方法

充電口キャップを外し、充電口にACアダプタのプラグをしっかりと差し込みます。電源プラグを電源コンセントに差し込みます。充電表示ランプが赤色に点灯します。点灯しない場合は満充電の状態です。充電完了後は、充電口に充電口キャップを確実にはめてください。尚、充電口にプラグを差している状態では電源は入りません。

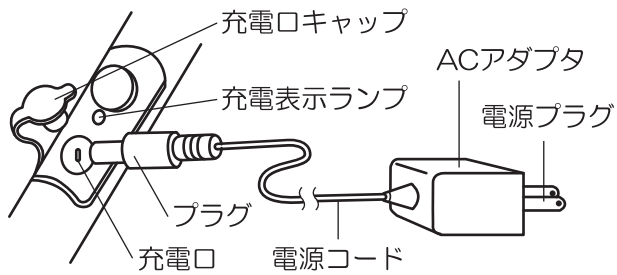

- 杖の握り方


人差し指と中指の間に杖の支柱を挟んで、持ち手を握り、支柱に真っすぐ体重がかかるようにします。

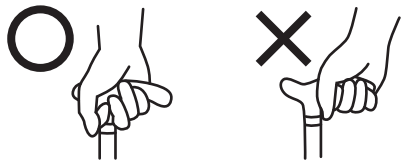

- 足元ライトの点灯・消灯方法

電源スイッチを2秒以上長押しすると杖先の足元ライトが点灯します。再び2秒以上長押しすると消灯します。

- ・ 足元を明るく照らしながら歩行することができます。
- ・ 自動車や他人に自分の存在を知らせることができます。

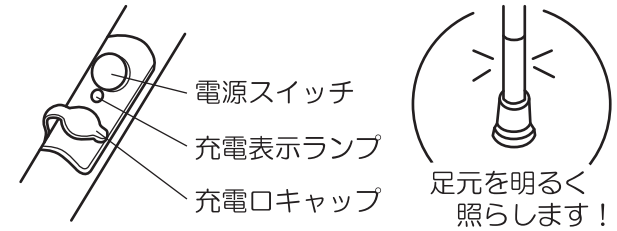

- 充電状態（青色光と点滅）について

- ・ 電源スイッチ長押し後、すぐに光る場合はほぼ満充電です。
- ・ 電源スイッチ長押し後、青く光ってから白色光に変わる場合は充電が約半分の状態です。早めの充電をお勧めします。
- ・ 足元ライトが点灯中に青と白が交互に点滅を開始した場合、充電が切れる注意信号です。すぐに充電してください。尚、点滅開始後約30分間は点滅します。

仕様

型式		LC-01	LC-02	LC-03	LC-04	LC-05	LC-06	LC-07L	LC-08R	LC-09	LC-10	
材質	持ち手	木材	樹脂		木材		樹脂			木材		
	支柱	アルミニウム								カーボンファイバー		
	伸縮パイプ											
	足元ライト	ポリカーボネイト、LED										
	杖先ゴム	天然ゴム										
全長 cm (7段階)		約 75～90					約 71～86			約 78～93		
重量 g		約 370	約 375	約 380	約 360	約 375	約 360	約 390		約 320		
杖先ゴムサイズ		5/8 (19 mm) 用										
電氣的仕様												
電源	形式	リチウムイオン充電電池				リチウムイオン電池が使われています。本製品を廃棄される場合には、地域の条例に基づいて廃棄してください。						
	容量	3.7V／750mAh										
動作時間		約 8 時間										
充電時間		約 3 時間										
ACアダプタ 定格												
定格入力		AC100V-240V 50／60Hz 0.2A										
定格出力		DC5V 1A max5W										
寸法 mm		27.8 × 47.9 × 26.5										
電線長さ m		1.8										
重量 g		80										

