

⚠ 使用上の注意

- ❗ 本製品は、ラクティブペット専用の製品です。
- ❗ ペットの飛出し防止以外の用途には使用しないでください。
- ❗ リードの取り付けは取扱説明書を理解の上、確実に取り付け作業をしてご使用ください。
- ❗ 取り付け完了後は袋 (大) 内のペットの安全を確認してご使用ください。
- ❗ 製品に無理な力がかかるような状況で使用しないでください。
- ❗ ペットが急に飛び出すとバランスを崩す恐れがあります、注意してご使用ください。
- ❗ 本製品はペットを完全に袋内に固定するものではありません、補助ベルトとしてご理解の上ご使用ください。
- ❗ 本製品を袋の外に垂らしたまま歩行しないでください。転倒や巻き込みの危険があります。
- ❗ 使用中、ペットに異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ❗ 人やペットが破片等を誤飲しないように注意してください。万一誤飲した場合は各医師に相談してください。
- ❗ 本製品は、ペットが噛んだり引っかく等すると、切れたり破損したりします。
- ❗ 噛み癖や引っかき癖のあるペットには使用しないでください。
- ❗ ペットが嫌がる場合は、無理に使用しないでください。
- ❗ ラクティブペット本体の積載荷重を超えた体重のペットには使用しないでください。

フランスベッド ラクティブペット用


飛出し防止リード 取扱説明書

- ❗ このたびは、お買い上げいただきましてまことにありがとうございます。
- ❗ 安全のため、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- ❗ お読みにになった後は、いつでも取り出せるように、大切に保管してください。
- ❗ この取扱説明書は「ラクティブペット」に付随するものです。



画像はしま柄のものです

各部の名称

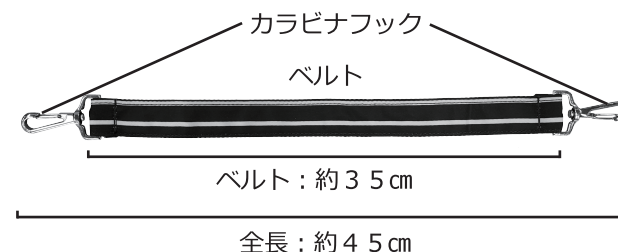

仕様変更等により実際の商品と多少異なる場合があります。

梱包内容

- 取扱説明書 1 枚
- 飛出し防止リード 1 個


主な材質

- スチール
- ポリエステル

重量: 約 40 g

飛出し防止リードの取り付け方

- ①飛出し防止リードの片方のカラビナフックをラクティブペット本体の袋（大）後方に付いている留め具に取り付けます。

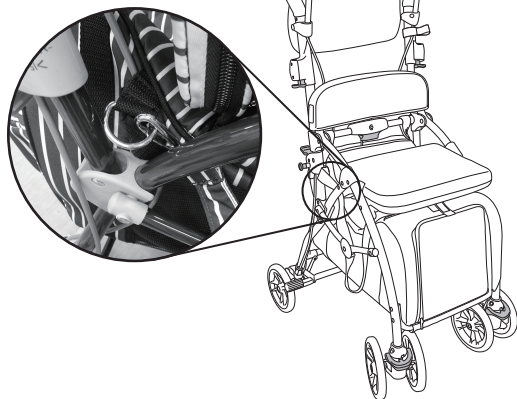

- ②もう一方のカラビナフックをペットの首輪（またはハーネス）に付いている留め具に取り付けます。




- ③ラクティブペット本体の袋（大）天面のファスナーを開きます。



- ④ペットを袋（大）の天面からゆっくり入れてください。



- ⑤ペットが飛び出さないように、天面のファスナーを閉めます。この時、ベルトの幅分のすき間を残して締めてください。

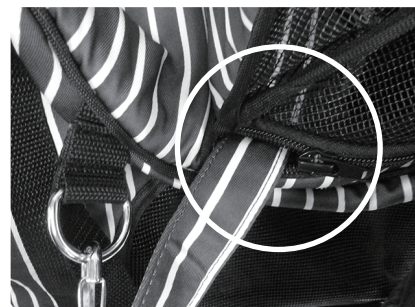

ペットと飼い主の安全のために必ずお守りください



- ❗ 本製品とラクティブペット本体をつないだまま、ペットを歩行させないでください。バランスを崩して転倒する恐れがあります。
- ❗ 本製品はラクティブペット本体からペットが飛び出すことを防ぐためのものです。ラクティブペット以外のものにはつなげないでください。
- ❗ 使用中にベルトのほつれや金具の変形、取り付け異常が見られた場合は、使用を中止してください。