

型式名：リフトアップチェア400 N1
取扱説明書

このたびはフランスベッドの製品をお買い上げいただきまして
まことにありがとうございます。


⚠ 注意

正しく安全にご使用いただくためにこの組立・取扱説明書をよく
お読みいただいた上で組立て、ご使用下さい。
また、いつでもご覧いただけますように大切に保管して下さいま
すようお願い申し上げます。

安全のために必ずお読み下さい

絵表示について

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただくため
に、下記の絵表示をしています。その表示と意味は次のように
なっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

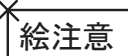 警告	記載されている内容を見捨て、誤った取扱いをす ると、人が死亡または重傷を負う可能性があること を示します。
 注意	記載されている内容を見捨て、誤った取扱いをす ると、人が傷害を負う可能性や製品が破損する恐れ のあることを示します。
	この記号は行為を強制したり指示する内容を告げる ものです。（～しなさい。）
	この記号は禁止の行為であることを告げる ものです。（～してはいけません。）
 絵注意	絵表示に対する行為を禁止することを告げる ものです。

アフターサービス

- 保証書
- ◎保証書は、お買い上げ店より
「お届け日、お買い上げ店名」を
記入していただいて下さい。
- ◎保証書に記入できない場合は、
納品書又は領収書（お届け日、
お買い上げ店名のわかる物）と
併せて大切に保管して下さい。

保証期間：お届け日より1年

注）保証書と、納品書又は領収書無き場合は保証いたしかねます。

- 修理を依頼されるときは
- ◎この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある
場合は『お買い上げ店』又は、『お客様相談室』へご連絡下さい。
- 保証期間中は
- ◎保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
- ◎修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させて
いただきます。
- ご連絡していただきたい内容
- ◎できるだけ詳しくお願いいたします。
- ①ご住所、氏名、電話番号
- ②型式名、お買い上げ店名、お届け日
- ③故障又は異常の内容

お客様相談室

修理、お取り扱い、お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの
販売店へお申し付け下さい。

◎弊社製品は厳格な検査を経て納入いたしておりますが、万一不具合な点がござ
いましたらお買い上げの販売店又は弊社相談室にお問い合わせ下さい。



0120-39-2824

フリーダイヤル：月～金 9時～12時、13時～17時
土、日、祝祭日、年末、年始等は除く

安全のために必ずお守り下さい



警告

製品の上で立ったり飛び跳ねたり
しないでください。
不意にバランスを崩し、転倒したり、
重大事故の原因となります。




製品の作動時は、周囲に人や障害物がないことを
確認してください。
正常に作動しなかったり、ケガ、破損、故障の
原因となります。



座面下の可動部には触れないでください。
可動部に手や足を挟み、重大事故の原因となります。



製品の上に、危険なものや重いものを
置かないでください。
思わぬケガをしたり、置いたものが
落下し、製品を破損する原因となります。

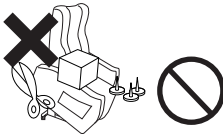

自分の意思表示、リモコン操作が困難な人のご使用は
お避けください。
また、介護を要する人が利用する場合、必ず介護をする
人の監督下で使用してください。



この製品の定員は1人です。子供を抱えながら使用
したり、2人以上でのご使用はしないでください。
破損や転倒など重大事故の原因となります。




電源コードの配線は、通路を避けてください。
コードに足を引っかけて転倒したり、破損や断線の
原因となります。



製品上での喫煙はご遠慮ください。
火災の原因となります。



暖房器具や放熱器具の近くには
設置しないでください。
火災や変色の原因となり、
大変危険です。

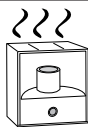

注意

子供の遊具として使用することは避けてください。
操作方法を誤り、思わぬケガをする恐れがあります。



平坦な場所に設置してください。
（不安定な場所では使用しないでください）
ガタツキや破損の原因となります。



フローリングや畳など、凹んだり、キズが付きやすい
床面に設置する場合は、カーペットなどを敷いて、
床面を保護してください。




直射日光が当たる場所への設置は避けてください。
また、高温多湿な場所は避けてください。
製品をいためる可能性があります。



異常音やガタツキ、作動性に異常を感じたら、
直ちにご使用をやめ、お買い上げの販売店、
またはお客様相談室へご連絡ください。



背もたれを外した状態で使用しない
でください。
転倒したり、事故の原因となります。

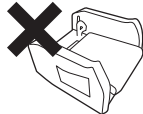


製品を移動するときは、必ず電源コードを抜き、
もとの位置に戻してください。
また、コード類を車輪で踏まないよう十分注意して
ください。



異常音やガタツキ、ネジの緩みがないことを
定期的に確認してください。
異常のままご使用になると、故障や負傷の原因
となります。



本製品を分解、変造、改造しないで
ください。
思わぬケガや製品が破損する原因と
なります。

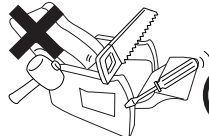

利用者最大体重は80kgです。
80kgを超える方のご使用はお避けください。
破損、転倒、負傷の原因となります。



作動時に身体の一部や電源コード、リモコンコード
が挟まらないよう十分注意してください。



作動時に背もたれやひじ部にもたれないでください。
また、片方だけのひじ部に体重をかけないでください。
バランスを崩し、転倒したり、破損の原因となります。



座る際は、座面を最適な高さに調整し、ゆっくりと
こしかけてください。
衝撃的に座ると製品が不意に動いたり、破損の原因
となります。



電源コード、リモコンコードを無理に引っ張らないで
ください。
断線の原因となります。



当製品を他の用途で使用しないでください。



お手入れ方法

ジュースなどの 液体をこぼしたときは、直ちに薄めた中性洗剤を硬く絞ったタオルで
軽く叩くように吸い取ってください。こすると汚れを広げてしまう原因となります。
そして、風通しを良くして乾かしてください。



カバーを取り外してご家庭で洗濯（洗濯ネット使用）をすることができます。
取り外す時は、無理にはずそうとすると破ける恐れがあるので、少しずつおこなって
ください。



