

取扱説明書 OS・AGドイツステッキ

ご使用になる前に必ずこの説明書をよくお読みください。

この説明書はいつでも見られるように大切に保管してください。

安全にお使い頂くために下記のようなシンボルを付けて注意表示、禁止表示をいたしております。

また、第三者に譲渡される場合は必ずこの説明書を添えてください。

使用上の注意

⚠ 注意 軽微なケガや商品の損傷などの原因になる。

- ・ 滑りやすい場所や床が濡れている場所、また足元の悪い場所でお使いになる場合転倒しない様に十分に注意して歩行してください。
- ・ 坂道や接地面が不安定な場所でのご使用は、安定性を確認の上ご使用下さい。
- ・ 先ゴムはしっかり固定されているか確認をしてください、又破れや磨耗している場合は速やかに交換してください。
- ・ 使用まえ及び使用中を含めて、長さ調節ボタンや先ゴムはしっかり固定されているか確認をしてください。

お手入れ方法

- ・ 使用後は、先ゴムに付いている砂や異物を取り除いてください。
- ・ お子様の手の届かないところに保管してください。

材 質

- ・ シャフト : アルミ
- ・ グリップ : ソフト樹脂(OS) 人工樹脂(AG)

保証期間

お買い上げ日から1年間
(先ゴムなど消耗品除く)

⊘ 禁 止

- ・ 杖目的以外ではご使用にならないでください。

耐荷重 : 1 2 0 Kg

ケイ・ホスピア株式会社
神奈川県川崎市宮前区土橋 1-11-1
TEL 044-871-5514
FAX 044-877-0121