


取扱説明書

自動寝返り支援ベッド専用入力支援スイッチ

853050-0900

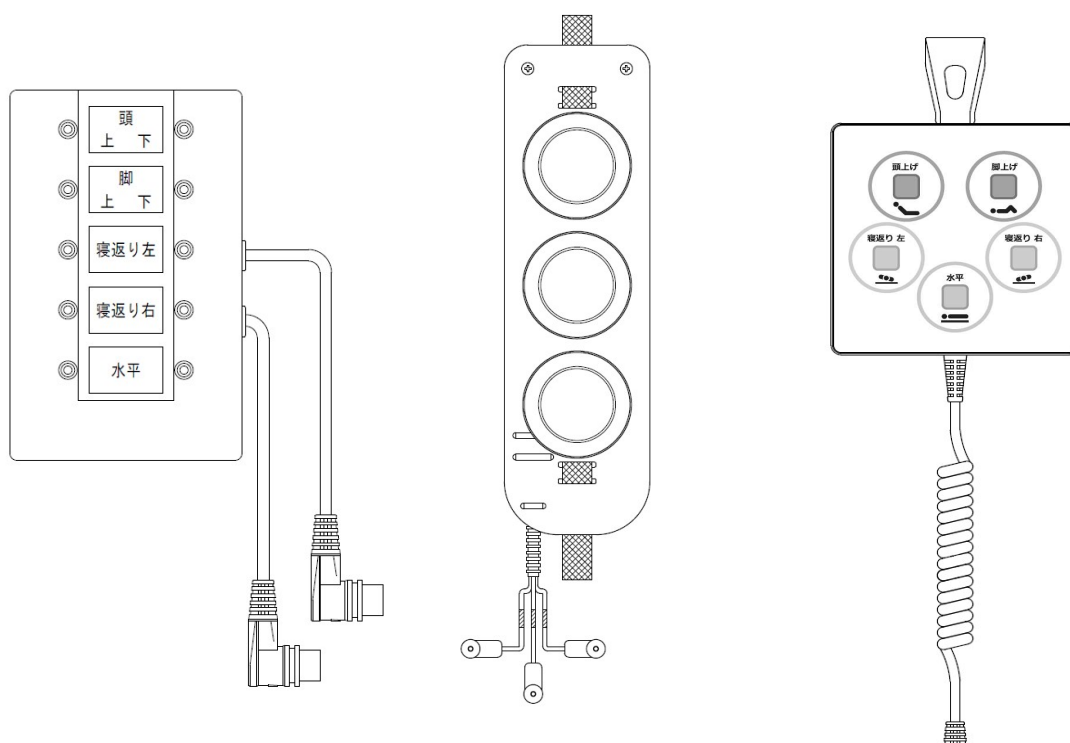

まえがき

このたびはフランスベッドの製品をお買いあげいただきまして、ありがとうございます。
この取扱説明書には、製品を安全にお使いいただくための、注意事項と使用方法を記載しています。

- 安全のため、必ずこの取扱説明書をよく読み、内容を十分理解してから使用してください。
- 本取扱説明書は、寝返り支援ベッド専用入力支援スイッチの説明のみ記載しています。
別紙のベッド本体の取扱説明書と合わせてご覧ください。
- 取扱説明書を読んだ後は、いつでも必要なときに取り出せるように、所定の場所に保管してください。

		ページ
1.	安全のために必ずお守りください	2
2.	入力支援スイッチの名称	4
3.	入力支援スイッチの使用	5
1.	中継ボックス各部の名称	5
2.	中継ボックスの設置	6
3.	LPB スwitchの設置・接続方法	8
4.	LPB スwitchの操作方法	9
5.	タッチ手元スSwitchの設置・接続方法	10
6.	タッチ手元スSwitchの操作方法	11
4.	仕様	11
5.	こんなときには	12
6.	アフターサービスについて	13
7.	保証書	14

1. 安全のために必ずお守りください

絵表示について



この取扱説明書および製品の表示では、製品を安全に正しく使用していただき、使用者への危害や財産への損害を未然に防止するために下記の絵表示をしています。

その指示と内容は、次のようになっています。

内容をよく理解してから本文を読んでください。


 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が生命に関わるケガを負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。
	この記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 (～しないでください)
	この記号は、行為を強制したり指示する内容を告げるものです。 (～してください)
	この記号は、絵表示に対する行為を禁止する内容を告げるものです。




設置する時

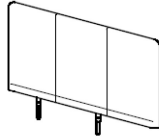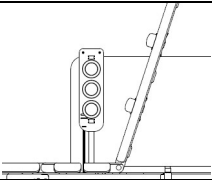 警告		
LPB スイッチを使用の際は、サイドレールカバーを必ず使用してください。 LPB スイッチが固定されず、ケガや誤操作をする恐れがあります。		
LPB スイッチをサイドレールに固定する際には、固定する位置に注意してください。 ボタンがマットレスに押され、思わぬ事故の原因となります。		
使用可能なサイドレールは、SR-100JJ、SR-106JJ、SR-800JJ、SR-W1JJのみです。ベッド用グリップでは使用しないでください。 隙間により誤操作をする恐れがあります		

使用する時


LPB スイッチとタッチ手元スイッチは併用しないでください。 誤操作やケガの原因となります。	
---	---

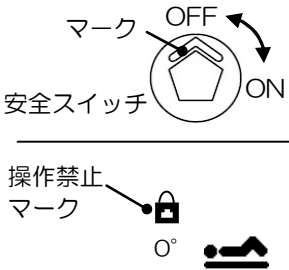LPB スイッチを使用しないときは、自動寝返り支援ベッドの手元スイッチ裏面の安全スイッチを「OFF」にするか、各動作を個別に禁止する場合は、設定コントローラーで操作禁止の設定を行ってください。 無意識にボタンに触れて誤動作するおそれがあり、思わぬ事故の原因となります。		
LPB スイッチの使用時、移乗の際、ボタンに当たらないよう注意してください。 思わぬ事故の原因となります。		
入力支援スイッチのボタンは、必要な操作に合わせて 1 つずつ押してください。 複数のボタンを同時に押したり、不必要なボタンを押すと思わぬ動きをし、ベッドに乗っている人や周囲の人がケガをするおそれがあります。		
操作する前は、ベッドの下部（周囲）の安全確認を行ってください。 思わぬケガをする恐れがあります。		
タッチ手元スイッチ使用時、6 秒間以上ボタンに触れ続けると、動作が停止しますので、さらにベッドを動作させる際は、再度ボタンに触れ直してください。 仕様上、動作時間を制限しています。		
入力支援スイッチを使用する際は、必ず中継ボックスに手元スイッチを接続してください。 手元スイッチが接続されていない場合、操作禁止モードになります。		

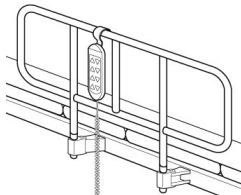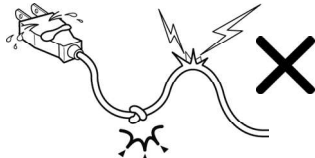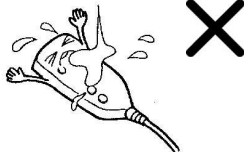
⚠ 注意		
スイッチを使用しないときは、ヘッドボードの外側やサイドレールの外側にかけてください。 ベッドの上やヘッドボード、サイドレールやベッド用グリップの内側などは無意識に触れて誤動作するおそれがあります。		
入力支援スイッチのコードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、たばねたり、挟み込んだり、巻きつけたり、加熱したりしないでください。 コードが破損して、火災、感電の原因となります。		
スイッチに水やジュースなどの液体をこぼさないでください。 故障や事故の原因となります。		
スイッチのボタンを爪や先の尖ったもので押したり、必要以上に強く押したりしないでください。 ボタンが破損するなど故障の原因となります		

2. 入力支援スイッチの名称

- それぞれの名称は図の通りです。使用前に内容を確認してください。
- 本製品は、拘縮や筋力低下の方のためのものです。ご利用者様の状況に合わせて LPB/タッチ手元スイッチいずれか一方をご使用ください。
- 使用するときは、必ず手元スイッチを中継ボックスに接続してください。接続していない場合、ベッドは操作禁止状態になります。

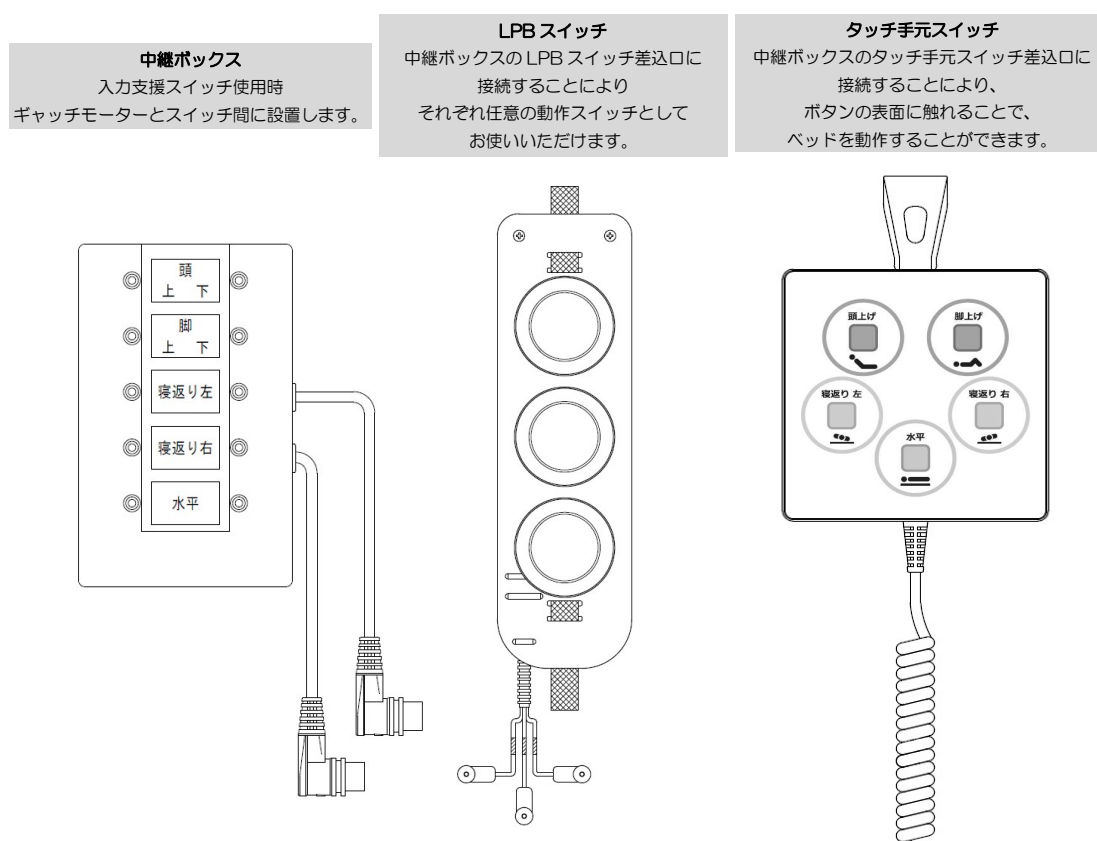


入力支援スイッチ接続例

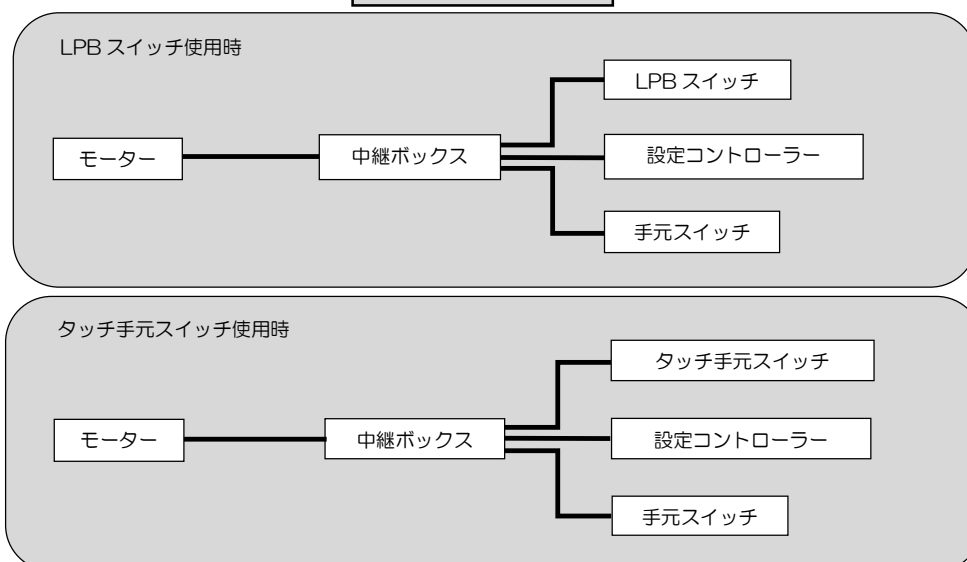

3. 入力支援スイッチの使用


1. 中継ボックスの各部の名称

- 各部の名称及び働きは図の通りです。使用前に位置と内容を確認してください。

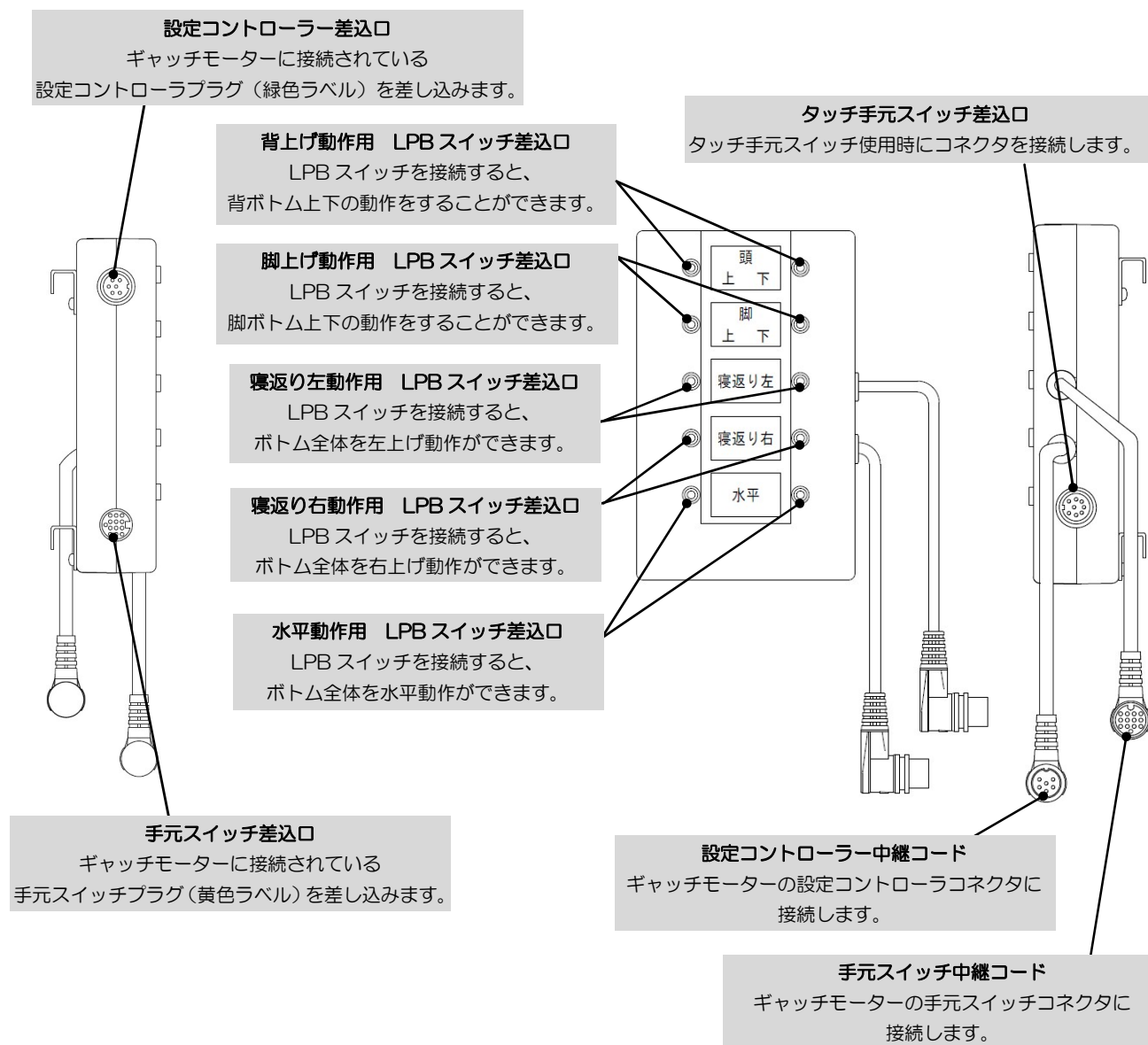



2. 中継ボックスの設置

- ベッドの高さを最大（66 cm）まで上げ、中継ボックス裏面のフックをギャッチモーターの穴に引っかけます。フックは裏面に3つあり、それぞれが確実に引っかかっていることを確認してください。

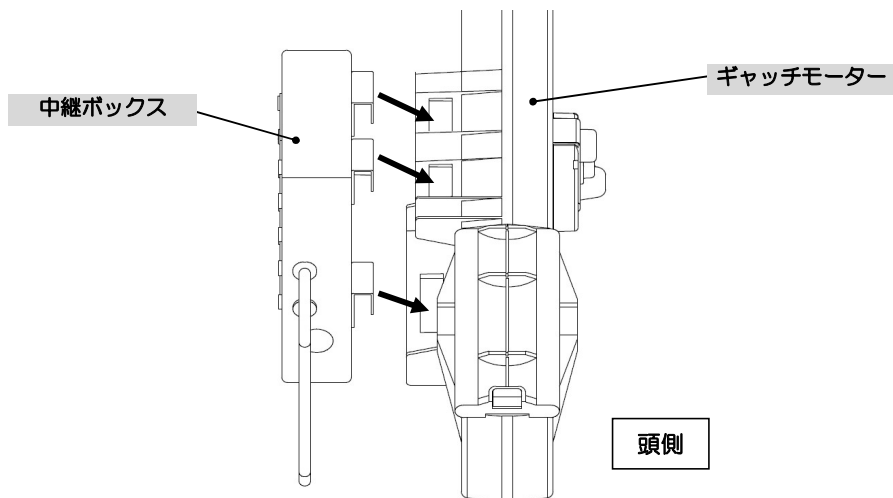


- ギャッチモーターに接続されている手元スイッチ（黄色ラベル）、設定コントローラー（緑色）の各コードを外します。（通常はベッドに差し込まれた状態です。）
- 抜いた手元スイッチ（黄色ラベル）と設定コントローラー（緑色）の各コードを中継ボックスの正面から見て左側面にある手元スイッチ差込口と設定コントローラー差込口に接続します。差し込む際には、プラグの向きを確認してコネクタへ奥まで確実に差し込んでください。

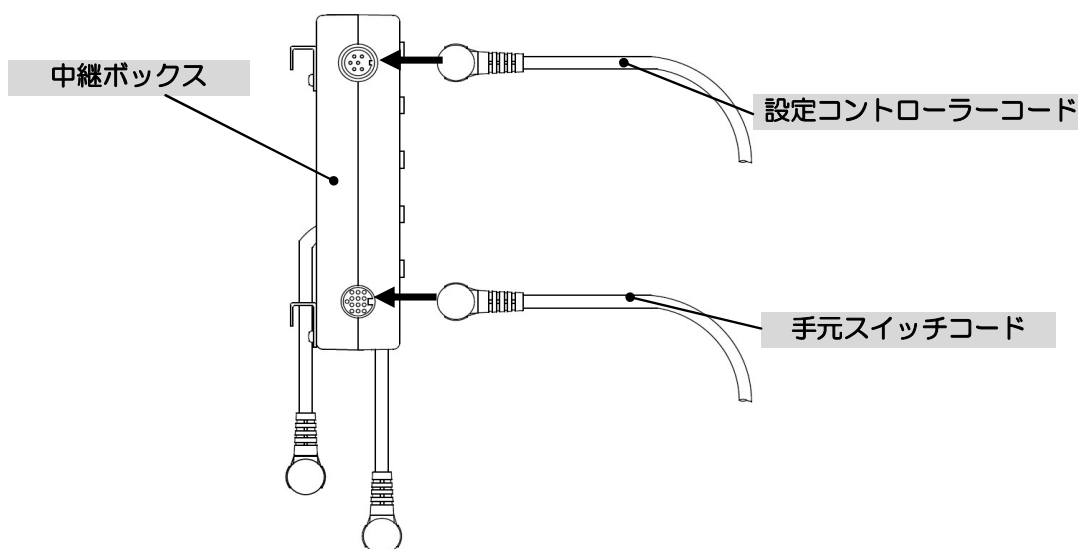

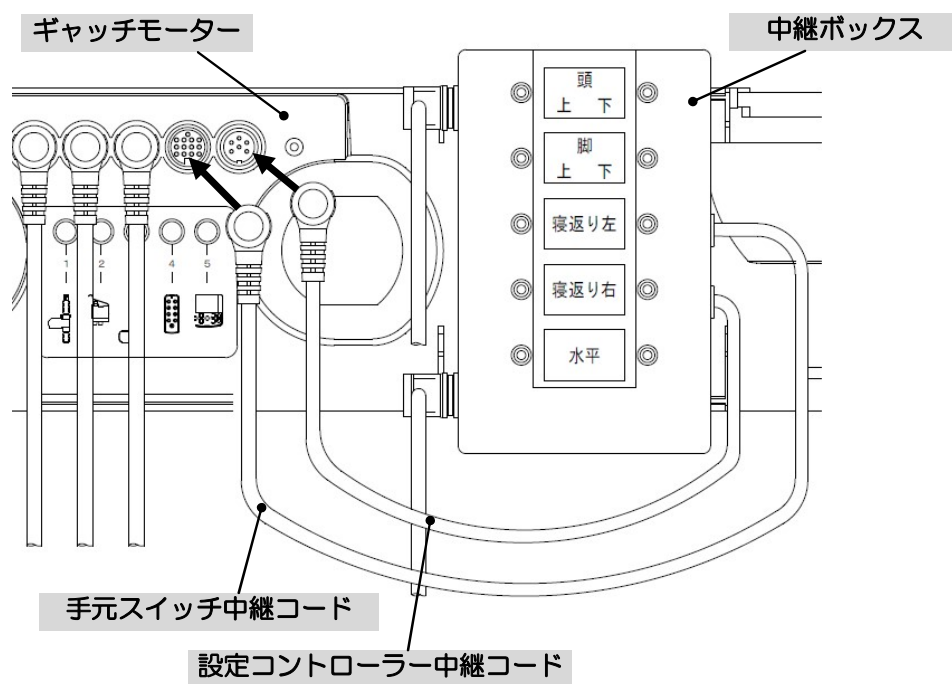


- 中継ボックス本体の2本のコードをギャッチモーターに接続します。差し込む際には、コネクタと設定コントローラーのプラグの向きを確認してコネクタへ奥まで確実に差し込んでください。

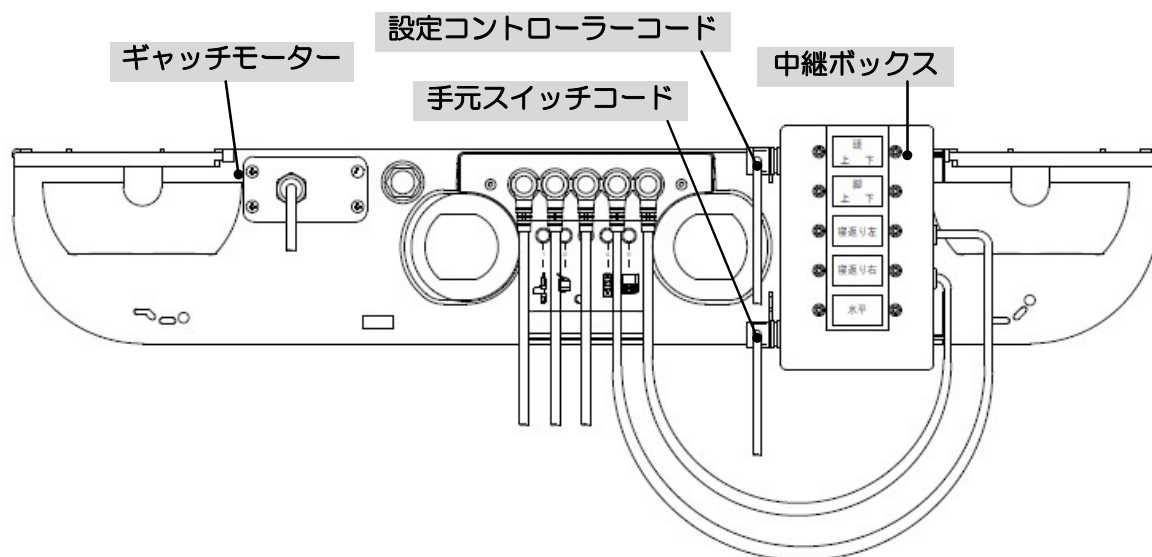


3. LPB スwitchの設置・接続方法

- サイドレールに取り付ける際には、指定されたサイドレールのみに取り付けます。
- ベッドを背上げした状態で、サイドレール位置合わせ用のゴムをサイドレールの上端に合わせ、背ボトムの動きに干渉しない位置（サイドレール脚側端より約 30 cm）にマジックテープでしっかりと固定してください。

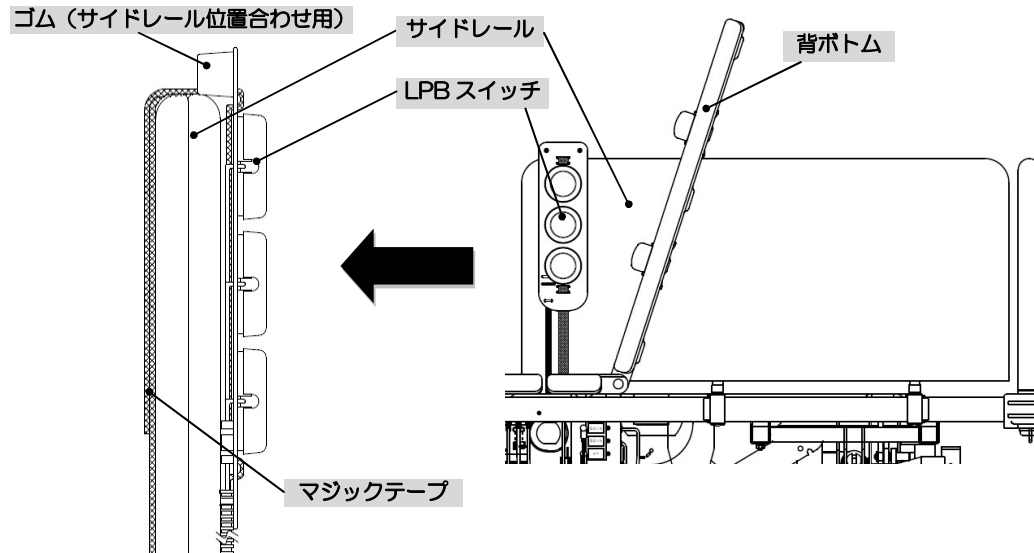


- ベッドの高さを最大（66 cm）まで上げ、スイッチのコードはベースフレームの上を通し、中継ボックスの LPB スイッチ差込口にお好みの動作に合わせ、LPB スイッチのプラグを接続してください。スイッチの色（青、黄、緑）に対応する色テープを参照ください。

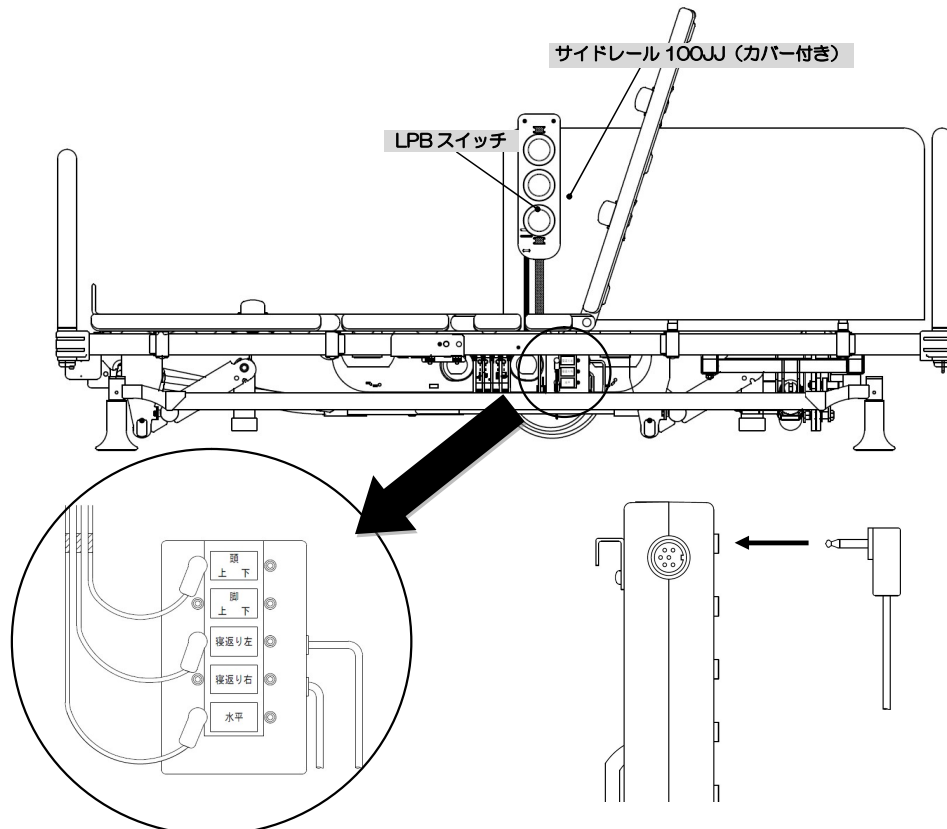

- 中継ボックスへのコード接続後、ベッドの動作時にマットレスなどが LPB スイッチに干渉しないか確認します。各運転モード（手動運転、手動運転（制限））において、背上げや寝返り（左右）を上限まで上げ、ボタンに当たる場合、位置を調整してください。

4. LPB スwitchの操作方法


- ベッドの操作するときは、各ボタンを一つずつ押してください。
- 各ボタンの動作は、中継ボックスの対応する各動作用 LPB スwitch 差込口に接続することにより、お好みの動作にすることができます。
- 例えば、中継ボックスに青色プラグを頭上げ、黄色プラグを寝返り左、緑色プラグを水平差込口に接続すると、上から頭上げ、寝返り左、水平の動作スィッチとして使用できます。

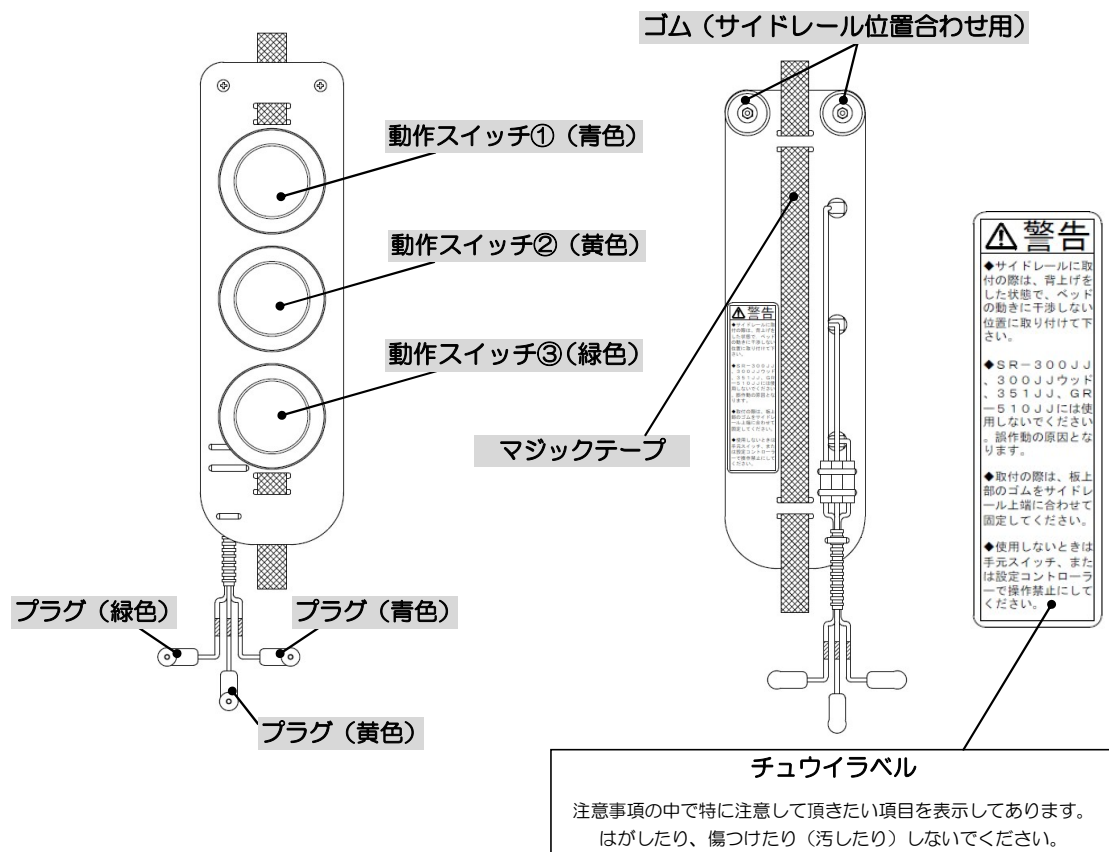

- LPB スwitchを使用しないときは、手元スイッチで裏面の安全スイッチを「OFF」にするか、各動作を設定コントローラーで個別に操作禁止にしてください。

5. タッチ手元スイッチの設置・接続方法


- ベッドの高さを最大（66 cm）まで上げ、タッチ手元スイッチのコードをベースフレームの上に通し、中継ボックスのタッチ手元スイッチ差込口に接続してください。

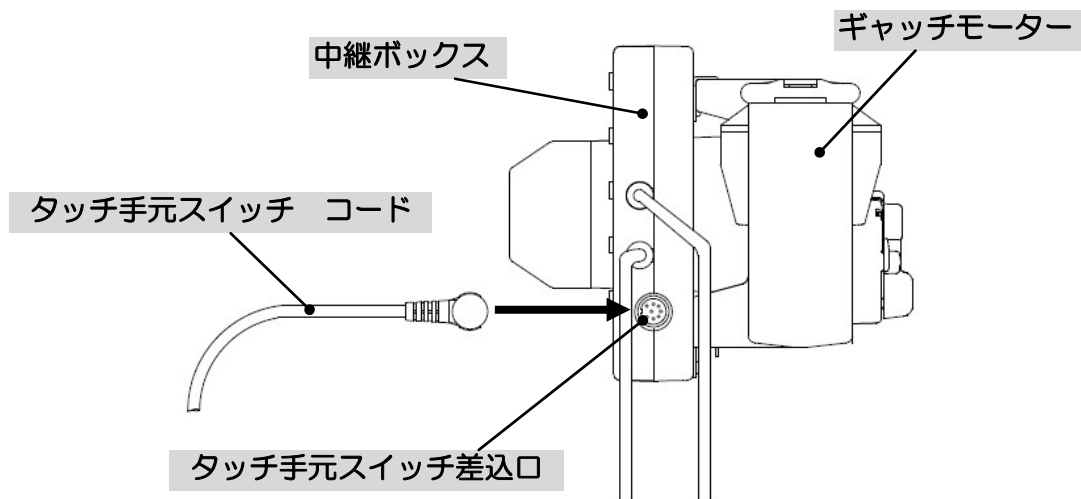

- 中継ボックス正面の行いたい動作のジャックにプラグを差し込みます。差し込む際には、奥まで確実に差し込んでください。
- 接続が完了したら、各ボタンの動作確認をしてください。

6. タッチ手元スイッチの操作方法

- ベッドを操作するときは、各ボタンを一つずつ押してください。
- スイッチをタッチするとバイブレーションが反応します。
- 使用時は握らずに使用してください。
- 約6秒間押し続けると、動作が停止するようになっていきますので、再度押し直してください。
- 頭下げ、脚下げの際は水平ボタンを押してください。
- 使用しないときはサイドレールにかけておいてください。

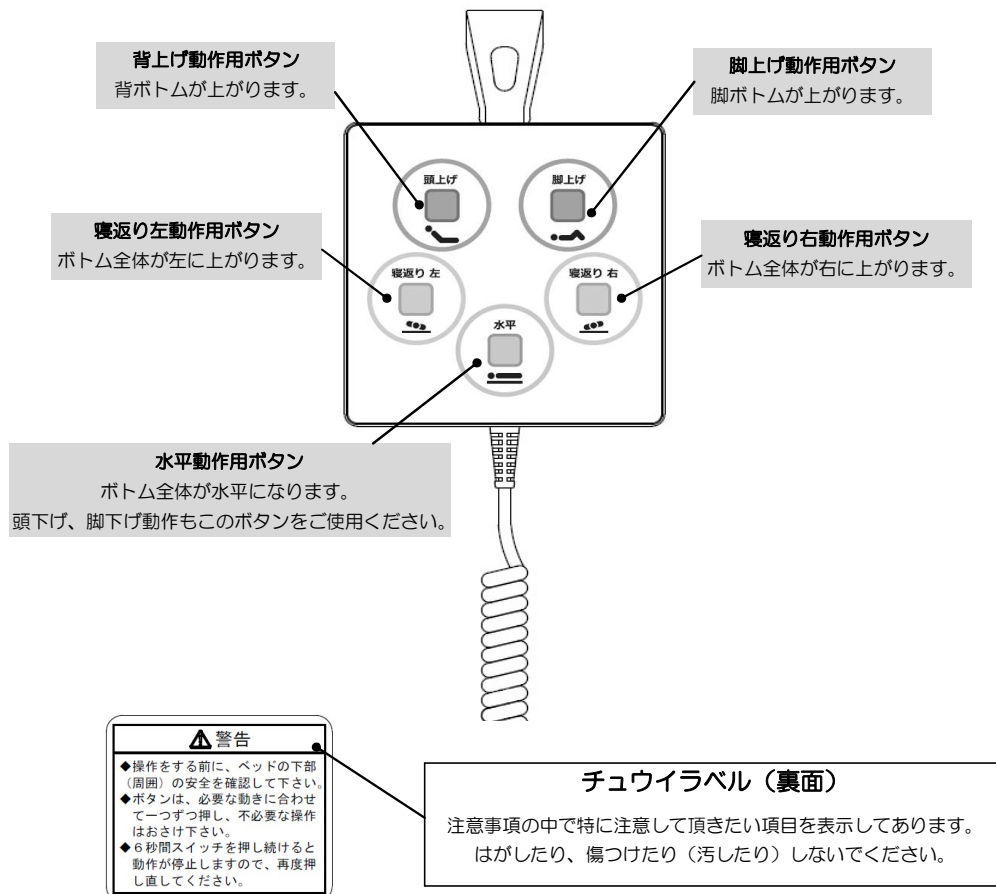

4. 仕様

中継ボックス	寸法	100×160×33
	重量	約 630 g
	消費電力（最大）	約 50mW
LPB スイッチ	寸法	100×340×49
	重量	約 960 g
タッチ手元 スイッチ	寸法	130×130×25
	重量	約 320 g

5. こんなときには

ベッドが動かない場合、修理を依頼する前にもう一度、以下の項目をチェックしてください。チェックしても正常に動作しない場合は、ただちにベッドの使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜き、販売店または弊社お客様相談室に修理を依頼してください。

症状	チェック項目	対処方法
入力支援スイッチのボタンを押してもベッドが動かない。 (全ての動作が操作できない)	電源プラグは、コンセントに差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。
	設定コントローラーの画面で <u>全ての動作に操作禁止マーク</u>  が表示されていませんか？	中継ボックスのコードが確実に差し込まれていないなど、接続に問題があります。確実に接続されているか、コードに破損はないか確認してください。
	差込口からコードの先端が外れていませんか？	手元スイッチコードの先端を差込口に差し込んでください。
	電源コード、手元スイッチのコードは破損していませんか？	電源コード、手元スイッチのコードがつぶれていたり、被覆が破れていると危険です。電源プラグをコンセントから抜き、修理の依頼をしてください。
	手元スイッチの裏側の安全スイッチのマークがOFFの位置になっていませんか？	切替レンチで、安全スイッチのマークをONの位置にしてください。
	操作している動作が操作禁止設定になっていませんか？	設定コントローラーで操作禁止の設定を解除してください。
	ボタンを同時に 2 つ押していませんか？	各ボタンを 1 つずつ押してください。
	大きい押しボタンがマットレスなどに押されていませんか？	ボタンの位置を調整し、マットレスなどが当たらないようにしてください。
	中継ボックスに手元スイッチは接続されていますか？	手元スイッチが中継ボックスに接続されていないと、ベッドの動作が禁止状態になります。

6. アフターサービスについて

保証書および保証期間について

- 保証書
所定事項の記入および記載内容をご確認の上、大切に保管してください。
- 保証期間中に修理を依頼される場合
保証書の記載内容に従って修理致します。
- 保証期間を過ぎて修理を依頼する場合
修理すれば使用できる場合は、希望により有料で修理致します。

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に取扱説明書をよく読み、再度点検の上、なお異常がある場合は、販売店または弊社お客様相談室へ連絡してください。

ご連絡いただきたい内容・・・住所、氏名、電話番号、型式名、販売店、
お買い上げ日、故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

お客様相談室

弊社の商品は厳格な検査を経て納入致しておりますが、万一不具合な点がございましたら、販売店または弊社お客様相談室までお問い合わせください。

お客様相談室



フリーダイヤル：0120-39-2824

受付時間：月～金曜日 9時～12時 13時～17時

（土、日、祝祭日、年末年始、弊社指定の休日などは除く）

製造元：フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148

7. 保証書

保証書

保証期間	1 年
お買い上げ日	平成 年 月 日
お客様	ご芳名 様
	〒□□□-□□□□
	ご住所
	TEL
販売店	店名・住所

保証の対象

本体のみ行います。

保証の態様

- (1) 保証期間内において、この製品に製品上の欠陥が発見された場合には無償修理をいたします。
- (2) ご用命の際は、お買い上げの販売店又は相談窓口にご連絡下さい。
- (3) 遠隔地等については、旅費を申し受けることがあります。

保証を受けるための条件

保証を受けるためには、保証書及び納品書又は領収書を提示して下さい。

※ 本保証書と納品書又は領収書を併せて保管をお願いします。

保証書の適用除外

- (1) 保証書及び納品書又は領収書のご提示がなかった場合。
- (2) 誤使用或いはお取扱い上の不注意や過失によって故障が生じた場合。
- (3) 本製品をご使用者自身又は他業者により変造・改造された場合。
- (4) ご購入後の移動・輸送によって故障又は損傷が生じた場合。
- (5) 火災・天災・地変によって故障又は損傷が生じた場合。
- (6) 本製品の製造上に起因した欠陥であるか、確認できない場合。

※ 上記項目については有償修理になります。

法的責任 この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は相談窓口にお問合わせ下さい。

フランスベッド株式会社



〒196-0022 東京都昭島市中神町1148 TEL 042(543)8111(大代表)