




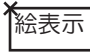
このたびはフランスベッドの製品をお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。

⚠ 注意

正しく安全にご使用いただくために、この取扱説明書をよくお読みいただいた上でご使用下さい。
また、いつでもご覧いただけますように大切に保管して下さいませようお願い申し上げます。

安全のために必ずお読み下さい

絵表示について
この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただくために、下記の絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読み下さい。

 注意	記載されている内容を見逃して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や製品が破損する恐れのあることを示します。
	この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。(～しなさい。)
	この記号は禁止の行為であることを告げるものです。(～してはいけません。)
 絵表示	絵表示に対する行為を禁止することを告げるものです。

安全のために必ずお読み下さい

⚠ 設置上の注意

平坦な場所に設置して下さい。
ガタツキや破損の原因となります。また、転倒などによるケガの原因となります。

暖房器具や放熱器具の近くには置かないで下さい。
火災の原因となります。また、皮革や木に必要な水分や油分を無くし、変色、変形、ひび割れの原因となります。

製品の移動は、ひきずらず、持ち上げて行ってください。
床面のキズや製品破損の原因となります。

直射日光が当たる場所には設置しないでください。
日焼け、変色の原因となります。

⚠ ご使用上の注意

ご使用者を座らせた状態で、製品を引きずらないでください。
製品が破損、転倒したり、床面へキズを付ける原因となります。

肘掛けや背もたれに乗ったり腰掛けたりしないでください。
転倒してケガをしたり、製品破損の原因となります。

製品の上でお子さんを遊ばせないでください。
転倒してケガをしたり、製品破損の原因となります。

製品に座った状態で揺らしたり、傾けたりしないでください。
不意に転倒してケガをしたり、製品が破損する原因となります。

製品の上に立ち上がったり、踏み台にしないでください。
不意に転倒してケガをしたり、製品が破損する原因となります。

子供を抱えた状態、2人以上でのご使用は避けてください。
不意に転倒してケガをしたり、製品が破損する原因となります。

肘掛け、背もたれ、座面に物を載せないでください。
物が落下してケガをしたり、製品破損の原因となります。
また、張り地やクッション材を傷める原因となります。

本製品を変造・改造をしないでください。
製品が破損する原因となります。

◎お手入れ方法

- 毎日のお手入れは、表面を軽くたたき、掃除機でホコリを吸い取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、中性洗剤を2～3%程度に希釈したぬるま湯に浸した柔らかい布を軽く絞り、表面を軽くたたきように拭き取ってください。その後、水に浸してかたく絞った布で洗剤分をよく吸い取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。そして、風通しの良い日陰で自然乾燥してください。


アフターサービス

- 保証書
◎保証書は、お買い上げ店より「お届け日、お買い上げ店名を記入していただく」下さい。
◎保証書に記入できない場合は、納品書又は領収書（お届け日、お買い上げ店名のわかる物）と併せて大切に保管して下さい。
注）保証書と、納品書又は領収書無き場合は保証いたしかねます。

- 修理を依頼されるときは
◎この取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合は『お買い上げ店』又は、『お客様相談室』へご連絡下さい。
- 保証期間中は
◎保証書の規定に従って、出張修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
◎修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。
- ご連絡していただきたい内容
◎できるだけ詳しくお願いいたします。
①ご住所、氏名、電話番号
②型式名、お買い上げ店名、お届け日
③故障又は異常の内容

お客様相談室

修理、お取り扱い、お手入れなどのご相談は、まずお買い上げの販売店へお申し付け下さい。
◎弊社製品は厳格な検査を経て納入いたしておりますが、万一不具合な点がございましたらお買い上げの販売店又は弊社相談室にお問い合わせ下さい。

 0120-39-2824
フリーダイヤル：月～金 9時～12時、13時～17時
土、日、祝祭日、年末、年始等は除く

◎ネジ類の定期点検

- ガタツキがある場合は、肘掛けや座面下の組立てネジが緩んでいる可能性があります。その際は、付属のレンチで締め直してください。
ガタツキがある状態のまま使用を続けると、製品が破損したり、不意に転倒してケガの原因となります。
- 点検時、金具などの破損があった場合は直ちに使用をやめ、お買い求めいただいた販売店、またはお客様相談室へお気軽にご相談ください。

座面高さの調整方法

付属の六角レンチを用い、36 c m、39 c m、42 c m よりお好みの高さを選ぶことができます。

(お届け時の座高は 36 c m)

で使用者のかかとが着地する高さをお選びください。

- ▲ ネジは確実に締めつけてください。
- ▲ 定期的に点検し、緩みがないことを確認してください。

操作レバー取扱い方法


背もたれの角度は、「左右にあるレバーを引いた状態で」調整します。

①座って右側のレバー

おしり (尾てい骨) が乗る部分の座面角度を調整してください。

②座って左側のレバー

背もたれの角度を調整してください。

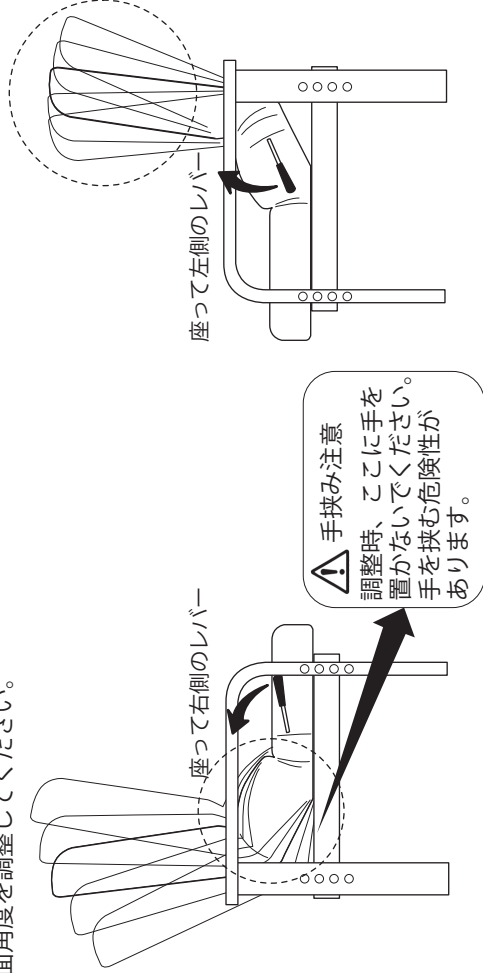


▲ 角度調整は、

付添いの方、ご家族の方が、背もたれに手を添えながら行ってください。使用者自身が調整しようとすると、急に背もたれが倒れたり、適切な角度が調整できない場合があります。

適切な角度選びについて

なるべく深く座り、腰回り、背中との隙間がなくなり、ご使用者が最も姿勢を維持しやすい角度を選んでください。

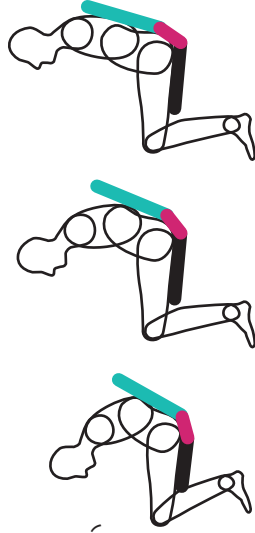

保証書

お届け日 平成 年 月 日

ご芳名	様
ご住所	
〒	
Tel	

店名・住所	
販売店	

保証期間：お届け日より1年

保証の適用除外

保証期間中でも次のような場合には、有料修理又は出張料を申し受ける事があります。

- (1) 本保証書のご提示が無かった場合。
- (2) 本保証書にお届け日、お客様名、販売店名の記入が無く、納品書又は領収書等にて必要事項の確認ができなかった場合。
- (3) 保証書の記載事項の字句を書き替えられた場合。
- (4) 誤った使用あるいはお取扱上の不注意や過失によって故障が生じた場合。
- (5) 本製品をご使用者自身又は他業者により改造、改造された場合。
- (6) ご購入後の移動や輸送及び落下等、不適切なお取扱により故障及び損傷が生じた場合。
- (7) 火災、地震、風水害、落雷およびその他の天災地変、公害、塩害、ガス害による故障又は損傷が生じた場合。
- (8) 指定電源(AC100V 50Hz/60Hz)以外の使用、及び異常電圧による故障又は損傷が生じた場合。
- (9) 本製品の使用による経年変化に該当する事項、及び消耗品の交換。
- (10) ①布地、革、ソフトレザー等の破損、変色。
- (11) ②木部の変質、塗装・メッキ部の曇り変色。
- (12) ③電球の切れ。
- (13) 一般家庭用以外 (例 業務用等) に使用された場合の故障及び破損。
- (14) 設置場所 (床面のゆがみ等) に起因される異音、組立不具合。
- (15) 本製品外より発生した虫害。

設置場所

- (1) ご贈答品、あるいは転居等で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、取扱説明書記載のお客様相談室へご相談下さい。
- (2) 本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

法的責任

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権限を規制するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はお客様相談室にお問い合わせ下さい。

保証の態様

- (1) 保証期間内において、取扱説明書、製品添付の注意ラベル等の注意書にしたがって正常な使用状態で故障した場合には、無償修理致します。
- (2) ご用命の際は、お買い上げの販売店又はお客様相談室にご連絡下さい。
- (3) 離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿った訪問に要する実費を申し受けることがあります。

保証を受けるための条件

保証を受けるためには、出張修理の際に本保証書及び販売店納品書又は領収書を提示して下さい。

※ご注意 納品書又は領収書を併せて保管願います。

保証の対象

消耗部品を除く、本体とし保証期間は別表により。尚、別売部品をご選択の場合は、別売部品添付の保証書により。

免責

本製品の故障の放置又はその使用によって生じた、直接、間接の損害についての保証は、一切その責を負いませんので、あらかじめご了承下さい。

販売店様へお願い

ご購入後又はご配送時に保証書の所定事項 (お届け日、販売店名) をご記入の上、お客様へお渡し下さい。

フランスベッド株式会社
〒196-0022 東京都昭島市神町1148
TEL 042(543) 3111 (代表)