

ご使用方法

- 袋から取り出し、そのままご使用いただけます。
- スポンジ部で口腔内の汚れを取り除いてください。

特長

- 大小の山谷でやさしく効果的に口腔内の汚れを取り除くサクラ形状です。
- 口腔内にやさしいソフトな使用感です。
- 本品は個包装されているために衛生的です。
- 全長 15cm の長めで使いやすいスポンジブラシです。
- 水や歯磨き剤は必要ありません。

使用上のご注意


- 上記以外での用途で使用しないでください。
- 万全な管理のもと製造しておりますが、ご使用前に必ずスポンジ部と柄が接着されていることをご確認ください。
- スポンジ部を噛んで強く引っ張るとちぎれることがあります。スポンジを飲み込まないよう十分に注意してご使用ください。
- 本商品は使い捨てとなります。繰り返しのご使用はお避けください。

製造元


Saitou industrial co.,ltd.

 齊藤工業株式会社

〒959-1286 新潟県燕市小関字野中 1156-1
TEL 0256-62-2627 FAX 0256-63-9863
URL <http://www.saitow.co.jp>
E-mail saitow@saitow.co.jp

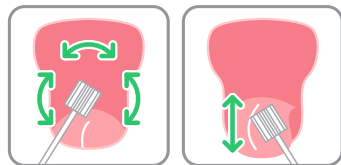

回転させながらご使用ください。

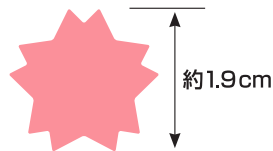

サクラ形スポンジ原寸大

