

吸着すべり止めマット

正しくお使いいただくため、ご使用になる前にこの取扱説明書を必ずお読みください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。

取扱説明書

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。



注意

誤った使いかたをすると「傷害又は財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を含んで説明しています。





必ず実行していただく「強制」内容を説明しています。



してはいけない「禁止」内容を説明しています。

注意

	必ず浴槽内でのみ使用すること		飛び乗ったりしないこと マットが動き、転倒し、けがの原因になります。
	入浴する前に吸盤が吸着しているか必ず確認すること マットが滑り、転倒し、けがの原因になります。		底面がざらついた浴槽や木製の浴槽には吸盤が効かないため、使用しないこと
	取り外す場合はゆっくりとめくこと 無理に引っ張ると破損する恐れがあります。		石けんやシャンプー、入浴剤等がマットや浴槽に付いた状態で使用しないこと 滑り、転倒し、けがの原因になります。
	使用後は浴槽から取り出すこと 湯水につけたままでは製品の劣化が早まり、変形または破損する恐れがあります。		高温になる場所に長時間放置しないこと マットが変形し、使用できなくなります。
	使用前にマットを置く場所の汚れやぬめりを取り除くこと 吸着力が弱まり転倒やけがの原因になります。		お湯を循環させている浴槽(24時間風呂)で使用する場合、必要時以外はマットを浴槽の底に敷かないこと 汚れやぬめりが発生し、転倒やけがの原因になります。

使いかた

- 浴槽の底面に敷いてお使いください。
- マットの裏面に付いている吸盤を押さえつけるようにして、しっかり吸着させてください。
- 取り外す場合は、マットの端を軽くめくだけで吸盤がはがれます。

お手入れの方法

中性洗剤をスポンジかやわらかい布にふくませて、汚れを取り除いたあと、きれいな水で洗剤を洗い流してください。しっかり水気を切り、かげ干しか、乾いた布で乾かしてください。

使用上のご注意

- ※火のそばに置かないでください
- ※タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等は使用しないこと
- ※塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール、漂白剤等は絶対に使用しないこと
製品が劣化・変化・色おちする恐れがあります。
- ※直射日光があたる場所に長時間放置したり、乾燥器具等の火気に近づけないこと

製品仕様(1枚あたり)

サイズ:28×36×厚さ0.8cm
重 量:約220g

品質表示

原料樹脂:エラストマー
耐熱温度:80度

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル  **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)



フィルム:PP

日本製



アロン化成株式会社



ライフサポート事業部



4 970210 049617