



# 自動ラップポータブルトイレ専用 凝固剤

吸収・消臭・固めて臭いを閉じ込めます



安全上のご注意・使いかたの詳細は裏面にございます。  
正しくお使いいただくために、必ずお読みください。

(約 60 回分) 容量 **6L**



## 消臭

消臭成分入りで、尿の臭いを閉じ込めます。

## 固める

尿を吸収し、ゲル状に固めます。

## 安心

お肌に触れても安全な原料を使用しています。

## 環境

紙製品のリサイクル材料を主原料とし、環境にやさしい商品です。

- ・本商品は、弊社の自動ラップポータブルトイレ専用の凝固剤です。他の用途には使用しないでください。
- ・商品により、色に多少の差が生じる場合がありますが、品質には問題ありません。

### ⚠️ 警告 誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

- ・本商品は、食べ物ではありません。
- ※本商品を誤って食べてしまった場合、すぐに吐かせるなどの処置をして医師の手当てを受けてください。

### ⚠️ 注意 誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

- ・本商品が床などに散乱した場合は、速やかに清掃してください。
- ※足を滑らせて転倒する原因になります。
- ・お子様や認知症の方の手の届かない場所へ保管してください。

### 使いかた

- ・自動ラップポータブルトイレのフィルムが、正常に取り付けられていることを確認します。
- ・トイレのご使用前に、付属の計量カップで1杯分量り取り、ポータブルトイレのフィルム内に本商品（凝固剤）を投入します。（尿1回分（約200～300ml）に対し、付属の計量カップ1杯が目安です。）
- ・本商品（凝固剤）投入後は、自動ラップポータブルトイレの取扱説明書に従い、フィルムでラップしてください。

### ⚠️ 廃棄上の注意

- ・大便是、ラップされたフィルムから取り出し、トイレに流してください。
- ※トイレの配管が詰まる原因になりますので、本商品（凝固剤）をトイレに流さないでください。
- ※大便秘をトイレに流した後は、大便秘に付着した本商品（凝固剤）が詰まりの原因とならないよう、必ず水だけで2回以上流し、完全に流れたことを確認してください。
- ・オムツの分類を参考にするなど、お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

### 保存（保管）方法


- ・高温多湿、および直射日光を避けて35℃以下の環境を目安に保管してください。
- ・火や水のそばに置かないでください。
- ・開封後は袋の口をしっかりと閉じ、お早めにご使用ください。

### 仕様

- ・主成分：再生紙、吸水ポリマー
- ・指定用途：簡易トイレ用の凝固剤
- ・性状および適用：可燃物
- ・容量：6L（約60回分）

### 付属品 <計量カップ>

- ・付属の計量カップで本商品を量り取り、ポータブルトイレのフィルム内に本商品（凝固剤）を投入します。

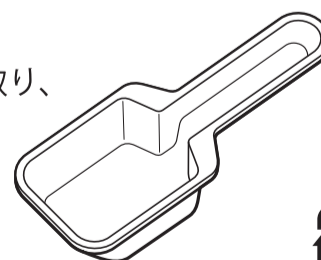

JAN: 4970210862513

日本製 910855

製品に関するご意見・お問い合わせは

### お客様相談室

フリーダイヤル ☎0120-86-7735  
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00  
(12:00～13:00はのぞく)

発売元



## アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <http://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索

製品の仕様および価格は予告なく変更することがあります。