

## お客様ご相談窓口のご案内

### ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理 ・ お手入れ ・ お取扱い ・ 工事などのご相談は、  
まずお買い求めの販売店 ・ 工事店へお申し付けください。

商品・お取扱いなどのご相談は

**パナソニック エイジフリー株式会社**

フリーダイヤル **0120-365887**

●受付時間 9:00～12:00 (土、日、祝日休み)  
13:00～17:00

<http://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

**パナソニック エイジフリー株式会社**

本社 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048  
© Panasonic AGE-FREE Co.,Ltd.2017-2018


保管用  
保証書別添付

介護保険  
購入対象  
品 目

**Panasonic**<sup>®</sup>

## 取扱説明書 家具調トイレ 座楽

|       |                                     |              |
|-------|-------------------------------------|--------------|
| コンパクト | <input type="checkbox"/> プラスチック便座   | 品番 PN-L23206 |
|       | <input type="checkbox"/> ソフト便座      | 品番 PN-L23207 |
|       | <input type="checkbox"/> あたたか便座     | 品番 PN-L23208 |
|       | <input type="checkbox"/> 脱臭プラスチック便座 | 品番 PN-L23216 |
|       | <input type="checkbox"/> 脱臭ソフト便座    | 品番 PN-L23217 |
|       | <input type="checkbox"/> 脱臭あたたか便座   | 品番 PN-L23218 |

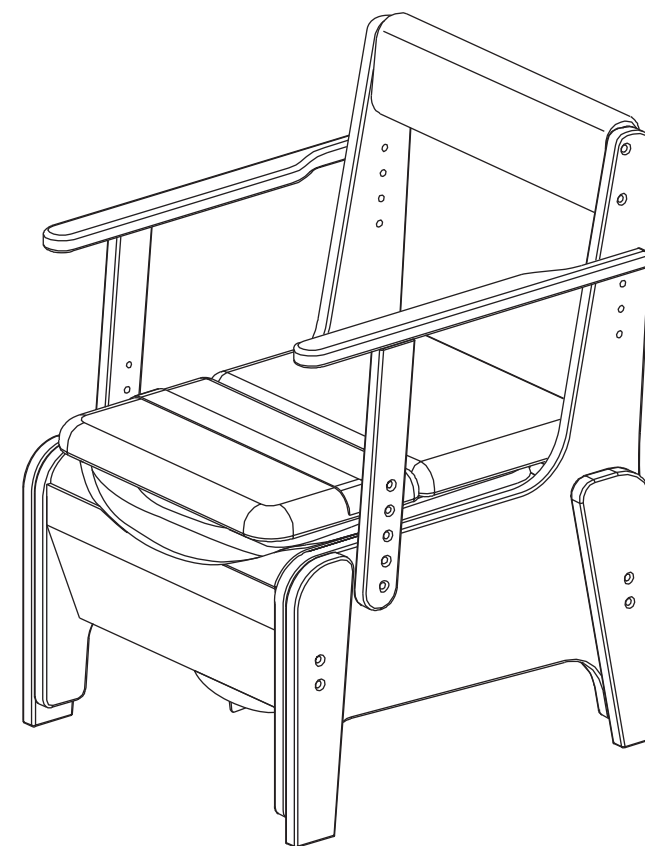

### もくじ

|               |       |    |
|---------------|-------|----|
| ●安全上のご注意      | ..... | 2  |
| ●各部の名称        | ..... | 5  |
| ●部材・付属品一覧     | ..... | 5  |
| ●商品寸法図        | ..... | 6  |
| ●組み立てかた       | ..... | 7  |
| ●ご使用方法        | ..... | 13 |
| ●お手入れ方法       | ..... | 15 |
| ●愛情点検表        | ..... | 18 |
| ●故障かな?と思った時   | ..... | 19 |
| ●仕様           | ..... | 21 |
| ●保証とアフターサービス  | ..... | 22 |
| ●お客様ご相談窓口のご案内 | ..... | 24 |

**ご使用になる前に必ずお読みください。**

最大使用者体重：100kg以下

このたびは、家具調トイレ 座楽をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2～4ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

## ■ 安全上のご注意 ■

必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

**警告** 「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。

**注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

## 警告



必ず守る

■座る際や、使用後立ち上がろうとする際などに、ご使用者自身が身体的安全性を十分に確保できない場合は介助者が付き添う。

転倒や、ケガのおそれがあります。



必ず守る

■必ず平坦な場所で使用する。

本体が不安定になり、転倒やけがの原因になります。



必ず守る

■身体を本体に十分近づけてから座る。

転倒や、ケガのおそれがあります。



必ず守る

■片側、もしくは両側のひじ掛けをはずして使用する場合は介助者が付き添う。

転倒や、けがのおそれがあります。



必ず守る

■各部のネジがゆるんでいないか使用前に点検する。

破損またはけがをするおそれがあります。



禁止

■体重が 100kg を超える方は使用しない。

本体が破損し、けがのおそれがあります。



禁止

■絶対に分解したり、修理、改造はしない。部品の代用品は使用しない。

破損やけがのおそれがあります。また、感電、火災の原因にもなります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



禁止

■浴室など、湿気の多い場所には設置しない。

故障や感電、火災の原因になります。



禁止

■商品梱包用のポリ袋やシートをかぶらない。

窒息するおそれがあります。



禁止

■横からもたれかからない。

移乗の際にひじ掛けにつかまると転倒しけがのおそれがあります。家具調トイレへの移乗が困難な場合は介助者の付き添いが必要です。



禁止

■すき間や開口部の一部に身体の一部をはさまない。

ご使用者の心身の状態や利用状況によっては、すき間にはさまれ生命に関わる大きな事故につながる可能性があります。特に、頭部や首、腕や足がはさまれないように十分ご注意ください。



禁止

■トイレ、座いすとしての用途以外に使用しない。

子供の遊び道具や踏み台等として使用すると破損やけがのおそれがあります。



禁止

■ポータブルトイレとの間にはさみこみが発生するようすき間を開けて設置しない。

首や手、足をはさむすき間があると事故の原因となります。



禁止

■移乗時にひじ掛けや、背もたれ、ペーパーハンガーなどにつかまったり、身体を支えるために使用しない。

故障や破損、けがの原因になります。

## 警告



必ず守る

■お手入れの際、あるいは長時間ご使用にならない場合は電源プラグ、ACアダプターをコンセントから抜く。

故障や感電、火災の原因になります。



必ず守る

■電源プラグ、ACアダプターのほこり等は定期的にとる。

電源プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因となります。電源プラグ、ACアダプターを抜き、乾いた布でふいて下さい。



必ず守る

■製品を移動させるときは、必ず電源プラグをコンセントから抜き、コードをまとめてから移動する。

コードの破損、感電、ショート、火災の原因になります。



禁止

■いたんだ電源プラグ、ACアダプター、電源コード、ゆるんだコンセントは使用しない。

故障や感電、火災の原因になります。



禁止

■電源コード、コントローラーコード、センサーコードを本体の下敷きにしない。センサーコード、電源コードを無理に曲げる、引っばる、ねじる、傷つける、加工する等を行わない。また電源コードやコントローラーを束ねたり、傷ついたら使用しない

故障や感電、火災の原因になります。



必ず守る

■低温やけどに注意する。 **あたたか便座/脱臭あたたか便座**

便座の同じ場所に長時間皮膚がふれていると低温やけどのおそれがあります。長時間便座に座るときはあたたか便座コントローラーの設定を「低」にしてください。

【次のような方は特にご注意ください】

ご年配の方、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、眠気を誘う薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用された方、深酒、疲労の激しい方。



必ず守る

■電源プラグ、ACアダプターは根元まで確実に差し込む。

故障や感電、火災の原因になります。



必ず守る

■焦げ臭いなど異常がある場合は、すぐに電源プラグを抜く。

故障や感電、火災の原因になります。



禁止

■コンセントや配線器具の定格を超える使い方や交流 100V 以外で使わない。

故障や感電、火災の原因になります。



禁止

■濡れた手で電源プラグ、ACアダプターを抜いたり接続をしない。

故障や感電、火災の原因になります。



禁止

■あたたか便座、あたたか便座コントローラー、電源プラグ、脱臭器、ACアダプター、脱臭器センサー、脱臭器のすい口に小便や汚水、水をかけない。

故障や感電、火災の原因になります。



禁止

■専用の AC アダプター以外は使用しない。

故障や感電、ショート、火災の原因になります。

## 注意



禁止

■あたたか便座は、便座にカバーをかけて使用しない。

本体の温度が上昇し、故障、感電の原因になります。



禁止

コントローラーを使用するときは、心臓ペースメーカーから 5cm 以上離す  
本機からの電波により、ペースメーカーの作動に影響をあたえる場合があります。



## 注意

- 必ず守る**

■高さ調整の際は、必ず全ての脚が同じ高さになるように、ネジで確実に固定する。  
本体が不安定になり、転倒したり、けがの原因になります。
- 必ず守る**

■ご使用者の身体状況に応じて各部品を調整する。  
調整が不適切な状態で使用すると転倒やけがのおそれがあります。各部品の調整はお買い上げの販売店かケアマネジャーなどの専門家にご相談ください。
- 必ず守る**

■便座に座るときには、できるだけ便座中央部に座る。  
転倒や転落の原因になります。ご使用者自身が身体の安全性を確保できない場合は介助者が付き添ってください。
- 禁止**

■座面を後ろに倒した状態で座面に力をかけない。  
座面が破損し、転倒やけがのおそれがあります。
- 禁止**

■落としたり強い衝撃を加えない。  
強い衝撃を加えたり、硬いものに当てたりすると破損・凹みの原因になります。
- 禁止**

■トイレパケツにトイレパケツフタを置いた状態で、便座に座らない。  
パケツフタの持ち手がお尻に接触し、けがの原因になります。
- 禁止**

■高さ調整脚を外した状態で使用しない。  
本体が不安定になり、転倒やけがのおそれがあります。
- 禁止**

■便座の上に立ったり便座を乱暴に開閉しない。  
故障や破損、けがの原因になります。
- 禁止**

■屋外に放置したり直射日光に当てたりしない。  
色あせやひび割れ、破損の原因になります。
- 禁止**

■トイレパケツの中に水や汚物を入れたまま、本体を移動させたり座面の高さ調整を行わない。  
内容物がこぼれ、床や衣服を汚すおそれがあります。
- 禁止**

■補高便座は使用しない。  
本体が不安定になり、転倒やけがのおそれがあります。
- 禁止**

■ひじ掛けの高さ調整穴に指を入れない。  
けがの原因になります。
- 必ず守る**

■長期間使用していない場合は、使用前に必ず作動確認を行う。  
P18 ページの愛情点検表に沿って確認してください。
- 必ず守る**

■便座を開閉する際、あるいはトイレパケツ、防汚トレイを取り出す際には座面が倒れてこないことを確認する。  
座面が倒れると指などはさんでけがをすることがあります。
- 必ず守る**

■移動の際、ひじ掛けは必ず固定した状態で行う。  
本体が破損し、けがをするおそれがあります。
- 必ず守る**

■座面を後ろに倒して使用する場合は座面を持ってゆっくりと倒す。  
本体が転倒したり、座面が破損しけがの原因になります。
- 禁止**

■座面が立った状態で座面に力をかけない。  
座面が破損し、転倒やけがのおそれがあります。
- 禁止**

■キャスターで本体を移動させる場合は無理な段差や凹凸面では行わない。  
故障や破損、けがの原因になります。
- 禁止**

■木材部分は直接水をかけて洗わない。  
木材部分の劣化・塗装剥がれの原因になります。
- 禁止**

■お手入れの際に、磨き粉、たわし等を使用しない。  
傷がつき、汚れが落ちにくくなります。
- 禁止**

■中性洗剤以外の洗剤、シンナー、ベンジン、漂白剤、便器用洗剤薬品などを用いて清掃しない。  
変質や破損、感電の原因になります。
- 禁止**


■座面を開閉するときには側面や座面の折れ目などは持たない。  
側面や座面の折れ目を持つとひじ掛けや本体に指をはさんでけがをすることがあります。
- 禁止**

■本体や便座が破損したときは使用しない。  
故障や破損、けがの原因になります。
- 禁止**

■人や物をのせたまま移動しない。  
移動中に落下するなど故障や破損、けがの原因になります。
- 禁止**

■火気に近づけない。  
火災や変形の原因になります。


## 各部の名称

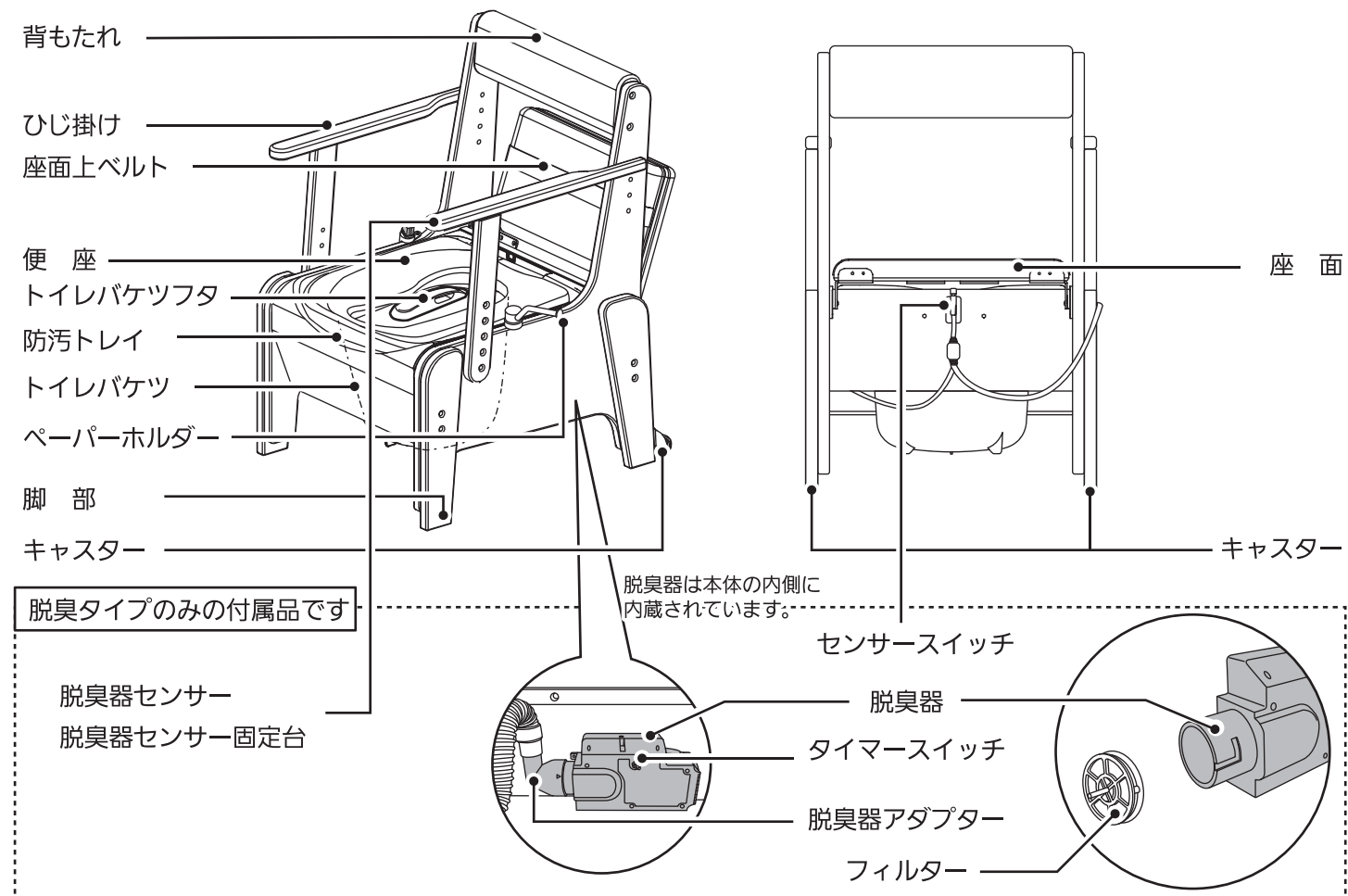

## 部材・付属品一覧

組み立て前には必ず同梱されている部材・付属品をご確認ください。

本体  
1台

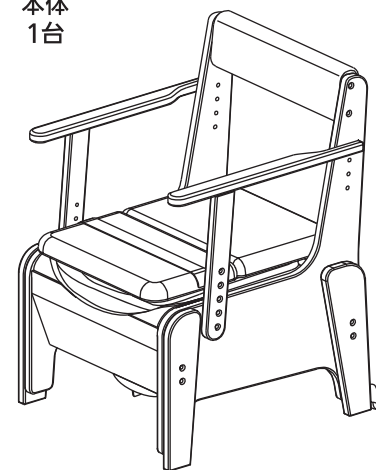

※ひじ掛け、脚は本体に  
あらかじめ取り付けて  
あります。

本体にあらかじめ  
取り付けてあります


トイレパケツフタ  
1個



トイレパケツ本体  
1個



防汚トレイ  
1個

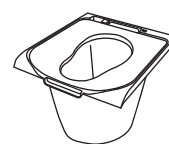


トイレパケツの中に入っています

消臭液  
1本



品番  
VALTBNSB

便座カバーEタイプ  
1枚

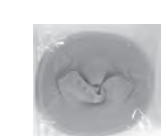


品番  
PN-LTBCRKC  
※あたたか便座タイプ  
には付属しません。

ペーパーハンガー  
1個



固定ネジ  
1本

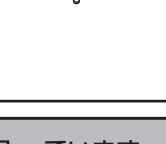

ACアダプター  
1個



※脱臭タイプのみの  
付属品です。


梱包箱に入っています

取扱説明書  
1冊



パケツフタ置き  
2本

※梱包材に貼り付けています。

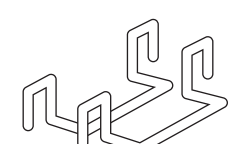

組み立て前には必ず同梱されている  
部材・付属品をご確認ください。

あたたか便座コントローラー



コントローラー固定用フック  
1個




※防汚トレイに取り付けてあります。


## センサースイッチ



※センサーコードに取り付けています。

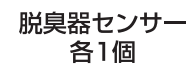

センサー固定具  
1個

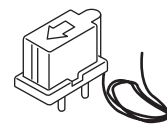


赤外線  
センサー面  
本に取り付けています。




※本体に取り付けています。

立体图

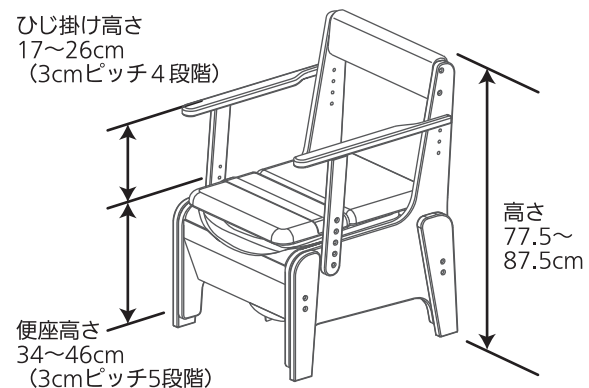


※座面の高さは便座高さ +3cmです。

上面図

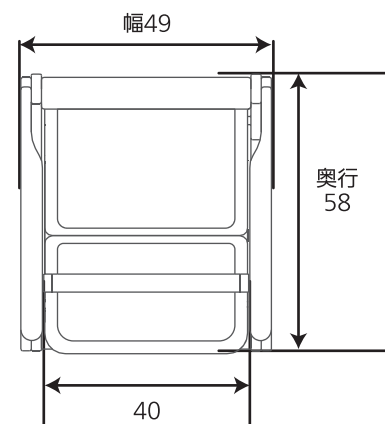



#### 便座寸法図

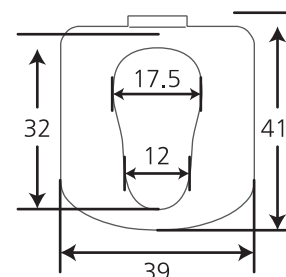

单位: cm

## 本体を組み立てる

- 便座の高さは34～46cmまで3cm間隔で5段階の調整ができます。
- 脚はあらかじめ便座の高さが34cmの位置に取り付けてあります。
- 固定するときは仮止めして平坦な床の上に置き、脚がすき間なく床面に接していることを確認してから全てのねじを完全に締め付けてください。

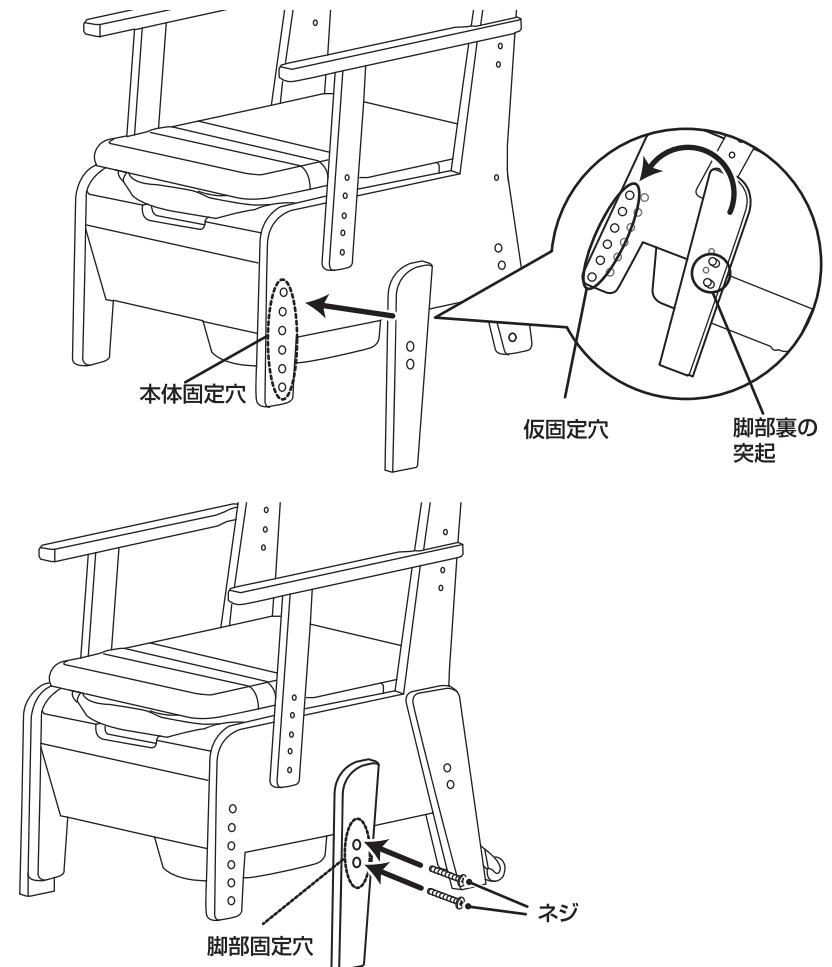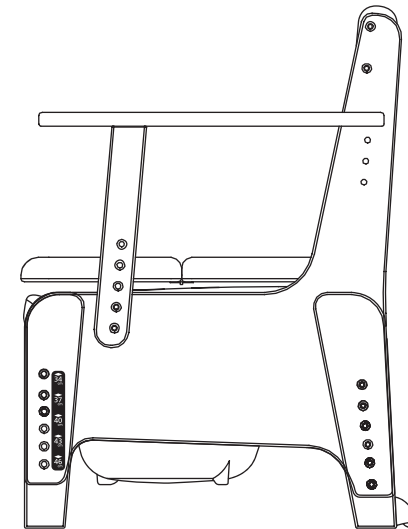

| 床面からの便座面高さ |            |      |      |      |      |
|------------|------------|------|------|------|------|
|            | 34cm       | 37cm | 40cm | 43cm | 46cm |
|            | 1 段目 (出荷時) | 2 段目 | 3 段目 | 4 段目 | 5 段目 |
|            |            |      |      |      |      |




■高さ調整の際は、必ず全ての脚が同じ高さになるように、ネジで確実に固定する。  
本体が不安定になり、転倒したり、けがの原因になります。



## 2 ひじ掛けの高さ調整方法

- ひじ掛けの高さは17～26cmまで3cm間隔で4段階の調整ができます。
- ひじ掛けはあらかじめ便座からの高さ23cmの位置に取り付けてあります。

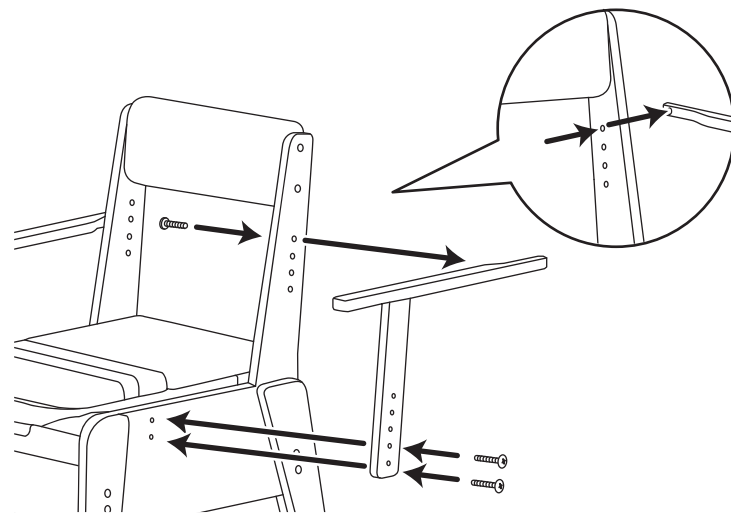


便座面からのひじ掛け高さ

|  | 17cm | 20cm | 23cm     | 26cm |
|--|------|------|----------|------|
|  | 1段目  | 2段目  | 3段目(出荷時) | 4段目  |
|  |      |      |          |      |


## 3 付属の便座カバーを取り付ける

■あたたか便座タイプには付属していません


- ①便座を立ててカバーを裏返してください。

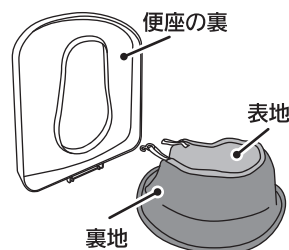


- ②カバーのフック部が下になるようにし、便座穴からカバーを引出してください。

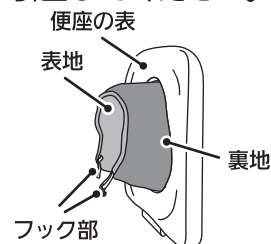


- ③フックを便座の表からヒンジ部にまわしフックを引っ掛けてください。

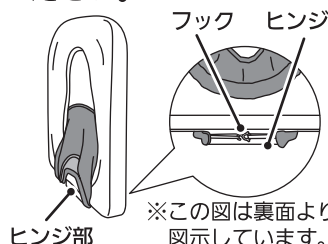


- ④カバーを便座の肩部に引っ張りひっかけてください。

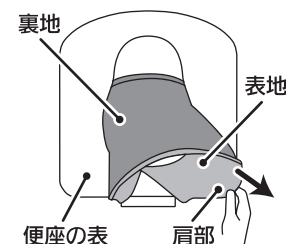

- ⑤カバーを便座の逆の肩部に引っかけてください。

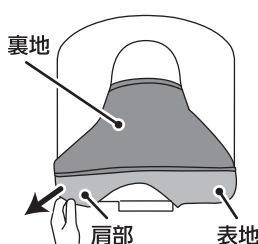


- ⑥カバーを便座の先端部に引っ張りひっかけてください。

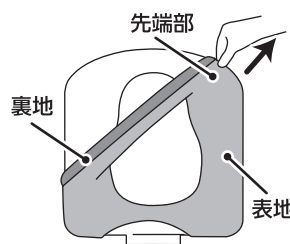

- ⑦カバーを便座の逆の先端部に引っ掛けしわ、たるみをのばしてください。




- パイプを外せば洗濯機で丸洗いができます。洗濯後は風通しの良い所で陰干ししてください。

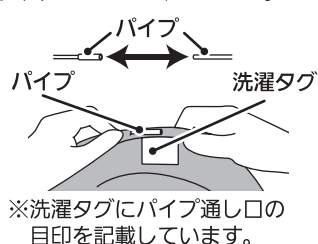

## 4 ペーパーハンガーを取り付ける



■プラスドライバーをご用意ください  
■左右どちら側にも取り付けることができます

- ペーパーハンガーを本体のペーパーハンガー取り付けナットにねじで固定してください。
- 左右にペーパーハンガー取り付けナットが付いています。
- ペーパーハンガーを取り付ける取り付けナットは前方です。  
※後方は脱臭器センサー固定用です。

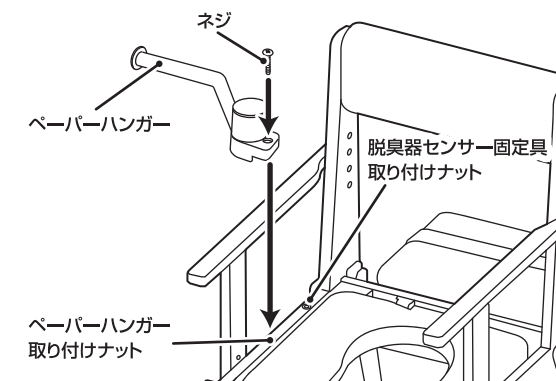


## 5 バケツフタ置きを取り付ける

本体内側に、バケツフタ置きを差し込む穴が開いています。左右各穴の前後にバケツフタ置きを差し込んでください。

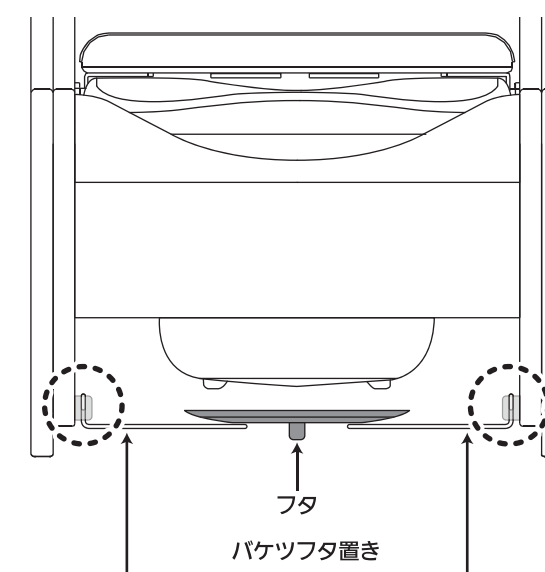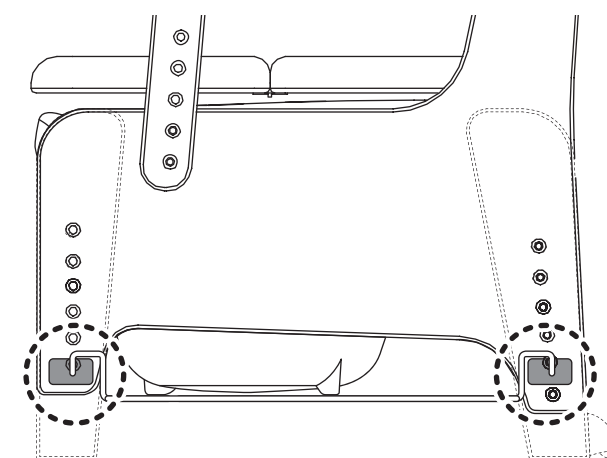

取付けブロック

トイレバケツフタの持ち手は床面に向けて置いてください。

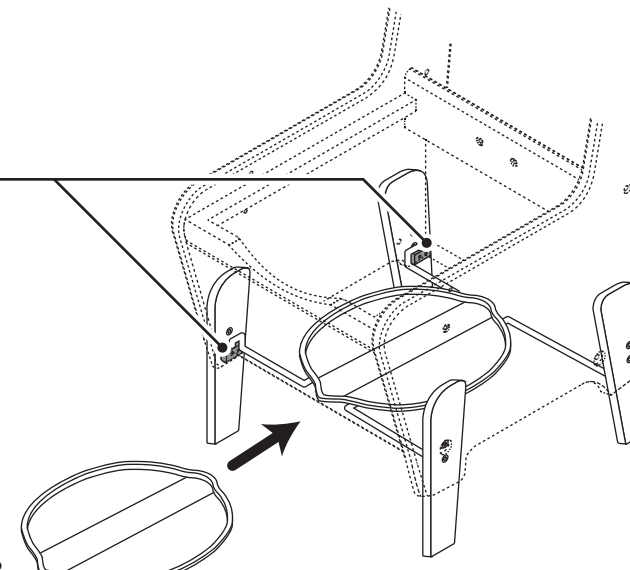

お知らせ


■バケツフタ置きを上から強く押すと取付けブロックが破損するおそれがあります。

6～10は、脱臭タイプの説明になります。

## 6 脱臭タイマーの変更方法

- 脱臭タイマーは60分、15分に設定ができます。
- 出荷時の脱臭タイマーは60分に設定されています。

- ①防汚トレイを上へ持ち上げ取りはずしてください。
- ②好みの脱臭時間に合わせ、脱臭タイマースイッチをスライドさせてください。

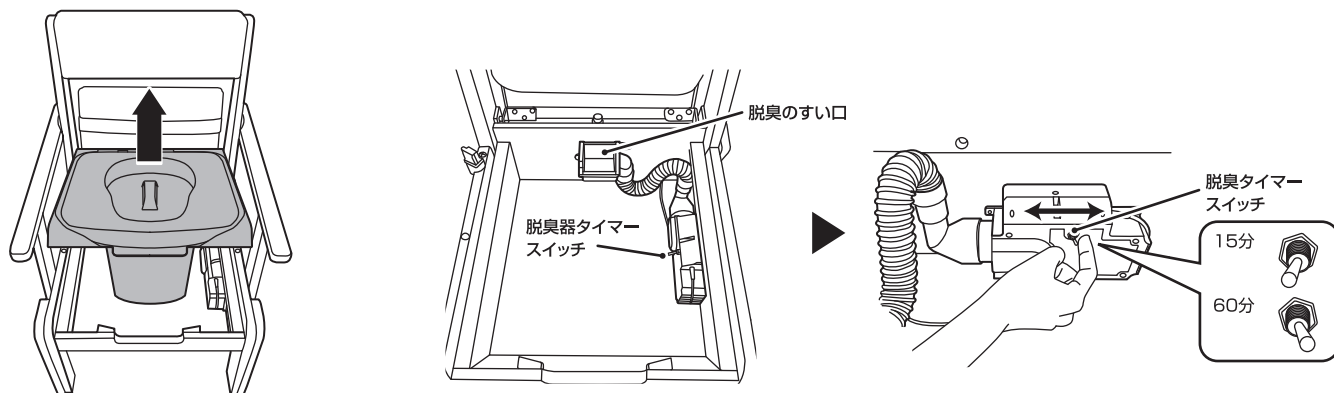

## 7 脱臭器センサーを取り付ける


- プラスドライバーをご用意してください
- 左右どちら側にも取り付けことができます

- センサー固定具は出荷時、右側に取り付けています。
- センサー固定具を取り付ける取り付けナットは後方です。前方はペーパーハンガー用です。


### 1 センサー固定具の取り付け

センサー固定具を本体のセンサー固定部にネジで取り付けてください。

#### 右側への取り付けの場合

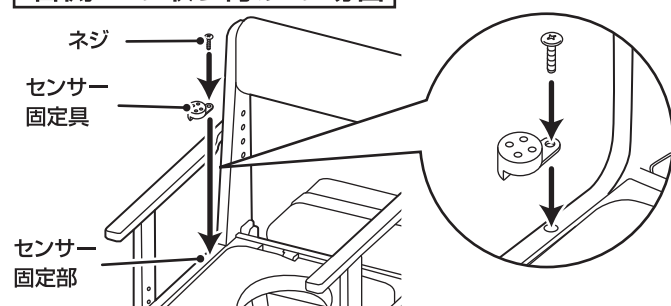


#### 左側への取り付けの場合

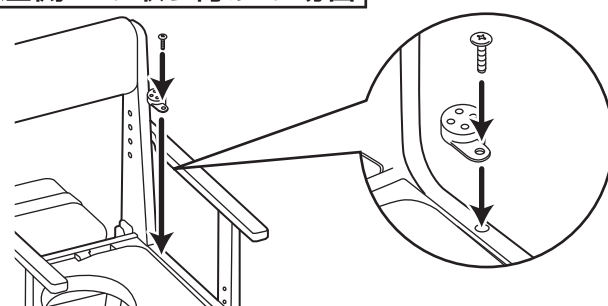


### 2 脱臭器センサーの取り付け

脱臭器センサーの矢印は便座中央に向くようにセンサー固定具の穴に差し込んでください。

#### 右側への取り付けの場合

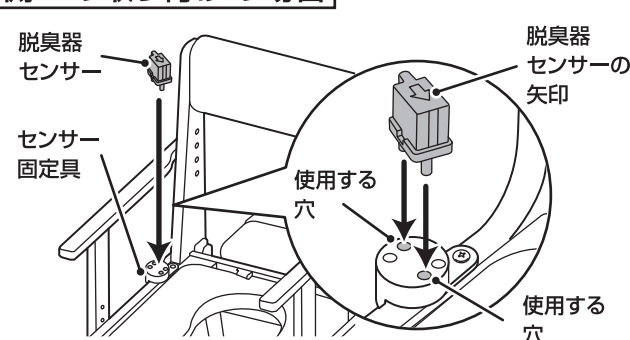


#### 左側への取り付けの場合

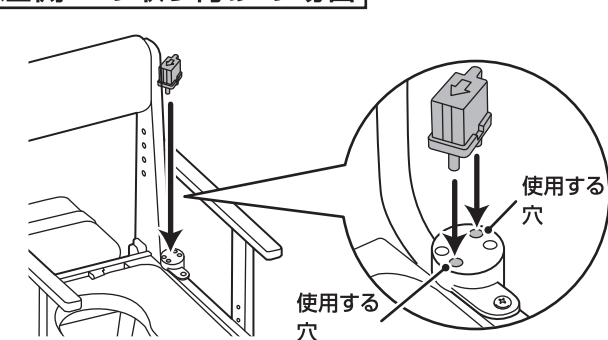


## 8 脱臭器センサープラグ、ACアダプタープラグを接続する

- 脱臭器センサープラグを脱臭器センサープラグ差し込み口（ケーブルが長い方）にACアダプタープラグをACアダプタープラグ差し込み口（ケーブルが短い方）に差し込んでください。

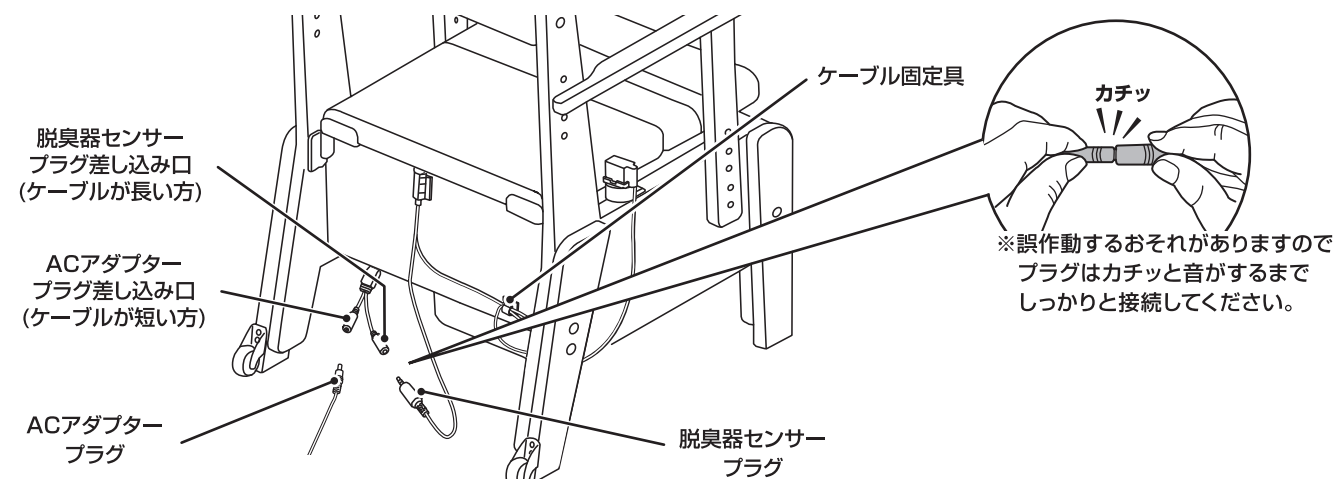

## 9 ACアダプターをコンセントに差し込む

- ACアダプターをお近くの100Vコンセントに根元まで確実に差し込んでください。

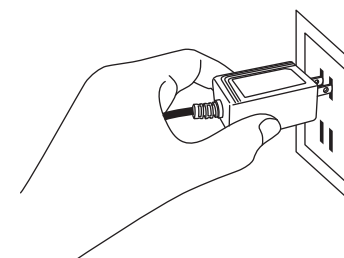


## 10 脱臭器を作動させる

- 便座に座ると約3秒後に自動で脱臭が開始されます。  
(誤動作防止の為、ACアダプターをコンセントに差し込んでから約20秒間、センサーは感知しません。)
- 便座から立ち上がると60分後または15分後(出荷時は60分後に設定)に脱臭が終了します。  
設定方法はP10 7 脱臭タイマーの変更方法を参照してください。
- 外出時や脱臭が不要なときには、安全のため必ずACアダプターを抜いてください。


11～12は、あたたか便座タイプの説明になります。

## 11 温度調節コントローラーを設置する

- コントローラー固定用のフックが付属しています。  
裏面のはく離紙をはがし商品本体の使いやすい場所に貼り付けあたたか便座コントローラーを固定してください。

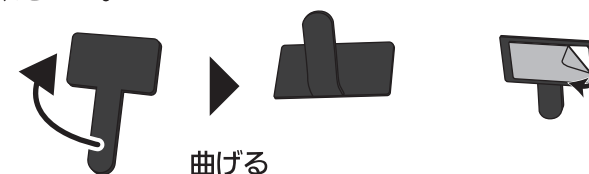


- 取り付け後、コントローラー固定用のフックがしっかりと固定されている事。  
便座や便フタの開閉時に、あたたか便座のコードがはさまれない事を確認してください。

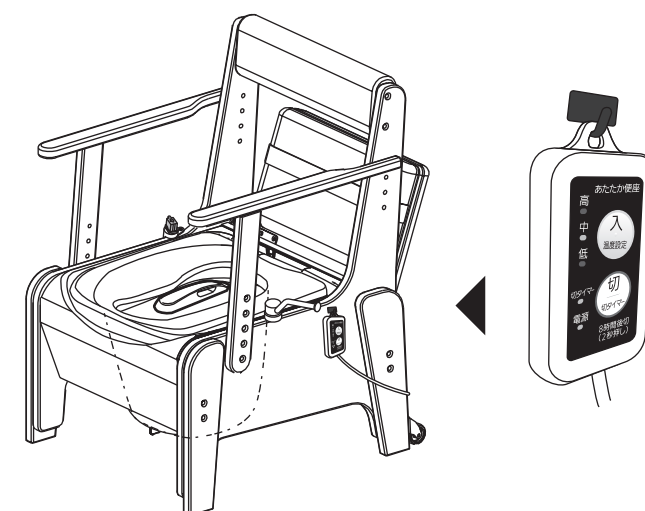



12 は、あたたか便座タイプの説明になります。

## 12 温度調節コントローラーで温度調節を行う

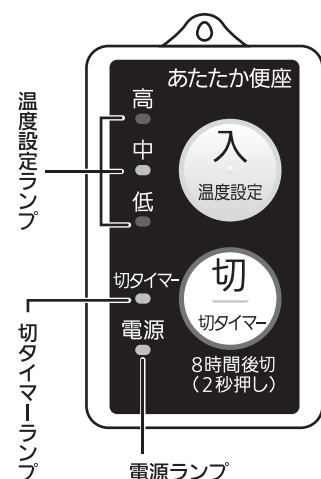

### あたたか便座の使用方法


電源プラグを交流100Vのコンセントに根元まで確実に差し込んでください。電源ランプが点灯（緑）していることを確認してください。

#### 1) 便座のヒーターを入れる

- コントローラーの **入** ボタンを押してください。

#### 2) 温度調整をする

- コントローラーの **入** ボタンを押してください。ボタンを押すごとに図のように温度設定ランプが点灯（赤）し、便座の温度が変わります。

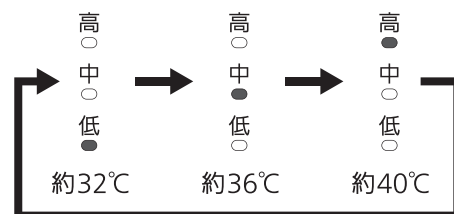

#### 3) 便座のヒーターを切る

- 便座のヒーターを切りたい場合は **切** ボタンを押してください。温度設定ランプが消灯し、便座への通電を停止します。再度 **入** ボタンを押すと、前回の設定温度のランプが点灯（赤）し、便座の通電を開始します。

#### 4) 8時間後切設定

夜間のみの使用の場合などに便利な、切タイマー機能（8 時間後に暖房を停止する機能）が付いております。

- 温度設定ランプが点灯（赤）中に、コントローラーの **切** ボタンを約 2 秒間押してください。切タイマーランプが点灯（緑）し、8 時間後に便座への通電を停止します。
- タイマーにて通電を停止したのち **入** ボタンを押すと、前回の設定温度のランプが点灯（赤）し便座へ通電を開始します。
- タイマー設定中に、再度コントローラーの **切** ボタンを押すと、便座への通電を停止します。

### お知らせ

- タイマー設定中に **入** ボタンを押すとタイマーが解除されます。
- 温度設定ランプ（赤）が点灯していない状態では、タイマー設定はできません。
- 電源プラグを抜くと温度設定およびタイマー設定はリセットされます。
- 室温が 5℃を下回る場合、お好み温度にセットしてもその温度に達しないことがあります。



### 警告


- 低温やけどに注意する。  
便座の同じ場所に長時間皮膚がふれていると低温やけどのおそれがあります。長時間便座に座るときはコントローラーの設定を「低」にしてください。  
【次のような方は特にご注意ください】  
ご年配の方、自分で温度調節のできない方、皮膚感覚の弱い方、眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方、深酒、疲労の激しい方。
- コントローラーを使用するときは、心臓ペースメーカーから 5cm 以上離す  
本機からの電波により、ペースメーカーの作動に影響をあたえる場合があります。

## ■ ご使用方法 ■

ご使用前に、一度、健常者の方が使い勝手のチェックをされることをおすすめいたします。

## 1 座面を開け、便座をあげてトイレバケツフタをはずす

- ①座面上ベルトを持ってください。
- ②座面を持ち上げ開いてください。
- ③便座を上げ、トイレバケツフタをはずしてください。

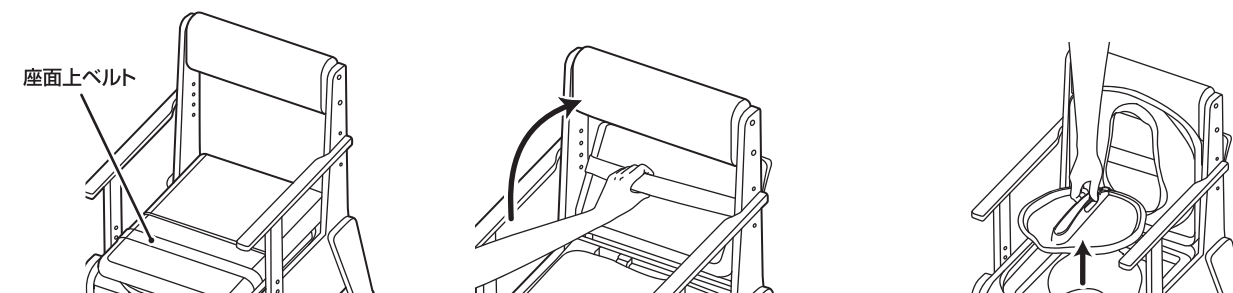


## 2 トイレバケツに水と消臭液を入れる

- バケツに水1.5～2リットルを入れ、消臭液を入れてください。
- 脱臭タイプは消臭液を併用することで夜間など長時間汚物の処理ができない場合も脱臭効果を持続させることができます。

## 3 座面を後方まで倒して使用する

- 後ろから介助が必要な場合は、図のように座面を持ち上げながら後方に倒してください。

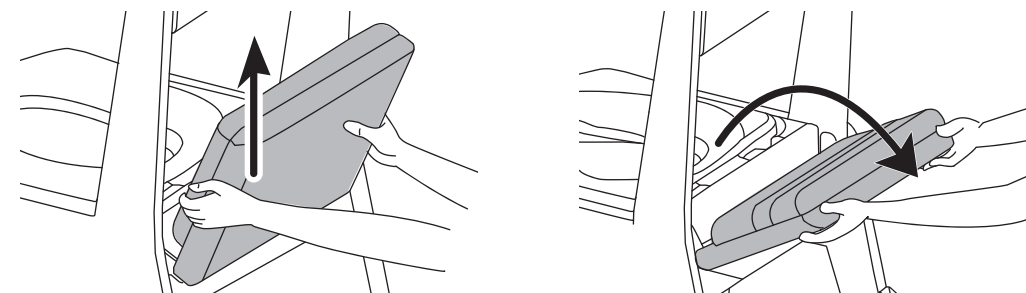


### 注意

- 座面を後ろに倒した状態で座面に力をかけない  
座面が破損し、転倒やけがの原因になります。

## 4 キャスターの使用法

- キャスターはトイレを移動させる際にお使いください。
- 移動はひじ掛けがしっかりと固定されているか確認し  
ひじ掛けの前側を図のように持ち上げて移動させてください。

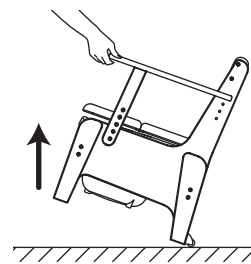

注意

- トイレに人が座った状態では移動させない。  
キャスターは本体の移動専用ですので、破損やケガの原因となります。
- 移動の際は汚物の有無を確認する。  
大きく傾けて移動すると汚物がこぼれるおそれがあります。

お知らせ

- バケツフタをフタ置き場に収納した状態で移動しないでください。  
バケツフタが落下し床を汚すおそれがあります。

## 5 汚物の処理について

バケツフタは取り外した状態、取り付けた状態どちらでも、汚物処理ができる構造になっています。


### ■バケツフタを取り外した状態で汚物処理をする方法

- バケツ吊手を倒しフタを取り外してから、バケツの持手と吊手を持って  
トイレに汚物を流してください。



### ■バケツフタを取り付けた状態で汚物処理をする方法

- バケツの吊手と持手をもった状態で、バケツフタの後端を押し込むとバケツフタが開きます。
- バケツフタを開いた状態でバケツの持手と吊手を持って、トイレに汚物を流してください。

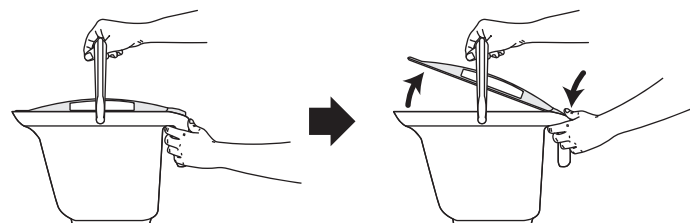


お知らせ

- バケツ内に汚物や水が入った状態でバケツ持手のみを持ってバケツを持ち上げると  
破損するおそれがあります。必ず、バケツ吊手を持って持ち上げてください。

### ■バケツのお手入れ方法

- バケツ内で水を廻しやすい形状にしているため、バケツ内の汚  
れが落としやすくなっています。  
汚物をトイレに流したあと、500～1000 mlの水をバケツに入  
れ、バケツ内で水をくるくる廻すようにバケツを動かしてくだ  
さい。回転する水でバケツ内の汚れが取りやすくなります。

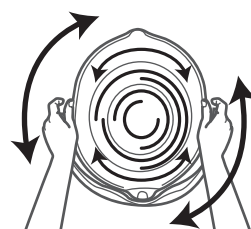

お知らせ

- 勢いよくバケツを動かすと、バケツ内の水や汚物が飛び出すおそれがあります。  
バケツ内の水の動きを確認しながら、ゆっくりと動かして洗浄してください。

## ■ お手入れ方法 ■

プラスチック便座、バケツ・防汚トレイは取りはずして丸洗いできます。



警告

- あたたか便座、ソフト便座、脱臭器は丸洗いしない。  
故障・感電・破損のおそれがあります。



注意

- 磨き粉、たわし等を、使用しないでください。  
傷がつき、汚れが落ちにくくなります。
- 便器用洗剤、漂白剤、シンナー、ベンジン等は、使用しないでください。  
変質し、破損する恐れがあります。
- 屋外に放置したり、直射日光に当てたりしないでください。  
色あせやひび割れの原因となります。




お知らせ

- あたたか便座、ソフト便座、脱臭器の汚れは水またはぬるま湯を  
やわらかい布にしみこませて軽くふき取ったあと水気を十分ふき取ってください。

- 便座と防汚トレイの取りはずしは  
本体から持ち上げて取りはずしてください。

市販の中性洗剤をご使用ください。


洗剤をスポンジまたは柔らかい布に含ませ汚れを拭き取り  
十分に水洗いした後水切りをしてください。

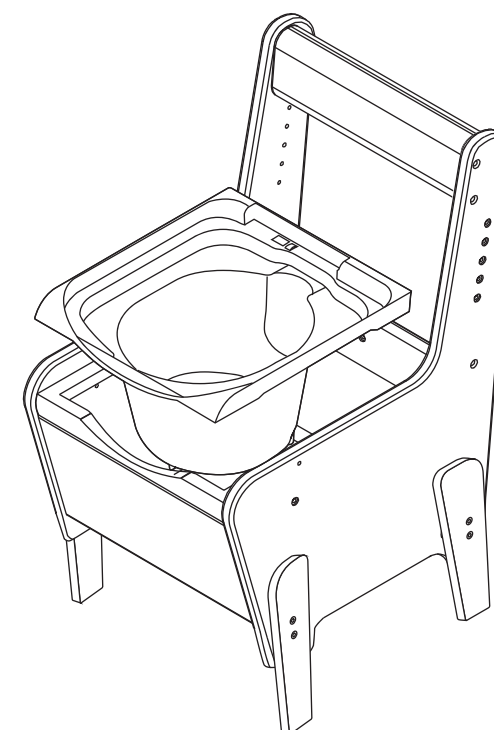


便座ストッパー




ダンパー

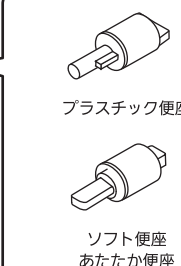

※便座のタイプによって  
ダンパーは異なります。

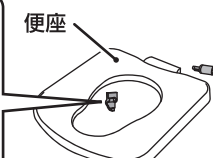

トイレバケツフタ

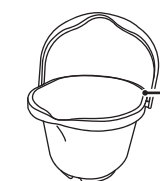

トイレバケツ本体



防汚トレイ

お知らせ


- 取りはずしの際に、部品をなくさないようにしてください。



## 1 便座を取りはずす

プラスチック便座 / 脱臭プラスチック便座

- ①防汚トレイの固定ピン押さえを下に押さえてください。
- ②固定ピン押さえを押しながら固定ピンを左へスライドしてはずしてください。
- ③便座を斜めに持ち上げてください。

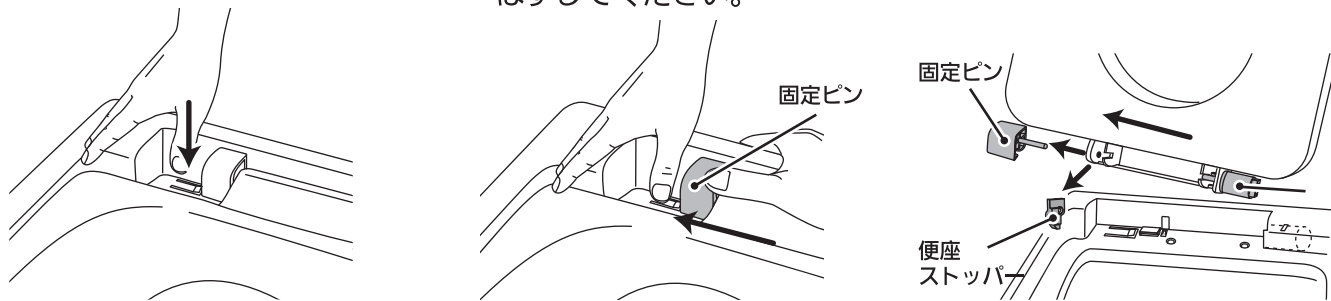


### あたたか便座タイプの取り外し

あたたか便座はケーブルが固定されています。ケーブルを外してから


**1 便座を取りはずす**の方法で便座を取りはずしてください。

ケーブルの取りはずし

- ①本体背面にケーブル固定用のフックが取り付けられています。

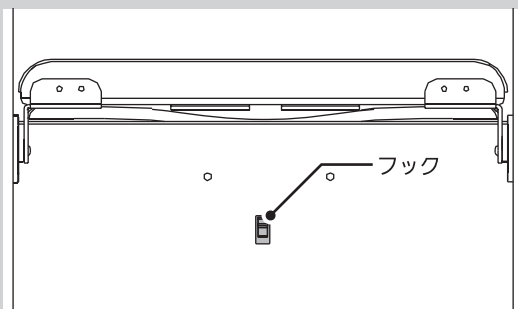


- ②フックの爪部分を押し込んでください。フックの固定が解除されます。

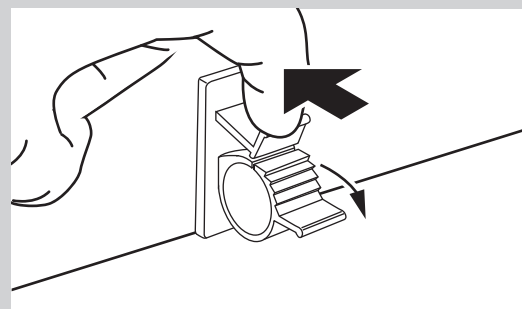


ケーブルの固定

- ①図のように、ケーブルをはわしケーブルフックに通してください。

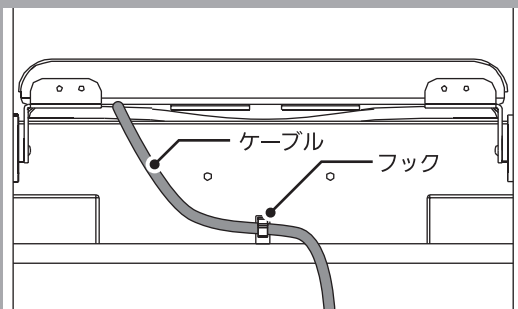

- ②ケーブルフックを押し込みケーブルを固定してください。

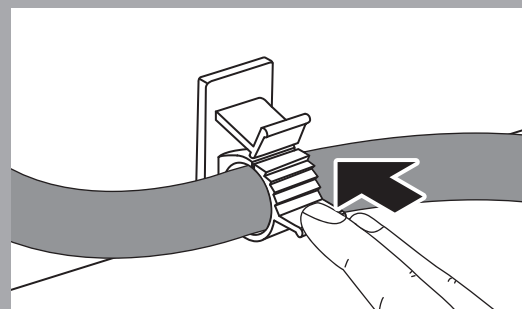

お知らせ

■取りはずしの際に、部品をなくさないようにしてください。


お知らせ

プラスチック便座 / 脱臭プラスチック便座

#### ■ダンパーの差し込む方向について


ダンパーは差し込む方向が決まっています。便座軸受けのチェック窓に青色が見えると方向が間違っています。そのまま使用するとダンパーが破損しますので、ご注意ください。

※ダンパーは、便座をゆっくり閉めるための部品です。手で無理に便座を倒すと破損するおそれがあります。

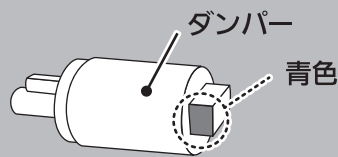


## 2 便座を取り付ける（お手入れがおわったあと）


- ①ダンパーを防汚トレイの差し込み穴にダンパーの凸部を合わせて溝に差し込んでください。
- ②便座に便座ストッパーを装着し、ダンパーの溝に合わせてスライドさせながら取り付けてください。

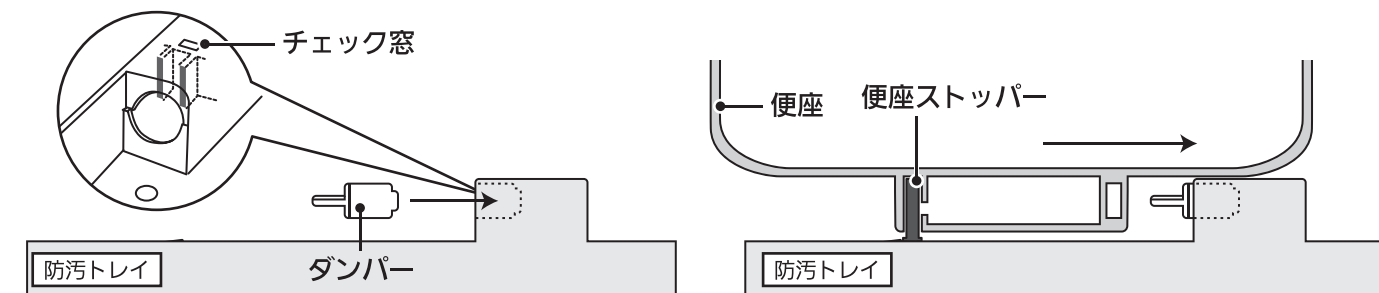

- ③固定ピンをレールに沿って便座に差し込んでください

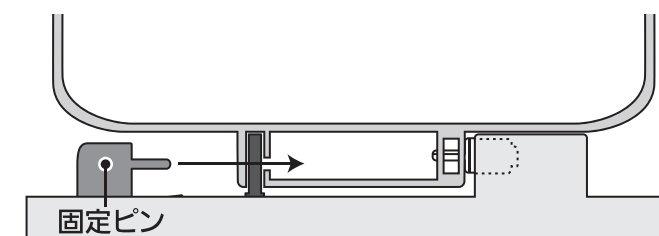

- ④便座を上げ下げ等を行い、正しく装着できているか確認してください。

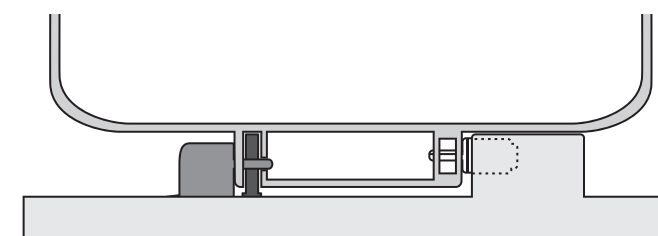


**3** は、脱臭タイプの説明になります。

お手入れの際には必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。


## 3 定期的（1ヶ月に1回）にフィルターを洗ってください

- 脱臭器アダプターを取りはずしてください。脱臭器アダプターを持ち、時計回りに回転させスライドさせてください。

※取り付けの時は脱臭機のダクト溝と脱臭機アダプターの目印を合わせて差し込んで下さい。

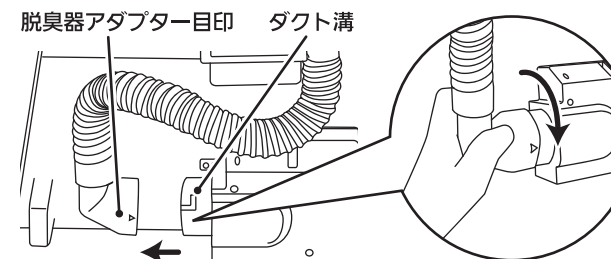

- 脱臭器のダクトよりフィルターを取りはずしてください。

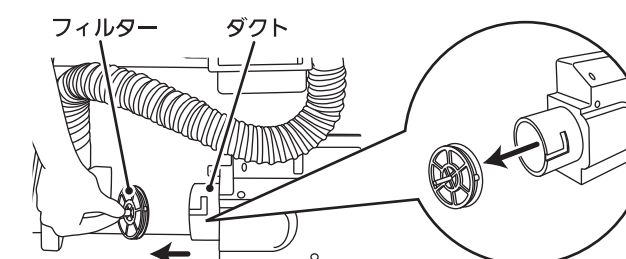

注意

- フィルターは定期的に洗浄を行ってください。

汚れが付着しますと、脱臭効果が低下することがあります。

- フィルターを洗った後は、必ず水分を完全に乾燥させてから脱臭器に装着してください。

水分が残ったまま装着しますと、脱臭器が故障するおそれがあります。

- 取り付ける際は、脱臭器と脱臭器アダプターが接続されていることを確認してください。

脱臭器が正常にはたらかないおそれがあります。

交換用フィルターは別売です。  
品番：PN-L3011144P

■ 愛情点検表 ■

| 家具調トイレ安全チェックシート                                                                                             |                           |             |  |  |  |  |  |                                                        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------|--|--|--|--|--|--------------------------------------------------------|--|
| 安全点検項目                                                                                                      |                           | 点検結果（該当には○） |  |  |  |  |  | 処理手順                                                   |  |
|                                                                                                             |                           |             |  |  |  |  |  |                                                        |  |
| <div>愛情点検</div> <div></div> | 電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 |             |  |  |  |  |  | ○印があるときは、危険な状態になっていますので使用を中止し故障や事故の防止の為、お取り替えをおすすめします。 |  |
|                                                                                                             | 電源プラグや電源コードが異常に熱い。        |             |  |  |  |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                             | 異常な音やこげ臭いにおいがする。          |             |  |  |  |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                             | 触ると電気（ビリビリ）を感じる。          |             |  |  |  |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                             | 背もたれ、ひじ掛け等にひび割れ、変形がある。    |             |  |  |  |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                             | 購入後 5 年以上経過している。          |             |  |  |  |  |  | ○印があるときは、お買い上げ販売店にご相談ください。                             |  |
|                                                                                                             | ひじ掛け、背もたれにガタツキ・ゆるみなどがある。  |             |  |  |  |  |  |                                                        |  |
|                                                                                                             | 変色がある。                    |             |  |  |  |  |  |                                                        |  |

上記点検項目以外でも不具合があれば、販売店等の専門家にご相談下さい。（品番により該当しない項目があります。）

●製品の長期使用について

- 1.本体への表示内容
- 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、製造年月日を本体の裏に表示しております。
- 2.想定安全使用期間とは
- 一般家庭用にてご使用いただく家具調トイレにおいて、標準的な使用条件の下で、適正な取り扱いで使用し、適正な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用できる期間として、想定される期間です。無償保証期間とは異なります。
- また、偶発的な事故を補償するものではありません。
- ※一般家庭以外（病院、施設等、不特定多数の方が使用される場所）に設置された場合は、使用条件により、想定安全使用期間よりも早い時期に劣化するおそれがあります。
- 3.経年劣化とは
- 長期間にわたる使用や処置に伴い生じる劣化をいいます。

【想定安全使用期間】    5 年    （一般家庭にてご使用いただく場合）

想定安全使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・怪我等の事故に至るおそれがあります。

■ 故障かな？と思った時 ■

- 修理を依頼される前に下記をお読みください。

| 現 象            | 確 認                                                  | 処 置                                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本体             |                                                      |                                                                                                       |
| 本体がガタガタする      | 凹凸がある床、毛が長い絨毯の上ではありませんか？                             | 平らな床面に移動してください。                                                                                       |
|                | 仮締めのままご使用していませんか？                                    | 仮締めを増し締めしてください。 / ネジを締め直してください。                                                                       |
| 脚やひじ掛けにグラつきがある | 高さ調節用のネジやボルトが緩んでいませんか？                               | 仮締めを増し締めしてください。 / ネジを締め直してください。                                                                       |
|                | 仮締めのままご使用していませんか？                                    | 仮締めを増し締めしてください。 / ネジを締め直してください。                                                                       |
| キャスターが回らない     | 凹凸がある床、毛が長い絨毯の上ではありませんか？                             | 平らな床面に移動してください。                                                                                       |
| 便座（共通）         |                                                      |                                                                                                       |
| 便座が自立しない       | 便座が上まで上げられていますか？                                     | 便座を上まで上げてください                                                                                         |
|                | ※途中で手を離しますと便座はゆっくりと下がります。<br>防汚トレイに便座がきちんと装着されていますか？ | 取扱説明書P17に記載の方法で便座を取り付けてください。                                                                          |
| 便座がボタンと下がる     | 防汚トレイに便座がきちんと装着されていますか？                              | 取扱説明書P17に記載の方法で便座を取り付けてください。                                                                          |
| 便座（あたたか）       |                                                      |                                                                                                       |
| 電源ランプが付かない     | 電源プラグはコンセントに挿されていますか？                                | 交流100Vのコンセントに差し込んでください。                                                                               |
| 便座があたたかにならない   | 温度設定が低くありませんか？                                       | P12に記載の温度設定方法をご確認の上<br>好みの温度設定にしてください。                                                                |
|                | 室温が5℃を下回っていませんか？                                     | ※室温が低い場合、好みの温度に設定してもその温度に達しないことがあります。室温を上げてください。                                                      |
| 便座が熱すぎる        | 温度設定が高くありませんか？                                       | P12に記載の温度設定方法をご確認の上<br>好みの温度設定にしてください。                                                                |
|                | 便座の上に衣服や布団が置かれていませんか？                                | 便座カバーや便座の上に物を置かないでください。                                                                               |
| 暖房が停止する        | 「切」ボタンを押していませんか？                                     | 「入」ボタンを押してください。<br>コンセントの位置を変更するなどしてご使用ください。                                                          |
|                | お近くで強い電波を発する機器などが使用されていませんか？                         | ※屋内電気配線に強い電気ノイズが発生した場合や、近くで強い電波を発する機器が 使用された場合には、安全の為、暖房が自動で停止することがあります。<br>コンセントの位置を変更するなどしてご使用ください。 |
| タイマー設定が動作しない   | 切タイマー設定中にボタンを押していませんか？                               | 切タイマー設定中にいずれかのボタンを押すと切りタイマーは解除されます。                                                                   |
| 脱臭器            |                                                      |                                                                                                       |
| 脱臭器が動作しない      | ACアダプターはコンセントに挿されていますか？                              | 交流100Vのコンセントに差し込んでください。                                                                               |
|                | ACアダプタープラグ差込口からACアダプタープラグが外れていませんか？                  | プラグがしっかりささっているか確認してください。                                                                              |
|                | 脱臭機センサープラグ差込口から脱臭機センサープラグが外れていませんか？                  |                                                                                                       |
|                | 下記「脱臭器の取り扱いについて」のような状態で使用されていませんか？                   | 脱臭器の取り扱いについてをご確認ください。                                                                                 |
| 脱臭機が止まらない      | センサースイッチに遊びがありませんか？                                  | P.20をご確認の上、スイッチ位置を調整してください。                                                                           |
|                | 下記「脱臭器の取り扱いについて」のような状態で使用されていませんか？                   | 脱臭器の取り扱いについてをご確認ください。                                                                                 |

上記を確認しても問題がなかった場合や、症状が頻繁に発生する場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

- 次のような場合には必ずお買い上げの販売店にご連絡ください。

- ・電源プラグを差し直してもコントローラーの電源ランプが点灯しない。
- ・コントローラーをトイレバケツ内に落とし、濡らしてしまった。
- ・電源ランプ・温度設定ランプが点滅している。    →    電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。
- ・煙が出たり、異常な音やにおいがする。    →    電源プラグを抜いて販売店にご連絡ください。

脱臭器の取り扱いについて

脱臭プラスチック便座 / 脱臭ソフト便座 / 脱臭あたたか便座

下記のような状態で使用すると脱臭器が誤作動を起こすおそれがあります。

- 脱臭器センサーの赤外線センサー面は傷つけないように十分注意する。
- 本品付近に照明器具を設置しない。
- 本品付近の壁は、金属板などの鏡面のものは避ける。
- 太陽光や照明灯などが直接、赤外線センサー面に当たらないように設置する。
- 赤外線センサー面が汚れたら、やわらかな布で掃除する。
- 脱臭器センサーの感知距離は着衣の色により異なります。黒っぽい着衣では感知距離が短くなることがあります。
- インバーター照明により、脱臭器が誤作動をおこす場合があります。
- 脱臭器センサーの矢印の方向が間違っていると、脱臭器が止まらない事があります。(P10<sup>⑦</sup>参照)




# ■ センサースイッチの調整 ■

## 1 スイッチの確認

- 座面を閉じた時にスイッチが完全に押し込まれていることを確認してください。
- スイッチにあそびがある（完全に押し込まれていない）場合は位置の調整をしてください。




座面を閉じた時に、スイッチが完全に押し込まれていることを、指で押して確認してください。

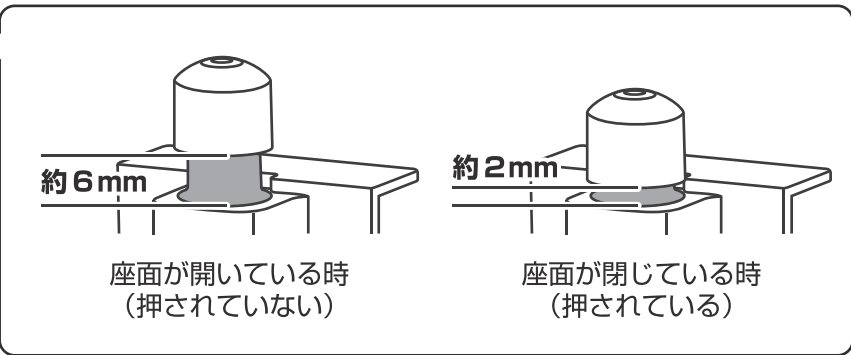


## 2 位置の調整

- スイッチを固定するネジ 4 本をプラスドライバーで緩めてください。
- 座面を閉じた状態で、スイッチを座面に押し当てながら、ネジ 4 本を締めて下さい。

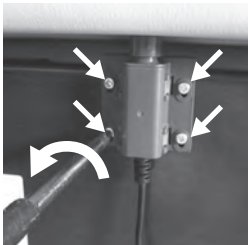

ネジ 4 本を 1 回転緩める（取り外さない）

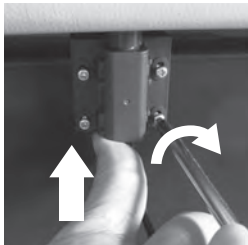

スイッチを上には押し上げながらネジを締める。

# ■ 仕様 ■

| 製品名  |              | 家具調トイレ座楽<br>コンパクト<br>プラスチック便座  |                  | 家具調座楽<br>コンパクト<br>ソフト便座 |         | 家具調トイレ座楽<br>コンパクト<br>あたたか便座 |  | 家具調トイレ座楽<br>コンパクト<br>脱臭プラスチック便座 |  | 家具調トイレ座楽<br>コンパクト<br>脱臭ソフト便座 |  | 家具調トイレ座楽<br>コンパクト<br>脱臭あたたか便座 |  |
|------|--------------|--------------------------------|------------------|-------------------------|---------|-----------------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------------|--|
| 製品品番 |              | PN-L23206                      |                  | PN-L23207               |         | PN-L23208                   |  | PN-L23216                       |  | PN-L23217                    |  | PN-L22718                     |  |
| サイズ  | 製品寸法         | 幅49×奥行58×高さ75.5～87.5cm         |                  |                         |         |                             |  |                                 |  |                              |  |                               |  |
|      | 便座サイズ        | 幅39×奥行41cm                     |                  |                         |         |                             |  |                                 |  |                              |  |                               |  |
|      | 便座高さ         | 34・37・40・43・46（3cmピッチ 5段階）     |                  |                         |         |                             |  |                                 |  |                              |  |                               |  |
|      | ひじ掛け高さ       | 便座面より 17～26cm（3cmピッチ 4段階）      |                  |                         |         |                             |  |                                 |  |                              |  |                               |  |
|      | ひじ掛け内寸       | 40cm                           |                  |                         |         |                             |  |                                 |  |                              |  |                               |  |
| 材質   | 本体           | 天然木（ウレタン樹脂塗装）                  |                  |                         |         |                             |  |                                 |  |                              |  |                               |  |
|      | 便座           | ポリプロピレン                        | ウレタンフォーム<br>合成皮革 |                         | ポリプロピレン | ポリプロピレン                     |  | ウレタンフォーム<br>合成皮革                |  | ポリプロピレン                      |  |                               |  |
|      | 座面           | ウレタンフォーム・合成皮革                  |                  |                         |         |                             |  |                                 |  |                              |  |                               |  |
|      | バケツ・フタ・筋污トレイ | ポリプロピレン                        |                  |                         |         |                             |  |                                 |  |                              |  |                               |  |
|      | 背もたれ         | ウレタンフォーム・合成皮革                  |                  |                         |         |                             |  |                                 |  |                              |  |                               |  |
|      | ひじ掛け         | 天然木(ウレタン樹脂塗装)                  |                  |                         |         |                             |  |                                 |  |                              |  |                               |  |
| 製品質量 |              | 14.0kg                         |                  | 14.4kg                  |         | 14.9kg                      |  | 14.5kg                          |  | 14.8kg                       |  | 15.5kg                        |  |
| 付属品  |              | 便座カバー 1枚                       |                  |                         |         | －                           |  | 便座カバー 1枚                        |  |                              |  | －                             |  |
|      |              | ペーパーハンガー ・ 消臭液 1本 ・ バケツフタ置き 2本 |                  |                         |         |                             |  |                                 |  |                              |  |                               |  |

### ●あたたか便座仕様

| 定 格             | AC100V 50/60Hz 45W                                |
|-----------------|---------------------------------------------------|
| 電 源 コ ー ド       | 本体：1.8m コントローラー：1.0m                              |
| 温 度 調 節         | 3段階電子制御「切」室温・「低」32℃・「中」36℃・「高」40℃                 |
| ヒ ー タ ー         | 45W                                               |
| およその電気代         | 24円/日 45W 1円/日 （1日1時間使用した場合） ※新電力料金目安単価27円/kwh 計算 |
| 安 全 装 置         | 温度ヒューズ 76℃                                        |
| 材 質             | コントローラー：ABS樹脂 / 便座：ポリプロピレン                        |
| 便 座 寸 法 ( c m ) | 幅39×奥行41                                          |
| 製 品 質 量         | 1.5kg                                             |

### ●脱臭器仕様

| 定 格         | AC100V 50-60Hz<br>専用アダプター使用<br>(DC12V 3W)  |
|-------------|--------------------------------------------|
| 消 費 電 力     | 約3W(脱臭器作動時)<br>約0.5W(待機時)                  |
| およその電気代     | 0.3円/日(1時間/1日の使用)<br>※新電力料金目安単価:27円/kWh 計算 |
| コ ー ド の 長 さ | ACアダプターコード／約1.8m<br>センサーコード／約0.6m          |

### 別売部品のご案内

| 商品名          | 品番         |
|--------------|------------|
| ポータブルトイレ用バケツ | PN-L53018W |
| 便座カバーEタイプ    | PN-LTBCRKC |
| 消臭液          | VALTBN5B   |

# ■ 保証とアフターサービス ■

## ●保証書について

この商品は保証書を別途添付しております。  
保証書は販売店でお渡しいたしますので、「販売店名、購入日」など所定の事項の記入および記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。  
保証期間はご購入日より1年間です。  
ただし、一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

## ●補修用性能部品の保有期間






当社は家具調トイレ座楽の補修用性能部品を製造打切り後、  
5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ●修理を依頼されるとき

- 保証期間中は  
ご購入の販売店まで、品名、品番、ご購入日、故障の状況（できるだけ具体的に）、  
ご住所、お名前、お電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。  
保証の規定に従って修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは  
ご購入の販売店にご相談ください。  
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

# 公的介護保険制度購入対象商品

※申請の際にコピー、または切り取ってご使用ください。
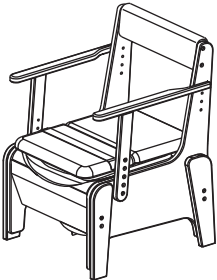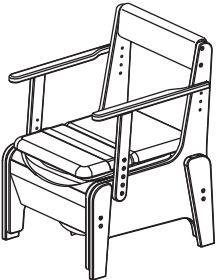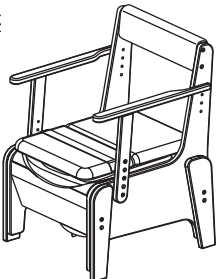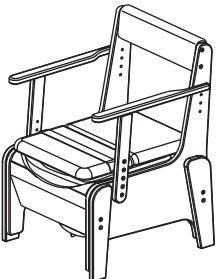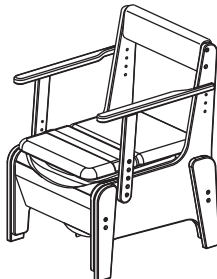
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>家具調トイレ 座楽</div> <div>コンパクト<br/>プラスチック便座</div> <div>品番：PN-L23206</div> <div></div> <div>パナソニック エイジフリー株式会社</div>   | <div>家具調トイレ 座楽</div> <div>コンパクト<br/>ソフト便座</div> <div>品番：PN-L23207</div> <div></div> <div>パナソニック エイジフリー株式会社</div>   | <div>家具調トイレ 座楽</div> <div>コンパクト<br/>あたたか便座</div> <div>品番：PN-L23208</div> <div></div> <div>パナソニック エイジフリー株式会社</div>   |
| <div>家具調トイレ 座楽</div> <div>コンパクト<br/>脱臭プラスチック便座</div> <div>品番：PN-L23216</div> <div></div> <div>パナソニック エイジフリー株式会社</div> | <div>家具調トイレ 座楽</div> <div>コンパクト<br/>脱臭ソフト便座</div> <div>品番：PN-L23217</div> <div></div> <div>パナソニック エイジフリー株式会社</div> | <div>家具調トイレ 座楽</div> <div>コンパクト<br/>脱臭あたたか便座</div> <div>品番：PN-L23218</div> <div></div> <div>パナソニック エイジフリー株式会社</div> |