

安全のため、ご使用前には必ずこの取扱説明書をお読みください。


お読みになった後は、いつでも必要な時に取り出せるように、所定の場所に保管してください。

折りたたみ歩行器「4095-A」

取扱説明書

折りたたみ歩行器「4095-A」は、介護を必要とされる方が歩行する時に、体を支えるための器具です。

各部の名称

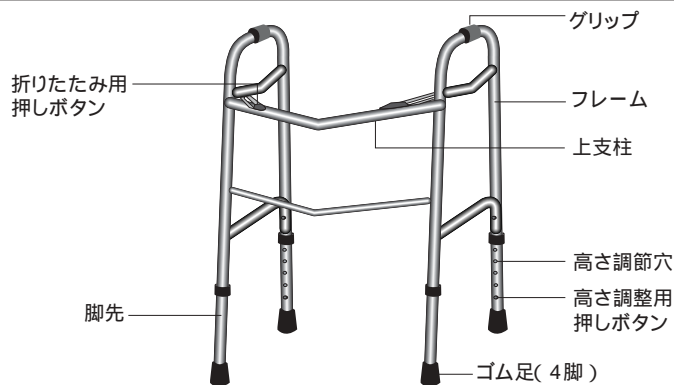

安全のために、必ずお守りください

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、ご使用者への危害や財産への損害を未然に防止するため、下記のように警告・注意を記載しています。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。



警告

本歩行器は、凹凸のない水平な場所でご使用ください。下記のような場所・場合では使用しないでください。製品が倒れたり滑ったりして怪我をする恐れがあります。

- ・段差のあるところ
- ・急坂
- ・砂利の多い道や凹凸の激しい道
- ・凍結した道など滑りやすいところ
- ・溝のあるところ
- ・階段、エスカレーター
- ・二段以上の段差があるところ
- ・夜間で路面状況がよく認識できない場合
- ・交通の頻繁な場所や混雑している場所

歩行器を開くときは、左右のフレームが必ず固定されるまで開いてください。固定しないで使用すると歩行器が倒れて怪我をする恐れがあります。

ジョイント部近くには手を置かないでください。歩行器を開くとき、折りたたむときにグリップの前のジョイント部で手を挟んで怪我をすることがあります。

必ず、両手でグリップ部を持って歩行してください。片手操作やグリップ以外を持って歩行すると、バランスをくずして倒れ、怪我をするおそれがあります。

お子様の遊び道具にしないでください。使用方法を間違えて怪我をする恐れがあります。

火の近くや高温になるところに置かないでください。製品が変形して事故につながる恐れがあります。

また、火災の原因になります。

分解・修理・改造はしないでください。製品本来の安全性が保たれず、事故が起きる恐れがあります。

廃棄の際は、各自治体にお問い合わせいただき、粗大ゴミとして出してください。回収を待つ間に動いたり子どもが遊んだりしないようにしばって破棄してください。

ご不明の点、万一故障や事故の場合には、下記へご連絡ください。

フランスベッド株式会社 メディカルサービス事業本部
〒169-0073 東京都新宿区百人町1-25-1 ☎ 0120-083413


ご連絡いただきたい内容は

- ・ご住所、ご氏名、電話番号
- ・製品名、お買上げ店名、お買上げ年月日
- ・故障又は異常の内容(できるだけ詳しく)

ご使用方法

歩行器の最適の高さ

①腕を伸ばしたときに歩行器のハンドルが手首の高さになるように調節します。

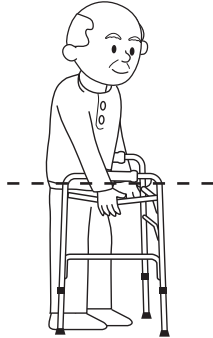

②背中を丸めずに腕を適切に曲げるとよい姿勢になり疲れも少なくなります。





腕の曲がり角度は20～30度がよい

高さ調節の仕方

1.高さ調整用押しボタンと穴

①4脚の下方の内側に、それぞれ1個の押しボタンと5カ所の穴があります。

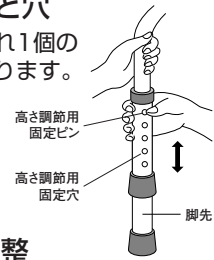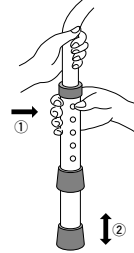


2.高さ調整

②押しボタンを押します。
③押しボタンを押しながら、脚先を上下させ、お望みの高さにします。押しボタンの先が、穴からパチンと飛び出したら固定されます。

開き方


1.グリップ(握り部)を握ってください。

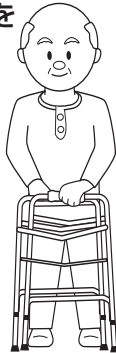

2.フレームを、片方ずつ開いていきます。



3.左右いっばいに広げます。カチンと音がして固定されます。

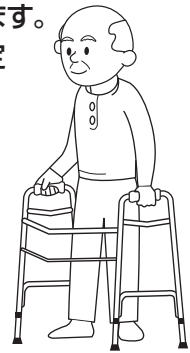


歩行


1.しっかりとグリップを握ってください。



2.軽く持ち上げ、前へ出します。

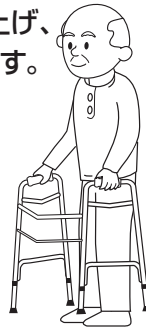

3.ゆっくりと歩いてください。

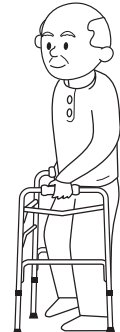


しっかりと歩行します。方向を変えるときは、両手で歩行器を持ち上げ、お望みの方向へ回して接地させます。

折りたたみ方

1.折りたたみ用押しボタンを押します。

上の横棒の中央部に、折りたたみ用押しボタンがあります。▷印を押してください。ブツンと音がしてロックが解除されます。

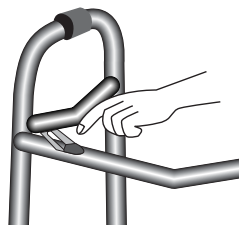


2.左右のフレームを折りたたみます。

それぞれ内側に折りたたんでください。



3.これで折りたたみ完了です。

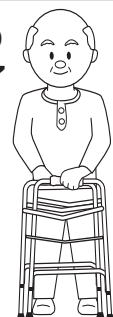

お手入れ方法

- ご使用後はやわらかい布等で水気を拭き取り、湿気のない場所に保管してください。汚れがひどい場合は、中性洗剤をご使用ください。
- シンナー、ベンジン、磨き粉、たわし等は、使用しないでください。

【主な仕様】

サイズ：全幅59×奥行44×全高73～83cm

グリップ：内幅42cm 重量：2.5kg