

bonbone 取扱説明書

【新・入浴用キャリアベルト】

- 本製品は浴室への移乗や脱衣時の姿勢保持のサポートを目的とした介助ベルトです。
- 取手をバランスよく配置し前後左右のどの方向からでも掴みやすく、とっさの対応や両サイドからの介助などにも対応できます。
※サイズによって取手数が異なります。(S:4つ M:5つ L:7つ)
- 取手は誰でも握りやすいサイズに設計しています。水揚げが良い素材を採用していますので、清潔にご使用いただけます。
- パッドは余分な水分を上下に逃がす溝構造と高発泡素材で、フィット感が高く、しっかり体を支えます。
- 耐水性が高く、タオルで簡単にお手入れできます。

警告 その危険を回避できなかった場合に、使用者や第三者が死亡又は重傷を負う可能性のあるもの

- ご使用にあたり理学療法士、作業療法士など専門家もしくは販売店にご相談いただき、正しく使用して下さい。
- この取扱説明書に示した用途以外のご使用は、重症（骨折・圧迫・麻痺など）または死亡に至る可能性がありますので絶対にお止め下さい。
- ご使用前にベルト縫製部分のほつれや各部品に破損がないか確認し、異常を見つけた場合は使用せず、ご購入先へご連絡下さい。
- ご使用前にベルトを引張り、アタッチメントのゆるみや、外れないか確認して下さい。
- 取手ベルト以外（本体、アタッチメント等）を持って使用すると破れやベルトがゆるむ恐れがあり大変危険ですので、必ず取手ベルトを持ってご使用下さい。
- 入浴時、水や石鹸などが本品と肌面の間に含まれる場合は、滑りやすくなりますので十分ご注意ください。

注意 その危険を回避できなかった場合に、使用者や第三者が軽傷を負う可能性のあるもの、および他の財物への損害の可能性のあるもの

- 介助を行う際は勢い余ってバランスを崩して転倒するなど、大変危険ですので、急がずゆっくり慎重に行ってください。
- 適用範囲外（ウエストサイズ）の方は使用しないで下さい。
- 本品には化繊とポリエチレン素材を使用しています。ご使用により肌に異常が現れた時は使用を中止し、医師にご相談下さい。

洗濯方法

- 30℃以下の水で中性洗剤を使用し手洗いして下さい。
- 漂白剤・アイロン・乾燥機の使用やドライクリーニングは避けて下さい。
- 洗濯後の乾燥は、陰干しにして下さい。

保管方法

- 直射日光や高温を避け、湿気の少ない風通しの良い場所に保管して下さい。
- 長時間圧迫された状態で放置すると、型がつく場合があります。

廃棄方法

- 本品は布製品です。アタッチメントを外し通常可燃物として廃棄して下さい。（地域により異なる場合がありますので詳しくは自治体へご確認ください。）

適用範囲	S	ウエスト 50~70cm	M	ウエスト 60~100cm	L	ウエスト 80~120cm
------	---	-----------------	---	------------------	---	------------------

使用方法

QT13-24-R03

1 製品を広げます

アタッチメントを外します。

2 ベルトを装着します

装着者のウエスト部分にベルトを合わせて、アタッチメントがカチッと音が出るまで差し込みます。

3 ベルトの長さを調整します

4 装着確認

締めすぎたり、緩すぎたりしていないか、ベルトを引張ってもアタッチメントが外れないか、確認して下さい。

使用例1

浴槽までの歩行補助

使用例2

立ち上がり補助

警告

取手ベルト以外（アタッチメント等）を持って、ベルトがゆるむ場合があり、大変危険ですので必ず取手ベルトを持ってご使用下さい。

ご連絡先	ダイヤ工業株式会社 〒701-0203 岡山市南区古新田 1125 フリーダイヤル フリーファックス ☎0120-01-1245 ☎0120-02-1246	素材表示 ポリエチレン ポリウレタン ナイロン ポリプロピレン ポリアセタール	Lot. No 601303