


木製どこでも手すり 取扱説明書

型式名：FB-F2

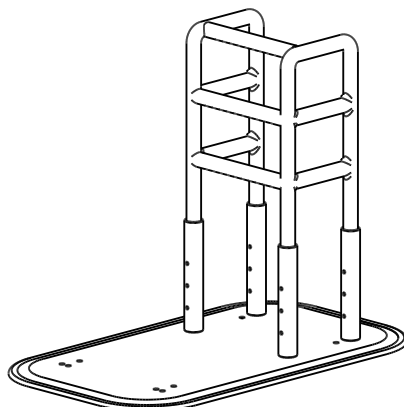

このたびはフランスベッドの製品をお買いあげ
いただきましてありがとうございます。

⚠ 注意

- ご使用前に取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくご使用ください。
- 取扱説明書はいつまでもご使用できるように
大切に保管してください。

1. 安全のために必ずお守りください

⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取扱をすると、使用者が傷害を負う可能性 及び物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	この記号は禁止の行為であることを告げるものです。 (～してはいけません。)
	この記号は行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 (～しなさい。)
 絵表示	絵表示に対する行為を禁止することを告げるものです。


設置上の注意

⚠ 注意	
・ ガタツキや緩み、閉め忘れが無いことを確認の上で使用ください。 ・ 突起物のない水平な場所でご使用ください。 ・ 組立、分解、設置は必ず販売店におまかせください。 ・ 家具やベッドの周辺に設置する場合は、利用者が転倒する可能性があることを考慮し十分なすき間をあけて設置してください。	


使用上の注意

⚠ 注意	
・ 立ち上がり補助以外の用途では使用しないで下さい。 ・ 手すり部に無理な力をくわえないで下さい。 転倒してケガをする恐れがあります。 ・ 直射日光の当たる場所では使用しないで下さい。 金属部が極端に熱くなることがあります。	
・ ご使用の際は、介護者が必ず付き添った上でご使用ください。 思わぬ事故の原因となります。 ・ 平らな場所でご使用ください。 ・ ベースや手すり部は乾いた状態でご使用下さい。 滑って思わぬ事故の原因となります。 ・ 設置後の安定性、使用する方の状態を確認の上使用してください。 ・ ベースプレートには、安全のためゴム製のエッジが取り付けてあり8mm程度の厚みがあります。つまずかないように注意してください。	
・ 手すり部には頭や脚を入れないでください。 思わぬケガの原因となります。 ・ 子供には使用させないでください。思わぬ事故の原因となります。 ・ 改造・加工はしないでください。 ・ 手すり部に、頭、脚、腕を入れないでください。 思わぬ事故の原因となります。	


2. 部品の確認

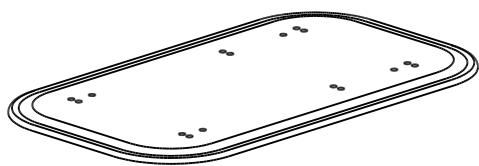

ベースプレート (922×532×12)
材質：スチール (エッジ部 合成ゴム)
重量：12 k g

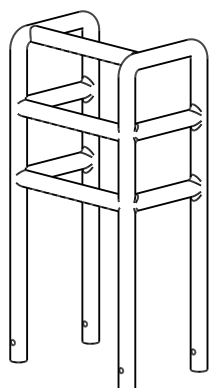

手すり
(675×333×233 φ33)
材質：木製
重量：4 k g

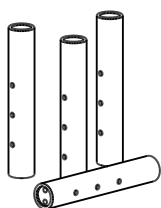

ホルダーパイプ (4 ヶ)
φ42.7×250
材質：スチール
重量：4 k g



トメネジ (4 ヶ) M10×20
(手すりに仮止めされています。)



固定ネジ (8 ヶ) 六角レンチ (対辺 5mm)
M10×15



3. 組み付け方法

① ベースプレートに手すりを固定する。


出荷時は組立高さ 700mm でホルダーパイプが仮止めされています。ホルダーパイプが仮止めされた手すりを図のようにベースプレートの下面より固定ネジで、仮止めします。工具は六角レンチ対辺 5mm を使用します。(組み付けが硬い場合は、トメネジと手すりを取り外し、ホルダーパイプだけをベースプレートに仮止めます。)

② 手すりの高さを決定し固定する。

使用する高さを変える場合は高さ (トップの高さ 700・750・800) を決定し、手すりの穴とホルダーパイプの穴方向を合わせ、ホルダーに手すりを差し込みトメネジを六角レンチでしっかり固定します。

③ 固定ネジを締め付ける。

ベースプレート下面のネジを確実に締めこみます。以上で組立は完成です。組み付けた状態で約 20kg になりますので移動には十分注意して設置してください。

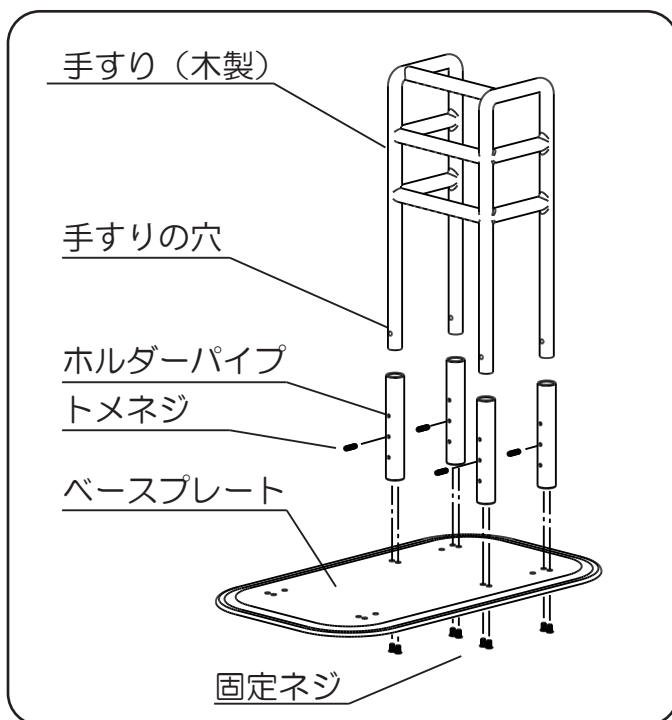

4. 点検

長期にわたり本来の性能を維持するには日頃の点検等の適切な管理が必要となります。点検を行うことにより、大きなトラブルを防止し安心して使用することが出来ます。

1. 外観点検項目：各部ネジの緩みや外れ、各部フレーム接合（溶接）部のヒビ割れや外れ。
使用中に不具合を発見された時には、ご使用を控えるか場合によっては使用を一時中断し、速やかに「販売店」または「お客様相談室」に故障状況を報告し、修理を依頼することが適切です。安易にご自身による故障の修理等は絶対に行わないでください。

5. お手入れ方法

乾いた柔らかい布で拭いてください。しつこい汚れがある場合は、家庭用クリーナー、または石鹸水で拭き取り、その後乾いた布で拭いてください。

⚠ 注意

汚れを拭き取るのに、シンナー、ベンジン、ガソリンなどの有機溶剤を含んだものおよび、研磨剤、漂白剤などは使用しないでください。市販のクリーナーを使用するときは、一度目立たない所で試してから使用してください。
変色、変質、商品を傷める原因となります。



6. アフターサービスについて

修理を依頼されるときは

修理を依頼される前に取扱説明書をよく読み、再度点検の上、なお異常がある場合は、お買い上げ店または、下記のお客様相談室へ連絡してください。

ご連絡いただきたい内容・・・ご住所、ご施設名、ご氏名、電話番号、型式名、販売店、お買い上げ日、故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

お客様相談室

弊社の商品は厳格な検査を経て納入致しておりますが、万一不具合な点がございましたら、お買い上げの販売店または弊社お客様相談室まで問い合わせください。

お客様相談室



フリーダイヤル：0120-39-2824

受付時間：月～金曜日 9時～12時 13時～17時

（土、日、祝祭日、年末年始、弊社指定の休日などは除く）

製造元：フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148