

車イス用
円背サポート
クッション

らくいち 楽位置背クッション

取扱説明書

980950-8900




この度は、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みいただき、充分にご理解の上ご使用下さい。
製品に関してご不明な点や不都合なことがございましたら、ご購入店もしくはお客様相談室へご連絡下さい。

フランスベッド株式会社

1 各部の名称

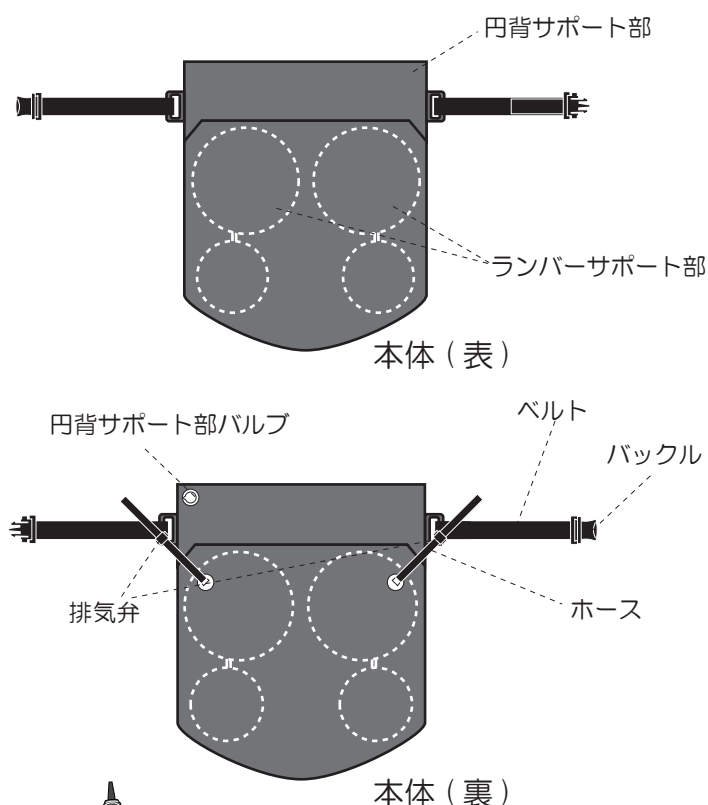


ポンプ


2 使い方

①車イスに楽位置背クッションを取り付けてください。

左右のベルトを後ろに回し、バックルを留めてください。

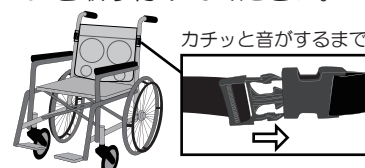

②楽位置背クッション裏の左右にあるランバーサポート部のホースを出し、付属のポンプでランバーサポート部にエアを注入してください。

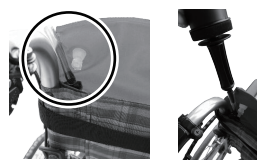

③車イスの座面奥までしっかり腰を掛け、身体の傾きにに応じて左右の排気弁についているボタンを押して排気し、ランバーサポート部のふくらみを調整してください。

- 身体が背シート側に沈み、左右にずれない状態に調整してください。
- 左右に傾く方は、傾く方のエアを少し多めに入れてください。



④背中から肩にかけての隙間を埋めるように付属のポンプで円背サポート部にエアを注入してください。



3 使用上の注意



禁止

- 付属のポンプ以外の方法で空気を入れるのはおやめください。
- 本製品は床ずれ予防を目的に製造されたものではありません。床ずれの改善・予防を目的に使用しないでください。
- 本製品は背中に当てて使用するものです。座面に敷いてお使いにならないでください。
- 洗濯機での洗濯はおやめください。
- 火気の近く、高温になる場所での使用、及び保管はおやめください。
- 本製品に、勢いをつけて体重を掛けしないでください。
- 保管する際は、平らな状態で保管し、クッションの上には物を置かないでください。
- お風呂場などの水場での使用はおやめください。
- 本製品に、鋭利なものや先の尖ったもので触れないでください。
- 切断したり、穴をあけないでください。



注意

- 本体表面を強くこすると、表面の起毛が取れる可能性がありますので、ご注意ください。
- 本製品を水で濡らしてしまった場合は、風通しの良い日陰で乾燥させてください。
- 本製品を破損した場合は、その使用を直ちに中止してください。
- 廃棄する場合は、各自治体のルールに従い正しく処理してください。

4 仕様

製品名	車イス用円背サポートクッション 楽位置背クッション	
寸法	本体	幅 44×高さ 50 cm
	ポンプ	幅 4.5×奥行 4.5×高さ 27 cm
重量	本体	205 g
	ポンプ	77.5 g
材質	本体	塩化ビニール 樹脂 ナイロン
	ポンプ	樹脂
JAN コード	4954281489916	
生産国	日本	

アフターサービスについて

- 修理を依頼されるときは… 修理を依頼される前にこの取扱説明書をよくお読みいただき、再度ご点検の上、なお異常がある場合は「お買い上げの販売店」又は下記「お客様相談室」へご連絡ください。
- ご連絡いただきたい内容… ご住所・ご氏名・電話番号・型式名（製品名）・お買い上げの販売店・お買い上げ日・故障または異常の内容（できるだけ詳しくお願い致します。）
- お客様相談室… 弊社は厳格な検査を経て納品いたしておりますが、万一不具合等がございましたら、「お買い上げの販売店」または弊社「お客様相談室」までお問い合わせください。

フリーダイヤル ☎ 0120-39-2824

受付時間：月～金曜日、9～12時、13～17時
（土、日、祝祭日、年末、年始、弊社指定の休日等は除く）

製造販売元 フランスベッド株式会社

5 保証書

保証期間	1年間
お買い上げ日	平成 年 月 日
お客様	ご芳名 様
	〒 □□□-□□□□
	ご住所
TEL	
販売店	店名・住所

法的責任

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権限を規制するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又はお客様相談室にお問い合わせ下さい。

保証の対象

本体のみ行います。

保証の態様

- (1) 保証期間内において、取扱説明書、製品添付の注意ラベル等の注意書にしたがって正常な使用状態で故障した場合には、無償修理致します。
- (2) ご用命の際は、お買い上げの販売店又はお客様相談室にご連絡下さい。
- (3) 離島や離島に準ずる遠隔地については、弊社規定に沿った訪問に要する実費を申し受けることがあります。

保証を受けるための条件

保証を受けるためには、出張修理の際に本保証書及び販売店納品書又は領収書を提示して下さい。

※ご注意 本保証書にお届け日、販売店名の記入の無き場合は、納品書又は領収書を併せて保管願います。

保証の適用除外

- (1) 本保証書及び納品書又は領収書のご提示が無い場合。
- (2) 誤った使用あるいはお取扱上の不注意や過失によって故障が生じた場合。
- (3) 本製品をご使用者自身又は他業者により変造、改造された場合。
- (4) ご購入後の移動や輸送及び落下等、不適切なお取扱により故障及び損傷が生じた場合。
- (5) 火災、地震、風水害、落雷及びその他の天災地変、公害、塩害、ガス害による故障又は損害が生じた場合。
- (6) 本製品の製造上に起因した欠陥であることを確認できない場合。
- (7) 本製品の使用による経年変化に該当する事項、及び消耗品の交換。

※ 上記項目については有償修理になります。

フランスベッド株式会社

〒196-0022 東京都昭島市中神町1148
TEL 042(543)3111(代表)

