

「ご注意」


- 本商品をご使用になるためには、以下の点を必ずお守りください。
- ・ フレームはペンチなど使わずに手で曲げて形状を合わせてください。
- ・ フレームの鋭角な曲げは破損につながります。
- ・ 本製品は材質にシリコンゴムを使用していますがアレルギーが出るようでしたらご使用を控えてください。
- ・ フレームから銅線が露出しましたら直接触れることを避けてください。
- 本製品のお取扱い保管の際は以下のことにご注意ください。
- ・ 汚れましたら、皮カバーを外して掃除できます。
- ・ 本製品のカバーは本皮を使用していますので、保管の際は湿気によるカビにご注意ください。
- ・ 本製品のベースフレームはシリコン材、台座部はフェルト材です。
- ・ 本製品は最新の注意を払って製作していますが、お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

お問い合わせ・相談窓口

株式会社 菊池ハイテクサプライ
URL: <http://www.kikuchi-hs.co.jp>



スパイラルウエアでライフアップ

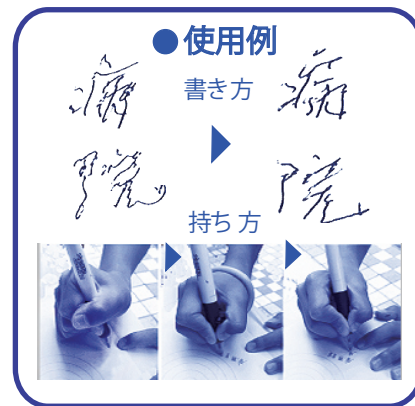

株式会社 菊池ハイテクサプライ

「楽書」の特長

”オシャレに手助け”

- 装着負担が少ない！
自分の手の形に合わせベストフィット
- 手軽に！
軽量でコンパクト
- スマートなデザイン！
シンプルフォルムの皮装仕上げ
- ・ 読みやすい書字ができる。
- ・ 非利き手の書字アシスト。
- ・ 道具の握り易さのアシスト。

スパイラルウエア®とは？

菊池製作所が提供する手軽に使い、身体にスマートに装着し、自立を美しく楽しくアシストする装身具。




- 片手麻痺でも編み物が可能。
- スピーン・フオーンを安定保持。




- 手や指への負担を軽減。

<その他の用途>

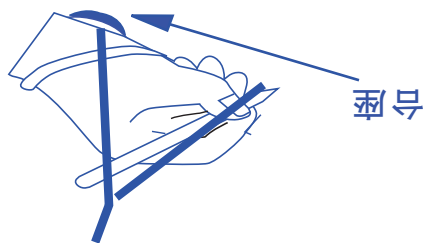

2. 台座を机面に付け安定させコンパスの芯のように手全体で書字する。

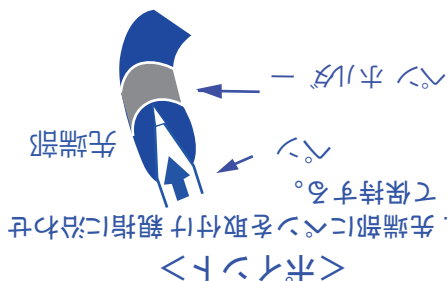


1. 先端部にペンを取付け親指に沿わせて保持する。

<ポイント>

■使用方法

* もう一方の手で全体を握り隙間なくフィットさせる。

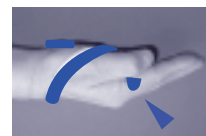



④先端部◀を親指に絡ませる。



③フレームを手の形に合わせる。



②台座◀を手のひらに定める。

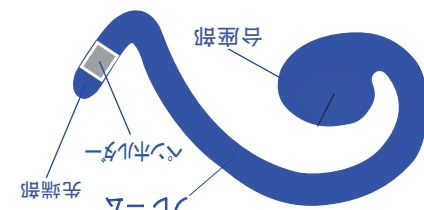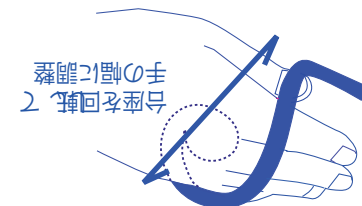

■装着方法