


取扱説明書

洋式トイレ用 スライド手すり(ステンレス)

品番 PN-L53001

保管用
保証書付き

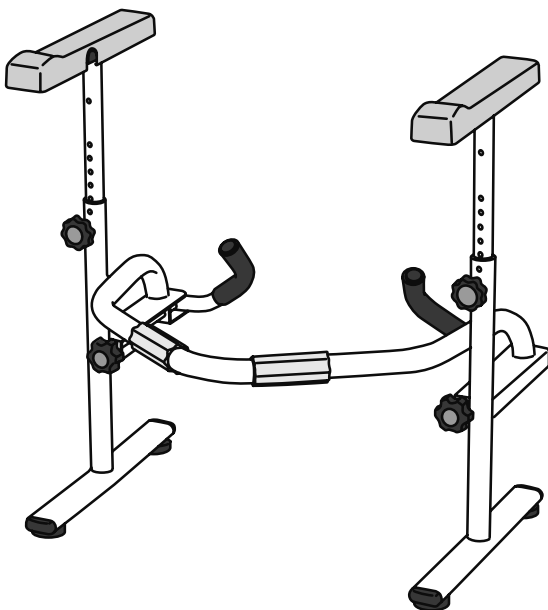

もくじ

●安全上のご注意		2
●各部の名称		4
●部材・付属品一覧		4
●商品寸法図		4
●ご使用になる前に		5
●ご使用方法		5
●お手入れ方法		7
●仕様		8
●保証とアフターサービス		9
●お客様ご相談窓口のご案内		10
●保証書		裏表紙

ご使用になる前に必ずお読みください。

最大使用者体重:100kg以下

このたびは、洋式トイレ用手すりをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2・3ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

■ 安全上のご注意 ■

必ずお守りください。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷などを負うおそれがある内容」です。



注意

「軽症を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告



禁止

■ひじ掛けの上に乗ったりぶら下がったりよりかかったりしない。
ひじ掛けが破損しケガをするおそれがあります。



禁止

■すき間や開口部に身体の一部をはさまない。

ご使用者の心身の状態や利用状況によって、すき間にはさまれ生命に関わる大きな事故につながる可能性があります。特に、頭部や首、腕や足がはさまれないよう十分ご注意ください。



禁止

■座る時や、使用後に立ち上がる時など、片側のひじ掛けに体重をかけすぎない。
転倒やケガの原因になります。



禁止

■故意にゆすらない。
転倒やケガの原因になります。



禁止

■アジャスターは5mm以上伸ばさない。
取り付けが不安定になりケガをするおそれがあります。



禁止

■製品が破損、または正常な状態でない時は使用しない。
製品や設置が正常でない時に使用するとケガの原因になります。



禁止

■体重が100kgを超える方は使用しない。
本体が破損しケガをするおそれがあります。



禁止

■洋式トイレ内で使用する手すり以外の用途で使用しない。
子供の遊び道具や他用途の手すりとして使用すると破損やケガのおそれがあります。



禁止

■ひじ掛けを便器前方へ引っ張らない。
トイレから製品がはずれ転倒やケガの原因になります。



禁止

■商品梱包用のポリ袋やシートをかぶらない。
窒息するおそれがあります。



禁止

■取り付け可能な便器以外に取り付けない。
取り付けが不安定になりケガをするおそれがあります。



禁止

■床に腐食やガタツキがある場合は取り付けない。
床自体に強度がない場合は全体重がかかった場合、本体がはずれケガをするおそれがあります。



必ず守る

■ひじ掛け調整ノブはしっかりと締め付ける。
取り付けが不安定になりケガをするおそれがあります。



必ず守る

■便器にアームカバー前をあてて固定する。
取り付けが不安定になりケガをするおそれがあります。



必ず守る

■必ず便器に固定して使用する。
取り付けが不安定になりケガをするおそれがあります。



必ず守る

■定期的にネジのゆるみなど各部に異常がないか点検する。
本体が正常にはたらかず破損やケガのおそれがあります。

警告



必ず守る

■使用中にゆるみやガタツキが発生した場合は、直ちに使用を中止しお買い上げの販売店に相談する。

取り付けが不安定になり、ケガをするおそれがあります。



必ず守る

■使用前に製品を前後・左右にゆらしてガタツキやずれがないか確認してください。

取り付けが不安定になり、ケガをするおそれがあります。



必ず守る

■座る際や、使用後立ち上がろうとする際などに、ご使用者自身が身体の安全性を十分に確保できない場合は介助者が付き添う。

転倒やケガのおそれがあります。



必ず守る

■床に本体を取り付ける際は取り付け強度を保つため厚み12mm以上の構造用合板(JAS規格品)または同等以上の下地材に取り付ける。

床自体に強度がない場合は全体重がかかった場合、本体がはずれケガをするおそれがあります。



必ず守る

■ひじ掛けの高さ調整を行うときは指をはさまないように注意する。

ケガをするおそれがあります。



分解禁止

■絶対に分解したり、修理、改造はしない。部品の代用品は使用しない。

本体が正常にはたらかず破損やケガのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店にご相談ください。


注意



禁止

■直射日光にあてたり火気に近づけない。

色あせやひび割れの原因となります。

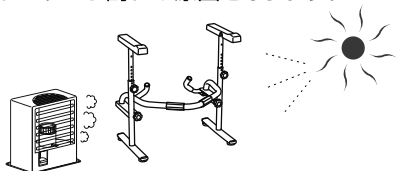

禁止

■タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しない。

プラスチックが劣化または破損しケガをするおそれがあります。



必ず守る

■便器がしっかり固定されていることを確認する。

取り付けが不安定になり、ケガの原因となります。



禁止

■ノブボルトは工具を使用して締め付けない。

破損の原因となります。



禁止

■トイレマットの上に設置しない。

本体が正常にはたらかず破損やケガのおそれがあります。



禁止

■樹脂製便器には取り付けない。

便器が破損しケガをするおそれがあります。



必ず守る

■中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませて洗った後洗剤が残らないように水洗いし、乾いた布で水分をふき取る。


洗剤がついているとすべりやすく、転倒しケガをするおそれがあります。

安全にお使いいただくために

使用前に製品を前後・左右にゆらしてガタツキやずれがないか確認してください。
ガタツキがある場合は下記の項目をご確認ください。

- 便器固定ノブが緩んでいる可能性があります。
 - 便器固定ノブを締め直してください。
- ひじ掛け調整ノブがゆるんでいる可能性があります。
 - ひじ掛け調整ノブを締め直してください。
- アジャスターが調整されていなかったりはずれている可能性があります。
 - アジャスター調整または取り付けてください。
- アームカバー前が便器にあたっていない可能性があります。
 - アームカバー前をしっかりと便器にあてた状態で、便座固定ノブを締め付けてください。
- 床固定をしている場合、木ネジがゆるんでいる可能性があります。
 - お客様は修理を行わず、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。

■ 各部の名称 ■

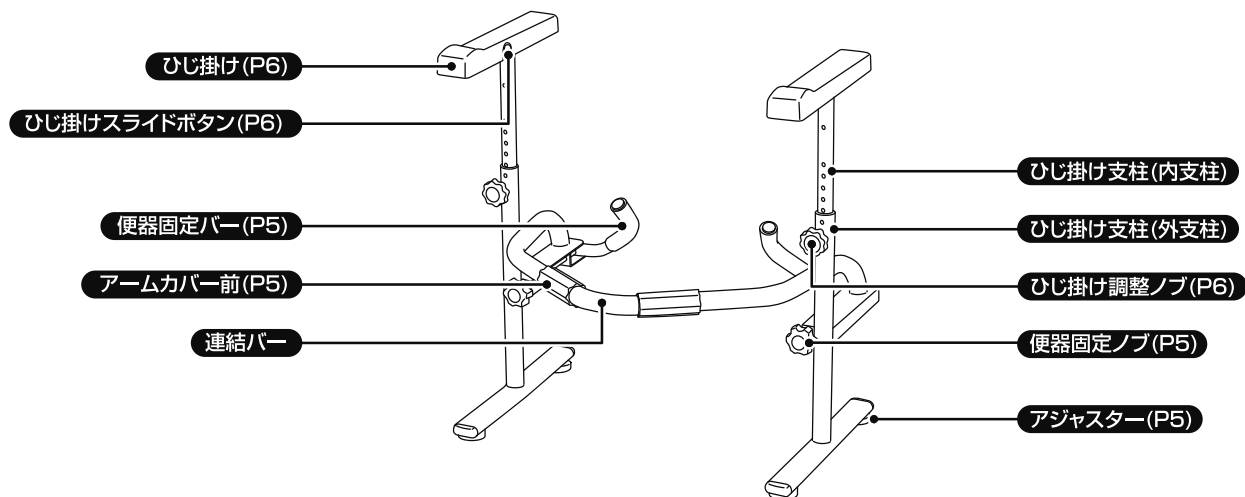


■ 部材・付属品一覧 ■

**組立完成品になります。必ず同梱されている
部材・付属品をご確認ください。**


本体
1台

取扱説明書
1冊

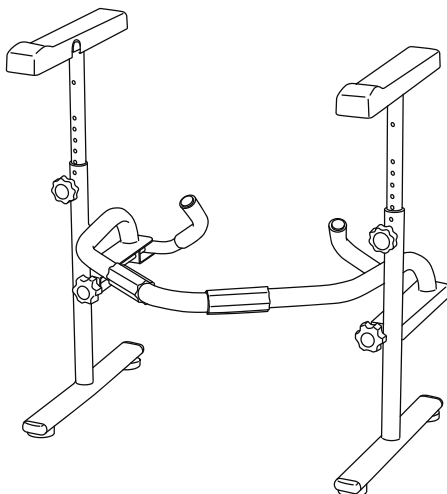


商品寸法図


正面図

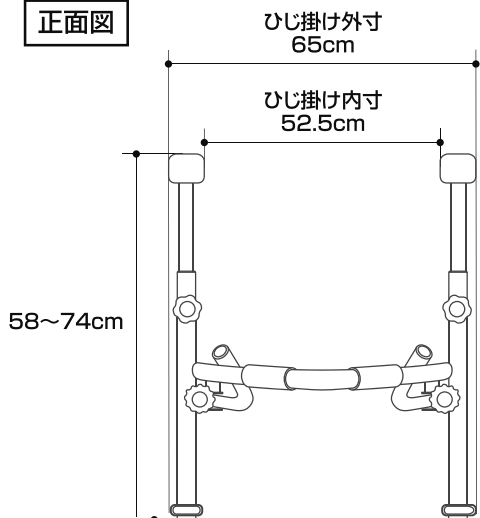

横面図

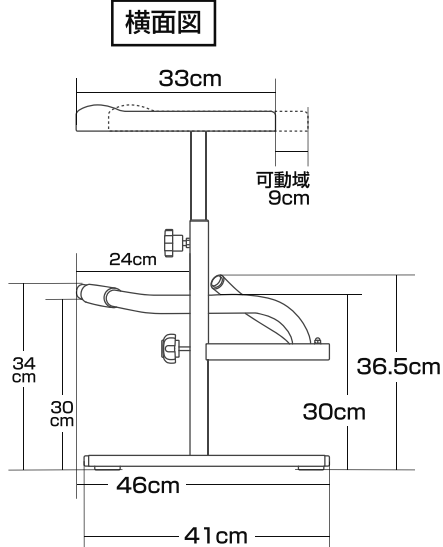

上面図

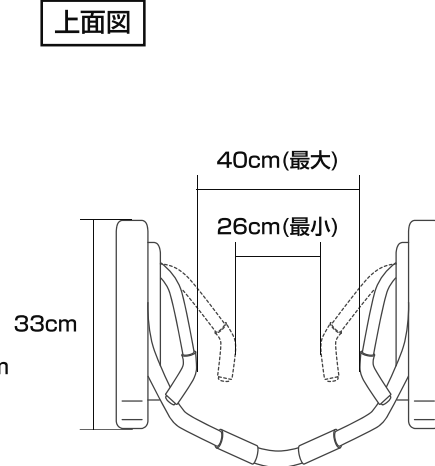


■ ご使用になる前に ■

- 家庭用洋式トイレにのみ、取り付けてご使用ください。
- ご使用になる前に、取り付け可能な便器であるかをご確認の上、取り付けを行ってください。

取り付け可能な便器

①の寸法が**26cm～40cm**の便器
(①は床から約30cmの高さの便器の最大幅)

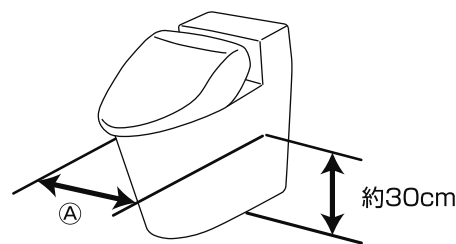

■樹脂製便器には取り付けない。
便器が破損しケガをするおそれがあります。


■ ご使用方法 ■

- ご使用になる前に、P5 ■ご使用になる前に■ を参照の上、取り付け可能な便器であるか確認し取り付けを行ってください。

1 便器への取り付け方法


1 便器固定バーを開く

取り付ける便器にあわせ便器固定ノブをまわし便器固定バーを開いてください。

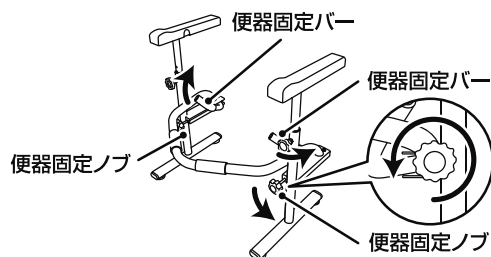


2 便器に取り付ける

アームカバー前が便器の先端に接触するように取り付けてください。

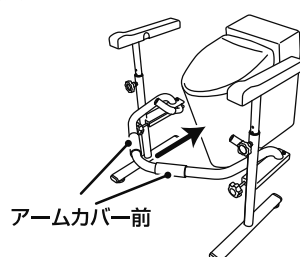


3 ガタツキの調整

床面の状態によりガタツキがある場合はアジャスターを調整し、床に確実に設置していることをご確認ください。

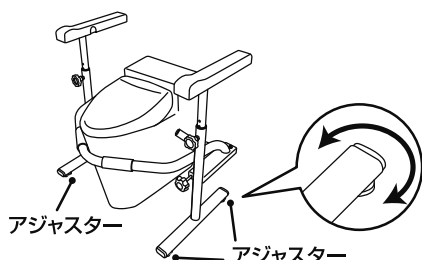

4 便器に固定する

本体が確実に固定されるまで便器固定ノブを締め付けてください。締め付け後、両側のひし掛けをゆすりガタツキがないことをご確認ください。

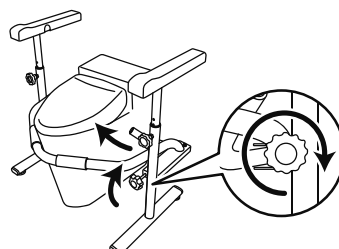

お知らせ

■取り付けのめやすは便器固定バーが便器に接触してから便器固定ノブを1回転半まわしてください。



■アジャスターは5mm以上伸ばさない。

取り付けが不安定になりケガをするおそれがあります。

■すき間や開口部に身体の一部をはさまない。

ご使用者の心身の状態や利用状況によって、すき間にはさまれ生命に関わる大きな事故につながる可能性があります。特に、頭部や首、腕や足がはさまれないよう十分ご注意ください。



■便器固定ノブは工具を使用して締め付けない。

本体が破損するおそれがあります。


2 ひじ掛けの高さ調整方法

- ひじ掛け高さは床から58cm～74cmの9段階に調整ができます。

- ① ひじ掛け調整ノブを取りはずし、ひじ掛けを固定する高さまでスライドさせてください。

※内支柱の高さ調整穴の底部と外支柱の先端が合う位置が固定のめやすとなる位置となります。

- ② ひじ掛け調整ノブを穴に差し込み締め付けてください。

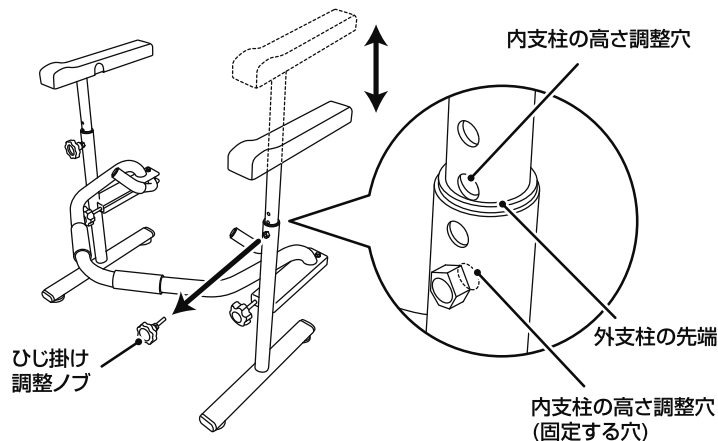


注意

■ ひじ掛けの高さ調整を行う時は必ずひじ掛けを持ってください。

ひじ掛け(内支柱)を持って高さ調整を行うとすき間に指などをはさみケガの原因となります。


■ ひじ掛け調整ノブがしっかり締め付けられ、ひじ掛けにガタツキがない事を確認し使用する。

本体が不安定になり、転倒したり、ケガの原因となります。

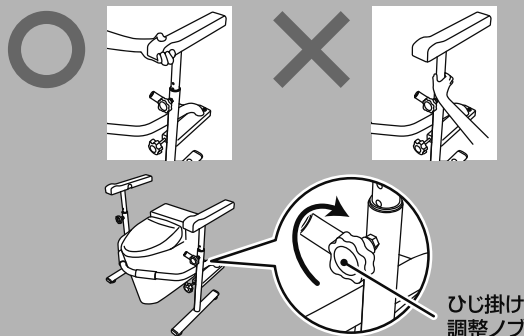

3 ひじ掛けの前後の調整方法

- ひじ掛けの前後は3cm間隔で4段階に調整ができます。
- ひじ掛けの内側面のひじ掛けスライドボタンを押しひじ掛けを使いやすい位置にスライドさせてください。ボタンをはなすとひじ掛けが固定されます。

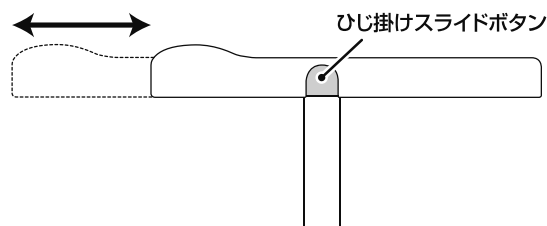

4 床への固定方法

■ 床の施工状態が不明な時は施工された業者にご確認ください。

床固定に必要な部材

専用床固定部材 ※別売品になります。

- 床取り付けプレート2個
- フィッシャープラグ4個
- 木ねじ(6.2×32mm)4本


工具

- 共通で使用する工具
 - ・電気ドリル
- 床がコンクリートやタイルの場合に使用する工具
 - ・ドリル刃(コンクリート用φ8mm)
- 床が木の場合に使用する工具
 - ・ドリル刃(木用φ3mm)

床が木の場合

① 床取り付けプレートの固定

本体後方のアジャスターとフレームの間に床取り付けプレートをはさみこんでください。

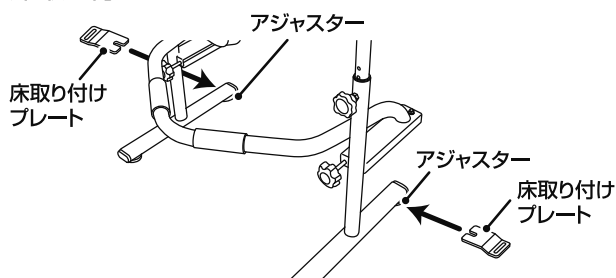

② 設置場所を決める

床取り付けプレートの穴の両端に合わせて床に印をつけてください。


※左側も同様に行ってください。



③ 下穴をあける

印をつけた位置に木用ドリル刃で
φ3mmの下穴をあけてください。


※左側も同様に行ってください。

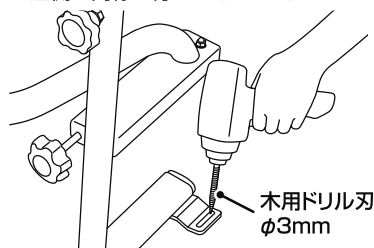

④ 本体を固定する

付属の木ネジでしっかりと固定してください。

※左側も同様に行ってください。

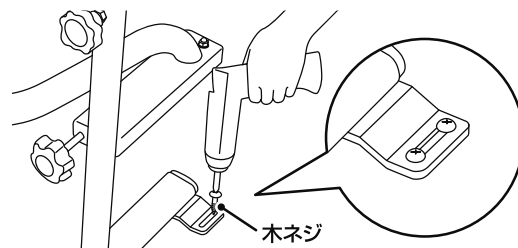

床がコンクリートやタイルの場合

① 床取り付けプレートの固定

アジャスターとフレームの間に
床取り付けプレートをはさみこんでください。


③ 下穴をあける

印をつけた位置にコンクリート用ドリル刃で
φ8mmの下穴をあけてください。

④ フィッシャープラグの取り付け

下穴にフィッシャープラグを
押し込んでください。

※左側も同様に行ってください。

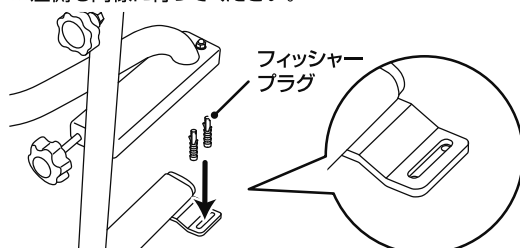


② 設置場所を決める

床取り付けプレートの穴の両端に合わせて
床に印をつけてください。

⑤ 本体の固定

付属の木ネジでしっかりと固定してください。

※左側も同様に行ってください。

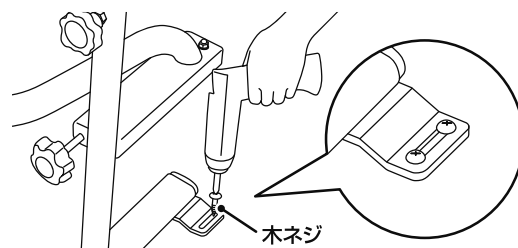

警告

■床に腐食やガタツキがある場合は取り付けない。

床自体に強度がない場合は、全体重がかかった場合
本体がはずれケガをするおそれがあります。

■床に本体を取り付ける際は、取り付け強度を保つため

厚み12mm以上の構造用合板(JAS規格品)または同等以上の下地材に取り付ける。

床自体に強度がない場合は、全体重がかかった場合
本体がはずれケガをするおそれがあります。

■必ず便器に固定して使用する。

取り付けが不安定になりケガをするおそれがあります。

■ お手入れ方法 ■

- 中性洗剤のうすめ液をスポンジかやわらかい布にふくませて洗った後
洗剤が残らないよう水洗いし、乾いた布で水分をふきとってください。



注意

■タワシや磨き粉、研磨剤入りのスポンジ等、あるいは塩素系洗剤、 酸・アルカリ性洗剤、シンナー、クレゾール等は使用しない。

プラスチックが劣化または破損し、ケガをするおそれがあります。



仕様

製品名	洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)	
製品品番	PN-L53001	
製品質量	8.5kg	
サイズ	製品寸法	幅65×奥行45×高さ58～74cm
	ひじ掛け高さ	58～74cm
	ひじ掛け内寸	52.5cm
材質	本体：ステンレス ひじ掛け：ポリプロピレン ひじ掛け支柱、連結バー、便器固定バー：ステンレス 便座固定ノブ：ABS / ステンレス ひじ掛け調整ノブ：ABS / ステンレス アジャスター：合成ゴム / ステンレス アームカバー：合成ゴム	
最大使用者体重	100kg以下	

別売品のご案内

- 各部品が汚れたり、破損した場合はお買い上げの販売店にお問い合わせの上、購入してください。
交換については販売店にご相談ください。

部品名	部品品番	希望小売価格(税抜)
床固定用部材	PN-L5300032P	3,500円

2014年4月現在

廃棄上のご注意

廃棄するときはできるだけ素材別に分解し
地域の分別のルールに従い廃棄してください。

■ 保証とアフターサービス ■

●保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。

保証期間はご購入日より1年間です。

ただし、一般家庭用以外に使用された場合は保証期間内でも有料修理とさせていただきます。

●補修用性能部品の保有期間

当社は洋式トイレ用スライド手すり(ステンレス)の補修用性能部品を製造打切り後、5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

●修理を依頼されるとき

●保証期間中は

ご購入の販売店まで、品名、品番、ご購入日、故障の状況(できるだけ具体的に)、ご住所、お名前、お電話番号をご連絡ください。

保証の規定に従って修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

ご購入の販売店にご相談ください。

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

お客様ご相談窓口のご案内

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、
まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

商品・お取扱いなどのご相談は
パナソニック エイジフリー株式会社

フリーダイヤル



0120-365887

●受付時間 9:00～12:00 (土、日、祝日休み)
13:00～17:00

<http://sumai.panasonic.jp/agefree/products>

パナソニック エイジフリー株式会社

本社 〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048

© Panasonic AGE-FREE Co.,Ltd.2017-2018